



Danish **CARE** Supply
- fremtidens hjælpemidler

Magnetiske skolukkere

Et sæt består af 4 magneter, 2 til hver sko. Findes i to størrelser og to farver (sort og hvid)

HMI-nr.	Varenr.	Varetekst	Str.
102543	230002	Magnetiske skolukkere - SORT	34-40
102544	230003	Magnetiske skolukkere - SORT	41-47
102543	230000	Magnetiske skolukkere - HVID	34-40
102544	230001	Magnetiske skolukkere - HVID	41-47



www.danishcaresupply.dk

Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere



> Påsætning af magneter

1. Snørebåndet monteres på skoen som vanligt men ved montering i de tre øverste snørebåndshuller kommer snørebåndet også gennem magneten.

1,1



1,2



1,3



1,4



2. Når begge magneter sidder på snørebåndene rettes længden af snørebåndene til, så skoen passer over vristen, når magneterne lukkes. Klip evt. overskydende snørebånd af.





> Sko på

1. Åben magneterne enten med hænderne eller ved at presse foden ned i skoen. Når foden er på plads i skoen lukkes magneterne automatisk.



> Sko af

1. Løft foden opad, så der liver et pres på magneterne som deles, og foden kan flyttes ud af skoen.




Rengøring: Vaskes i hånden.





Med markedets største sortiment i ryggen tilbyder vi en professionel rådgivning i valget og brugen af vore hjælpemidler. Kontakt os gerne på telefon 22 11 86 16 eller på dsc@danishcaresupply.dk.

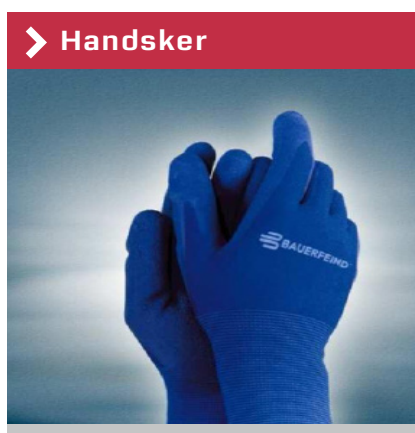

Du er velkommen til at kigge forbi vores webshop og få inspiration til, hvordan vi gør borgeren selvhjulpent indenfor på- og afklædning. Her findes også en lang række hjælpemidler, som kan aflaste hjælperne i deres arbejde.

På gensyn...

Danish CARE Supply

Agerskallet 1

8920 Randers NV

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: dcs@danishcaresupply.dk

www.danishcaresupply.dk



Følg os på
facebook

facebook.com/danishcaresupply