

MADE IN
EUROPE




Vores produkter og råvarer er produceret i Europa.

Vælg kvalitet, spar penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

01_20231222_DK

Master Glide Traume Board

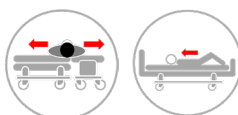

-
-

Varenr.	HMI nr.	Navn - Størrelse	UDI-DI/GTIN
MC 004-1030	103330	Master Glide Traume Board	5744001972656
MC 004-1032	-	Master Glide Traume Board - 160	5744001975008

Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 31 03 18

The Original Nordic
Human Handling Concept



Developed &
Manufactured by:



Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produktet kan benyttes ved planforflytning af brugere mellem 2 lejer. Brug af nylon og et stiklagen under bruger anbefales.

Anvendelse af produktet:

Master Glide Traume Board kan bruges ved overflytning mellem smalle lejere fx røntgenleje og akutleje. Placer boardet halvt under brugeren, hvorefter bruger glides over på modsatte leje. Nylon bør anvendes, hvis forflytningen vurderes tung eller ved brugere, der er i risiko for at pådrage sig shear skader.

Advarsel:

Boardet bør ikke anvendes over større ikke-understøttede afstande end det, som er anført på boardet. Grundet boardets smalle bredde bør det ikke anvendes til bariatriske patienter.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for

den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Levetid:

Produktet forventes at have en levetid på 2-5 år ved normal slitage. Produktets levetid afhænger af brug og belastning. Produkter bør efterses jævnligt. Hvis produktet er defekt, har brudte overflader eller ikke længere yder tilstrækkelig friktionsnedsættelse til en sundhedsmæssig og forsvarlig forflytning kan udføres, bør produktet kasseres.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



Brugervejledning - Master Glide Traume Board

Brug af Master Glide Traume Board:



1. Placer brugeren ud til kanten af madrassen.



2. Vend brugeren let til siden og placer Master Glide Traume Boardet så det dækker hoved og bækken.



3. Hvis brugeren har tunge ben eller der er risiko for traume, kan 2 stk Master Glide Traume Board benyttes.



4. Placer glidestof ovenpå boardet for at minimere friktion under forflytningen.



5. Placer sengene mod hinanden i samme højde. Husk at låse alle bremser.



6. I et roligt tempo trækkes brugeren over på modsatte seng via lagnet.



7. Fjern glidestykket ved at trække i laget længst fra brugeren.

Brugervejledning - Master Glide Traume Board

Tekniske specifikationer

Materialer:

PE

Produkterne lever op til følgende standards:

REACH

RoSH

DODD Frank

Varenummer - Navn:

Størrelse:

Håndtag:

Max. Brugervægt:

Varenummer - Navn:	Størrelse:	Håndtag:	Max. Brugervægt:
MC 004-1030 Master Glide Trauma Board	L 100 x B 49 x H 0,5 cm	1	150 kg
MC 004-1032 Master Glide Traume Board - 160	L 160 x B 49 x H 0,5 cm	1	150 kg

ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten.



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Max. 20 cm afstand mellem understøttelsesfladerne i forbindelse med forflytning med Master Board.



Max. 5 cm hældning mellem understøttelsesfladerne.



Sørg for, at alle relevante bremser er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



Brugervægt:

Anbefalet max. brugervægt: 150 kg.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller, at der ikke er skader på stof, stropper, sømme mm. Har produktet høj friktion eller på anden vis er i stykker, skal produktet kasseres.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk



Find os på:

