

Hygiejnepude:

HMI nr. 104859.

Hygiejnepuden anvendes i forbindelse med pleje/vask af borgeren.
Puden anvendes imellem ben ved borger der abducerer eller indadroterer meget i hoften.



Vigtigt:

- Borgeren skal være under konstant overvågning, når puden er i brug.
- For at undgå trykmærker, undgå længerevarende brug af puden, da puden vil være i spænd imellem benene.

Rengøring:

Puden kan skylles under vandhanen med lunken vand. Rengøring kan også foretages ved aftørring med opvredet klud. Brug gængse rengørings- og desinfektionsmidler. Rengøres evt. med SURCON EKAMED DESINFEKT. SERVIETTER/KLUDE – Sani-Coth Active Wipes Alkohol fri eller Chlor + 1000. Bemærk: Servietter med chlor/alkohol kan reducere levetiden på PU-overfladen..

Data:

Mål: B 25cm x L 20 cm x H 15 cm.

ID nr.:97060246.

Skumtype: Koldskum RG30.

Betræk: Smudsafvisende bi-elastisk PUR- overflade lagt direkte på skumfladen.
CE.

Advarsel! Rygning forbudt.