


Rygstøttepude:

HMI nr. 104860.

Rygstøtte pude, til brug når borger har behov for støtte på sengekanten.
Puden vendes efter behov, afhængig af borgerens størrelse og sengebredde.

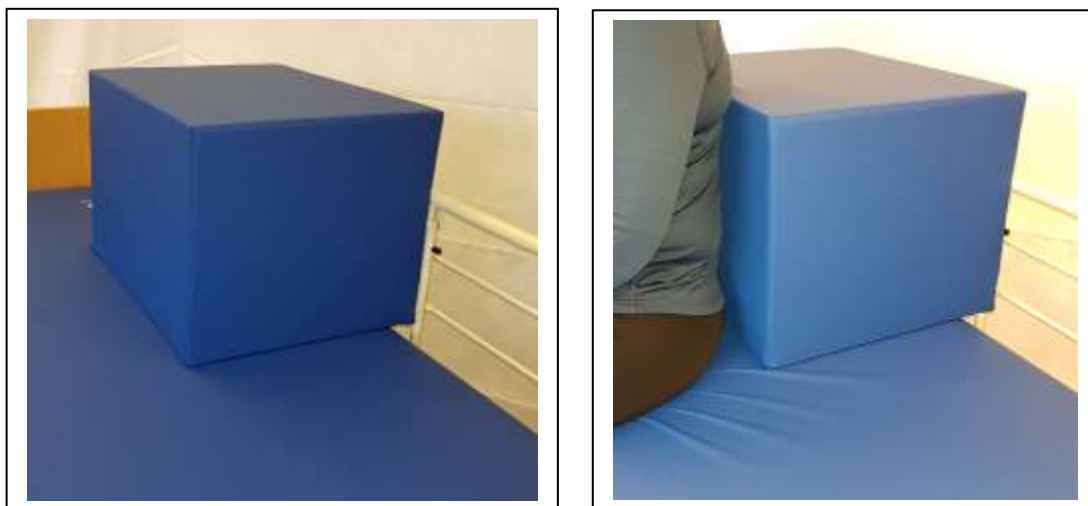

Vigtigt:

- Rygpuden **skal** altid støttes af en væg/hævet sengehest på den modsatte side. Se foto. Sengen skal være bremset under anvendelse af puden.
- Borgeren skal sidde stabilt på sengen. Sengen skal sænkes, så borgerens fødder berører gulvet.
- Det er også muligt at bruge en pude på begge sider af borgeren som sidestøtte/armlæn.
- **Bemærk!** Ved bløde madrasser og vekseltrykmadrasser, der ikke har randzone forstærkning, vil der være en større risiko for at borgeren kan "glide" ud af sengen, når borgeren sidder på sengekanten, så tag forbehold for dette når puden anvendes.
- Borgeren skal være under konstant overvågning, når puden er i brug.

Data:

Mål: B 20cm x L 25 cm x H 35 cm.

ID nr.:97060247

Betræk: Smudsafvisende bi-elastisk PU materiale, Brandhæmmende norm EN 597-1/2.

Fyld: 100% Koldskum. CE.

Advarsel ! Rygning forbudt.