



# BRUGSANVISNING

*Danmark*

*Micro*



*panthera*  
**panthera**

# Brugsanvisning Micro **panthera**

## Indholdsfortegnelse

Anvendelse	side 3
Indstilling af stolen	side 4
Vedligeholdelse	side 7
Sikkerhed	side 8



# Brugsanvisning Micro **panthera**

## Indledning

Panthera Micro er en kørestol til de allermindste. Stolen er konstrueret til indendørs brug og bør ikke anvendes udendørs. Pantheras designer-team har gjort alt for at gøre denne stol så letkørt og så smidig som muligt. Den typiske bruger til Panthera Micro er formodentlig mellem et og fem år gammel og har svært ved selv at køre andre kørestole. Eventuelt kan barnet have en elektrisk kørestol til udendørs brug.

**Det er meget vigtigt, at side 8 vedr. sikkerhed gennemlæses for din egen og barnets skyld.**

### Kontrollér at stolen svarer til din bestilling:


- Kontrollér stolens sædebredde. Målet er det udvendige mål på stolens sæde. Bredden kan være 24 eller 27 cm, afhængigt af din bestilling.
- Kontrollér at du har fået det bestilte tilbehør.

### Lav en lille teknisk inspektion af stolen:

Kontrollér at:

- Baghjulsakslerne glider let i akselbøsningerne
- knappen i centrum af baghjulet springer ud, når du har monteret baghjulet
- forhjulsgafflen kan svinge rundt og svinger let.
- antitipstøtten sidder fast.

Hvis et eller flere af de ovenstående punkter ikke er som foreskrevet, kontakt da venligst TA. Service A/S inden du tager stolen i brug.

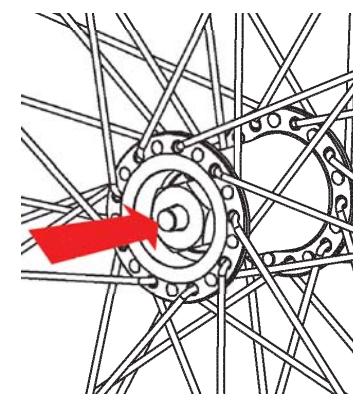

Billede 1: Knap til udløsning af hjullås

### At skille stolen ad – og samle den igen.

Ved transport af stolen kan baghjul og sidestykker/armlæn afmonteres hvorefter ryggen kan lægges ned. Således bliver stolen lettere at transportere og den fylder mindre. **Baghjulet** afmonteres ved at trykke ind på den lille knap i navets midte (se billede 1). Samtidig trækkes hele hjulet udad. Baghjulet monteres igen ved at trykke ind på den lille knap samtidigt med at akslen føres ind i akselbøsningen. Når akslen er trykket i bund i bøsningen slippes den lille knap i navet. For at kontrollere at hjulet sidder på plads, trækker du ud i hjulet – husk at slippe den lille knap.

## Brugsanvisning Micro panthera

### Indstilling af stolen:

Når du skal indstille stolen for at få den bedste siddestilling og de ønskede køreegenskaber er det vigtigt at indstillingen foregår i den rigtige rækkefølge. Stolen indstilles først så den understøtter siddestillingen, og derefter indstilles den med hensyn til køreegenskaberne. Denne rækkefølge er vigtig, idet man altid vil tilpasse sin siddestilling efter en given indstilling af stolens køreegenskaber, hvilket kan være u hensigtsmæssigt. Endvidere har din siddestilling i stolen indvirkning på stolens køreegenskaber.

Siddestillingen i stolen indstilles i nedenstående rækkefølge:

- 1) Sædets kontur
- 2) Fodpladen
- 3) Ryggens kontur.
- 4) Kørestolens balancering – tippunktet.

#### 1. Justering af sædets kontur

Den bageste halvdel af sædet kan du stramme eller slække ved at spænde velcrobåndene på undersiden af sædet – se *billede 2*. Dette giver dig mulighed for at variere din siddehøjde med ca. 2 cm opad eller nedad.

Ved at flytte sædeforlænger-stykket frem eller tilbage kan du justere sædedybden.



Billede 2: Velcrobånd under sædet

#### 2. Fodpladen.

Fodpladen (*billede 3*) kan du justere op eller ned. Justering sker ved at fjerne skrueerne i siderne af fodpladen, finde den ønskede højde og derefter montere skrueerne igen. Fodpladen bør indstilles i en højde, så brugerens lår – med fødderne placeret på fodpladen - understøttes af kørestolspuden. Fodpladen kan vendes således at dørkpladen vender fremad eller bagud. Fodpladen vendes ved at fjerne skrueerne i siderne på fodpladens hæfte. Fodpladen vendes alt efter ønske og skrueerne monteres igen.



Billede 3: Fodpladen

## Brugsanvisning Micro panthera

### 3. Ryggens kontur.

Ved at stramme eller slække velcrobåndene (*billede 4*) på rygbetrækket kan det tilpasses brugerens rygkontur. Det nederste af rygbetrækket fæstner på undersiden af sædebetrækket med velcrobånd. Ved at lave en større eller mindre "pose" i dette stykke, kan der gives mulighed for indstilling/tilpasning af rygbetrækket.

Start med at løsne alle velcrobåndene og placér barnet i stolen – så langt tilbage i stolen som muligt. Derefter spændes velcrobåndene så barnet opnår støtte for ryggen. Hvis barnet har en fornemmelse af ikke at kunne komme langt nok tilbage i stolen, kan det skyldes at den nederste flig af rygbetrækket er fæstnet for langt inde under sædebetrækket. Flyt fæstnet længere bagud og forsøg igen.




Billede 4: Rygbetrækket

### 4. Kørestolens balancering.

Kørestolens balancering eller dens tippunkt indstilles ved at flytte stolens bagaksel frem eller tilbage på stellet. Jo længere bagud bagakslen placeres des sværere bliver stolen at tippe for barnet. Hvis bagakslen placeres fremme på stellet bliver stolen let tippet, og den bliver lettere for barnet at manøvrere over mindre niveauforskelle. Vær opmærksom på at bagakslen ikke bør placeres for langt fremme på stellet, da dette vil føles ubehageligt for barnet.

Det er vigtigt, at der gives god tid til at afprøve og tilpasse stolens balancering, så den passer til barnets siddestilling og køreteknik.

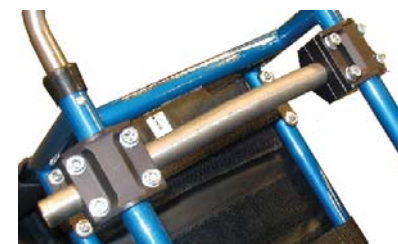


Billede 5: Bagaksel

## Brugsanvisning Micro **panthera**

### Sådan flytter du stolens bagaksel:

1. Tag baghjulene af stolen – se side 2.
2. Løsn boltene som sidder på undersiden af beslaget til bagakslen. Husk at løsne boltene i begge sider.
3. Nu kan beslagene skubbes frem og tilbage på stellet. Det er vigtigt at beslagene placeres lige overfor hinanden. Dette kontrolleres bedst ved at måle afstanden mellem forkanten på det lodrette stelrør og bagkanten af beslaget. Afstanden skal være ens i begge sider. (Se billede 6).
4. Spænd boltene under beslagene, så disse sidder godt fast.

1. Vær opmærksom på, at indstillingen af stolen skal komme barnet til gode i lang tid fremover, hvorfor det er vigtigt at sørge for, at det gøres ordentligt. Prøv eventuelt forskellige indstillinger, så det derigennem kan afgøres hvilken indstilling, der passer bedst til barnet. Der bør jævnligt følges op på indstillingen af stolen, således at den hele tiden passer optimalt.

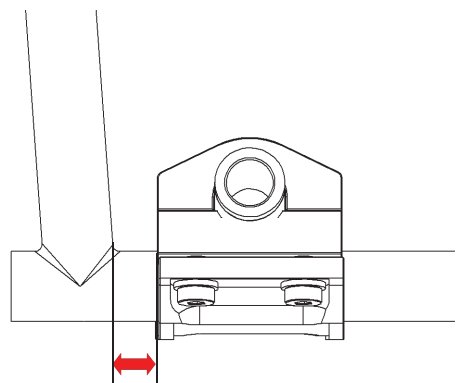

Billede 6: Balancering

## Brugsanvisning Micro **panthera**

### Vedligeholdelse

Din Panthera er designet, så den næsten er vedligeholdelsesfri. Nogle dele bør du dog regelmæssigt efterse.

#### En gang om måneden bør du:

- smøre baghjulsakslerne. Tag baghjulet af og fordel et par dråber olie på baghjulets aksel. Hvis du kører i regn, sand, sne, sjap eller salt, eller kun sjældent tager baghjulene af, bør baghjulsakslerne smøres oftere.
- pumpe baghjulene. Fjern den lille sorte ventilhætte og tilslut pumpe med auto-ventil-adaptor. Dæktrykket bør være 8 kg i begge baghjul.
- rengøre mellem forhjul og forhjulsgaffel. Her samles ofte mængder af hår og andet, som kan medføre beskadigelse af lejerne i forhjulene. Løsn møtrikken med en fastnøgle (10 mm), mens der holdes på bolten ligeledes med en fastnøgle (10 mm). Træk bolten ud og rengør derefter hjul, mellemstykker og bolt. Kom en dråbe olie i hvert forhjulsleje og monter derefter forhjulet igen.
- vaske sædebetræk, rygbetræk og pudebetræk ved max. 40° i vaskemaskine, når det er nødvendigt.
- aftørre stolens stel med en fugtig klud opvredet i van med autoshampoo eller opvaskemiddel. Til meget snavsede flader kan der anvendes affedtningsmiddel. Smør alle bevægelige dele med universalolie efter vask.

#### Garanti og holdbarhed.

Holdbarheden på en Panthera afhænger af hvor meget stolen bruges, og i hvor høj grad stolen vedligeholdes.

Garanti: Der gives syv års fabriksgaranti på stel. På øvrige dele er der 12 måneders garanti. Der ydes ikke garanti på dæk og slanger.

Max. personvægt: 30 kg

## Sikkerhed



En Panthera kørestol er konstrueret til at være så letkørt som muligt. Dette medfører at den reagerer hurtigt og kontant på de "kommandoer" du giver den. Hvis stolen gives en u hensigtsmæssig kommando, kan den reagere u hensigtsmæssigt – ved eksempelvis at tippe bagover. Det er muligt at vælte med stolen, idet man ikke kan tage forbehold for alle tænkelige situationer. Der er vigtigt, at du har gennemført en ordentlig afprøvning af stolen, og at du giver dig tid til at træne i kørsel med stolen. Hvis du har spørgsmål vedrørende kørestolsteknik, skal du kontakte din kommunale terapeut. Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål, kan du kontakte TA. Service A/S. Nedenfor belyses nogle enkelte punkter, som er gode at kende til, når det handler om din sikkerhed i stolen.

### *Konstrueret til indendørs brug*

- Årsagen til dette er, at stolen er konstrueret med ét forhjul (for at svinge lettere). Dermed øges risikoen for, at stolen kan vælte skråt fremover, hvis den rammer en forhindring eller kører i en grøft med fart på. Dette er også muligt indendørs om end meget mindre sandsynligt.
- De fleste børn har brug for et bælte, som kan hjælpe med at holde balancen i overkroppen, og som kan forhindre, at de falder ud af stolen. Der følger et blødt bælte med stolen. Er dette ikke tilstrækkeligt, bør barnet ikke benytte stolen før et passende sikkerhedsbælte er monteret på stolen.

### *Siddestilling*

- U hensigtsmæssig siddestilling kan være årsag til trykskader. Hvis du er i tvivl om, hvor vidt du sidder hensigtsmæssigt kontakt da din terapeut i din kommune.
- Sædebetrækket er tænkt benyttet sammen med en pude.

### *Andre børn kan skade sig på stolen*

- Egerbeskyttere gør stolen tungere at køre og er derfor ikke standard på stolen. Færdes barnet sammen med andre børn, er der imidlertid risiko for, at andre børn kan få fingre eller hænder i klemme i egerne. Egerbeskyttere kan eftermonteres.

### *Teknisk kontrol*

- Når stolen er tilpasset skal du kontrollere, at alle skruer er på plads, og at alle møtrikker er spændte.
- Kontrollér altid at baghjulene sidder ordentligt fast, når de har været afmonteret.

**panthera**  
**TA.**  
**SERVICE A/S**

TA. Service A/S • Orupgade 32 B • Orup • 4640 Fakse  
Telefon +45 56 72 57 77 • Telefax +45 56 72 57 76  
www.ta-service.dk • ta-service@ta-service.dk