

## Mobilex rollator "Lion"

Varenr. 312371, 312372, 312373 og 312374

### Montage- og brugervejledning



**MOBILEX A/S**  
Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Danmark  
www.mobilex.dk

## 1. Indledning

Vi glæder os over, at De har købt en kvalitetsrollator fra Mobilex. Denne montage- og brugervejledning indeholder en detaljeret produktbeskrivelse og væsentlige instrukser for korrekt anvendelse af produktet. Derfor bedes De læse denne vejledning grundigt, før produktet tages i brug. Venligst vær opmærksom på alle forholdsregler, især sikkerhedsanvisningerne, og overhold altid disse, så De opnår en sikker og langvarig anvendelse af produktet.

### Formålsbeskrivelse

Mobilex rollatoren "Lion" er beregnet til personer, som grundet bevægelsesproblemer har brug for støtte ved gang, men som selv er i stand til at bruge rollatoren uden risiko for selv at komme til skade eller øve skade på andre. Takket være sædet og parkeringsbremserne kan brugeren til enhver tid sætte sig for at få en pause. Rollatoren må kun bruges til at komme frem med og til kortvarigt at sidde på.

### NB

Rollatoren må kun bruges af personer, der på grund af deres sundhedstilstand har brug for stabil støtte ved gang. Rollatoren bør ikke bruges af personer med eksempelvis balanceproblemer eller svækket muskelkraft, og som derfor ikke kan bruge rollatoren uden risiko for selv at komme til skade eller skade andre.

Ved spørgsmål til produktet bedes De henvende Dem til forhandleren eller direkte til Mobilex A/S

### Mobilex A/S

Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Danmark

Telefon: +45 87 93 22 20  
Telefax: +45 87 93 17 77  
E-Mail: info@mobilex.dk

## 2. Sikkerhedsanvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet, skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet
- Benyt kun produktet til det oplyste formål
- Der må ikke laves konstruktionsændringer på produktet uden producentens skriftlige tilladelse
- Pas på ikke at få fingrene i klemme eller få andre skader ved alle rollatorens samlinger samt i forbindelse med justeringer, sammenklapning m.m.
- Check at begge bremser fungerer inden ibrugtagning
- Benyt kun rollatoren, når den er fuldt udklappet og med låsemekanismen helt fastlåst
- Produktet må kun anvendes på et plant og stabilt underlag indendørs og udendørs
- Alle hjul skal til hver en tid være i kontakt med underlaget. Dette sikrer, at rollatoren er i balance og derved undgås evt. uheld
- Når rollatoren anvendes til at sidde på, SKAL parkeringsbremserne aktiveres.
- Begge bremsehåndtag skal aktiveres og blokeres på én gang
- Efterlad aldrig en rollator ulåst i bremsefunktionen.
- Produktet må aldrig udsættes for større belastning end i alt 150 kg
- Indkøbstasken er testet til 5 kg


## 3. Beskrivelse

### Produktbeskrivelse

Mobilex rollatoren "Lion" har en letvægtsramme af pulverlakeret aluminium og er udstyret med 4 store og stabile hjul. Aluminiumsrammen gør det let at folde rollatoren sammen samt opbevare og transportere den. Den er let at manøvrere og er meget stabil såvel indendørs som udendørs. Skubbehåndtagene kan indstilles i højden. Rollatoren er fra fabrikken udstyret med et monteret sæde, rygbælte, stokkeholder og en indkøbstaske.

## Leverancen omfatter

- ✓ 1 "Leopard" rollator sammenfoldet inkl. sæde, rygbælte, stokkeholder og indkøbstaske
- ✓ 1 montage - og brugervejledning

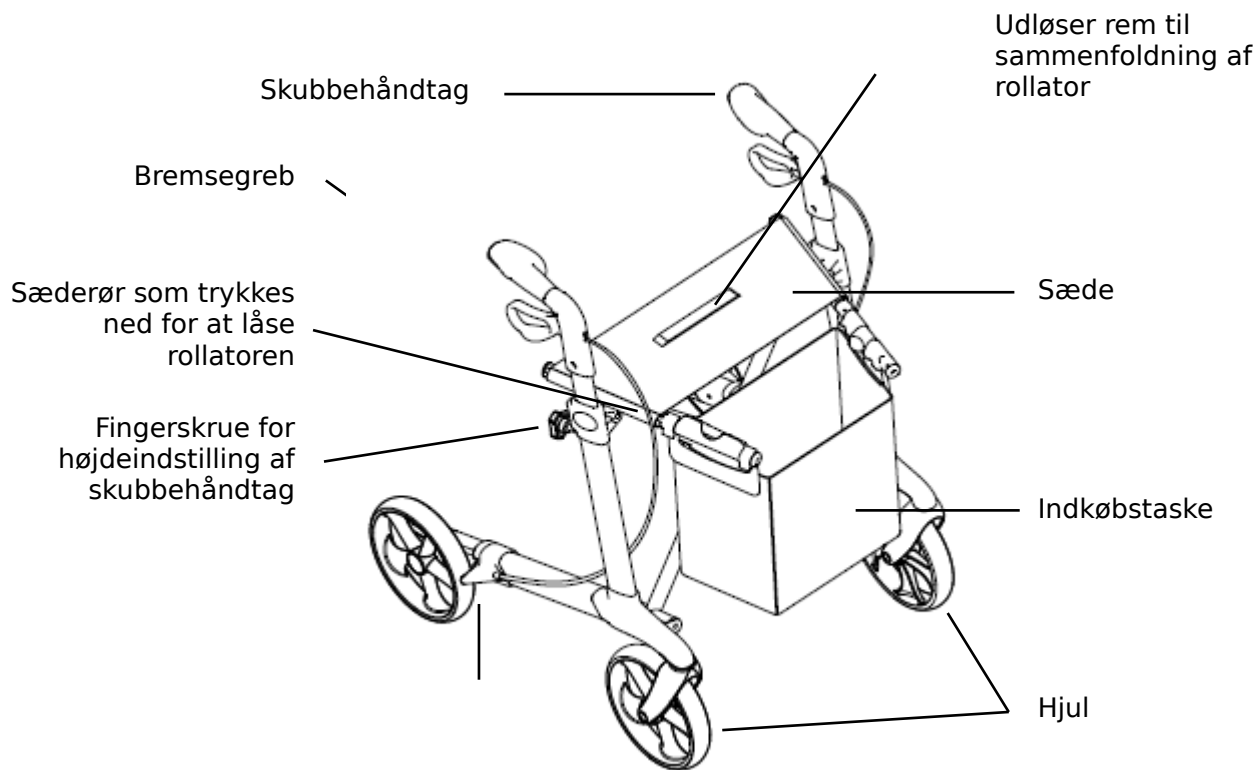

## Kontrol

Kontroller ved hjælp af ovenstående at der ikke mangler noget. Hvis der mangler noget, skal De straks kontakte forhandleren af produktet.

## Klargøring

- Tag rollatoren op af kassen og sæt den med hjulene på gulvet. Tryk på den røde knap og tag fat om rørene ved sædet. Tryk disse nedad, indtil der høres et let klik i låsemekanismen. Nu er rollatoren foldet ud og sikret mod sammenklapning.
- Kontroller inden brug at boltene, der fastgør hjulene, er korrekt fastgjorte, og at rollatoren er stabil, således at ingen dele kan bevæges.
- Kontroller endvidere bremsens funktion, før rollatoren anvendes.




## Sammenfoldning af rollator

- For at folde rollatoren sammen skal der trækkes opad i stroppen midt på sædet.
- Derefter udløses låsemekanismen, og rollatoren kan nemt foldes sammen.

## Højdeindstilling af skubbehåndtag

- For at indstille højden på skubbehåndtagene løsnes fingerskruen.
- Derefter indstilles håndtagene i den ønskede højde, hvorefter skruen igen fastspændes.

 Vær opmærksom på at begge håndtag skal være indstillet i samme højde. Korrekt indstillede håndtag bør ca. være i brugerens albuehøjde, når denne står med løst hængende arme.

## Tilbehør

Der findes forskelligt tilbehør til rollatoren (fx stokkeholder, slæbebremse m.v.). Kontakt Deres forhandler for yderligere informationer.

## Håndtering under transport

Det anbefales at transportere rollatoren i sammenfoldet stand. Dens konstruktion og lave vægt gør det muligt på en nem måde at folde den ud og folde den sammen. Man bør sikre sig, at rollatoren befinder sig i en stabil position under transporten, så den ikke beskadiges.

## Anvendelse


Stil Dem midt bag ved baghjulene, tag fat om håndtagene og udløs bremserne. Bremserne er specialudviklet, således at kun en lille kraftanstrengelse er nødvendig.

## 4. Tekniske data

| Mobilex rollator Lion              | Standard   | Small  |
|------------------------------------|--|--|
|                                    | Varenr. 312372 (antrasit)<br>Varenr. 312374 (brun) | Varenr. 312371 (antrasit)<br>Varenr. 312373 (brun) |
| Højde af skubbehåndtag (justérbar) | 90-112 cm  | 77-90 cm   |
| Sædehøjde                          | 62 cm  | 53 cm  |
| Total bredde åben / sammenfoldet   | 68 / 26 cm   | 68 / 26 cm   |
| Indv. bredde mellem skubbehåndtag  | 56 cm  | 56 cm  |
| Længde (dybde)                     | 76 cm  | 76 cm  |
| Vægt (+ taske 380 g)               | 9,3 kg   | 9,0 kg   |
| Max. belastning (rollator / taske) | 200 kg / 5 kg                                      | 200 kg / 5 kg                                      |
| Bremser                            | 2 låsbare med parkeringsfunktion                   |  |
| Hjul (soft hjul)                   | Forhjul 285 x 44 mm - baghjul 235 x 44 mm          |  |

## Typeskilt

Findes på den nederste rammedel

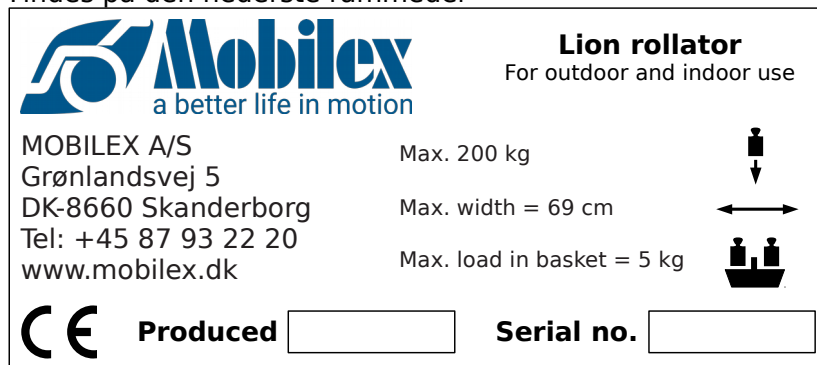

Billede af typeskilt (eksempel)

## 5. Vedligeholdelse

Normalt snavs på metal- og plastdele kan fjernes med almindelige rengøringsmidler. Benyt kun milde sæbemidler. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler, opløsningsmidler eller skuremidler, ej heller stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Trods den stabile konstruktion og brugen af modstandsdygtige og korrosionsbestandige materialer vil rollatoren blive udsat for et vist slid. Det anbefales derfor at få en fagmand til at tjekke den jævnligt (min. én gang årligt). Ved en sådan kontrol bør følgende efterses: Visuel kontrol af alle rammedele hvad angår skævheder, beskadigelser, slid og korrosion samt i særdeleshed kontrol af:


- ✓ Rollatorstellet
- ✓ Skubbehåndtag og greb
- ✓ Bremsegreb og bremsekabler
- ✓ Styregafler og forhjul
- ✓ Baghjul med bremser
- ✓ Sæde og låseanordning
- ✓ Indkøbstaske
- ✓ Tjek om der mangler nogle montagedele (fx møtrikker, skruer, nitter) og om de fungerer og er i god stand

## Rensning af hjulene

Det anbefales at rengøre hjulene med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Foretag også smøring af lejer ved at spraye et smøremiddel på engang imellem eller når hjulene begynder at knirke.

## 6. Genanvendelse

Rollatoren er egnet til genanvendelse. Før genanvendelse skal den rengøres og desinficeres samt være kontrolleret i henhold til pkt. 5.

 Vær opmærksom på at hvis rammen er bøjet eller brækket må rollatoren ikke genanvendes før hele rammen/rollatoren udskiftes.

## 7. Generel problemløsning

| Problembeskrivelse   | Mulige årsager   | Løsning   |
|--|--|---|
| Rollatoren kan kun med besvær skubbes eller styres                                 | Der er skidt mellem hjulene og gafferne  | Rengør mellem hjul og gaffel. Aftag evt. hjulet. Smør de bevægelige dele med smøreolie                                |
| Bremserne virker ikke som de skal eller én af bremserne virker bedre end den anden | Bremseskoene er slidte eller bremserne er ikke justeret korrekt  | Forsøg at justere bremsekablet eller udskift bremseskoene. Hvis dette ikke afhjælper problemet kontaktes forhandleren |
| Sædet låser ikke i korrekt position  | Kontroller om låsemekanismen går i indgreb eller om den er defekt. Se om der evt. sidder noget i vejen eller om noget ikke er fastspændt | Kontroller eller udskift låsemekanismen. Hvis dette ikke afhjælper problemet kontaktes forhandleren                   |

## 8. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

## 9. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

## 10. Konformitetserklæring (CE)

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

**Mobilex rollator "Lion"**  
(varenr. 312371, 312372, 312373 og 312374)

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- **Direktiv 93/42/EF for medicinalprodukter, Del I af 14. juni 1993**

Lars Nygaard  
Direktør  
Mobilex A/S

Skanderborg, den 26-10-2017



.....  
Underskrift