




Inkontinens sengeunderlag med glid og håndtag – 90x110cm

Sengeunderlaget har et vandtæt barrierelag i bunden og en kerne af stærkt absorberende materiale. Liggeunderlaget har en underside af lav friktions materiale, samt et håndtag, der gør vendingen lettere. Sengeunderlagets overfalde er lavet af børstet polyester, hvilket gør at overfladen føles tør, selv efter lækage. Underlaget er lamineret, hvilket gør det meget stærkt og resulterer i en glat overflade uden risiko for indvendige folder i produktet.



Brugsanvisning: Vask beskyttelsesunderlaget inden brug for at aktivere absorberingsevnen. Placér beskyttelsesunderlaget i sengen med glidefladen vendt ned mod madrassen. Tag et fast greb om håndtagene, når underlaget anvendes som sengelagen. Bemærk venligst, at produktet ikke er beregnet til at løfte personer. Sørg for, at liggeunderlaget er tilpasset sengens bredde.



Varenavn	Inkontinens sengeunderlag med glid og håndtag – 90x110 cm
Varemærke	Absorba
Varenr.	310046
Antal produkter, stk.	1
Samlet areal, LxB	90x110 cm
Overflade / glidende overflade, LxB	90x110 cm
Absorberingskapacitet SS 8760033:2015	2476 ml
Overflademateriale	100% Børstet polyester
Underlagsmateriale	100% Polyester
Barrierelag	Polyuretan
Absorberingsmateriale	65% Polyester, 35% Rayon
Rengøring	 Ved afføring eller blodpletter skal liggeunderlaget skylles i koldt vand hurtigst muligt.
Antal vaske	Ca. 200 (normal husholdningsvask)
Bortskaffelse/sortering	Brændbart affald, sorteres efter lokale anvisninger
Opbevaring	Stuetemperatur, ikke i sollys
Øvrig information	Produktet indeholder ikke PVC eller Latex



Produktet overholder EU's grundlæggende sundheds-, miljø- og sikkerhedskrav



OEKO-TEX® betyder at produkterne er fremstillet på en miljøvenlig måde



Sørg for, at syninger og materialer er komplette og ubeskadiget. Ved tegn på slid skal produktet kasseres. Bemærk, at der stadig er risiko for at glide ud, efter hver bevægelse / position, skal der træffes en risikovurdering med udgangspunkt i andre sikkerhedsforanstaltninger! Læg altid sidestykkerne indunder madrassen. Bemærk! Produktet er ikke beregnet til at løfte personer. Bør ikke placeres i nærheden eller i direkte kontakt med genstande og enheder, der udsender høj varme.