

Comfort Master

BRUGERVEJLEDNING

Mini bord/pudebakke



Når mobiliteten forringes...




...forbedrer vi livskvaliteten!

Vare	Art no.	Hmi no.	Produktbetegnelse	Model	Størrelse	*L/B	Vægt
	MC 001-9920	20352	Mini bord/pudebakke		L 42 x B 42 H 10 cm	B	1200 g

* L=lagervare, hvor det kan forventes, at varen afsendes indenfor 3 arbejdsdage
B=bestillingsvare, her kan påregnes op til ca. 3 ugers leveringstid

Comfort Master

Mini bord/pudebakke

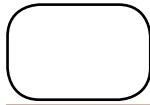

A. Placering af Mini bord/Pudebakke



1A) Bruger sidder i kørestol og har behov for et bord. Comfort MASTER Mini bord/Pudebakke placeres i skødet på brugeren. Grundet sin flamingoflydte inderside, former bordet sig efter brugeren og ligger derved stabilt.



2A) Brugeren sidder i sengen og har behov for et bord. Comfort MASTER Mini bord/Pudebakke placeres i skødet på brugeren. Grundet sit flamingoflydte indhold, former bordet sig efter brugeren og ligger derved stabilt.

Vaskeanvisning

Mini Bord/Pudebakke kan vaskes ved 80 grader C



Kun skånsom tørretumbling



ADVARSEL

Der må ikke anvendes skylle- eller blegemiddel.

Produktbeskrivelse

Mini bordet består af en bakke i opskummet PVC. På undersiden af bakken er der monteret en pude fyldt med Krøyerkugler. Dette bevirker, at bakken former sig efter underlaget og dermed ligger stabilt mod ethvert underlag.

Anvendelse

Mini bordet kan anvendes som sengebord til brugeren, der sidder i kørestol, seng, bil mm.

Fordele

- Skaber øget ventilation
- Mindsker varmeudvikling
- Giver god komfort
- Forebygger tryksår



VIGTIGT

- Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.
- Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.
- Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.



ANSVAR

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.