



FLIPPER FLEX G2



Brugervejledning

Flipper Flex G2

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsforeskrifter	3	Lægplade.....	15
Regulerbar sædehøjde - Gaspatron	4	Fodkasse	16
Regulerbar sædehøjde - Aktuator.....	5	Rammeforlængere.....	17
Opladning af batteri.....	6	Anti-tip støtte	17
Tilkobling af elektronikbox.....	6	Siddesystem.....	18
Tiltfunktion	7	Vedligeholdelsesvejledning.....	20
Kørebøjle	8	Rekonditionsanvisning	22
Parkeringsbremse	9	Tilpasning og specialtilpasning.....	24
Montering af drivhjul.....	10	Betingelser	25
Montering af anti-tip støtte & tippepedal.....	11	Tekniske data	26
Retningsholder	11		
Transportkit.....	12		
Transport i bil.....	13		
Fodstøtte	14		

Produktet er fremstillet af Anatomic SITT AB


Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping
Telefon +46 11-161800

Produktet forhandles i Danmark af:

Anatomic SITT A/S
Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark
Tel +45 86 17 01 74
Fax +45 86 17 01 75



Sæt kryds i ruden ved
SPECIALTILPASNING for så
gælder CE-mærkningen ikke!

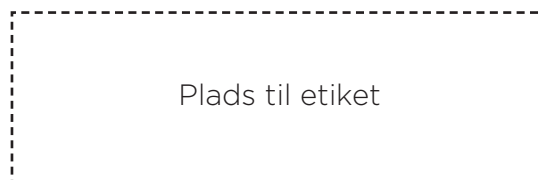

Plads til etiket

Sikkerhedsforeskrifter

Indledning

For at kunne udnytte Flipper Flex G2 til fulde er det vigtigt, at man læser denne brugervejledning igennem. Dette gælder alle personer, som har med brugeren at gøre.

Tilpasning af Flipper Flex G2 skal altid foretages af uddannet personale. Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Anatomic SITT A/S.

Anvendelsesområde

Produktet er beregnet til at blive brugt som udendørsstel sammen med siddesystem produceret af Anatomic SITT AB. Hvis anden kombination ønskes, bedes du kontakte Anatomic SITT A/S.

Maksimal belastningsvægt er 95 kg.

Korrespondance

Flipper Flex G2 og dets tilbehør er CE mærkede produkter. Et unikt serie nummer er placeret på en etiket på kørestolsstellets rørramme. Dette serie nummer skal der refereres til ved enhver korrespondance vedr. produktet.

Crashtestet & godkendt

Flipper Flex G2 er crashtestet og godkendt efter 7176-19 til 75 kg i bil.

Hvis et alvorligt problem opstår bør det rapporteres til Anatomic SITT A/S og landets behørig myndighed.

OBS!

Den som bevilliger hjælpemidlet eller en person med tilsvarende kvalifikationer og viden om brugeren og hjælpemidlet skal altid foretage en risikovurdering i forhold til tipning, før brug. Se afsnit om rammeforlængere på side 17.

Ekstra anti-tip støtte kan bestilles ved behov.

Regulerbar sædehøjde - Gaspatron

Sædehøjden er regulerbar mellem **29-65** cm.


Sædehøjden justeres enkelt ved hjælp af fodpedalen (se billede nedenfor).

Sørg for altid at holde en hånd på siddesystemet (eller kørebøjlen) ved justering.

- Aktiver gaspatronen ved at trykke ned på fodpedalen.
- Juster siddesystemet til ønskede højde.
- Slip fodpedalen når du har opnået ønskede højde. Højden er nu låst.




OBS! Vær opmærksom på den mulige risiko for afklemning.

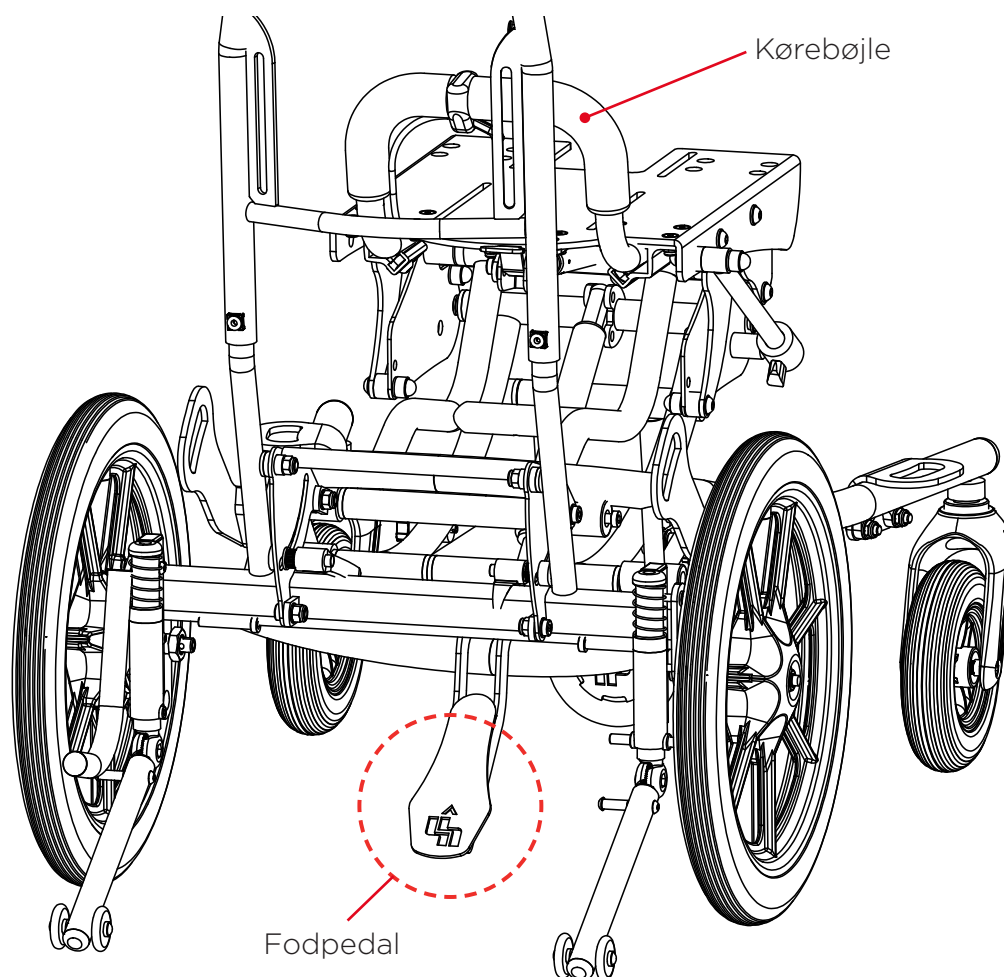

Regulerbar sædehøjde - Aktuator

Sædehøjden er regulerbar mellem 29-65 cm.
Sædehøjden justeres med en elektrisk håndkontrol.

Sørg for altid at holde en hånd på siddesystemet ved justering.

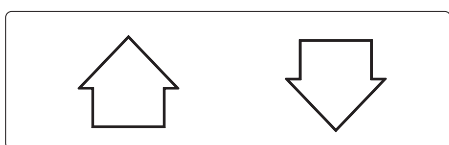

- Opad pil (A) løfter sædepladen
- Nedad pil (B) sænker sædepladen



OBS! Vær opmærksom på den mulige risiko for afklemning.

Håndkontrol

Tilt-styring →
Højde-styring →



Højdejustering:



Høj



Lav


Opladning af batteri

Tilslut laderens strømledning til en stikkontakt (220 V).

Tilslut efterfølgende laderens kontakt til udtaget på siden af håndkontrollen.

Første gang du lader batteriet, skal det ske i mindst 24 timer.

Det er meget vigtigt at batteriet aldrig aflades helt, eftersom det da kan ødelægges.

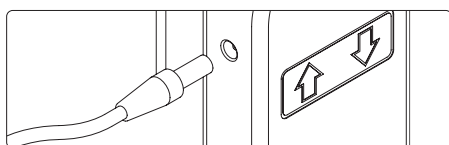

Kontakt til opladning sidder på siden af håndkontrollen.



Første opladning skal vare i 24 timer.
Det anbefales herefter at oplade hver nat.
Batteriet må aldrig aflades helt.

Tilkobling af elektronikbox

Ved tilkobling af elektronikboxen skal kontakten tilsluttes boksens stik mærket 1. Ved tilvalg af elektronisk tiltfunktion skal elektronikboxen og den elektroniske håndkontrol ombyttes till en ny håndkontrol og elektronikbox.

Tiltfunktionens aktuator kobles da til boxens kontakt mærket 2.




Håndkontrol



Aktuator (TILT) tilvalg




Aktuator (LØFT)

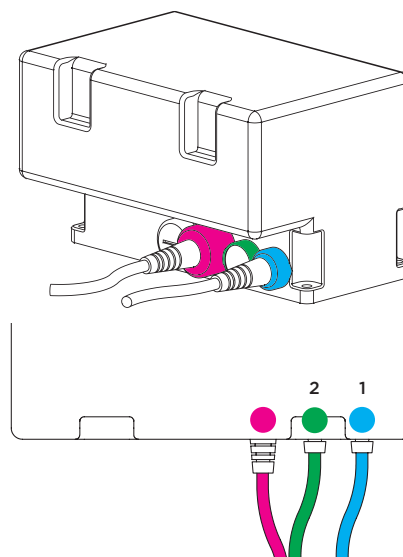

Tiltfunktion


Tiltfunktion

Flipper Flex G2 har to forskellige lejer for tilt hvilket indstilles ved hjælp af to huller i siden af sædepladen. I standardudførelsen er fastgørelsen i nederste hul. Ønskes mere negativ tilt, kan man flytte fastgørelsen til øverste hul.

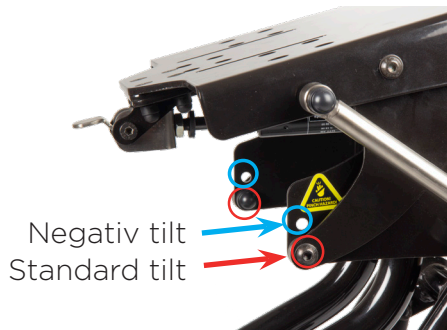

Tiltfunktion med gaspatron

Sædepladens vinkel justeres ved at løsne fingerskruen (A) og trykke palen på aktiveringshuset ned ad (Sidder i bagkanten på sædepladen). For derefter at trykke sædepladen nedad og fremad. Slip håndpalen (B) for at låse ønskede vinkel og stram efterfølgende fingerskruen til (A) for at sikre at vinklen er låst.

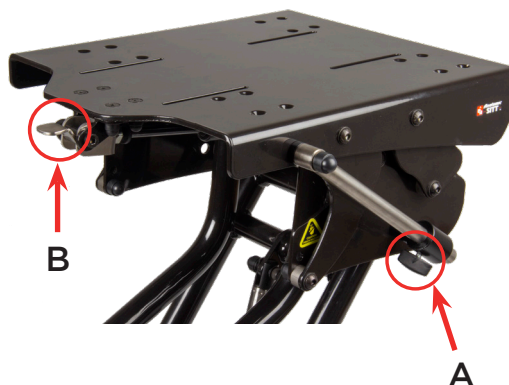

OBS! For at vende tilbage til sædevinklens oprindelige position, skal du løsne fingerskruen (A), trykke på håndtaget og trække sædepladen op og tilbage ved at trække i bøjlen.

Kontrol

Kontroller altid at tiltningen er låst, når ønskede vinkel er opnået.

Låsning

Fingerskruen (A) skal altid låses efter eventuel justering.

Tiltfunktion med aktuator

Juster tiltpositionen ved at holde trykknappen nede (C) til hældning fremad og tryknap (D) til hældning bagud. Slip trykknappen på controlleren, når den ønskede vippeposition er nået.

Håndkontrol



OBS! Vær opmærksom på den mulige risiko for afklemning.



Kørebøjle

Vinkeljustering - Håndtag (A)

For at ændre vinklen på håndtaget, skal du løsne fingerskruerne som vist på billede (A). Lås knapperne, når den ønskede vinkel er nået.


Vinkeljustering - Kørebøjle (B)

For at ændre kørebøjleens vinkel, skal du løsne drejeknapperne som vist på billede (B). Lås knapperne, når den ønskede vinkel er nået.

Højdejustering - Kørebøjle (C)

Kørebøjlen alternativt kørehåndtagene kan højdejusteres i tre forskellige højder. Sørg for at stramme skruerne (C) godt, når den ønskede position er nået.

Oversigt kørebøjle

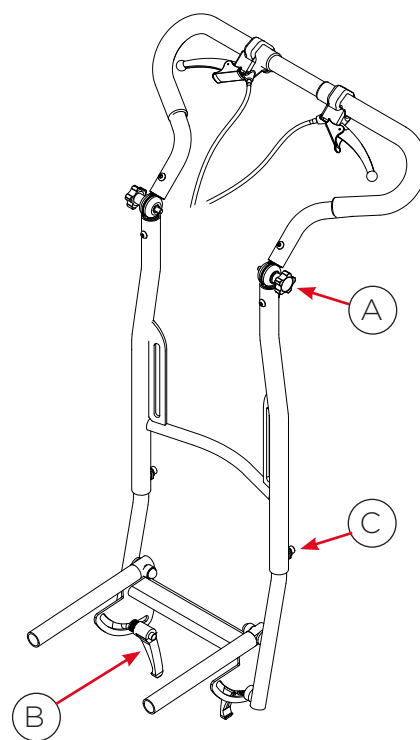

OBS! Fingerskruerne skal altid låses efter justering.



OBS! Kørebøjlen skal altid ligge ned mod sidde-systemets ryg ved transport i køretøj.


Parkeringsbremse

Lås bremse op

Lås parkeringsbremsen op ved at trykke bremsehåndtaget (A) ind, så den røde lås (B) slipper.

Lås bremsen

Lås parkeringsbremsen ved at trykke bremsehåndtaget ind (A) og sætte den røde låsmekanisme (B) i hak. Slip efterfølgende bremsehåndtaget.

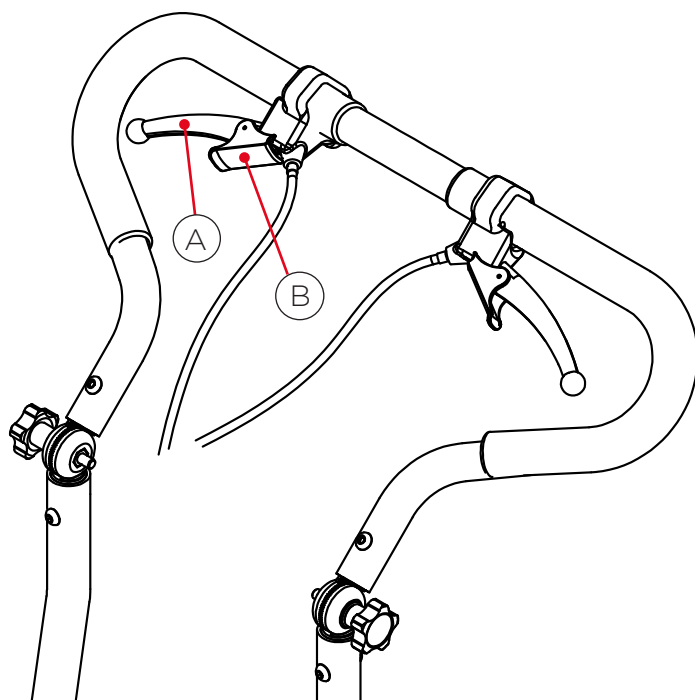

OBS! Lås altid parkeringsbremsen, når kørestolsstellet står på ujævnt underlag.

Montering af drivhjul


Drivhjulene kan enkelt monteres og fjernes. Dette kan være anvendeligt f.eks. ved transport.

Afmontering af hjul

Løsen parkeringsbremsen først. Tryk og hold ind på knappen i midten af hjulet. Træk efterfølgende hjulet ud.

Montering af hjul

Tryk og hold knappen ind og skyd efterfølgende quick-release-akslen ind i navet. Når drivhjulet er sat hele vejen ind, er det OK at slippe knappen.

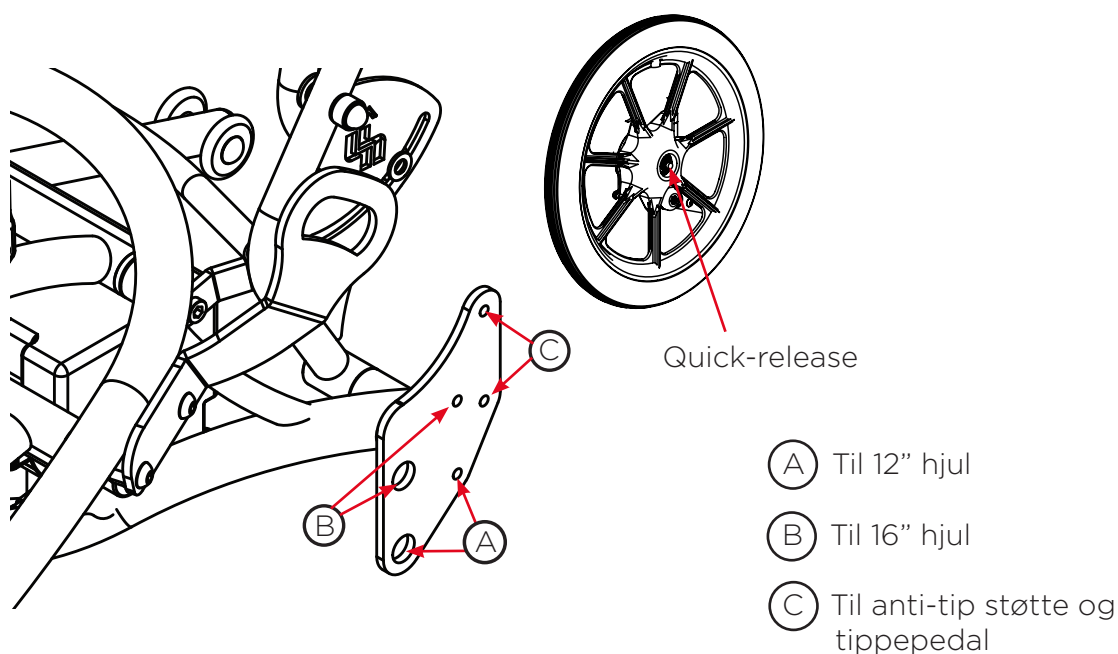

OBS! Sørg for at hjulet er låst!


Montering af anti-tip støtte & tippepedal

Anti-tip støtten & tippepedalen monteres med de samme skruer, afstandstykker og møtrikker, se billedet. Tippepedalen placeres på ydersiden og anti-tip støtten på indersiden af hulpladen.

Anti-tip støtte - Quickguide

Anti-tip støtten har til opgave at forhindre at kørestolsstellet tipper ukontrolleret bagud. Anti-tip støtten kan enkelt vippe til siden, så den ikke er i vejen.

Tryk ned på anti-tip støtten og vrid den til siden. Sørg for at vride ind til du hører et klik, som indikerer at anti-tip støtten er på plads. Forsøg at trykke ned så langt inde som muligt på anti-tip støtten. Dette er for at delene skal have længst mulig levetid. Omvendt vrider man anti-tip støtten ud til der høres et klik.

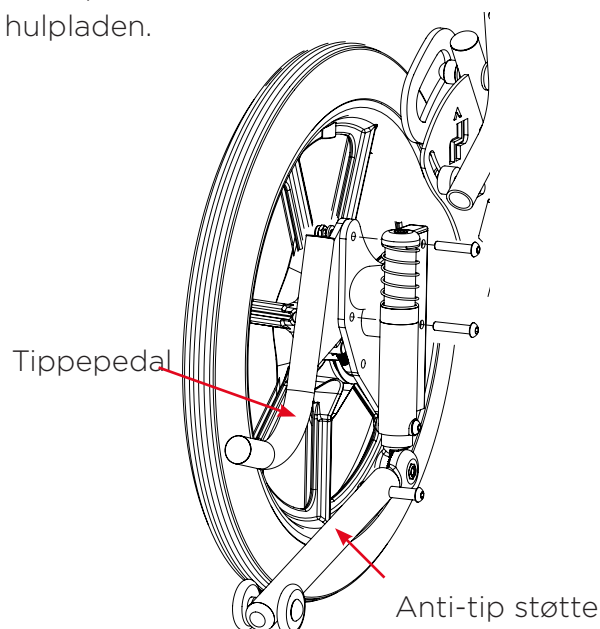


OBS! Zitzi Flipper Flex G2 bør altid udstyres med anti-tip støtte ved højdejustering

Tippepedal - Quickguide

Tippepedal bruges til at gøre det lettere at tippe kørestolen ved kantsten.

Ⓒ Hul til anti-tip støtte og tippepedal

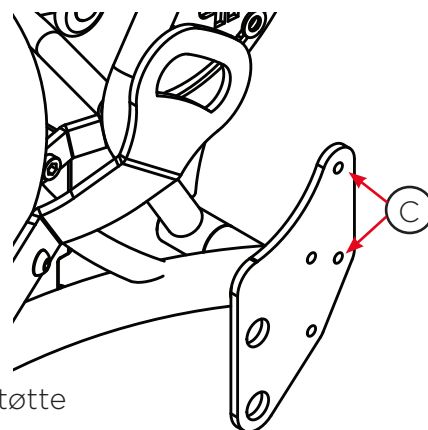

Retningsholder

Retningsholder

For at aktivere retningsholderen skal du trække låsebolten lige op og ned drej den derefter 90° og frigør låsen i hullet i det bevægelige element. Sørg for, at kørselsretningen er låst.

Transportkit


Montering af støttebøjle

Monteres med medfølgende skruer og lås, se billede.

Loc-tite skal bruges på skruerne (A) ved montering.

Støttebøjlejustering - Quick-release


- Løsen låsen på begge sider og træk efterfølgende ud til yderste leje.
- Sørg for at låsen går i hak i yderste leje og lås efterfølgende låsen.

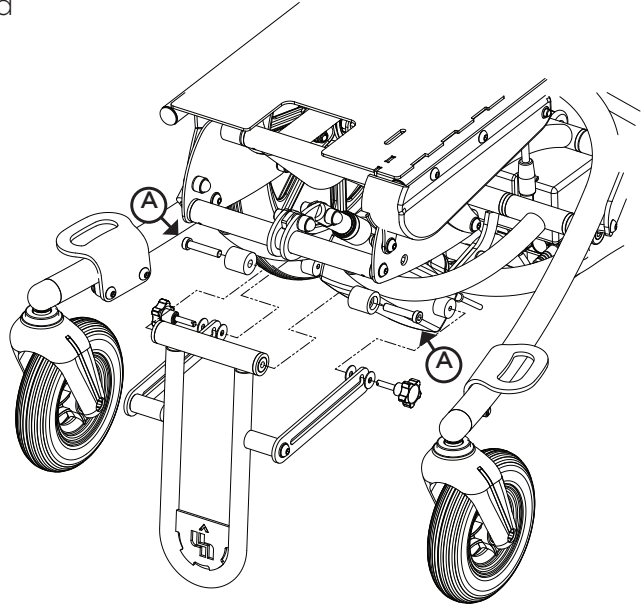

OBS! Støttebøjlen skal altid være i fældet fremover og i kontakt med underlaget ved transport.




OBS! Kørebøjlen skal altid ligge op mod siddesystemets ryg ved transport.

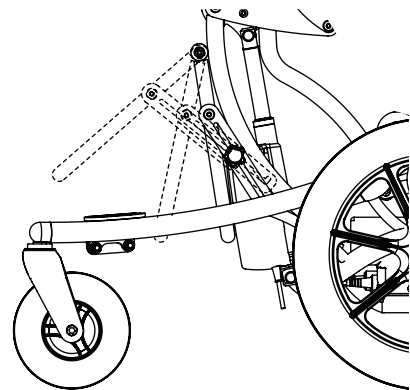


Montering af forreste og bagerste transportbeslag

Monteres med medfølgende skruer, skiver og møtrikker, se billede. Bemærk, at øjet på bagerste beslag skal pege bagud

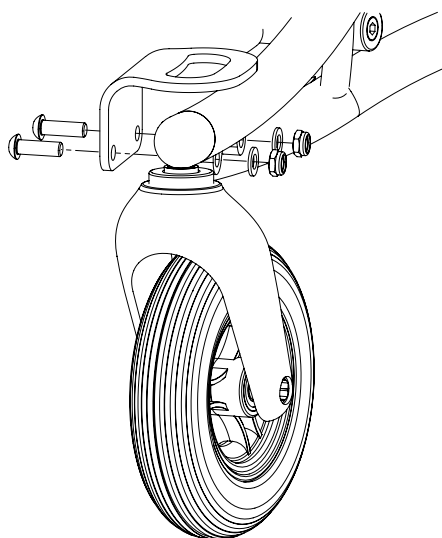

Forreste transportbeslag

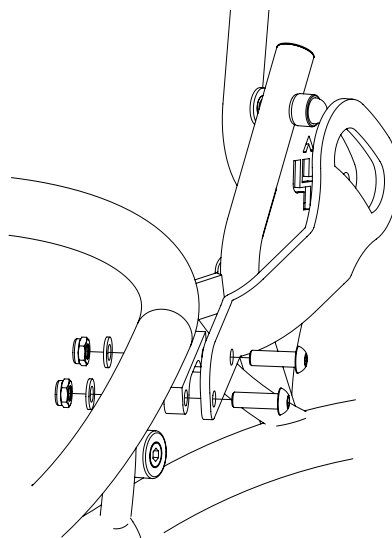

Bagerste transportbeslag

Transport i bil

Anvisninger for transport i bil

Kørestolsstellet er crashtestet og godkendt efter 7176-19 til 75 kg i bil, samt HI testet.

Fastgørelse skal ske med spændebånd, godkendt efter ISO 10542, i det tilsigtede transportbeslag.



OBS! Det er vigtigt at strække stropperne og ikke stramme dem for meget. Overdreven spænding af stropperne kan forårsage, at stellet bliver skævt.



OBS! Crashtest godkendelsen gælder belastningsvægt op til 75 kg.

Fodstøtte

Montering af fodstøtte

For at montere beslagene til fodstøtten anvendes medfølgende skruer (C). Beslagene monteres som på billedet med fire skruer i kanten forrest på sædepladen. Sørg for at låseskruerne (B) peger indad/hedad. Monter fodstøttens firkantsrør (A) i fodstøttebeslagene under sædepladens forreste del. Lås fodstøtten fast med låseskruerne (B) på begge sider.

Sikkerhedsstop

Sikkerhedsstop (D) i form af en samlemøtrik findes monteret i bunden af fodstøtteprofilen. Sikkerhedsstoppet kan også anvendes til at finde tilbage til en forindstillet højdeposition.





OBS! Monter et ekstra sikkerhedsstop ovenover fodstøtten i fodstøtteprofilens spor for enkelt at finde tilbage til en alternativ højdeposition (eksempelvis med eller uden sko).

Justering af vinkel ved knæledet

Når fodstøtten er monteret i siddepladen, er der mulighed for at højdejustere fodstøtten ved fodledet. Løsn skruen (E) og juster til ønskede højde. Spænd efterfølgende skruen.

Justering af fodstøttens højde

Når fodstøtten er monteret i siddepladen, er der mulighed for at højdejustere fodstøtten ved fodledet. Løsn skruen (F) og juster til ønskede højde. Spænd efterfølgende skruen.

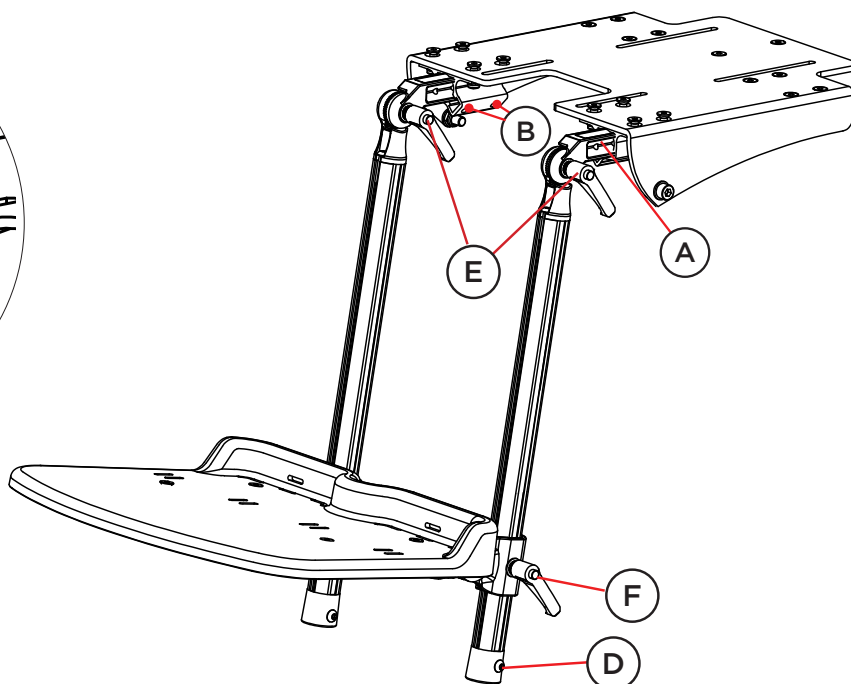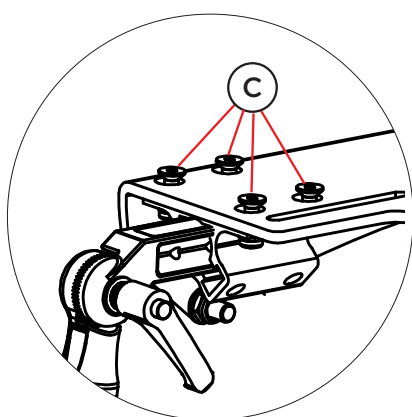

Lægstøtte

Montering af lægstøtte

Inden montering af lægstøtte kan udføres, skal du først fjerne fodstøtten. Begynd med at fjerne endeaflutningen (G) og løs efterfølgende italienergrebet (F) som holder fodstøtten på plads på fodstøttestangen. Træk fodstøttepladen og dens beslag nedad.


Monter lægstøtten ved at skyde profilmøtrikken (C) ind i fodstøttestangen, juster til ønskede højde og spænd skruerne (E). Genmonter derefter fodstøtten og endeaflutningen (G).

Højdejustering af lægstøtte

For at højdejustere lægstøtten løsner du skruerne (E) for efterfølgende at justere til ønskede højde. Spænd skruerne (E).

Breddejustering af lægstøtte

For at breddejustere lægstøtten løsner skruerne (A) for efterfølgende at justere til ønskede bredde. Spænd efterfølgende skruerne (A).

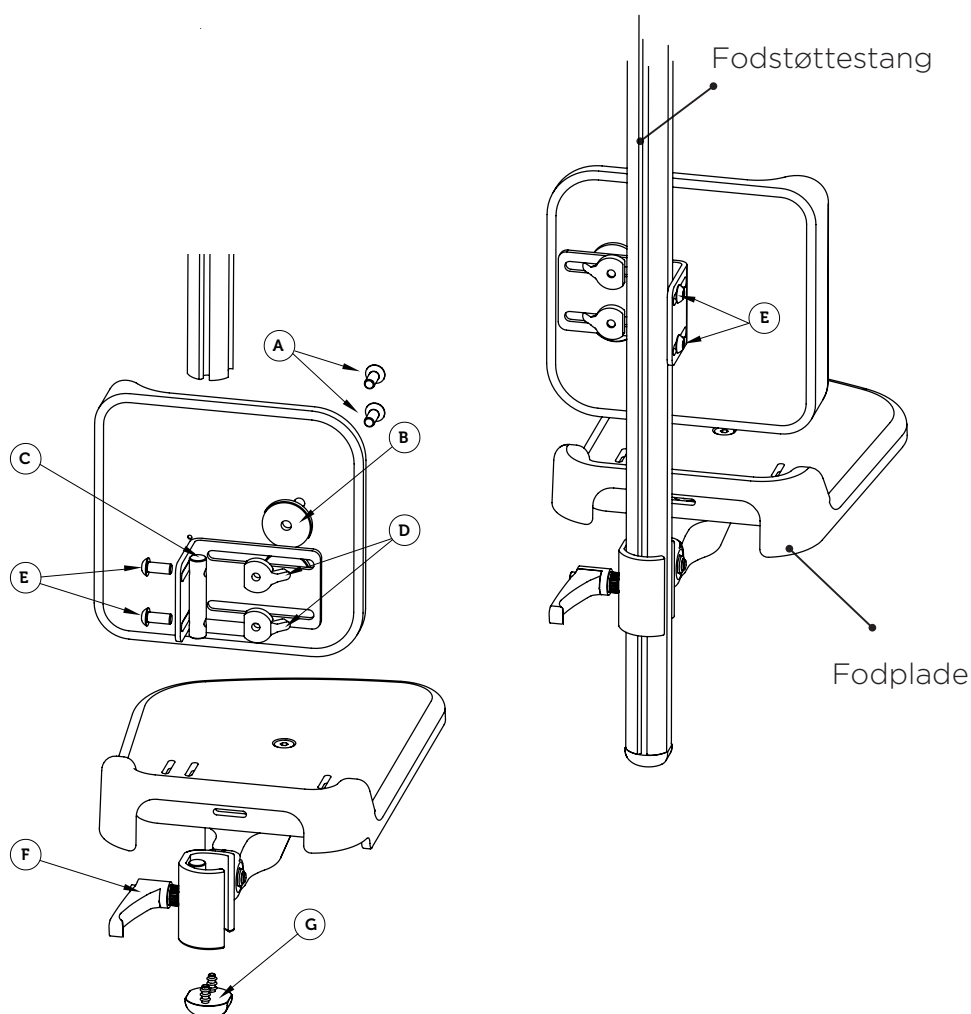


Fodkasse

Fodkasse dobbelt stang

For at montere fodkassen begynder du med at skyde profilmøtrikkerne (A) ind i fodkassen (B) og i fodstøttestangen (C). Indstil herefter fodstøtten (D) til ønskede højde og spænd så italienergrebet (E).

Indstil ønskede højde og bredde på fodkassen ved hjælp af skruerne (F) og (G). Plaststangen (H) på fodkassen skal føres igennem slidsen (I) på fodstøttepladen. Afslut med at montere medfølgende polstring og kontroller at alle skruer er ordentligt spændte.

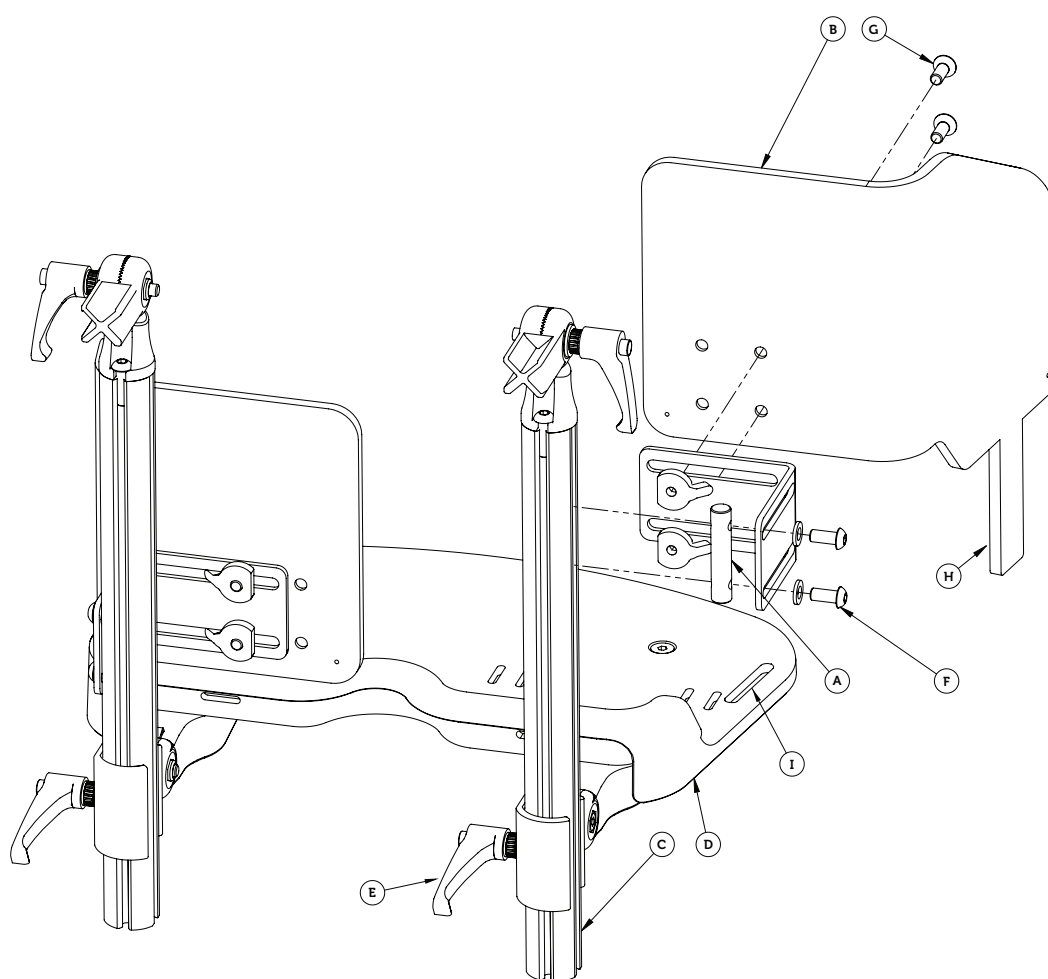

Noter!

Plaststangen (H) kan efter indjustering af ønskede højde, kappes eller varmes ind under fodstøttepladen efter egne mål.

Rammeforlængere

Montering af rammeforlængere

Montering af rammeforlængelse sker ved først at løsne skruen (A) og fjerne hjulet fra rammen. Fjern derefter endeproppen (B) på stelrøret. Skub rammeforlængeren (C) ind, og fastgør forlængelsesdelen med den medfølgende skrue (D) med skive. Skru hjulet tilbage i forlængelsesdelen med skruen (A).



OBS! Når Active sædet anvendes på Flipper Flex skal rammeforlængere bruges pga. risiko for at vælte fremad. Det samme gælder for andre siddesystemer, der er monteret langt fremme. Hvis nødvendigt kan an-tip støtte også monteres foran for at øge sikkerheden.

Anti-tip støtte foran

Montering af anti-tip støtte

Montering af Anti-tip støtten (A) gøres ved først at løsne skruen, som holder hjulet. Løft derefter Anti-tip støtten op over hjulbøsningen mod rammerøret. Lås Anti-tip støtten i retning fremad i rammens retning ved hjælp af de tre skrue (B). Skru hjulet fast igen




Siddesystem

Montering af siddesystem

Siddesystemets fæsteplade monteres enkelt på kørestolsstellet med fire (4) skruer, skiver og møtrikker i markerede spor (A) på kørestolsstellets sædeplade.



OBS! For yderligere information omkring fæsteplader, se respektive brugervejledning for valgte siddesystem.

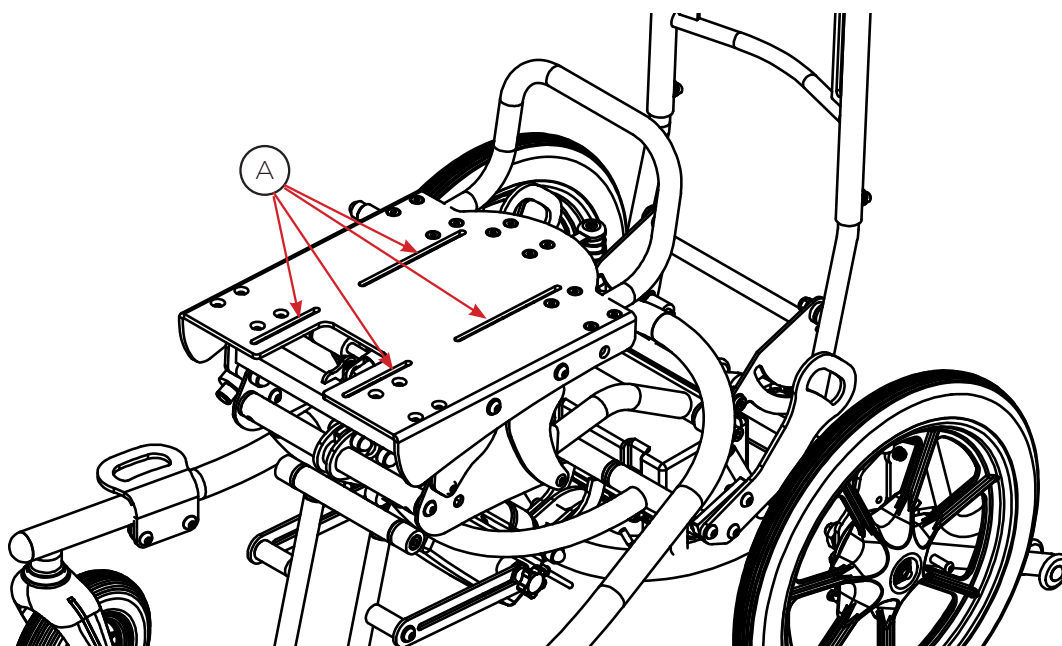

Vedligeholdelsesvejledning

Serviceinterval

For at hjælpemidlet skal fungere korrekt og sikkert bør regelmæssig service og kontrol udføres. Behovet for service skifter og skal bedømmes fra gang til gang afhængig af brug og slid. Kontroller alle bevægelige dele og skruer for slitage. Service skal altid foretages af professionelt og kvalificeret personale. Du er altid velkommen til at kontakte Anatomic SITT A/S.

Rengøring og vask

Plast og metal dele kan tørres af med en fugtig klud, eller vaskes med antibakteriel vaskemiddel eller lignende. Tænk grønt, tænk på miljøet!
Anvend biologisk nedbrydelige vaskemidler.

Kontroller jævnligt hjælpemidlets stand og udfør vedligeholdelse hvis nødvendigt

Gaspatron

Gaspatronen bør bruges regelmæssigt for at bevare sin funktion. Hvis produktet ikke bruges, skal gaspatronen aktiveres mindst en gang hver 6. måned. Ydermere skal produktet opbevares, så patronerne er placeret nedad ellers kan gaspatronens forsegling brydes og gøre, at den ikke kan udløses.



OBS! Gaspatronen skal aktiveres regelmæssigt

Batteri



Den første opladning skal vare i 24 timer.
Opladning derefter anbefales at finde sted hver aften.
Batteriet må aldrig aflades helt, hvilket kan få batteriet til at stoppe med at virke.

Kombinationer

Zitzi Flipper Flex G2 og tilbehør er CE-mærkede produkter, som kan kombineres med samtligt tilbehør som beskrives i denne brugervejledning. Zitzi Flipper Flex G2 passer bl.a. sammen med siddesystem som Zitzi Delfi Pro, Zitzi Active, Zitzi Sharky Pro og Anatomic formstøbte sæder. For øvrige kombinationer venligst kontakt Anatomic SITT A/S.

Reservdel

For at Zitzi Flipper Flex G2 skal beholde sin CE-mærkning skal hjælpemidlet kun forsynes med reservedele leveret af Anatomic SITT A/S

Mærkning

Zitzi Flipper Flex G2 med tilbehør er et CE-mærket produkt. Et unikt serienummer er placeret på en etiket, som sidder på rørrammen. Dette serienummer skal oplyses ved korrespondance vedrørende produktet.

Genbrug

En brugt del eller produkt, skal afmonteres og kasseres. Delene skal herefter sorteres efter materiale type, metal, plast og brændbare stoffer (tekstiler). Gasparton sorteres som farligt materiale.



OBS! Kontroller altid ved genbrug at hjælpemidlet ikke er specialtilpasset, inden det udleveres til ny brugere.

EI

Elektronikken er IP klassificeret: IPX0. Dette indebærer, at den bare skal gøres rent men en fugtig klud.

Genbrug

Indledning

For at hjælpemidlet skal fungere sikkert, bør regelmæssig service og eftersyn udføres. Behovet for service varierer og skal vurderes fra sag til sag, helt afhængig af anvendelse og slid. Kontroller alle bevægelige dele og monteringsdetaljer med hensyn til slid. Renovering af Guppy G2 må kun ske med originale dele fra Anatomic SITT A/S.

Arbejdet skal altid udføres professionelt og af kvalificeret personale. Hvis du føler dig usikker, er du altid velkommen til at kontakte Anatomic SITT A/S.

Behovet for renovering varierer og skal vurderes fra sag til sag. Alle punkter skal udføres mindst en gang om året eller når nødvendigt.

Rengøring

Lakerede overflader, drivhjul, svinghjul og håndtag rengøres med opløsningsmiddel-frie rengøringsmidler. Brug ikke lak, benzin eller andre opløsningsmidler.

Efterbehandling

Efter vask skal alle samlinger, lukkede huller og drænhuller blæses tørre og sprøjtesmøres med flydende olie.

Mærkning

Kontroller at CE-mærkningen findes og at den tydeligt kan ses. På Flipper G2 sidder denne mærkning på stelrøret.

Hjul

Kontroller at både svinghjul og drivhjul ikke er slidte og at de snurrer let uden mislyd.

Lak

Kontroller skader i lakken ved at gennemse kørestolsstellet. For at forhindre korrosionsskader og forbedre ridser. Maling kan bestilles hos Anatomic SITT A/S.

Stabilitet

Kontroller at alle hjul står stabilt på underlaget og at der ikke er skævhed i stellet.

Stel og detaljer

Svejsning og skrueforbindelser kontrolleres. Samlinger og hængsler skal arbejde uden støj. Smør om nødvendigt. Kontroller også drejeknapper, skruer og andre monteringsdetaljer. Udskift disse om nødvendigt.

Bremser

Kontroller at bremse og eventuel parkeringsbremse fungerer korrekt.

Funktionskontrol

Funktionskontrol indebærer at du går igennem hjul, stabilitet, bremses og evt. tilbehør.



OBS! Kontroller altid ved genanvendelse at hjælpemidlet ikke er specialtilpasset, inden det sendes ud til ny bruger.



OBS! Ved alt genanvendelse skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at det er sikkert at bruge. Hvis der er mangler, der ikke kan afhjælpes ved rekonditionering, skal produktet tages ud af drift og genanvendes.

Tilpasning og specialtilpasning

Rekommendationer

Hver gang Zitzi Flipper G2 ændres, skal man vurdere, om det er en tilpasning eller en specialtilpasning.

En tilpasning er en ændring indenfor CE-mærkningen. Alle andre ændringer er specialtilpasninger. Tilpasningerne må kun foretages af en person, der anses for at være kvalificeret til opgaven og bør altid ske på en professionel måde. CE-mærket betyder, at produktet opfylder alle de væsentlige europæiske sikkerhedskrav.

Tilladte tilpasninger

Bemærk, at en risikovurdering altid bør foretages efter en tilpasning samt en special tilpasning af medicinsk udstyr. Produktet må aldrig blive farligt for brugeren at anvende efter tilpasning.

Afkortelse af fodstøttesprofiler

Fodstøttesprofilens længde kan afkortes for bedre at passe til brugeren.

Risikoanalyse

Bemærk, at der altid skal foretages en risikovurdering, både ved tilpasning og special tilpasning af et hjælpemiddel. Produktet må aldrig være farligt for brugeren at bruge efter tilpasning.

Mærkning

Produktet bør påføres oplysning om, at den er tilpasset til en specifik bruger, så stellet ikke kan antages for et produkt i standardudførelse.

Betingelser

Garanti

Der er to års reklamationsret fra leveringsdatoen i henhold til købeloven. Garantien er ugyldig, hvis produktet er blevet udsat for ekstreme påvirkninger eller "unormal" håndtering. For garantibehandling er det nødvendigt, at det fejlbehæftede produkt returneres til os. Vedlæg altid følgesedlen for den oprindelige leverance.

Reklamation

Beskriv fejlen samt årsagen hertil så nøjagtig som muligt. Oplys om du ønsker reparation eller eventuel udskiftning. Vedlæg kopi af fakturaen og oplys leveringsadresse, kontaktperson samt telefonnummer.

Sørg for, at du pakker produktet godt, så det er beskyttet mod eventuelle stød under transport. Noter shippingnummer på dokumentationen. Det er for at du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

Returnering



I tilfælde af fejlbehæftede ordrer eller leverancer, skal produkterne returneres indenfor 20 dage fra levering. Vedlæg altid en kopi af både følgesedlen og fakturaen. Giv din grund til at returnere produkterne.

Sørg for, at du pakker produktet godt så det er beskyttet mod stød under transporten. Noter shippingnummer eller lignende på dine dokumenter. Det er for at du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

 **Specialtilpassede produkter tages ikke retur**

DK

Tekniske data Flipper Flex G2

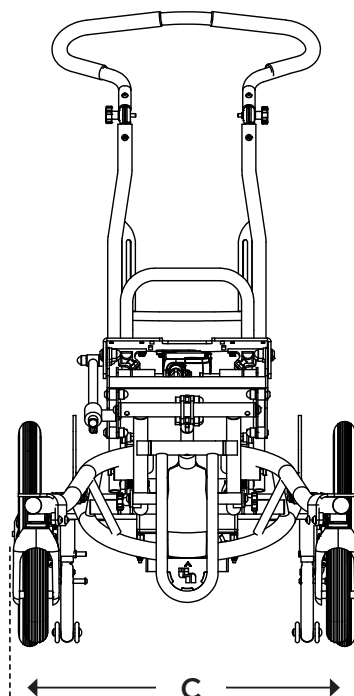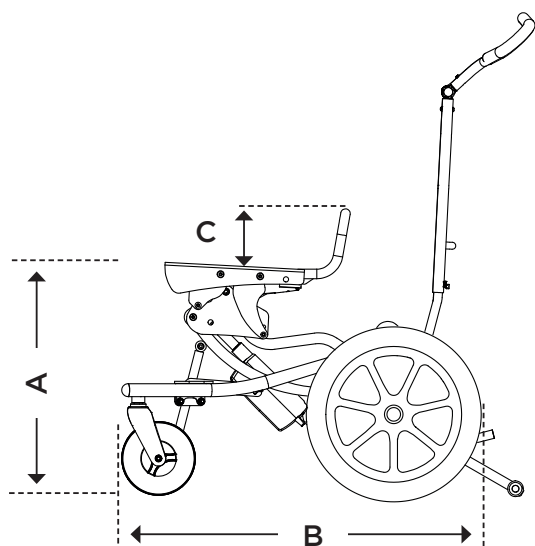


Produkt info - Flipper Flex G2

Max belastning	95 kg
Siddeplade	26x32 cm
Vægt	31 kg
Tiltning	0° til 30° / -5° til 25°


Flipper Flex G2 med 16" drivhjul

	A	B	C
Data	32-68 cm	83 cm	64 cm

FODSTØTTE

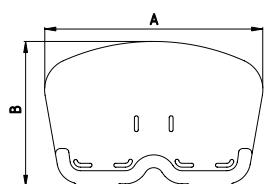


	A x B
Hel str. 2	345 x 225 mm
Hel str. 3	380 x 260 mm
Hel str. 4	380 x 310 mm
Hel str. 5	430 x 310 mm
Hel str. 6	480 x 310 mm

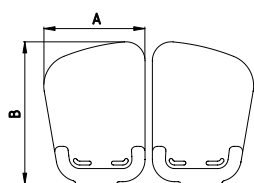

	A x B
Delt str. 2	160 x 220 mm
Delt str. 3	180 x 255 mm
Delt str. 4	175 x 305 mm

Størrelse **2-6**
Fodstøttestang profilængde (cm) **35**

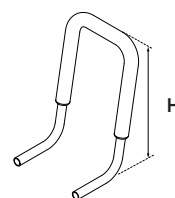

KØREBØJLE

	Højde
Kørebøjle str.1	13 cm
Kørebøjle str.2	35 cm

Dybden kan justeres 0-7 cm.
Højdemål er fra oversiden af siddepladen til håndtag.

DK

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark

Tel +45 86 17 01 74

Fax +45 86 17 01 75

a-sitt@anatomic-sitt.dk

www.anatomicsitt.dk

SE

Anatomic SITT AB (tillverkare)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besøgsadresse

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

