



Brugermanual

V-100
Rejsescooter



Forholdsregler

Denne brugermanual skal gennemlæses inden din Varsø el-scooter tages i brug.

Manualen indeholder en række vigtige informationer herunder Opladning, betjening og vedligeholdelse m.m.

Kør aldrig hvis du er påvirket af alkohol eller andre stoffer, som kan påvirke kørslen.

Hold altid begge hænder på styret under kørsel.

Overhold altid gældende færdselslov.
Hold altid til højre, for en sikker trafik.

Lav aldrig retningskift uden brug af blinksignal, da det kan være farligt for dig selv og andre i trafikken, nær el-scooteren.

Undgå forhindringer med en stejl stigning, høje kanter eller ujævnheder, som kan gøre kørslen usikker.

Der tages forbehold for trykfejl.

Manualens oplysninger var gældende på tryk-tidspunktet. Afvigelser og opdateringer i forhold til produktet kan forekomme. Ved afvigelser anbefaler vi at kontakte Varsø's kundeservice.

Tlf.

70 60 56 26

Mail

kundeservice@varsoe.dk

Specifikationer

V-100



Modellen er udstyret med

Kurv foran.

Komfortabelt sæde med armlæn.



Løftehåndtag foran og bagved.

Forlygte og reflekser.

Modellen kan adskilles så den er let at transportere, og løfte på.

- Sædet kan løftes af.
- Batterikassen kan let løftes af.
- Bagenden (motor/gear) kan med ét løft, i håndtaget – adskilles fra forenden (styr og forhjul).
- Styret kan lægges ned, og kurven kan tages af.


Rækkevidde	Op til 20 km
Hastighed	Op til 6 km/t
Maks Brugervægt	110 kg
Max Stigning	12 grader
Mål (LxBxH)	104cm x 49.5cm x 92.5cm
Vægt	45 kg m. batteri (35kg uden)
Batteri	12V20Ah x2
Oplader	24V/2.0A

Bremsetype	Elektrisk bremse
Hastighedsjustering	Trinløs
Venderadius	1.1 meter
Bremselængde	1.5 meter (tør overflade)
Motoreffekt	250W
Hjulstørrelse	8" For 9" Bag
Farve	 

Funktioner



Instrumentbordets funktioner

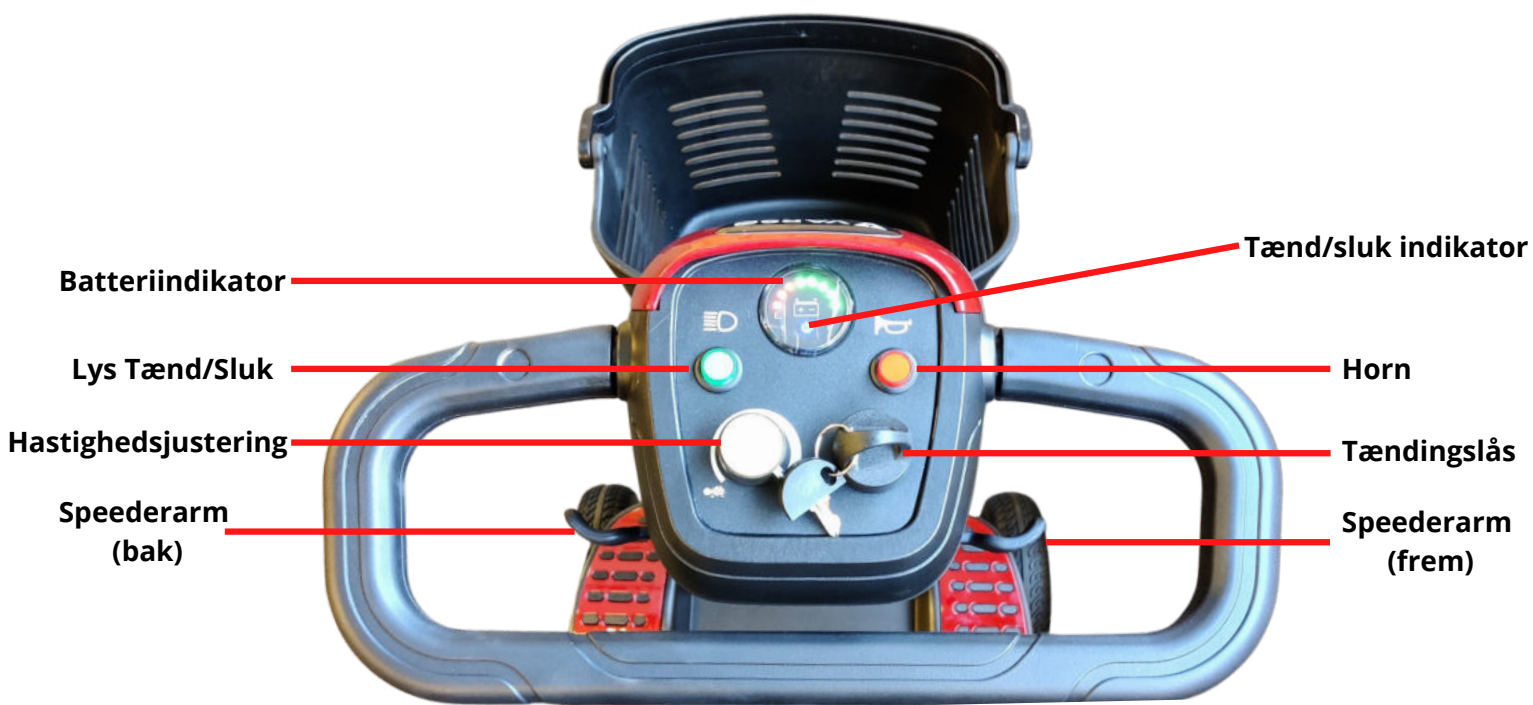

Inden du kører på scooteren, skal du sørge for, at du har en fuld forståelse af alle dens funktioner, og hvordan du betjener kontrolpanelet korrekt.

Tændingslås

Drej nøglen med uret for at tænde el-scooteren.
Sluk ved at dreje mod uret.

Lys

Tryk på lyskontakten for at tænde og slukke for scooterens lys.

Horn

Tryk på denne kontakt for at aktiverer hornet.

Batteriindikator

Angiver det aktuelle strøm niveau.

Når batteriindikatoren viser **3 røde**, **2 gule** og **4 grønne** streger, er batteriet fuldt opladt.

I takt med strømmen bliver brugt, slukker 1 streg ad gangen.

Først slukker de **GRØNNE streger**, derefter de **GULE streger**, og til sidst de **RØDE streger**.

Er batteriet brugt ned til de **RØDE** streger, anbefaler vi, at du hurtigst muligt, får sat scooteren til opladning. Derved undgår du at køre tør for strøm.

Hastighedsjustering

Justerer scooterens laveste og højeste hastighed. Skildpadde-symbolet angiver laveste fart, mens kanin-symbolet angiver højeste fart.

Tænd-/sluk indikator / funktionsfejl

Er scooteren tændt, lyser denne indikatorlampe konstant.

Ved funktionsfejl blinker indikatorlampen.

Antallet af gange lampen blinker, indikerer fejlen.

Se fejlkoder på sidste side i denne manual.

Speederarm

Bruges til at få scooteren til, at køre frem eller tilbage, samt kontrollere fart og acceleration.

- Træk højre side ned mod dig, selv for at køre frem. Skub den frem for at bakke.
- Træk venstre side ned mod dig selv, for at bakke. Skub den frem for at køre frem.
- Farten stiger i takt med, at speederarmen trækkes tilbage.
- Scooteren kan køres med én hånd.

Adskille og samle

Modellen kan adskilles så den er let at transportere og løfte på.

- Sædet kan løftes af.



Hold rotationshåndtaget i fremad gående position, og løft op i sædet.

Sædet kan nu løftes af.

- Batterikassen kan let løftes af.



Tag fat i håndtaget, og løft batterikassen op.



Batterierne er nu afmonteret, og kan oplades direkte, uden at skulle sidde monteret på scooteren.

Det er også muligt at oplade batterikassen direkte imens den er monteret på scooteren, eller via opladestikket i venstre side af instrumentbordet.

Adskille og samle


- Bagenden (motor/gear) kan med ét løft, i håndtaget – adskilles fra forenden (styr og forhjul).



Under batterikassen, findes håndtaget, som bruges til at adskille forende fra bagende.



Tag fat i håndtaget og løft op. ↑

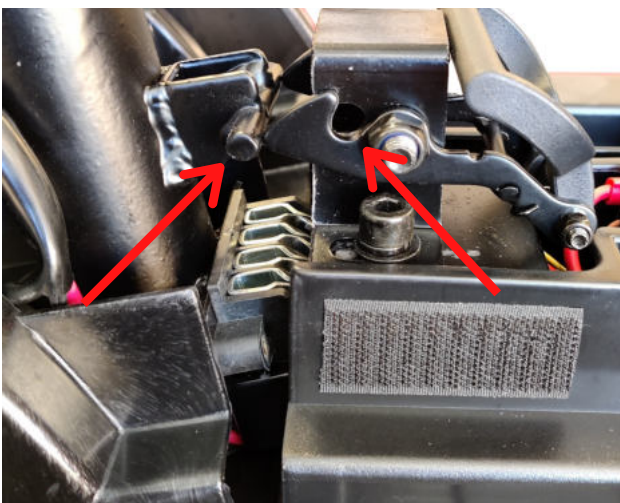


Låsemekanismen vil nu slippe palen, som holder scooteren samlet. Træk forende og bagende fra hinanden.

Scooteren kan nu trækkes fra hinanden, og løftes eller transporteres separat.

Adskille og samle



- Styret kan lægges ned, og kurven kan tages af.

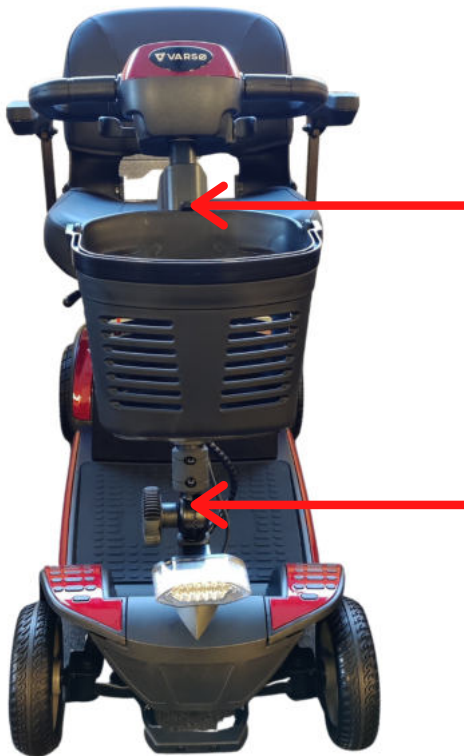

Kurven afmonteres ved at trykke plastikclipsen lige over kurven, ind imod scooteren. Derefter trækkes den lodret op.

**Låsehåndtag
for styr**



Styret kan lægges ned. Det gøres ved at løse løsne på håndtaget, som er placeret nederst på styrstangen.

Styr

Ratstammens position kan tilpasses dit behov for en behagelig kørestilling. For at justere ratstammen skal du holde fast i styret med den ene hånd og løsne låsehåndtaget med den anden hånd.

Juster ratstammen til den ønskede position og spænd låsehåndtaget.



Sæde

Justering af sædedybde:

Sædet er udstyret med skyderen, som vist i figuren ovenfor.

Trækkes skyderen op, kan sædet bevæges frem eller tilbage - for at tilpasse afstand til styret eller plads til benene.

Rotation:

Skub og hold sædets drejehåndtag frem, drej sædet til den ønskede position, Slip håndtaget igen for at låse sædet.


Juster armlænets bredde:

På sædets bagside er der fingerskruer på hver side på armlænets fastgørelsesrør. Løsnes fingerskruerne, frigøres armlænet, og det kan trækkes ud til den ønskede position.

Spænd derefter fingerskruerne for at låse armlænet.

Opladning

For at oplade din Varsø el-scooter skal du bruge den medfølgende oplader.

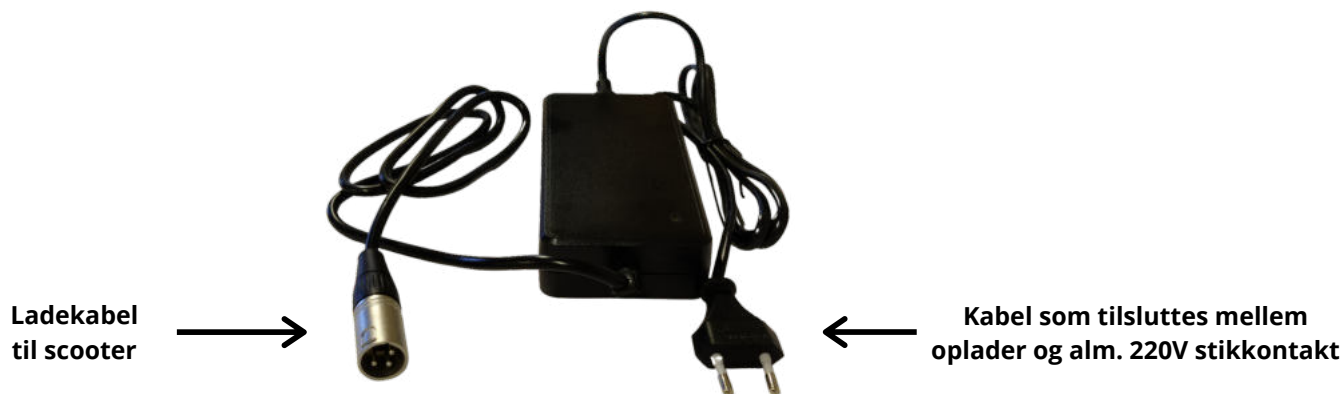

HUSK! Sluk scooteren inden den tilsluttes opladning

Scooterens ladestik er placeret under sædet, øverst på batterikassen.



Tilslut oplader:

Sæt opladerens runde stik i scooteren ladestik.

Opladerens andet stik tilsluttes en almindelig 220V stikkontakt.

Husk at skub ladestikket helt i bund.

Vi anbefaler at oplade scooteren efter hver køretur, uanset hvor langt du har kørt.

Opladerens farveindikator betyder følgende når den er tilsluttet scooteren

RØDT LYS Scooter oplader.

GRØNT LYS Scooteren er fuldt opladet.

Er opladeren tilsluttet strøm, men IKKE forbundet til scooteren.

Lyser opladerens farveindikator **GRØN**.

Bruges scooteren ikke i længere tid, anbefaler vi, at den tilsluttes oplader, hver 14. dag, for at batterierne ikke tager skade.

Fremgangsmåde:

1. Lad scooteren stå tændt i 24 timer, med alt lys tændt.
2. Scooteren sættes til opladning, indtil den er fuldt opladet.

Vedligehold

For en problemfri og lang levetid på dit køretøj er vedligeholdelse vigtigt.

Du bør inden kørsel tjekke at:

- Bremserne virker optimalt.
- Scooteren er helt opladet.

• **Rengøring.**

Rengør scooterens plastkåber og sæde med en fugtig klud eller brug alm. Glasrens på spray og tør efter med klud.

Undgå at sprøjte vand direkte på scooteren.

Du bør årligt få udført:

Serviceeftersyn af en Varsø-servicetekniker, for at sikre dit køretøj er i god stand, og derved sikre en problemfri drift.

HUSK! Er din scooter ny, skal den serviceres 1. gang efter 9 måneder og efterfølgende med 12 måneders intervaller for at opretholde 3 års garanti inklusiv nedbrudsgaranti.

Batteriinformation

Dit køretøj er udstyret med 2 x 12v batterier, der er vedligeholdelsesfri.

Batteriet er en sliddel, og det slides fra den dag, du tager scooteren i brug. Dermed nedsættes din maksimale kørselsdistance efterhånden, indtil batterierne skal udskiftes.

Deres levetid kan variere, alt efter hvor meget scooteren bruges, og om den bliver sat til opladning efter hver køretur.

Din maksimale rækkevidde afhænger af din kørestil.

Jævn kørsel lige ud øger scooterens rækkevidde.

Kørsel med f.eks. mange start og stop nedsætter rækkevidden.

Andre faktorer som kulde, vind, vejr og kørselsunderlag, herunder græs, grus og asfalt, kan også påvirke scooterens rækkevidde.

Batteriets levetid er typisk fra 12 måneder til 5 år, alt efter forbrugsmønster.

Vi anbefaler altid at tilslutte scooteren til opladning efter hver køretur. Uanset distance.

VIGTIGT! Undgå at aflade batterierne helt, da det reducerer levetiden kraftigt.

Er batterierne slidt, er det vigtigt, at de udskiftes med det rigtige type batteri.

**Kontakt Varsø kundeservice på tlf. 70 60 56 26
for yderligere information og udskiftning.**

Batterier og kulde

- Opbevareres kørestolen ved 10 grader eller derunder, kan man ikke forvente samme rækkevidde. Forvent op til 20% reduceret rækkevidde.
- Opbevareres kørestolen ved 5 grader eller derunder, kan man ikke forvente samme rækkevidde. Forvent op til 40% reduceret rækkevidde.

