
















## 1. Grundlæggende instruktioner

Produktet skal anvendes i overensstemmelse med denne brugsanvisning, og den skal opbevares et sikkert sted for eventuelle forespørgsler. Den indeholder vigtige oplysninger, som er nødvendige for den tilsigtede anvendelse. Dette hjælper med at undgå skader eller farer som følge af forkert brug.

Hvis der skulle opstå en alvorlig hændelse i forbindelse med dette medicinske udstyr, skal dette straks indberettes til SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG og den ansvarlige myndighed.


## 2. Forklaring af symboler

	Producent		Fremstillingsdato		Medicinsk udstyr
	Overensstemmelsesmærkning i henhold til den europæiske forordning om medicinsk udstyr 2017/745 (MDR)		Opmærksomhed Overhold de advarsler og sikkerhedsinstruktioner, der er anført i dette dokument.		Følg brugsanvisningen.
	Bemærk skilt/advarsel		Artikel nummer		Serienummer
	Kan ikke vaskes.		Må ikke behandles med blegemiddel.		Må ikke stryges.
	Må ikke tørretumbles.		Egnet til tørre desinfektion.		Må ikke renses.

## 3. Produktbeskrivelse

SHP-hælstøtten er en sko-formet pude, der kan bruges på begge sider og har en fordybning i området omkring hælsen. SHP-hælstøtten fastgøres sikkert på foden med velcrolukninger. Produktets fyld består af hulfiberpolstring og polystyrenkugler med små granuleringer, som er fast syet ind i et betræk af bi-elastisk polyamidstof (45 %) med antibakteriel polyurethanbelægning (55 %). Betrækket er uigennemtrængeligt for væsker, vaskbart, kan tørres af og er modstandsdygtigt over for blod og urin.

Se:

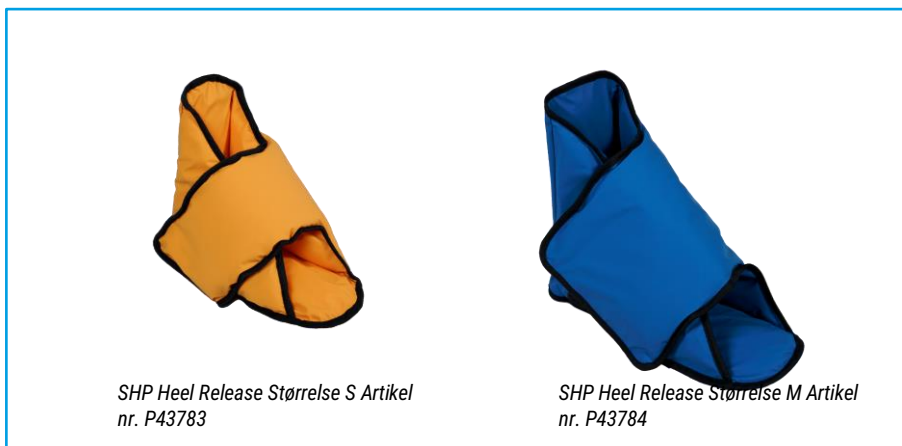

#### 4. Formål

SHP-hæludløsningsstøtten tjener som en statisk positioneringshjælp til de nedre ekstremiteter til både decubitusprofylakse og decubitusbehandling.

#### Effekt

Produktet fungerer efter princippet om blød positionering eller fri positionering og understøtter gennemførelsen af specifikke positioneringsformer, især positionering af foden.

På grund af det forstærkede relinerede område af akillessenen løftes hælen, aflastes fra tryk og frigøres, når patienten ligger på ryggen. Den hule fiberpolstring i de laterale dele giver blød støtte til de indre og ydre ankler, primært når patienten er placeret sidelæns. Herved fordeles støtetrykket over et større område. Dette sikrer blodcirkulationen i de tilstødende vævsområder, risikoen for udvikling af tryksår reduceres og behandlingen understøttes effektivt.

#### Angivelse

Produktet er beregnet til patienter,

- som har en øget risiko for tryksår, når de ligger ned
- For hvem der er behov for støtte til behandling
- som har diabetes mellitus med neurologisk-sensoriske underskud
- som har en kredsløbsforstyrrelse i foden

#### 5. Anvendelsesområde

##### Påtænkte brugere

De tiltænkte brugere er alle medlemmer af læge- og sundhedsfaglige erhverv og af sundhedssektoren samt lægfolk, hvis de har den nødvendige uddannelse eller viden og erfaring til brug af produktet *eller* er blevet instrueret i håndteringen af produktet.

##### Patientgruppe

SHP-hælstøtten er beregnet til personer, der på grund af sygdom, handicap eller alder har behov for at ligge ned overvejende eller permanent, som er i risiko for tryksår, eller for hvem støtte til behandling af tryksår er indiceret .

Der er ingen begrænsninger med hensyn til alder eller køn.

##### Brugermiljø

SHP-hælstøtten er velegnet til brug på hospitaler, plejehjem og plejehjem samt i hjemmet indendørs og kan anvendes i alle typer senge eller liggemøbler med en flad eller justerbar liggeflade.


#### 6. Sikkerhedsinstruktioner



- Forordningen om operatører af medicinsk udstyr (MPBetreibV) er bindende for operatøren/brugeren af medicinsk udstyr. Brugeren skal have den fornødne ekspertise til at kontrollere produktets egnethed og vurdere de eksisterende risici.
- Produktet er ikke egnet til at gå, der er en øget risiko for at falde.
- Beskyt produktet mod åben ild (f.eks. cigaretbrænder, stearinlys) eller stærke varmekilder (f.eks. elektriske varmeapparater, gasovne). Der er risiko for brand !
- Sørg for, at der ikke er skarpe hjørner eller kanter i anvendelsesområdet, som kan beskadige puden.
- Direkte påføring på støttepuden er kontraindiceret hos patienter/beboere, der sveder meget og har tendens til maceration eller intolerance over for polyurethanbelagte tekstiler.

### 7. Anvendelse af produktet

- Pudnen placeres direkte på patientens fod og fastgøres sikkert ved hjælp af en velcrolukning. Dette stabiliserer effektivt de omkringliggende områder - både i patientens liggende stilling og i sidelæns stilling.

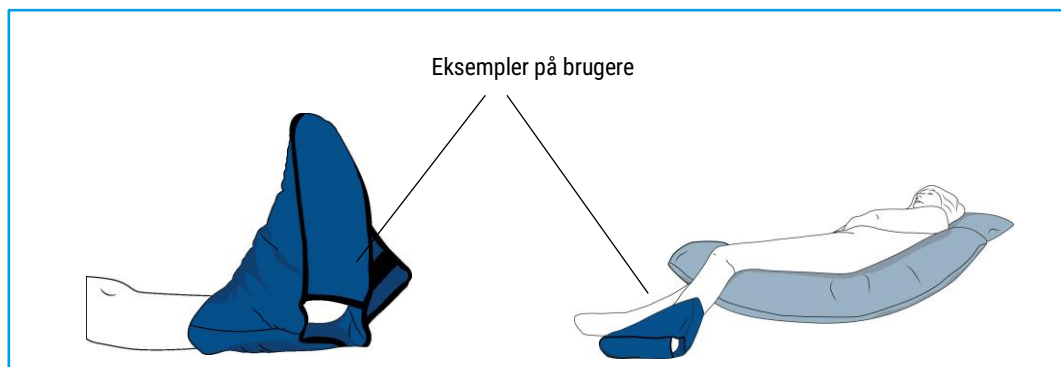

**i** Vi anbefaler generelt, at du bærer åndbare sokker under påføringen.

Til patienter med en skostørrelse op til 38 anbefales SHP-hælstøtten i størrelse S. Fra en skostørrelse på 39 anbefales størrelse M.

### 8. Pleje og rengøring

- I tilfælde af forurening kan pudnen rengøres med varmt sæbevand og desinficeres af brugeren. Desinfektion ved hjælp af tørre- eller spraydesinfektion bør kun foretages med klorfrie midler. Brugsanvisningen for de anvendte rengørings- og desinfektionsmidler skal overholdes.
- Produktet leveres i brugsklar stand og er vedligeholdelsesfrit.
- Det anbefales ikke at genbehandle produktet og genbruge det på en anden patient i hjemmet.
- I det stationære område kan det genbruges efter valideret oparbejdning i tilfælde af patientskift i overensstemmelse med de gældende lovkraft for det pågældende hospital.

### 9. Transport og opbevaring

- Produktet må kun opbevares på et rent og tørt sted.




Når pudnen ikke er i brug, må du ikke placere tunge eller skarptskårne genstande på produktet, når det ikke er i brug.

### 10. Bortskaffelse

I princippet kan det uskadelige produkt bortskaffes med husholdningsaffaldet.

- Hvis der er mulighed for, at produktet kan være potentielt smittefarligt forurennet, skal det desinficeres under overholdelse af beskyttelsesforanstaltningerne og først derefter bortskaffes. I det stationære område skal produktet bortskaffes under overholdelse af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med de gældende forskriftsmæssige krav for det pågældende anlæg.

**11. Tekniske data**

HMV nej.	11.11.05.0016
Påfyldning	Hulfiberpolstring og polystyrenkugler
Ydre skal	bi-elastisk polyamidstof (45 %) med antibakteriel polyurethanbelægning (55 %)
Pleje/rengøring	

**12. Varianter**

Artikel nummer	Farve	Vægt ( $\pm 5\%$ )	UDI-DI
P43783	orange	0,11 kg	4056538005013
P43784	blå	0,15 kg	4056538005020

Der tages forbehold for eventuelle fejl og stavefejl. Oversættelsen er foretaget af producenten, og er uden ansvar for CarePartner.

Forhandler:

  
**CarePartner**  
- din partner til et bedre liv

Lindevej 2, DK-4200 Slagelse  
Tel.: +45 58 55 10 99  
www.carepartner.dk

