

- Justerbar
- Selvpustelig
- Ultra lav vægt
- Stabil positionering
- Optimal trykafledning

**SIDDE
SYSTEM**

VARILITE™

VIGTIG PRODUKT INFORMATION

JUSTERING AF LUFTNIVEAU

For at justere luftniveauet i din Varilite pude, skal du sidde på en helt luftfyldt pude med lukket ventil.

Drej langsomt ventilen mod uret for at lukke luft ud. Lyt efter lyden af den udsivende luft, når du kan høre trykket forandre sig, skal du lukke ventilen ved at dreje ventilen med uret. Luftniveauet bliver bestemt af, hvor meget støtte, stabilitet og komfort, den enkelte bruger har behov for. Luk aldrig så meget luft ud at der opstår risiko for at sidde igennem puden.

RENGØRING

Varilite betrækket kan aftages, maskinvaskes og tørres ved lav temperatur. Husk at lukke lynlåsen før vask for at undgå at stoffet sætter sig fast i lynlåsen. Selve puden og basen kan tørres af med et mildt rengøringsmiddel opløst i varmt vand. Vær sikker på at alle dele er helt tørre, før du samler puden efter rengøring. Varilite puder må ikke autoklaveres.

REPARATION

Alle Varilite produkter er konstrueret af højkvalitets materialer, der er modstandsdygtige mod punktering. Varilite betræk er specielt designet til at hjælpe med at beskytte luft-skum puden, og bør derfor altid benyttes.

Skulle du få mistanke om en punktering, så flyt dig fra puden, fyld puden helt med luft og luk ventilen og flyt dig tilbage på puden. Hvis puden taber luft når ventilen er lukket, kan det indikere en punktering.

For at lokalisere en punktering, afmonter betrækket, fyld puden helt med luft og luk ventilen. Sænk puden ned i et kar med rent vand og se efter luftbobler. Luftboblerne vil afsløre hvor punkteringen er. Kontakt din leverandør og rekvirer et reparationskit eller send puden til reparation hos TA. Service A/S.

VARILITE™ 

TA. Service A/S
Orupgade 32B
4640 Fakse
Tlf. 56 72 57 77
www.ta-service.dk
ta-service@ta-service.dk

TA.
SERVICE A/S

Tak fordi du valgte Varilite!

Vi ved du vil blive tilfreds med kvalitet, virkning og design på dit Varilite produkt. Varilite's produkter tilbyder den bedste trykaflastning, stabilitet og positionering.

For at opnå den maksimale effekt af dit Varilite produkt, bør du overveje følgende muligheder og egenskaber:

For at justere luftniveauet i din Varilite pude, skal du sidde på en helt luftfyldt pude med lukket ventil.

Drej langsomt ventilen mod uret for at lukke luft ud. Lyt efter lyden af den udsivende luft, når du kan høre trykket forandre sig, skal du lukke ventilen ved at dreje ventilen med uret. Luftniveauet bliver bestemt af, hvor meget støtte, stabilitet og komfort, den enkelte bruger har behov for. Luk aldrig så meget luft ud at der opstår risiko for at sidde igennem puden.

Puder med kun én ventil, kan vendes så ventilen er tilgængelig fra højre eller venstre side. Dette kan være en hjælp for brugere med god håndfunktion i den ene side.

Betrækkets underside er af et non-slip materiale for at sikre puden ligger fast. Som ekstra sikkerhed er nogen betræk påsyet ekstra velcro, der evt. kan hæftes på en Varilite Drop Base eller en Varilite Rigidizer.

Alle Varilite betræk er syet så der er plads til Varilite Rigidizer sædeindsats. Varilite Rigidizer sædeindsats er en effektiv og billig løsning til en bedre siddende balance, en mere naturlig bækken stilling, større ekstension af ryggraden og en generel bedre komfort. OBS!! Bør IKKE bruges til puder hvor der er mulighed for at sidde igennem.

En 5 cm kile følger med nogen af modellerne. Kilen kan let tilskæres efter individuelle behov og er fremstillet af et materiale som er fugt- lugt- og bakterieresistent.

For at sikre en lang levetid og optimal virkning af din Varilite pude og/ eller rygsystem:

Udsæt aldrig din Varilite pude eller ryg for vejrforhold som ekstrem varme, kulde eller UV stråler.

Check din pudes luftniveau hver dag og hvis du skifter højde (flytur eller i bjerge). I tilfælde af punktering eller hvis ventilen står åben, vil puden under pres tømmes for luft.

Læg aldrig din Varilite pude i vaskemaskinen. Puder og baser kan tørres af med et mildt rengøringsmiddel opløst i varmt vand. Varilite betræk bør vaskes i overensstemmelse med anvisningen påsyet betrækket. Vær sikker på at alle dele er helt tørre, før du samler puden efter rengøring. Varilite puder må ikke autoklaveres.

Varilite puder og betræk bør benyttes sammen. Betrækket beskytter puden mod punktering, brandmærker og tilsmudsning. Betrækket forbedrer trykfordeling og luftcirkulation for at sikre sundt væv.

Check dit pude og/eller rygssystem regelmæssigt for at sikre optimal virkning og tilpasning. Spænd skruer og beslag efter behov.

ADVARSEL:

Hvis du skifter sædepude eller rygsystem, kan det være nødvendigt med mindre justeringer på din kørestol. Bepændingssystemer som hofte- eller brystseler etc. kan variere meget og skal tilpasses for korrekt funktion. Check derfor altid: skulderposition, sædehøjde, sædedybde, fodstøtte, armlæn og ryg/sædevinkel. Det anbefales at du kontakter din terapeut eller en anden siddestillingskyndig person, til at hjælpe dig med disse tilpasninger.

Der bør regelmæssigt checkes for rødme i huden, specielt omkring benede områder. Kontakt straks lægen ved vedvarende rødme i huden.