

BADEKARTABURET Model GIRAFFEN (HMI-nr. 22576)

Personer med funktionsnedsættelse kan have vanskeligt ved at tage et brusebad eller et karbad i siddende stilling på bunden af badekarret; dette problem kan løses med et badebræt eller en badekarstol/ badekartaburet, som kommer lidt længere ned i badekarret. Men også det at komme IND i badekarret kan være vanskeligt:



- Placér **GIRAFFEN** foran badekarret.
- Løsn fingerskruen (A), som fastholder sikkerhedsbøjlen (B).
- Skub sikkerhedsbøjlen ned over badekarrets kant, og sørg samtidigt for, at badekartrinet står stabilt.
- Spænd fingerskruen igen for at fastlåse sikkerhedsbøjlen og dermed **GIRAFFEN**.

VEDLIGEHOLDELSE:

- Kontrollér jævnligt stel og sæde for skader og korrossions-angreb.
- FØR brug kontrolleres, at **GIRAFFEN** står sikkert og stabilt.
- Badekartaburetten tåler rengøring med almindelige *ikke-ætsende* og *ikke-ridsende* rengøringsmidler. Den efterfølgende aftørring sker bedst med en blød klud.

dan-rehab a/s , Messingvej 13-15, DK-8940 Randers SV,
erklærer på eget ansvar, at **GIRAFFEN**, som er omfattet af
denne erklæring, er i overensstemmelse med EU-Direktiv
2007/47/EC, DIN EN ISO 12182