



Liko Komfortsejl, mod. 30, 31, 35, 36

Brugsanvisning

7DK160138-01

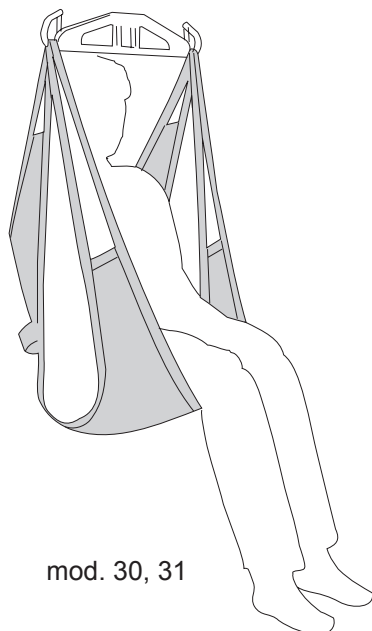

mod. 30, 31

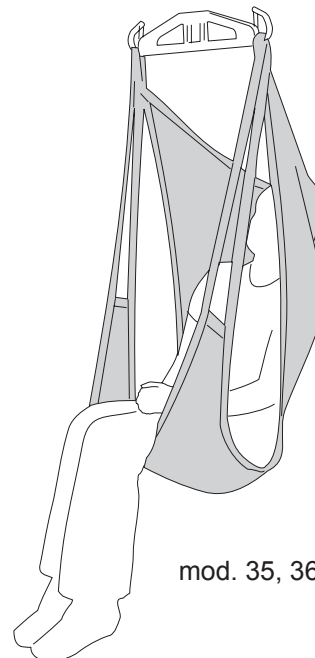

mod. 35, 36

Liko Komfortsejl

Liko Komfortsejlet er et løftesejl, som giver en behagelig siddestilling, og som tilpasser sig til brugeren uden individuelle indstillinger.

Komfortsejlet er et såkaldt "helsejl", hvilket betyder, at den forbliver under brugeren efter anvendelsen og flytning til eksempelvis en kørestol.

En korrekt afprøvet og omhyggelig påsat Komfortsejl giver brugeren en god tryghedsfølelse og stor komfort med en god støtte for ryggen.

Armene holdes inden for sejlet.

Komfortsejlet foretrækkes af mange brugere, som er amputerede eller særlig ømfindtlige, for eksempel brugere med ledbesvær.

Komfortsejlet med høj ryg, modellerne 35 og 36, giver en mere tilbagelænet siddestilling i forhold til modellerne 30 og 31. I kombination med Liko Firepunktsbøjlen, Krydsåget eller Sidebøjler opnås en mere liggende siddestilling.

Komfortsejlet findes i to størrelser: medium og large, large er bredere og højere end medium.

Komfortsejlet fås i forskellige materialer og udførelser, men løftestropperne er altid fremstillet i slidstærkt polyester og er dermed meget sikker.

Da løftesejlet oftest efterlades under brugeren efter forflytningen, anbefaler vi udførelsen i bomuld eller i polyester netvæv.

Til badet og brusebadet findes en model i plastbehandlet netvæv, der gør, at vandet kan slippe gennem løftesejlet, at det kan aftørres og tørrer hurtigere. Derfor virker et løftesejl i plastbehandlet netvæv ikke koldt på samme måde som en gennemblødt tekstilsejl. En del foretrækker dog polyester-materialet til bad og brusebad.

Liko Komfortsejl fås også med et polstret sæde (syntetisk skind) til personer, der er særlig følsomme over for tryk.


Til løft til og fra toilet anbefaler vi Komfortsejl med toiletåbning (modellerne 31 og 36).

△ er en advarselstrekant til situationer, hvor du skal være særlig opmærksom.

I brugsanvisningen kaldes den, der løftes, for brugeren, og den, der hjælper, for medhjælperen.

△ Læs brugsanvisning på både lift og løftesejl inden anvendelse. Brugsanvisninger kan downloades gratis på www.liko.com.

Liko Komfortsejl

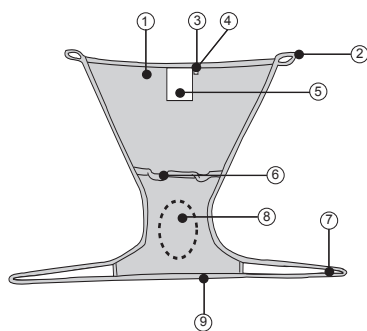

Liko Komfortsejl,
høj ryg, mod. 35, 36

1. Hovedstøtte

2. Øverste stropholder

3. Størrelsesangivelse

4. Fremstillingsnummer


5. Mærkeseddel

6. Håndtag (ikke i bomuld)

7. Nederste stropholder

8. Toiletåbning model 31, 36

9. Underkant

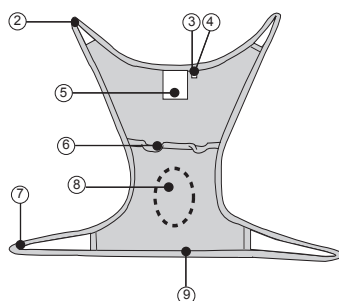


Liko Komfortsejl,
mod. 30, 31

△ Tænk på!

- Om der er behov for én eller flere hjælpere, bedømmes for hvert tilfælde.
- Planlæg løftesituationen inden løft, så det sker så trygt og smidigt som muligt.
- På trods af at Likos løfteåg er forsynet med afkrogningsbeskyttelse, skal særlig opmærksomhed iagttages: Det er vigtigt, inden brugeren løftes fra underlaget, men når båndene er strakt ordentligt, at kontrollere at stropperne er korrekt hængt på løfteåget.
- Løft aldrig brugeren højere fra underlaget end nødvendigt for løftets gennemførelse.
- Efterlad aldrig en bruger uden opsyn i en løftesituation.
- Check at hjulene på kørestol, seng, briks etc. er låste under arbejdsmomentet.

Forskellige siddestillinger i Liko Komfortsejl

Komfortsejl, mod. 30, 31

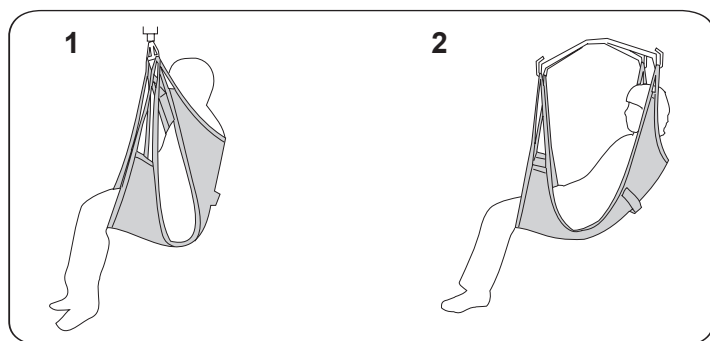


1. Komfortsejl model 30, 31 i kombination med Liko Universalåg 450 alt. Løfteåg Universal 670 Twin giver en opret siddestilling.

2. Komfortsejl model 30, 31 i kombination med Liko Firpunktsbøjle alt. Krydsåg giver en tilbagelænet siddestilling med mindre bøjede hofter.

Universalåg 450 i kombination med sidebøjler giver samme siddestilling.

Komfortsejl med høj ryg, mod. 35, 36

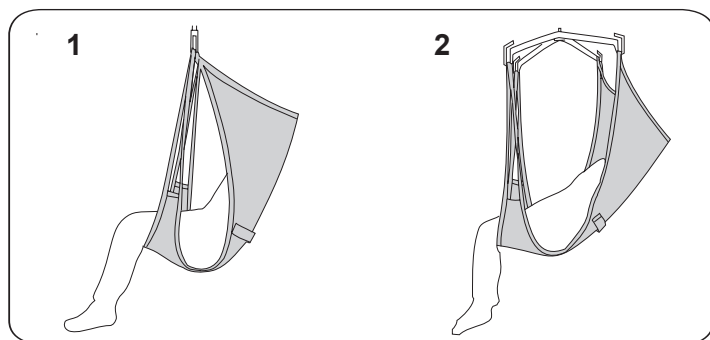


1. Komfortsejl model 35, 36 i kombination med Liko Universalåg 450 alt. Løfteåg Universal 670 Twin giver en tilbagelænet siddestilling med knap så bøjede hofter.


2. Komfortsejl model 35, 36 i kombination med Liko Firpunktsbøjle alt. Krydsåg giver en halvliggende stilling.

Universalåg 450 i kombination med Sidebøjler giver samme siddestilling.


Løftebøjler

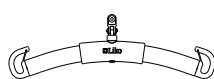


Universalåg 450
Varenr. 3156075

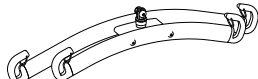


Universalåg 670 Twin
Varenr. 3156077

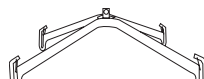

Firpunktsbøjle
Varenr. 3156010

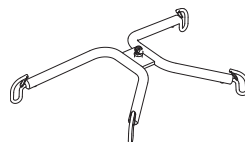

Krydsåg 670
Varenr. 3156018

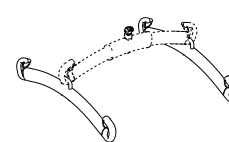

Universal Sidebøjler 450
Varenr. 3156079


Løfteåg Standard 450
Varenr. 3156001

Løfteåg Bredt 670
Varenr. 3156012

Krydsåg 450
Varenr. 3156021

Løft fra liggende stilling

Ved løft fra gulv anbefales Liko Komfortsejl med høj ryg, model 35, 36, som giver god støtte til hovedet.

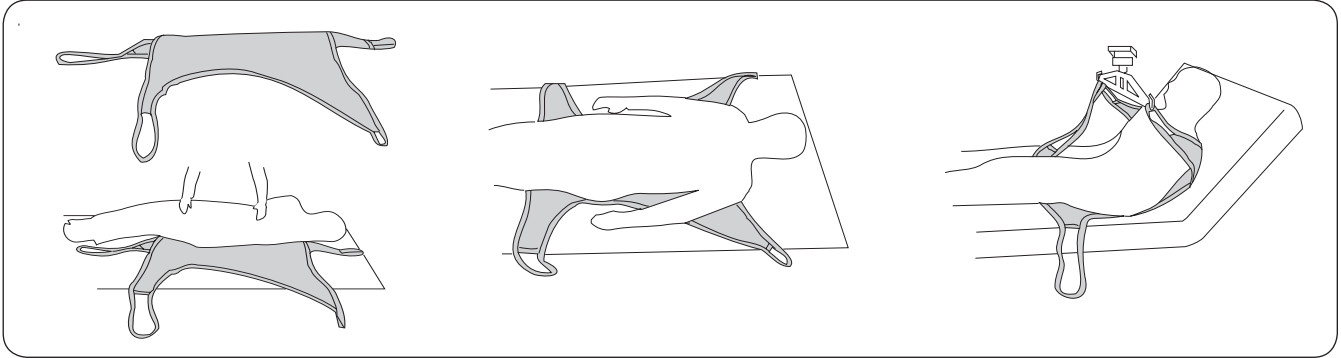

Vend brugeren mod dig selv for at undgå, at denne falder ud af sengen. Placer løftesejlets kant så langt ind under brugeren som muligt og med underkanten i højde med brugerens knæled. Fold løftesejlet et par gange, så centermærket er i niveau med brugerens rygrad, når brugeren forsigtigt vendes om. Træk forsigtigt løftesejlet ud på den anden side.

Kontrollér, at brugeren ligger midt på løftesejlet, justér placeringen efter behov. Underkanten af løftesejlet bør være i niveau med brugerens knæled, ikke under dette.

Har sengen indstillelig rygstøtte, indstilles den til halvt siddende. Sæt øjestropperne på løfteåget og foretag løftet. Medhjælperen flytter brugerens ben sidelæns ud over sengekanten.

Tilbage til liggende stilling

Flytning tilbage til liggende stilling sker i omvendt rækkefølge af det, der er beskrevet under "Løft fra liggende stilling".

Løft til kørestol

Ved placering i kørestol er det vigtigt, at brugeren kommer tilstrækkeligt langt tilbage i kørestolen for at sidde godt. Det kan gøres på flere måder.



For at gøre placeringen i kørestolen mere smidig, kan man vippe stolen skråt bagud under sænkningen. Lad bagdelen glide ned langs ryglænet det sidste stykke. Kontrollér kørestolens placering med foden på anti-tip.


En alternativ metode er at trykke let på brugerens knæ under sænkningen, så bagdelen trykkes ind mod kørestolens ryg. Hvis der er håndtag på løftesejlet, kan man styre med disse.
**Δ NB! For stor belastning på håndtagene kan resultere i, at løftesejlet brister.
Løft ikke i håndtagene!**

Efter gennemført løft til stol eller kørestol tages stropperne af løfteåget og rulles sammen.

Løft til/fra toilet

Liko Komfortsejlet fås også med toiletåbning (model 31 og 36) til løft til/fra toilet. I Likos sortiment findes også andre løftesejl, som med fordel kan anvendes til løft til/fra toilet. Fx toiletsejl-modellerne 40 eller 45, Hygiejnevest-modellerne 50 eller 55 m.fl.

Oversigt over Liko Komfortsejl, modellerne 30, 31, 35, 36

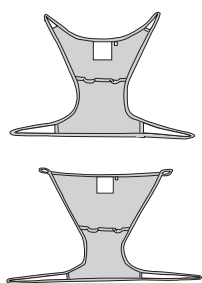

Produkt	Varenr.	Størrelse	Personvægt*
Liko Komfortsejl	3530 -- 5	M Medium	< 80 kg
Liko Komfortsejl	3530 -- 6	L Large	> 70 kg
Liko Komfortsejl med toiletåbning	3531 -- 5	M Medium	< 80 kg
Liko Komfortsejl med toiletåbning	3531 -- 6	L Large	> 70 kg
Liko Komfortsejl, høj ryg	3535 -- 5	M Medium	< 80 kg
Liko Komfortsejl, høj ryg	3535 -- 6	L Large	> 70 kg
Liko Komfortsejl, høj ryg, med toiletåbning	3536 -- 5	M Medium	< 80 kg
Liko Komfortsejl, høj ryg, med toiletåbning	3535 -- 6	L Large	> 70 kg

*NB! Den angivne personvægt er kun vejledende – afvigelser kan forekomme.

Hvis brugeren har lav muskeltonus og synker sammen i Komfortsejlet, bør man overveje at vælge en mindre størrelse.

Likos løftesejl er godkendt til en vægt på maks. 200 kg eller mere, se produktmærkningen.

3530 -- 5

2 Bomuld 3 Polyester netvæv 4 Plastbehandlet netvæv, der kan aftørres, også med sprit.

0 Uden afstivning eller polstring
2 Siddedel polstret med syntetisk fåreskind

Bestillingseksempel: Varenr. 3530225

Liko Komfortsejl, bomuld, polstret sæde, medium.

Vaskeanvisning:  60-80°C  Tørretumbling frarådes.

Læs altid vaskeanvisningen på løftesejlets mærkeseddel inden vask!

Anbefalede kombinationer med Liko Komfortsejl og Likos løfteåg:

	Miniåg 220	Small åg 350	Universålg 350	Standard 450	Universålg 450	Universålg 670	Bredt åg 670	Univ. 670 Twin	Firpunktsbøjle	Krydsåg 450	Krydsåg 670	Forklaring:
Komfortsejl, M	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1 Anbefales
Komfortsejl, L	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	1	2 Acceptabelt
Komfortsejl, høj ryg, M	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3 Frarådes
Komfortsejl, høj ryg, L	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	4 U hensigtsmæssigt

CE Medicinteknisk klasse I-produkt

Liko Komfortsejlet er afprøvet af et godkendt testinstitut og opfylder alle krav ifølge MDD klasse I-produkter, den opfylder alle krav jf. den harmoniserede standard EN ISO 10535.

Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbeholder os ret til produktændringer uden forudgående varsel. Kontakt din Liko repræsentant for opdatering, information og råd.

⚠️ Vigtigt!

Løft og forflytning af en person indebærer altid en vis risiko. Læs derfor brugsanvisningen til både lift og liftilbehør grundigt. Det er vigtigt, at du forstår indholdet i brugsanvisningen helt. Kun velinformerede personale bør anvende udstyret.

Kontrollér, at løftetilbehøret passer til den lift, der anvendes. Vær forsigtig og omhyggelig ved anvendelsen.

Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed.

Du skal være informeret om dennes muligheder for at håndtere løftesituationen.

Kontrollér løftesejlet med regelmæssige mellemrum, især efter vask. Se efter slitage eller skader på sømme, stof og øjestropper. Brug ikke beskadiget liftilbehør.

Kontakt producenten/leverandøren, hvis du er i tvivl om noget. For kombinationer med lifte af andre fabrikater end Liko kontakt leverandøren.

 **Liko**

www.liko.com

Fabrikant:

Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

Forhandler i Danmark:

Botved Plejeudstyr A/S
Nørrelundvej 5
2730 Herlev
Tilf: 80373737
Fax: 70203737
info@botved.dk
www.botved.dk

