


BRUGSANVISNING for løs toiletforhøjer

DERBY 1, 2, 3, 4, 5 og 6 (HMI-nr. 01893, 14248, 01892, 14247, 25183 og 25184)

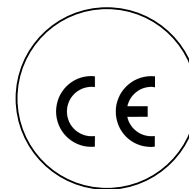

- a. **DERBY 2, 4 og 6:**
Drej håndhjulene, indtil beslagene i hver side er skruet så langt ud, som de kan komme.
- DERBY 1, 3 og 5:**
Skru møtrikkerne på undersiden af forhøjereren af og vend beslagene omvendt i forhold til den oprindelige position (:så beslagene ”griber” fat på toiletkummens yderside).
- b. Slå toiletkummens sæde op og placér toiletforhøjereren på kummen.
- c. **DERBY 2, 4 og 6:**
Drej håndhjulene, indtil beslagene i hver side rører kummen – PAS PÅ ikke at overskrue !
- DERBY 1, 3 og 5:**
Indstil beslagene, så de rører kummen, og skru møtrikkerne på igen – PAS PÅ ikke at overskrue !
- d. Afprøv, om sædet ligger sikkert.

VEDLIGEHOJDELSE:

- * Efterse jævnligt sæde (og låg). Afprøv jævnligt, om beslagene, der ”griber” om toiletkummen, skal efterspændes.
Udskift slidte eller ødelagte dele – hellere én gang for meget end én for lidt !
- * Forhøjereren rengøres med almindelige *ikke-øtsende* og *ikke-ridsende* rengøringsmidler, hvorefter den evt. spules. Den efterfølgende aftørring sker bedst med en blød klud. Forhøjereren tåler IKKE autoklavering.

www.danrehab.dk
tlf. 8644 7355