


Mod. 50

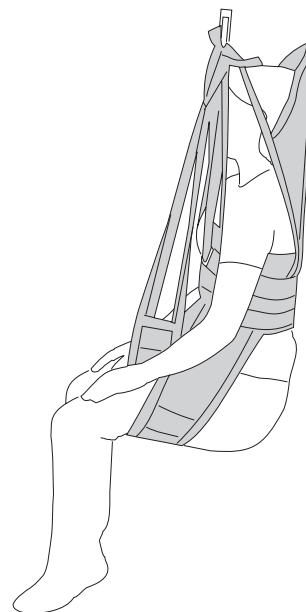

Mod. 55

Produktbeskrivelse

Brugsanvisningen gælder for Liko Hygiejnevest og Børne Hygiejnevest men i teksten anvender vi benævnelsen Liko Hygiejnevest.

Liko Hygiejnevest er et sikkert løftesejl, som kan løse problemer ved løft til og fra toilet.

Hygiejnevesten har nogle unikke funktions- og sikkerhedsmæssige fordele, og derfor fungerer dette sejl ofte i vanskelige tilfælde, hvor ingen andre løsninger har fungeret. Hygiejnevessen har en tætsluttende vest som løfter med en fast støtte om overkroppen. Den store udringning omkring bagdelen giver samtidigt god plads til af- og påklædning under selve løftemomentet ved toiletbesøg.

Hygiejnevessen foretrækkes af mange brugere, som værdsætter den oprette og konstante siddestilling. Selv for svært funktionshæmmende personer, som er benamputerede eller har problemer med spasticitet kan Hygiejnevessen være en god løsning. Selv personer med stærkt nedsat kropsstabilitet og lav muskeltonus plejer at kunne klare løft med Liko Hygiejnevest og oplever dette trygt og bekvemt.

Hygiejnevessen er beregnet til løft fra siddende til siddende, den giver oprejst siddestilling, hvilket letter ved løft til toiletstol og placering i kørestol.

Hygiejnevessen slutter ikke til rundt om enden, hvilket gør den velegnet til anvendelse ved løft fra formstøbte sæder og trange kørestole.

Liko Hygiejnevest i størrelse XXS og XS produceres i polyester som er dekoreret med Bamser - derfor navnet Børne Hygiejnevest.

På denne størrelse er benstøtten afstivet og foret med polyesterstof dekoreret med Bamser.

Størrelse S-XXXL er grøn polyester og her er benstøtten afstivet og foret med blødt fløj.

Disse materialekombinationer gælder også for de respektive størrelser i model 55.

Liko Hygiejnevest høj ryg, mod. 55/ Børne Hygiejnevest, mod. 55


Hygiejnevest med høj ryg er et godt valg for den som har behov for støtte, der forhindrer hovedet i at falde bagud. Brugere som har problemer med spasticitet bør afprøve mod. 55.

△ er en advarselstrekant for momenter, hvor særlig forsigtighed bør iagttages.

I denne tekst kaldes den, som bliver løftet for brugeren og den, som hjælper for medhjælperen.

 Læs brugsanvisning på både lift og løftesejl inden anvendelse. Brugsanvisninger kan downloades gratis på www.botved.dk.

Liko Hygiejnevest

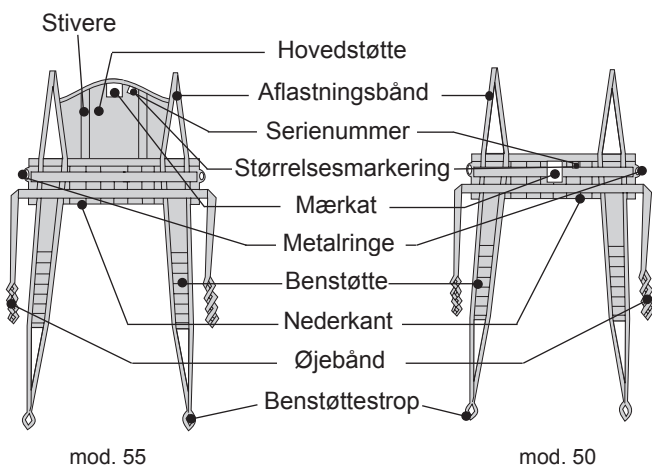


△ Tænk på!

- Om der er behov for en eller flere hjælpere, skal bedømmes for hvert tilfælde.
- Planlæg løftet før det udføres, så det sker så trygt og smidigt som muligt.
- Selv om Likos løftebøjler er forsynede med afkrogningsbeskyttelse, skal særlig opmærksomhed iagttages: Før brugeren løftes fra underlaget, men når båndene er strakt er det vigtigt at kontrollere at båndøjerne sidder korrekt på løftebøjlen!
- Løft aldrig en bruger højere end hvad der er hensigtsmæssigt ift. brugerens forudsætninger. Juster liftens højeste løftehøjde for at umuliggøre en løftesituation hvor brugeren ufrivilligt bliver løftet for højt.
- Kontrollér at brugeren sidder sikkert i sejlet inden forflytningen foretages.
- Efterlad aldrig en bruger uden opsyn i en løftesituation.
- Sørg for at hjulene på kørestol, seng, briks etc. er låste i løftesituationen.

Løft fra kørestol til toilet


Forbered afklædning ved at knappe knapper op og lyne lynlåse ned.

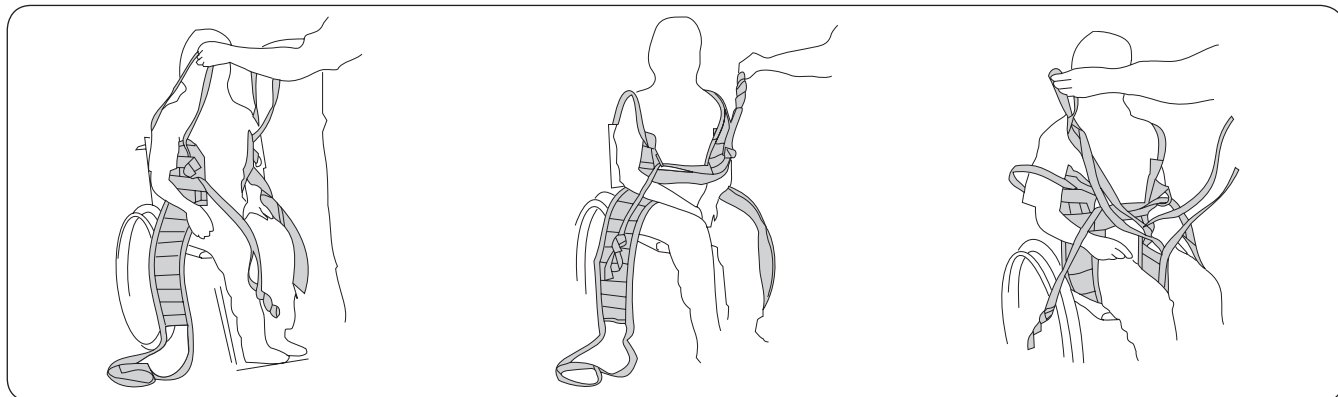

Placer vesten med mærkningen midt bag på ryggen. Stik armene gennem aflastningsbåndene.

Stik højre øjebånd gennem venstre metalring. Stik venstre øjebånd gennem højre metalring.

Placer benstøtterne under de respektive lår og kryds benstøtternes øjebånd.

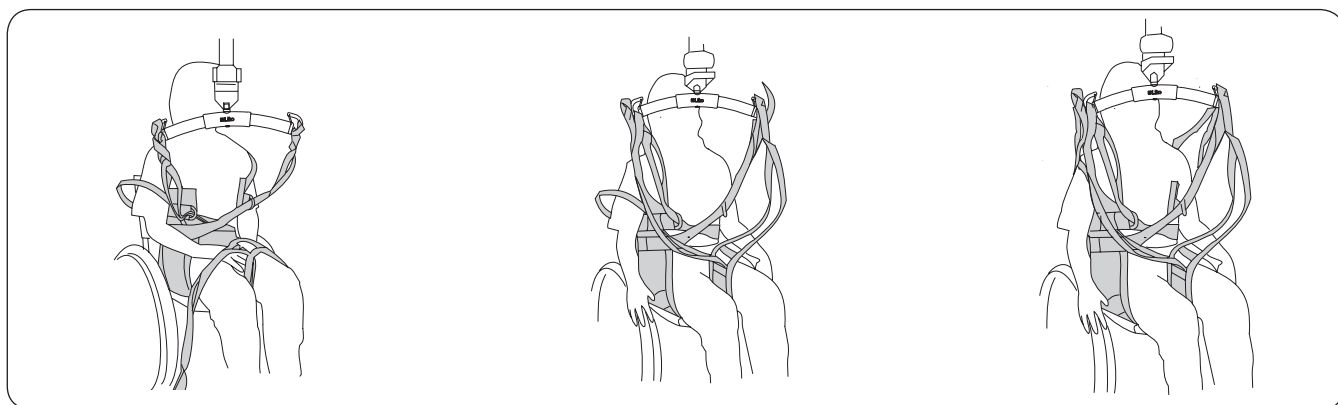

Sæt øjebåndene på løfteåget i et passende øje; se omstående forklaring.


Sæt de krydsede benstøttes øjebånd på løfteåget. To alternativer findes; se omstående forklaring.

Sæt til slut aflastningsbåndene på løfteåget.

△ Vigtigt!

Hygiejnevesten er beregnet til løft fra siddende til siddende, hvis den anvendes til løft fra liggende, kan dette resultere i en hurtigere nedslidning af aflastningsbåndene.

Aflastningsbåndene bør altid sættes på løfteåget til sidst.

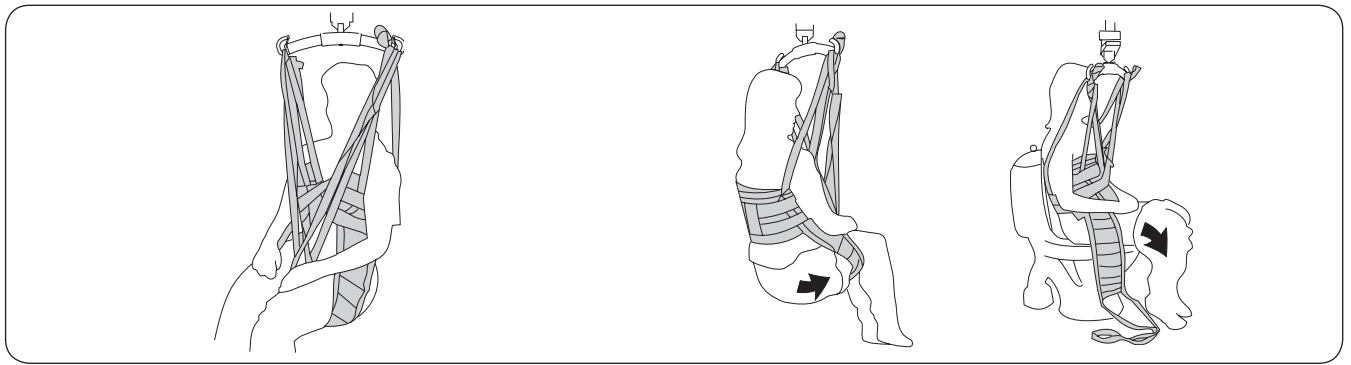

Løft forsigtigt og kontroller at trykket fordeles hensigtsmæssigt mod overkrop og under benene. Se omstående side.

Træk bukserne så meget ned på brugeren som muligt og sænk ned til toiletstolen. Bøj benstøtterne væk og træk tøjet yderligere ned. Vestdelen kan blive siddende som en sikkerhedsvest.

I en del tilfælde kan det være lettest ikke at bøje benstøtterne væk under toiletbesøget, gælder først og fremmest for kvindelige brugere.

Tilbage fra toiletstol til kørestol

Forneden beskrives to måder at tage tøj på efter afsluttet toiletbesøg. Brugersens tøj og fysiske status afgør valget af metode.

Alternativ 1: Benstøtterne udenpå bukserne. Denne metode er velegnet til brugere med bukser uden stræk.




Træk bukserne så højt op i skridtet som muligt.

Placer benstøtterne under benene udenpå bukserne. Placer alle båndøjer på bøjlen (side 2). Løft.

Læg eventuelt en ble på inden bukserne trækkes på plads. Gennemfør forflytningen og placer brugeren i kørestolen.

Alternativ 2: Først benstøtter - derefter bukser udenpå. Denne metode er velegnet til brugere med elastiske bukser.

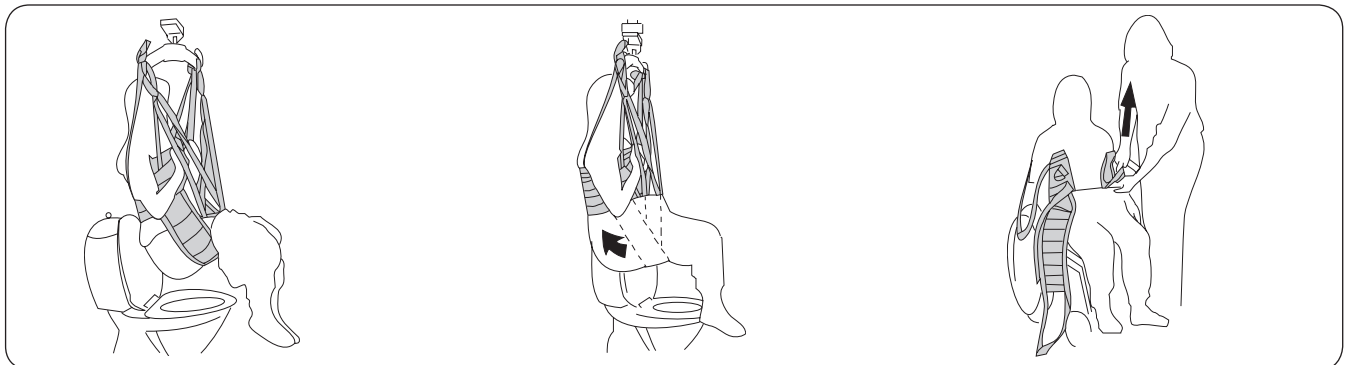

Placer alle båndøjer på bøjlen (side 2). Løft. Eventuel ble lægges på indenfor de krydsede benstøtter.

Træk bukserne op over bagdel og benstøtter når brugeren sidder i sejlet. Flyt til kørestol.

Løft båndøjerne af. Træk forsigtigt benstøtterne ud af bukserne og fjern Hygiejvesten.

Gør således når du afprøver en Hygiejnevest

Det er afgørende for Hygiejnevestens funktion at vestens vidde er korrekt i forhold til brugerens omfang rundt om overkroppen. Forskellige bredder på løftebøjlen giver forskellig trykfordeling på brystkassen. Prøv dig frem.

At vælge størrelse

Når man afprøver korrekt størrelse, skal man kontrollere vestens åbning mellem forkanterne i tiltrukket stand. Det varierer afhængig af størrelse, men bør være ca. 5-30 cm. Jo større størrelse, des større kan åbningen være.



For lille størrelse. Åbningen er for stor og øjebåndene er kortere end aflastningsbåndene i tiltrukket stand.

For stor størrelse. Metalringene mødes og øjebåndene kan ikke trække vesten tilstrækkeligt til.

Indstilling af øjebånd


Hvilket øje man vælger at sætte på løfteåget afgør hvor meget vesten spænder rundt om brystkassen.

Ved at prøveløfte i forskellige øjer samtidigt med aflastningsbåndene, kan man se hvilken position der giver den rette tiltrækning.

Hvis vesten glider op – prøv et øje længere inde alternativt en mindre størrelse.


Hvis vesten spænder for hårdt rundt om brystkassen – prøv et øje længere ude alternativt en større størrelse.

En slankere person skal anvende et øje længere inde end en kraftig person, hvis det er den samme størrelse vest. Ved korrekt indstilling af øjebåndene, har øje- og aflastningsbånd samme spænding under løft.

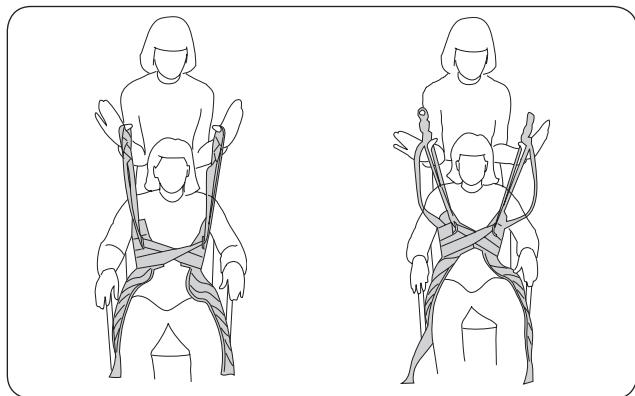

Afprøvning af indstilling af øjebåndene.

Stå bagved brugeren og hæng aflastningsbåndene rundt om tommelfingrene og løft op ad indtil båndene er ordentligt strakt ud. Ved korrekt forhold mellem øje- og aflastningsbånd har disse samme spænding.

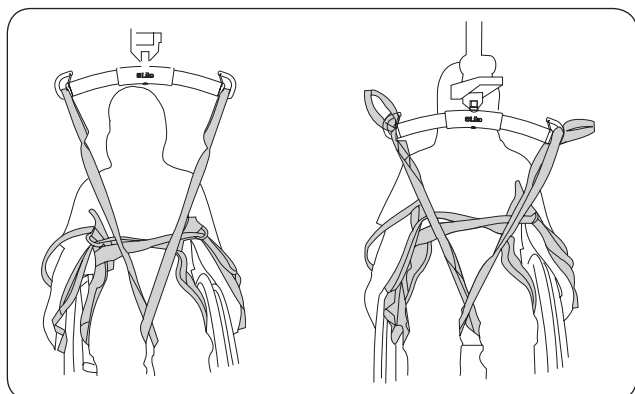

Giver opret siddestilling.
Passer de fleste.

Til lave brugere.


Indstilling af benstøtter

I princippet vælger man indstilling efter brugerens længde, ved en lav person sættes benstøttens inderste øje på åget. Dette plejer samtidig at medføre en mere tilbagelænet siddestilling. Prøv dig frem.

Tips: I stedet for at bruge det inderste båndøje, anbefales det at binde en knude på benstøttens båndøje.

Placering af benstøtterne

△ Det er af betydning for siddestillingen, **hvor** under brugerens lår benstøtterne placeres. På en person med meget lav muskeltonus bør de placeres så tæt ved skridtet som muligt for at undgå en nedsunken siddestilling.

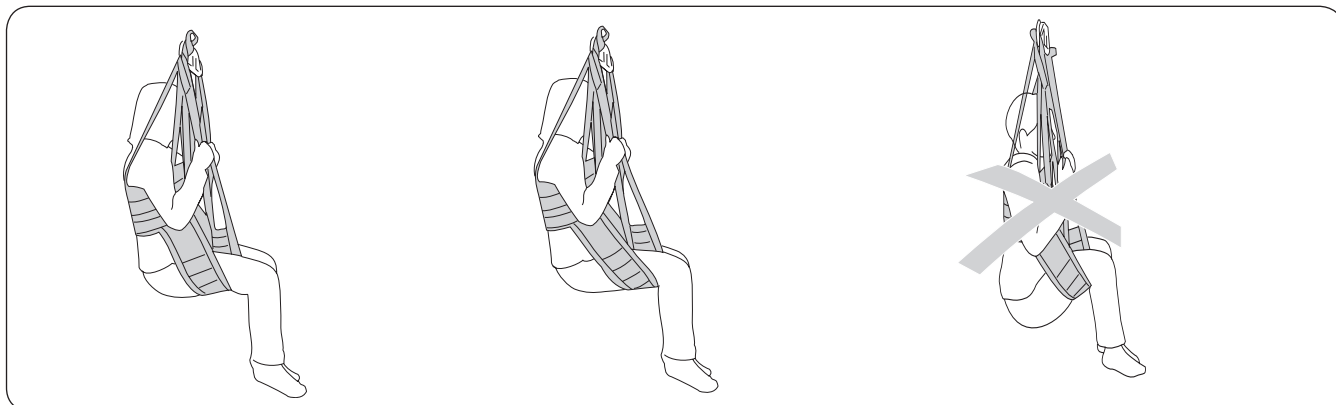


Korrekt placering af benstøtterne for de fleste.

For personer med høj muskeltonus kan det være en fordel at placere benstøtterne nærmest knæhasen.

Hvis siddestillingen virker nedsunken og ubekvem bør benstøtterne placeres nærmere skridtet.

Tips!

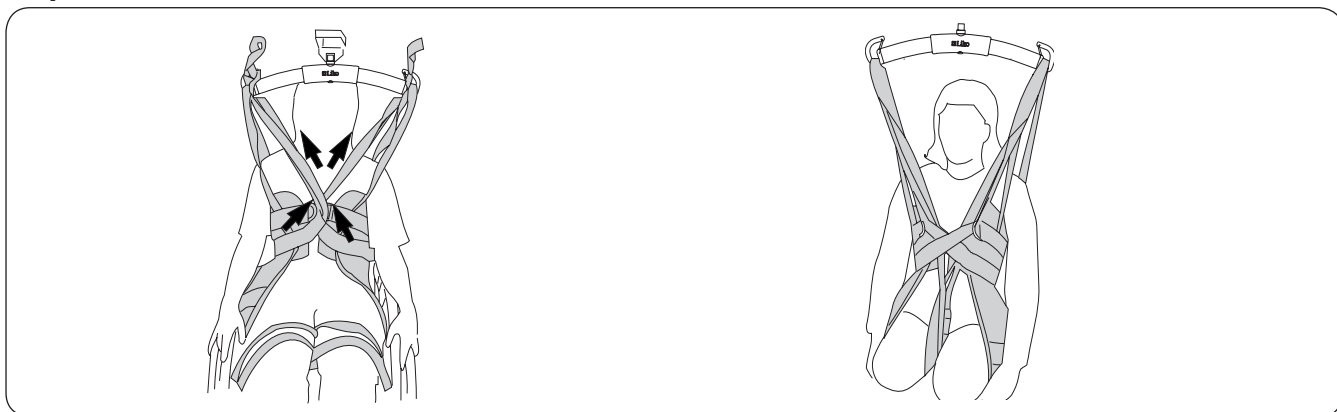

Hvis du har afprøvet en Hygiejnevest på en relativt slank person i henhold til anbefalingerne på omstående side, men ikke synes at vest delen trækker tilstrækkeligt, kan du prøve at krydse øjebåndene en gang (ovenfor metalringene) inden øjebåndene sættes på løfteåget.

For bl.a. amputerede kan det være hensigtsmæssigt at stikke benstøttestropperne indenfor de krydsede øjebånd, alternativt igennem metalringene inden de sættes på løfteåget. Dette mindsker risikoen for at benstøtterne skal glide frem på benene.


Tilbehør

Polstrede foderaler

Art. nr. 3666021



Som tilbehør findes polstrede foderaler til at sætte på de bageste af aflastningsbåndene.

Polstringen er forsynet med velcrobånd i den ene langside og kan let fjernes/monteres.

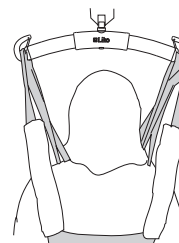


Øjeclips


Praktisk tilbehør til at afmærke individuelt afprøvet størrelse. Det letter arbejdet for hjælperne at finde det korrekte øje/størrelse hver gang.

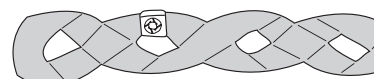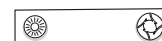

Oversigt Liko Hygiejnevest, mod. 50, 55

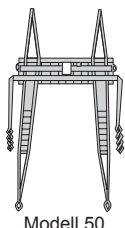

Modell 50

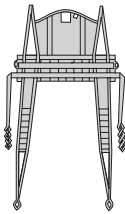

Modell 55

Artikel	Art. nr.	Art. nr.	Størrelse	Brugervægt*	Maks. belastning
Børne Hygiejnevest	3550812	3555812	XXS	< 20 kg	200 kg
Børne Hygiejnevest	3550813	3555813	XS	20-40 kg	200 kg
Liko Hygiejnevest	3550114	3555114	S	30-60 kg	200 kg
Liko Hygiejnevest	3550115	3555115	M	50-80 kg	200 kg
Liko Hygiejnevest	3550116	3555116	L	70-100 kg	200 kg
Liko Hygiejnevest	3550117	3555117**	XL	90-130 kg	300 kg
Liko Hygiejnevest	3550118	3555118**	XXL	130- kg	300 kg
Liko Hygiejnevest	3550119		XXXL	150- kg	300 kg

*N.B. Den angivne vægt er kun vejledende – afvigelser kan forekomme.

**Speicaltilvirkning"

1 Polyester 8 Polyester med Bamsetryk

355-15

→ Størrelse

0 Liko Hygiejnevest

5 Liko Hygiejnevest m. høj ryg

Bestillingseksempel: Art. nr 3550115

Liko Hygiejnevest, polyester, medium.

Vaskeanvisning: Se løftesejlets mærkning.

Forventet levetid

Produktet har en forventet levetid på 1-5 år eller længere ved almindelig anvendelse. Levetiden afhænger fx af materiale, brugsfrekvens, vaskeprocedure samt belastning.

Periodisk eftersyn

Et periodisk eftersyn af produktet skal udføres mindst hver 6. måned. Hyppigere eftersyn kan være nødvendig, såfremt produktet anvendes eller vaskes oftere end normalt. Se Likos protokol om periodisk eftersyn til det respektive produkt.

Anbefalede kombinationer Liko Hygiejnevest og Likos løftebøjle:

		Minibøjle 220	Smal 350	Universal 350	Standard 450	Universal 450	Bred 670	Univ. 670 Twin
Børne Hygiejnevest, XXS	50, 55	1	1	1	1	1	3	4
Børne Hygiejnevest, XS	50, 55	1	1	1	1	1	3	4
Hygiejnevest, S	50, 55	1	1	1	1	1	3	3
Hygiejnevest, M	50	2	1	1	1	1	2	2
Hygiejnevest, L	50	2	1	1	1	1	2	2
Hygiejnevest, XL	50	3	2	1	1	1	2	2
Hygiejnevest, XXL	50	4	3	2	1	1	1	1
Hygiejnevest, XXXL	50	4	3	3	1	1	1	1
Hygiejnevest m. høj ryg, M	55	2	1	1	1	1	3	3
Hygiejnevest m. høj ryg, L	55	2	1	1	1	1	2	3
Hygiejnevest m. høj ryg, XL	55	3	2	2	1	1	3	3
Hygiejnevest m. høj ryg, XXL	55	3	2	2	1	1	3	3

Forklaring:

- 1 Anbefales
- 2 Kan gå
- 3 Frarådes
- 4 Uansvarlig

I ovenstående tabel findes flere anbefalinger på hver størrelse.

Løftebøjleens bredde har betydning for trykket over skuldrene, prøv dig frem med de forskellige bøjlebredder.

Kombinationer med Liko Hygiejnevest og Firepunktsbøjle, Krydsbøjle 450/670 og alle kombinationer med Sidebøjler anses for uansvarlige.

CE Medicinteknisk klasse 1 produkt

Liko Hygiejnevest er afprøvet af et godkendt testinstitut og opfylder alle krav ifølge MDD klasse I-produkter, den opfylder alle krav jf. den harmoniserede standard EN ISO 10535.

Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbeholder os ret til produktændringer uden forudgående varsel.

Kontakt din Liko repræsentant for opdatering, information og råd.

ΔVigtigt!

Løft og forflytning af en person indebærer altid en vis risiko. Læs derfor brugsanvisningen til både lift og lifttilbehør grundigt. Det er vigtigt, at du forstår indholdet i brugsanvisningen helt. Kun velinformerede personale bør anvende udstyret.

Kontrollér, at løftetilbehøret passer til den lift, der anvendes. Vær forsigtig og omhyggelig ved anvendelsen.

Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed.

Du skal være informeret om dennes muligheder for at håndtere løftesituationen.

Kontrollér løftesejlet med regelmæssige mellemrum, især efter vask. Se efter slitage eller skader på sømme, stof og øjestropper. Brug ikke beskadiget lifttilbehør.

Kontakt producenten/leverandøren, hvis du er i tvivl om noget. For kombinationer med lifte af andre fabrikater end Liko kontakt leverandøren.



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Fabrikant:

Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se



7 330925 717954