

! Produktet må kun anvendes som bad og toiletstol.
Ønskes anden anvendelse kontakt da Anatomic SITT A/S.



Zitzi Clozitt

For at kunne udnytte Zitzi Clozitt til fulde, er det vigtigt at læse denne brugsanvisning igennem. Dette gælder alle personer, som er i kontakt med brugeren.

Zitzi Clozitt-serien er udviklet for de brugere, som har behov for at få tilført ekstra stabilitet i deres bad og toiletstol. Tilpasning/afprøvning af Zitzi Clozitt skal udføres af en fagperson. Hvis du har brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte Anatomic SITT A/S



Kryds her!
Der er sat kryds i ruden, hvis der er foretaget evt. SPECIALTILPASNINGER. CE-mærkningen gælder da ikke!

Producent:
Anatomic SITT AB
Box 6137, SE-60006 Norrköping
SWEDEN - Phone +46 (0)11-16 18 00

Indholdsfortegnelse:

Side:punkt

2:1	Indledning / Fakta	7:3	Breddejustering, armlæn
3:1	Montering af mellemrør/sædedel	7:4	Dybdejustering, armlæn
4:1	Tippepedal for løft af forreste hjul	8:1	Montering, justering af hoftebælte
4:2	Låsning af hjul	8:2	Montering, justering af seler
4:3	Aftagelig kørebøjle	10:1	Montering af bord
4:4	Justering af ryghøjde	10:2	Justering af sæde (starfish)
5:1	Tilt af sædeenhed	12:1	Justerbar ryg
5:2	Vinkeljustering af ryg	13:1	Potte & stænkskjold
5:3	Montering af fodstøtte	14:1	Antitip støtter
5:4	Fodstøtte, vinkeljustering ved knæled	15:1	Vedligeholdelse/ vaskeanvisning/ genbrug
6:1	Fodstøtte, vinkeljustering ved fodled	15:2	Demontering/ skrotning
6:2	Vinkeljustering, fodplade	15:3	Sammenfatning / efterkontrol
6:3	Kugleledsadapter	15:4	Kombinationer
6:4	Fjedrende fodstøtteadapter	15:5	Reserve dele
6:5	Lægstøtte	15:6	Mærkning
7:1	Montering, justering hovedstøtte	15:7	Garanti
7:2	Montering, armlæn		

Plads til etiket!

2:1) Indledning & fakta

For at I skal kunne udnytte Zitzi CloZitt til fulde, er det vigtigt at I læser denne brugervejledning igennem. Dette gælder alle personer, som er i kontakt med brugeren. Tilpasning/afprøvning af Zitzi CloZitt skal udføres af Fysioterapeut eller anden fagperson.

Størrelser:

Zitzi CloZitt tilbydes i 4 størrelser.
Justeringer kan udføres, i takt med at barnet vokser.
Max brugervægt: 130 kg.

Grundkonfiguration:


- Farve rør: Hvid
- Farve betræk: Blå
- Sædedel inkl. blødt betræk
- Rygdel inkl. blødt betræk
- Justerbar ryghøjde
- Vinkeljustérbar ryglæn
- Vinkling af hele sædeenheden
- Stel med låsbare hjul

Tilbehør:

- Hoftebælte
- Brystbælte
- H-sele, krydssele
- Sternumstøtte, sternumvest
- Armlæn
- Hovedstøtte
- Fodstøtte, lægstøtte
- Ankelbespænding
- Bord med kant, dækplade til bord.
- Stænkskjold, potte
- Drivhjul
- P-bremse

- * Anvend medfølgende unbraconøgle for at udføre justeringer.
- * Brugeren skal ikke sidde i stolen, når justeringerne udføres.
- * For at gøre tilpasningen så let som mulig, er det en god idé at gennemtænke hvilket tilbehør, som skal monteres. Den mest hensigtsmæssige rækkefølge kan variere, men et godt udgangspunkt er, oppe fra og ned:

- 1) Hovedstøttefæste
- 2) Øvre beslag for krydssele
- 3) Øvre beslag gaspatron
- 4) Beslag for armlæn
- 5) Nedre beslag for H-sele

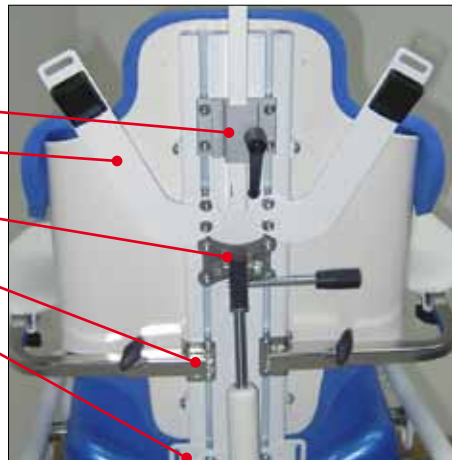

Tips! Montér altid det tilbehør, som skal sidde længst nede på ryggrammen først.

Hvis du skal eftermontere noget tilbehør, skal du afmontere endestoppet på toppen af rygstammen og placere dit tilbehør i korrekt rækkefølge.

15:1) Vedligeholdelse / vaskeanvisning/ genbrug:

- * Efter bad, afmonter sæde- & rygbetrækket for at det kan tørre.
- * Puder & bæltepuder: 60°, fin vask. Må ikke tørretumbles eller komme i tørreskab.
- * Plast & metaldele: Tør plast og metaldele af med en fugtig klud.



OBS! Vigtigt! Gaspatronen bør anvendes regelmæssigt, så den ikke mister sin funktion. Gaspatronen skal aktiveres mindst en gang hver 6. måned. Desuden bør gaspatroner opbevares, således at de placeres nedad. Ellers kan gaspatronen blive utæt og gå i stykker.



Vigtigt! Aktiver gaspatronen regelmæssigt!

Vær opmærksom på stelletts sliddele og almene tilstand. Udskift dele efter behov.

OBS! Vigtigt! Kontrollér jævnligt gaspatronens funktion! Ved rengøring af stel anvendes almindelige desinfektionsmidler. (miljøvenligt alternativ) Farve kode: RAL9010

15:2) Demontering/ skrotning

En defekt del eller produkt afmonteres og skrottes.
Delene skal sorteres efter materiale type.

Metal = ramme, mellemrør, rør, sæde- & ryggramme, kørebøjle m.m.
Hård plast = sæde- & rygdæl, bord, potte m.m.
Brændbart = betræk, polstring, hoftebælte, krydssele m.m.

15:3) Sammenfatning / efterkontrol:

- * Fortsæt kontinuerligt med at kontrollere diverse dele.
- * Kontrollér regelmæssigt at alle skruer er ordentligt spændte.
- * Kontrollér regelmæssigt slitage på seler og bæltepuder.
- * Såfremt seler eller bæltepuder ser slidte ud, bør disse skiftes.
- * Sørg for at sædet ikke er vinklet for langt frem, når barnet sidder i sædet.
- * Max brugervægt: 130 kg.

15:4) Kombinationer:

Zitzi CloZitt er et CE-mærket produkt, som kan kombineres med alt tilbehør, som beskrives i denne brugsvejledning. For øvrige kombinationer venligst kontakt Anatomic SITT.

15:5) Reservedele:

Zitzi CloZitt må kun forsynes med reservedele leveret af Anatomic SITT A/S.

15:6) Mærkning:

Zitzi CloZitt med tilbehør som beskrives i denne vejledning er et CE mærket produkt. Et unikt serienummer er placeret på det bagerste mellemrør. Serienumret skal angives ved al korrespondence vedrørende produktet.

15:7) Garanti:

1 år mod fabriktionsfejl, gælder fra købsdato. 2 års reklamationsret.

14:1) Anti-tip støtter

1. Bagerste del af ramme med hjul og anti-tip støtter
2. Skru hjulet med gaffel af.
3. Se billede
4. Se billede
5. Monter anti-tip støtten på rammen
6. Skru hjul og gaffel fast, således at skruen går gennem hullet i anti-tip støtten
7. Fastgør løst, så du kan justere anti-tip støtten
8. Juster anti-tip støtten, så det peger ret bagud, stram stopskruen
9. Spænd skruen, som holder hjulet og gafflen



3:1) Montering af Mellemrør/Sædedel:

Sædeenheten kan monteres i forskellige niveauer:

Montering af bagerste mellemrør:

Det bagerste mellemrør kan monteres i 6 forskellige højdeindstillinger. Denne justering kan udføres af to omgange:


- * Hvis sædeenhedens tiltning skal ændres.
- * Hvis fastgørelsesbøjlen til rygstammen kommer i karambolage med en anden fastgørelsesbøjle på rygstammen.

Montering af "sædeenheden":

Sædeenheten kan monteres i 2 forskellige højdeindstillinger.

Ved montering af mellemrøret, bør man tænke på:

- * Mellemrøret /sædedel skal drejes med 25 NM.
- * Gør sådan her, for at få venstre og højre rammedel vinkelrette:
- * Tag skuerne ud, se pos. A, billede 2.
- * Stil enheden på et plant gulv og påfør belastning på begge rammedele, så at alle hjul har kontakt med gulvet. (ved eksempelvis at sidde på rammen.)
- * Drej skruerne ved pos. A ud, billede 2 med 25 NM i udgangsposition.

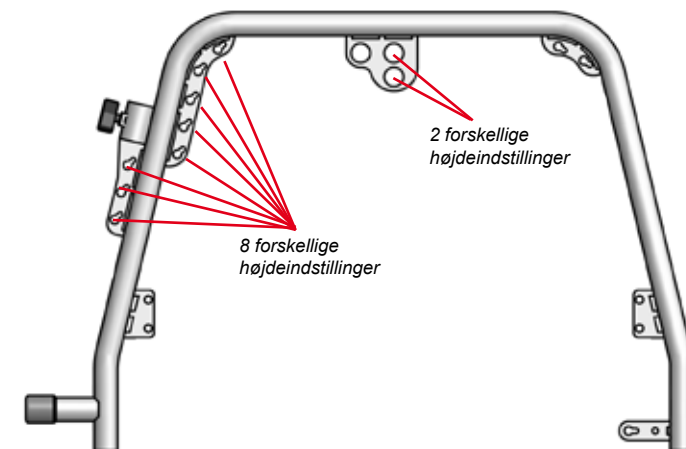

4:1) Tippepedal

CloZitt er udstyret med tippepedal for løft af forreste hjul.

For at løfte forreste hjul over f.eks. dørtrin: Træd på tippepedalen med foden og træk samtidig kørebøjlen mod dig.

4:2) Låsning af hjul

Tryk ned på bremsesystemet med foden for at låse hjulene. (Se billede.)

Vip bremsesystemet op, for at frigøre hjulet.

Tippepedal

Tryk ned på bremsesystemet for at låse hjulet.



4:3) Aftagelig kørebøjle

Ved behov kan kørebøjlen afmonteres.

- * Løsn skruerne, se pos.A.
- * Træk kørebøjlen lige op.

Kørebøjlen påvirker Zitzi CloZitts stabilitet. Den bør derfor ikke fjernes, med mindre den er i vejen, eller ved transport.

Pos. A



4:4) Justering, ryghøjde

- * Løsn unbraco skrue, se pos. A.
- * Justér til korrekt højde.
- * Spænd skrueerne.

OBS!
Er hovedet over ryglænet,
SKAL der altid anvendes
hovedstøtte.

Pos. A



13:1) Potte & stænkskjold

Der findes 2 forskellige størrelser potter & fæster, afhængig af hvilken størrelse CloZitt man har.

Montering af potte str. 1

Monter pottéfæstet med vinkelbeslaget.

Fastgør med vedlagte skruer.

Fæstet skal monteres, således at potten kan monteres fra siden.

Montering af potte str. 2

Pottéfæstet skrues fast med 2 skruer (A) og en krog (B)

Fastgør med vedlagte skruer.


Fæstet skal monteres, således at potten kan monteres fra siden.

Montering af stænkskjold (C)


Stænkskjoldet trykkes ned/monteres i forkanten af sædet, i midten.



Montering af potte str. 1

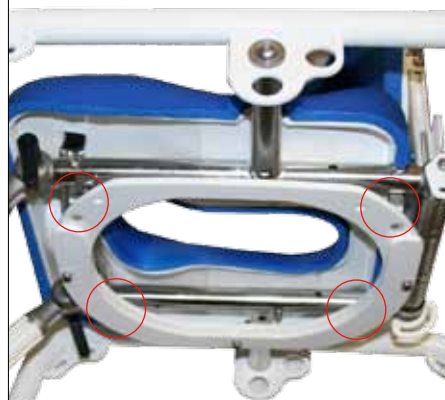

Montering af potte str. 2

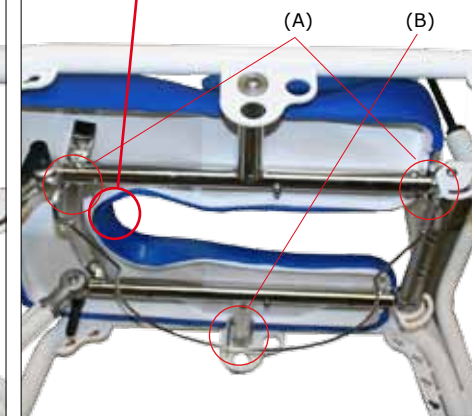

12:1) Multijusterbar ryg



Multijusterbar ryg


Zitzi CloZitt kan bestilles med en multijusterbar ryg ved behov for ekstra støtte og positioneringsmuligheder end standardryggen kan give.

Justering i højde:

- 1) Løsn skruerne.
- 2) Juster til ønskede højde.
- 3) Spænd skruerne.

Justering i bredde:


- 1) Løsn skruerne.
- 2) Juster til ønskede bredde.
- 3) Spænd skruerne.

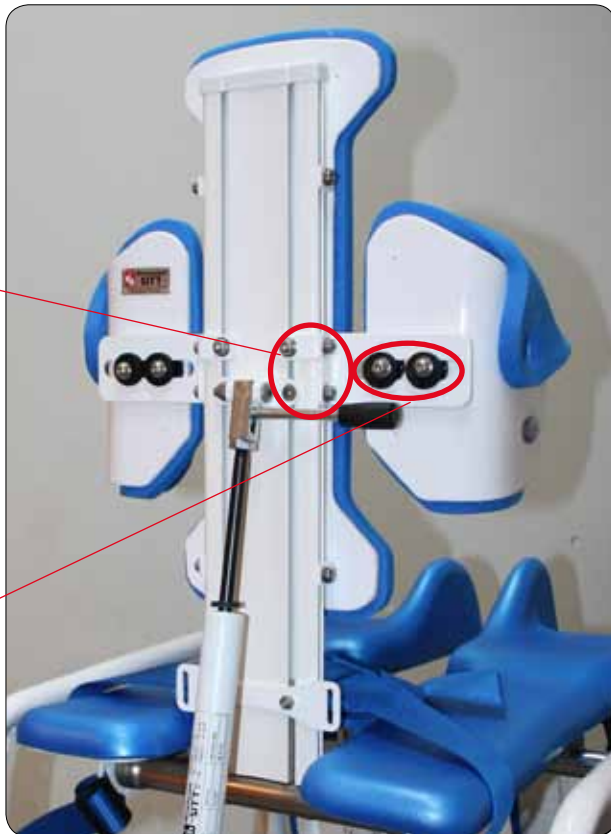

5:1) Tilt af sædeenhed

Aktivér gaspatronen ved at løfte eller trykke ned på håndtaget, se pos. A.

Justér til ønskede vinkel og slip derefter håndtaget.

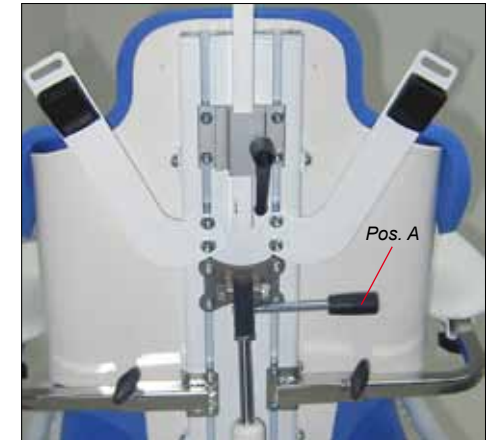

5:2) Vinkeljustering af ryglænet

- * Løsn unbraco skrue, se pos. A.
- * Justér til ønskede rygsvinkel.
- * Spænd skruerne.



Husk at efterspænde skruerne efter justering.



5:3) Montering af fodstøtte

- * Montering af fodstøtten, se billede.
- Løsn vingeskrue, se pos. A.

5:4) Justering af vinkel ved knæled

- * Løsn skruerne, se pos. B.
- * Justér til ønskede vinkel.
- * Tag skruerne ud.

Pos. B

Pos. A



6:2) Vinkeljustering, fodplade

Justering af vinkel ved fodled

- 1 - Juster vinklen ved at justere skruen, se position C.

Højdejustering af fodplade


- Løsn skruerne, position C & D.
- Juster til ønskede højde.
- Spænd skruerne.



6:3) Kugleledsadapter

Højdejustering af fodplade (A):

- Løsn skruerne, se pos. A
- Juster til ønskede højde.
- Spænd skruen.

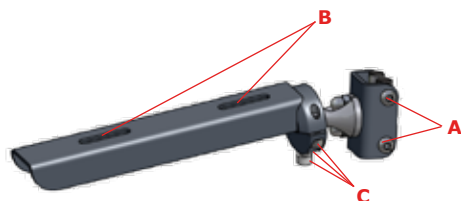

Justering af fodplade, dybdeled (B):

- Løsn skruen, se pos. B
- Juster til ønskede vinkel.
- Spænd skruen.

Justering (C):

- Løsn justeringskruerne (C), lige nok til at fodstøttet kan justeres med hånden.
- Juster til ønskede position. Spænd skruerne.

6:4) Montering/justering af fjedrende fodstøtte

Montering af fjedrende fodstøtte

Løsn endeaflutningen og før fodstøtten i sine spor.

Fjedring (C)


Skruer i position B bør altid være i sin laveste position for fuld fjedring.

Højdejustering (A & B)

Løsn skruerne, se position A og B

Vinkeljustering på fodstøtte (C)

Løsn skruer, se position C og vinkel fodstøtten til ønskede vinkel.

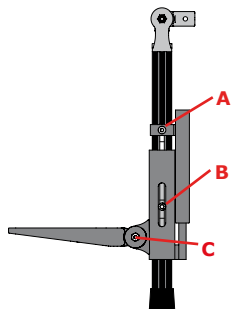


6:5) Montering / justering af Lægstøtte

- * Lægstøtten monteres se billede.
- * Kan justeres i højde og bredde.

- * Løsn unbracoskruen, se A eller B
- * Juster til ønskede position.
- * Spænd unbracoskruerne.

Pos. A - Justering i højde

Pos. B - Justering i bredde

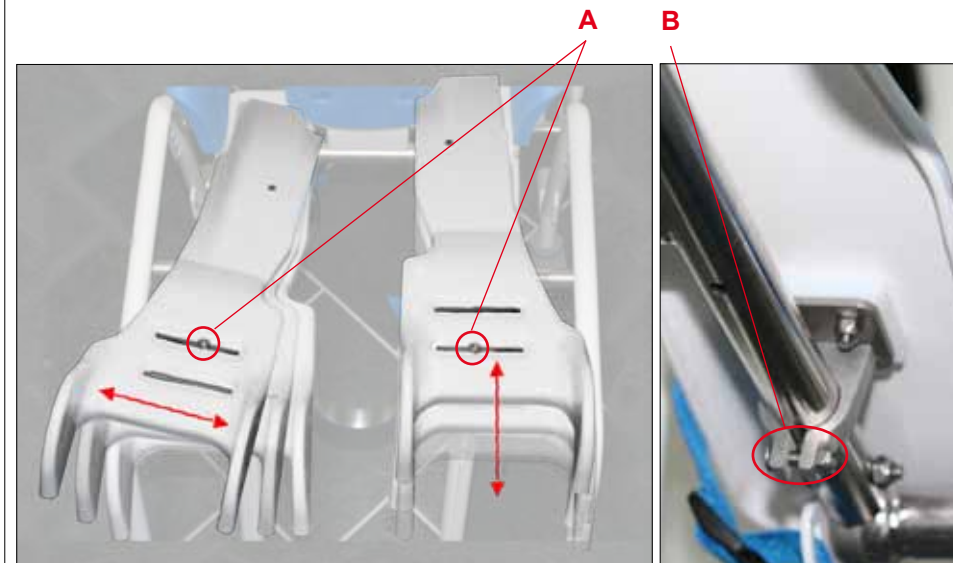

OBS Vær opmærksom på hvordan, låsebikkerne står, så de ikke hindrer monteringsmulighederne (Se billederne til venstre).

10:1) Montering af bord

- 1) Læg bordet på armlænspolstringerne.
- 2) Vrid monteringsbeslaget under armlæns-polstringen på plads, se billede. Beslaget skal vrides til det er indenfor undersiden af armlænspolstringen.



10:2) Justering af sædedel (starfish)



Justering, sædedel

Sædedybde, benlængdeforskel og abduktion af benene justers enkelt. For at kunne komme til skruerne, begynd med at fjerne betrækket. Sædedybde og benlængdeforskel kan justers 5 cm standard. Leveres med sædedybde 40 cm

For at justere sædedybde:

Sædedelen har to spor, hvor sædedybden kan forlænges. (Gælder sædedel 4)

Løsn skruerne A & B, så at sædedelene kan justeres med hånden.

OBS! Sikrer dig at du ikke skruer skruerne helt ud!

* Juster sædedelene, dette gøres enklest ved at holde hånden under sædedelene.

* Spænd skruerne, se pos. A & B

For at justere abduktion:

Løsn skruerne A & B, så at sædedelene kan justeres med hånden.

OBS! Sikrer dig at du ikke skruer skruerne helt ud!

* Juster sædedelene, dette gøres enklest ved at holde hånden under sædedelene.

* Spænd skruerne, se pos. A & B




7:1) Montering / justering af hovedstøtte

- * Fjern plastendeprofilen fra rygprofilen.
- * Montér hovedstøttebeslaget på rygprofilen, se pos. B.
- * Løsn skruerne, se pos. A. Løsn så meget, så det er muligt at justere med hånden.
- * Placér brugeren i sædet og justér til ønsket position.
- * Genmontér plastendeprofilen.

Hovedstøtten er enkel at afmontere:

- * Løsn vingeskruen og afmontér hovedstøtten, se pos. C.

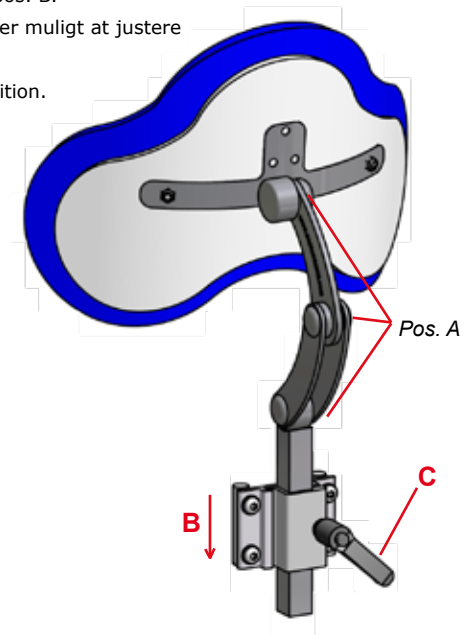

7:2) Montering, armlæn

Armlænene skal monteres på rygprofilen.


- * Montér armlænsbeslaget, se billede
- * Juster til ønsket højde.
- * Spænd skruerne, se pos. A.

7:3) Justering af armlænsbredde:

- * Løsn vingeskruen, se pos. B.
- * Juster til den ønskede bredde.
- * Spænd vingeskruen

7:4) Dybdejustering, armlæn:

- * Løsn unbracoskruen, se pos. C.
- * Justér til ønsket position.
- * Spænd unbracoskruen.

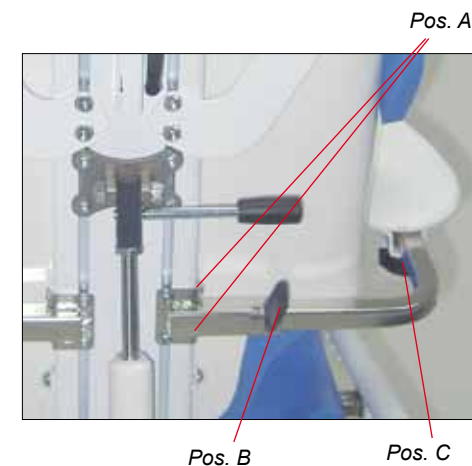

8:1) Montering / justering af hoftebælte

Montering:


- * Montér selen i respektive slidser, (to på hver side).
- OBS! selen til hoftebæltet skal monteres i de nedre slidser, se billede 1 & 2.

Justering:

- * Træk selen ud på begge sider af spændet for at få det centreret. (Se billede)
- * Juster bæltepuderne for at give optimal komfort.
- * Såfremt remmene er for lange, klippes det overflødig af og enderne brændes.



Billede 1

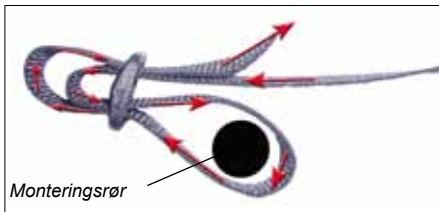

Montering med Tri-glide spænde.

8:2) Montering / Justering af seler (Krydssele, Sternumstøtte, Sternumvest, H-sele)


Montering:

Øvre beslag:

- * Fjern plastendeprofilen fra rygstammen.
- * Afmontér hovedstøttebeslaget.
- * Montér øvre fladjern til seler, se billede 1.
- * Åben spændet, se pos. B, træk selen igennem og lås spændet.

Nedre beslag til H-sele (Billede 2):

- Nedre beslag skal monteres, se billede 2.
- Selen skal også igennem samme beslag som hoftebæltet. Lås selen ved hjælp af "Tri-glide" spændet, se billede 4. Juster monteringsbeslaget efter behov.

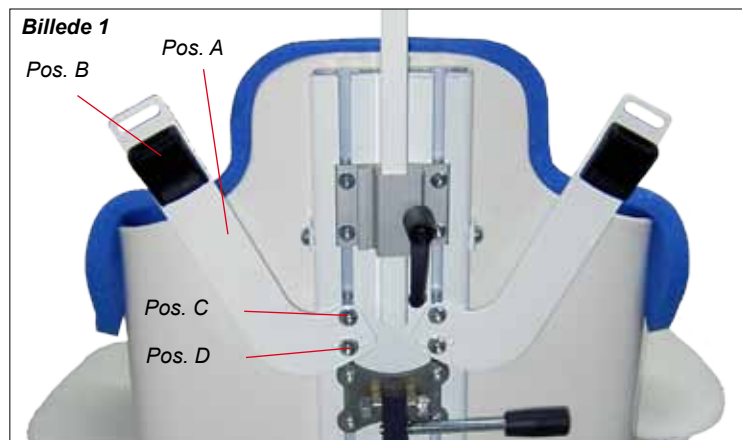

Billede 1

Nedre beslag til Krydssele, Sternumstøtte, Sternumvest (Billede 3)

Nedre beslag skal monteres, se billede 3.

Selen skal igennem samme beslag som hoftebæltet.

Lås båndet ved hjælp af "Tri-glide" spændet, se billede 4.

Justering:

Placér brugeren i sædet og løsn unbracoskruen, se pos. C & D, billede 1. Justér armene, således at trækretningen for de øvre fixpunkter er i samme højde som skulderpartiet.

- * Løsn skruen, se pos. C, billede 1.
- * Justér til ønskede bredde ved at vinkle fladjernet til højre eller venstre. (Der bør være tilstrækkelig plads ved halsen.)
- * Lås D- skruen.
- * Justér bæltepuderne for at give optimal komfort.


Efterkontrol:

- * Tjek at der er tilstrækkelig fri plads ved halsen.
- * Trykket på selen.
- * placeringen af bæltepuderne




Billede 2

Nedre monterings-slidser

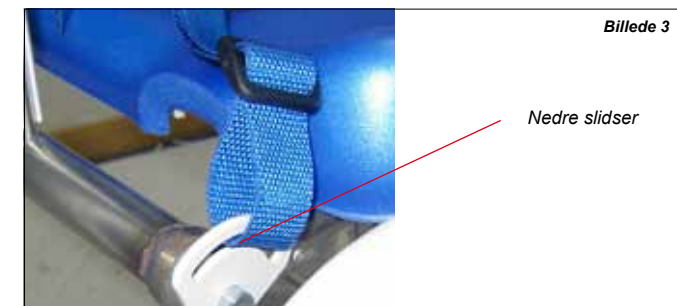

Billede 3

Nedre slidser

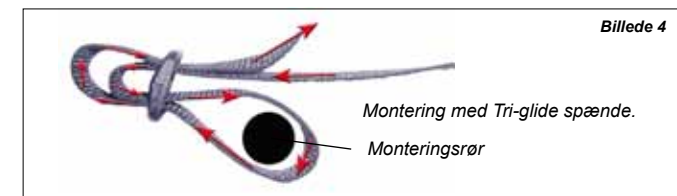

Billede 4

Montering med Tri-glide spænde.

Monteringsrør