


Liko Universalsejl, mod. 00, 02

Brugsanvisning

7DK160134-01

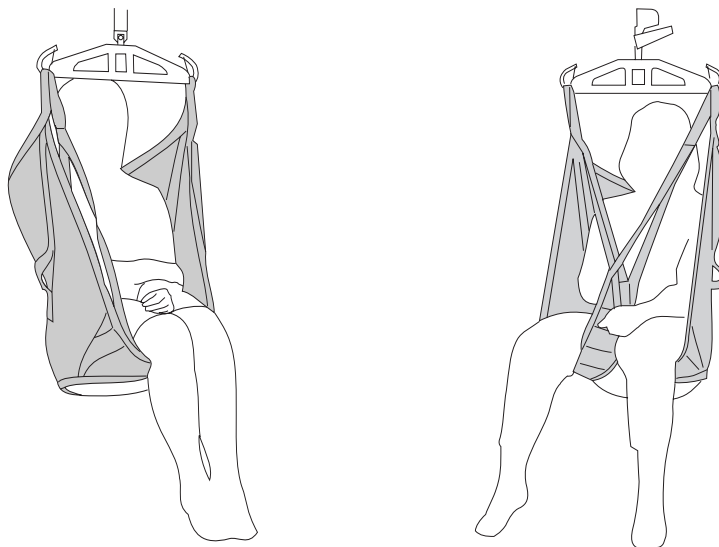

Liko Universalsejl

Liko Universalsejl er et løftesejl, som brugeren ikke sidder på. Det gør, at det er meget lettere at tage på og af. Liko Universalsejl er konstrueret for at tilpasse sig brugeren uden individuelle indstillinger.

Et korrekt afprøvet og omsorgsfuldt påsat Universalsejl giver brugeren en meget god følelse af trykthed og høj komfort. Universalsejlet giver støtte i ryggen og op til nakken. Armene holdes indenfor selen.

For større størrelser kan en kombination med Liko Universalåg 670 Twin være et godt valg.

Liko Universalsejl findes i flere forskellige størrelser. Det er vigtigt at vælge rigtig størrelse for at opnå største komfort og sikkerhed. Et for stort løftesejl øger risikoen for at glide ud af sejlet. Et for lille løftesejl bliver trangt i skridtet og kan give ubehag.

Liko Universalsejl findes i forskelligt materiale. Da brugeren sædvanligvis ikke bliver siddende i sejlet efter løftet, anbefales det i polyester. Dette materiale er meget slidstærkt og let at arbejde med, da det har lav friktion. Let at påføre og let at tage væk igen.

Liko Universalsejl findes også i bomuld samt i polyesternetvæv. Disse materialer anbefales for de, som lader sejlet blive i stolen efter løftet og helt enkelt ønsker et mere luftigt alternativ.

Til bad og brusebad findes et sejl, som er plastbelagt netvæv, hvor vandet løber hurtigt igennem og sejlet kan tørres af. Det tørrer hurtigere og køler ikke på samme måde, som et gennemfugtigt stykke tekstil ville gøre.

Løftebåndet er altid fremstillet af slidstærkt polyester og har stor sikkerhed.

Liko Universalsejl findes med benstøtter i flere forskellige udførelser. Sædvanligvis er benstøtterne afstivede. Afstivningen giver høj komfort, udjævner trykket og forhindrer at sejlet folder under låret. Det findes endog med blødpolstret benstøtter (syntetisk lammeskind). Denne udførelse er mest hensigtsmæssig til brugere, som er særlig trykfølsomme.

Liko Universalsejl med ekstra løftehøjde


Universalsejlet findes i en udførelse (mod. 02), som anbefales ved løft, hvor der er problemer med at få tilstrækkelig løftehøjde. Løfteøjerne er minimerede og siddestillingen er lidt mere bagudlænet i forhold til standardmodellen.

△ er en advarselstrekant for momenter, hvor særlig sikkerhed bør iagttages.

I denne tekst kaldes den, som bliver løftet for brugeren og den, som hjælper for medhjælperen.

**⚠ Læs brugsanvisning på både lift og løftesejl inden anvendelse.
Brugsanvisninger kan downloades gratis på www.liko.com.**


Liko Universalsejl

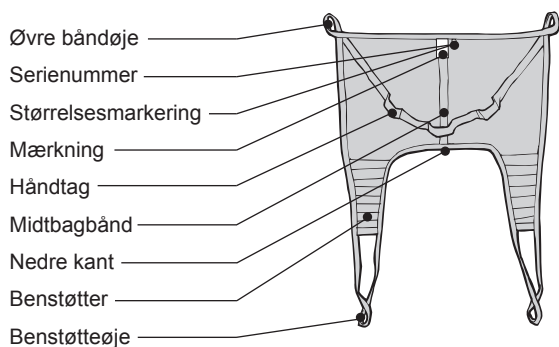

△ Tænk på!

- Om der er behov for én eller flere hjælpere, bedømmes for hvert tilfælde.
- Planlæg løftesituationen inden løft, så det sker så trygt og smidigt som muligt.
- På trods af at Likos løfteåg er forsynet med afkrøgningsbeskyttelse, skal særlig opmærksomhed iagttages: Det er vigtigt, inden brugeren løftes fra underlaget, men når båndene er strakt ordentligt, at kontrollere at stropperne er korrekt hængt på løfteåget.
- Løft aldrig brugeren højere fra underlaget end nødvendigt for løftets gennemførelse.
- Efterlad aldrig en bruger uden opsyn i en løftesituation.
- Check at hjulene på kørestol, seng, briks etc. er låste under arbejdsmomentet.


Løft fra siddende

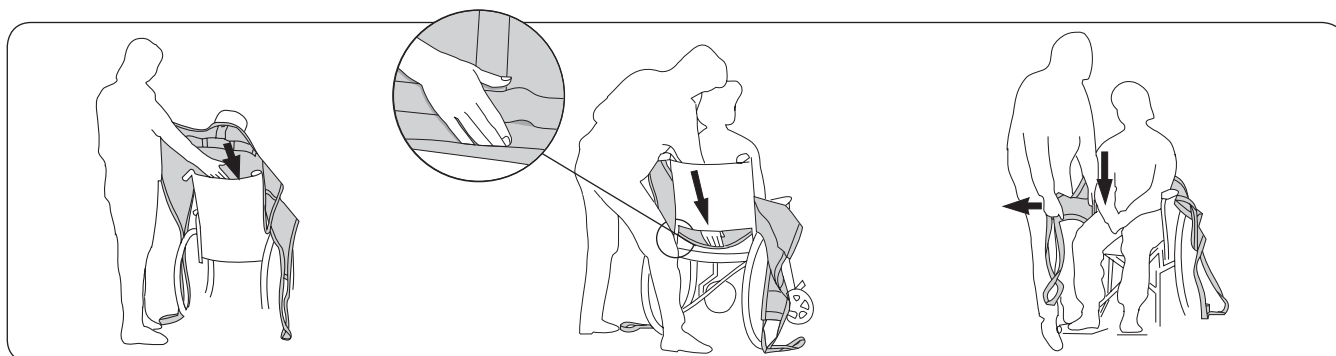

Placer løftesejlet bag brugerens ryg og med mærkningen udad. Bøj underkanten op rundt om dine fingerspidser for at lettere at styre løftesejlet på plads.


Ved hjælp af håndfladen trykkes løftesejlets nedre kant ned til brugerens haleben. **Dette er meget vigtigt.** Rigtig placering lettes, hvis brugeren lænes lidt fremad.

Træk benstøtterne ud langs lårets yderside. **Tips:** Med din håndflade mellem krop og løftesejl fører du benstøtternes nederste kant ned til sædet. Træk samtidig benstøtterne fremad med den anden hånd for at strække det ud.

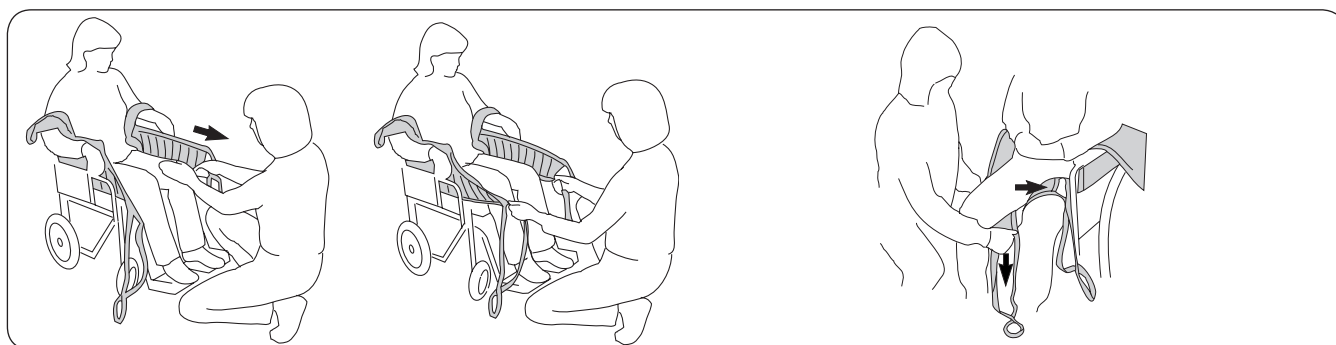

Tips: Med et let modhold på knæskallen kan man trække benstøtterne frem så eventuelle folder bagtil gattes ud. Kontroller at begge benstøtter når lige langt frem.

Før løftesejlets benstøtter ind under det respektive lår. Vær opmærksom på, at stoffet ligger glat under lårbenet, og at det når ordentlig rundt om benet.

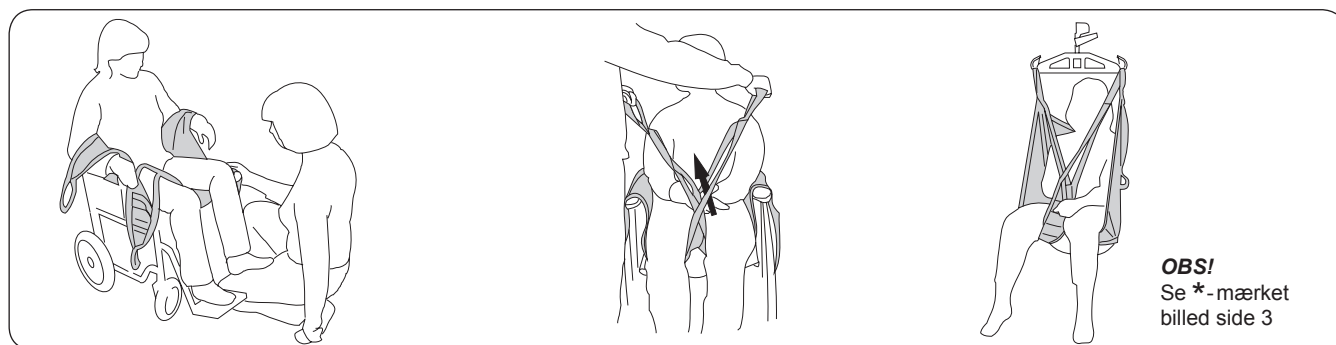

Tips: Det er lettere at påføre benstøtterne, hvis brugerens ben aflastes fra sædet. Det kan ske ved at placere fødderne på en fodstøtte eller på dit eget ben, som billedet viser.


Benstøtterne påføres, som det plejer, så den ene benstøtte trædes gennem den anden, inden de hænges på løfteåget.

Hæng de øvre båndøjer på løfteåget, derefter benstøtteøjerne. Armene kan holdes enten indenfor eller udenfor løftesejlet.

OBS!
Se *-mærket
billed side 3

Løft fra liggende

Oftest er det lettest at påføre løftesejlet, hvis brugeren ligger ned horisontalt. I visse tilfælde kan det være lettest i stedet at påføre løftesejlet, når brugeren sidder op i sengen. For løft fra liggende uden mulighed for at hæve hovedgærdet anbefales Liko Originalsejl med Høj Ryg model 20,21, som giver hovedstøtte.

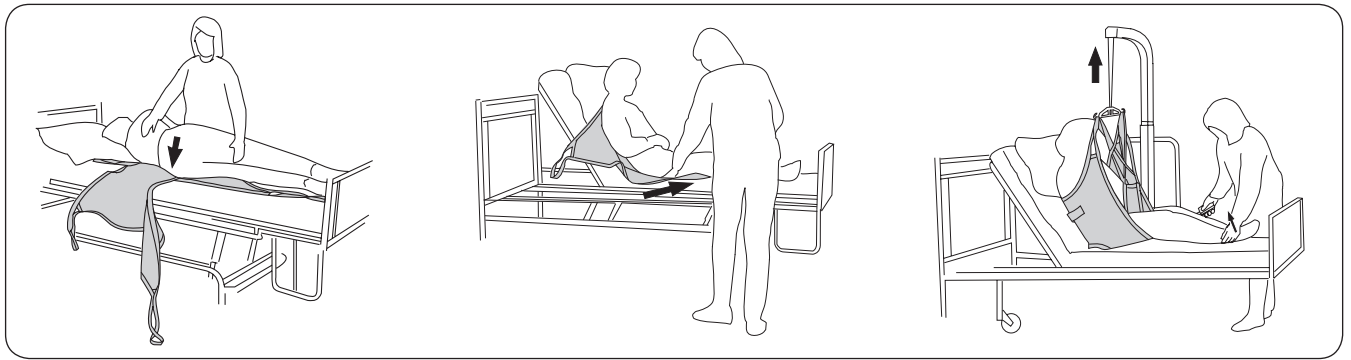


Vend brugeren mod dig for at forhindre at hun eller han falder ud af sengen. Placer løftesejlets kant så langt inde under brugeren som muligt og med den nederste kant **i niveau med halebenet**. Læg løftesejlet i et par buk, så dets "midtbagbånd" svarer til brugerens ryggrad, når brugeren bagefter forsigtig vendes tilbage. Lirk løftesejlet forsigtigt ud på den anden side. Løft rygstøtten op.

Læg benstøtterne på plads under lårene. Dette lettes, hvis brugeren bøjer benene. Vær opmærksom på, at stoffet ligger glat, og at det når helt rundt om benet. Benstøtterne kan påføres på forskellige måder, som beskrives nedenfor.

Påfør først de øvre bånddøjer på løfteåget, og så de nedre. Løft.

En anden metode at placere løftesejlet: Hæv sengens hovedgærde bag brugeren. Læg løftesejlet på sengen med mærkningen nedad. Før løftesejlet ned bag brugerens ryg så langt, at den nederste kant **når ned til halebenet**. Placering lettes, hvis brugeren læner sig fremad.

Forskellige måder at påføre benstøtter

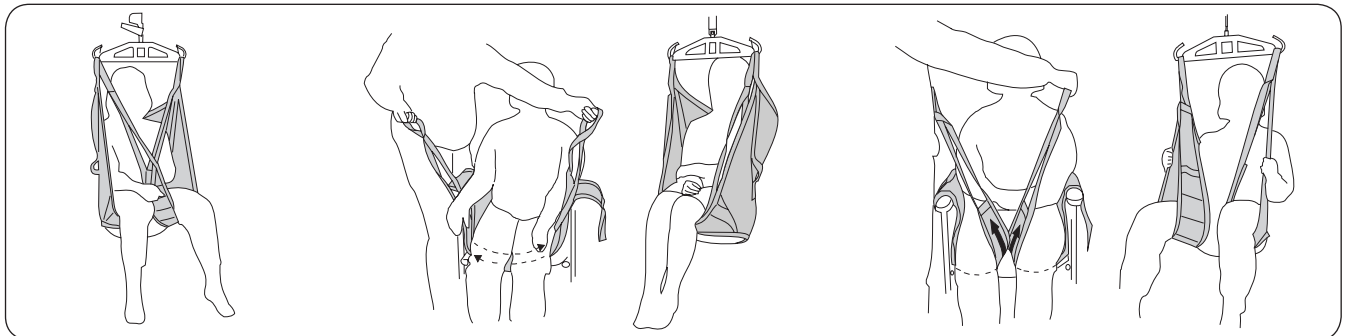


Benstøtter krydses. Den mest almindelige måde at påføre løftesejlet på.

Alternativ: Begge benstøtter under begge ben. Denne løsning bruges ved f.eks. løft af brugere med amputerede ben. Nogle gange behøves forlængerstropper til benstøtterne ved denne metode.

Alternativ: Hvert ben ophængt for sig selv til åget. Dette kan være egnet ved løft af brugere med sart underliv.
⚠ Øget risiko for at glide ud.

Brugeren sidder ikke godt – hvad har vi gjort forkert?

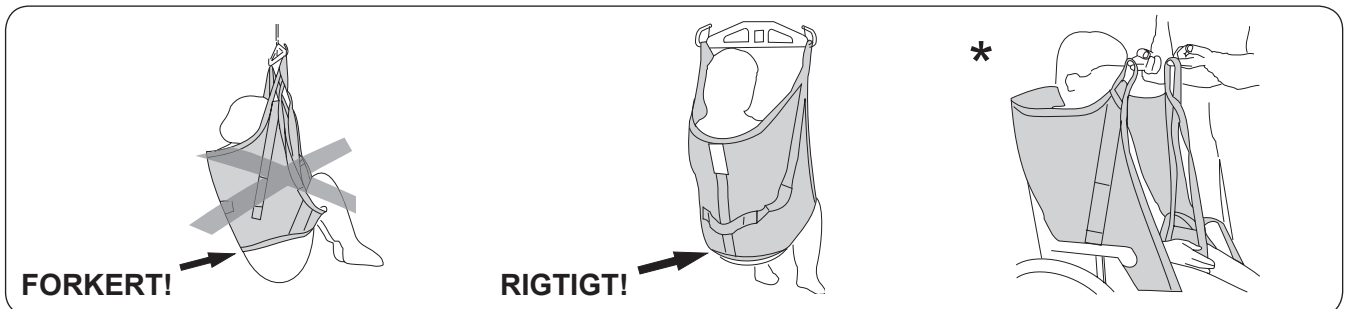


Bagdelen hænger nedad. Fare for at glide ud. Løftesejlets størrelse kan være for stort. Det kan også være, fordi løftesejlet ikke er blevet trukket nok ned i ryggen ved påføringen. Kontroller inden løftet begynder, at den nederste kant er udglattet, og at stoffet når ordentlig omkring benene.

Løftesejlets nedre kant ligger ved halebenet. Benstøtterne ligger godt under benene.

Tips: Kontroller at alle bånddøjer er lige lange, dvs. når lige højt, når de strækkes før løft. Hvis ikke, juster løftesejlets placering.

Løft til stol

Ved placering i stol er det vigtigt, at brugeren kommer tilstrækkeligt langt tilbage i kørestolen for at sidde godt. Der findes flere måder at gøre dette.

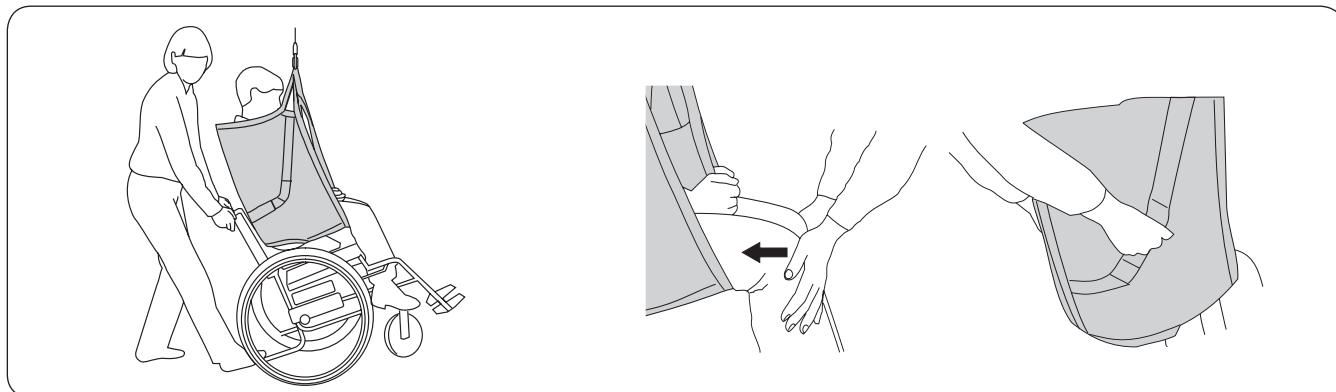


For at lette placeringen i kørestolen kan man vippe stolen bagud under sænkning. Lad bagdelen glide ned langs med rygstøtten det sidste stykke. Kontroller kørestolens position med foden på tip støtten.

Alternativ: Tryk let på brugerens knæ under sænkningen, så bagdelen styres ind mod ryggen af kørestolen. Hvis der er håndtag på løftesejlet kan man styre med disse.

△ For stor belastning på håndtagene kan resultere i, at sejlet brister. Løft ikke i håndtagene!

Fjern løftesejlet således:

Vi anbefaler, at løftesejlet tages væk efter afsluttet løft. Hvis man, af én eller anden grund vil lade løftesejlet blive i stolen efter løftet, anbefaler vi et sejl i bomuld eller polyesternetæv.

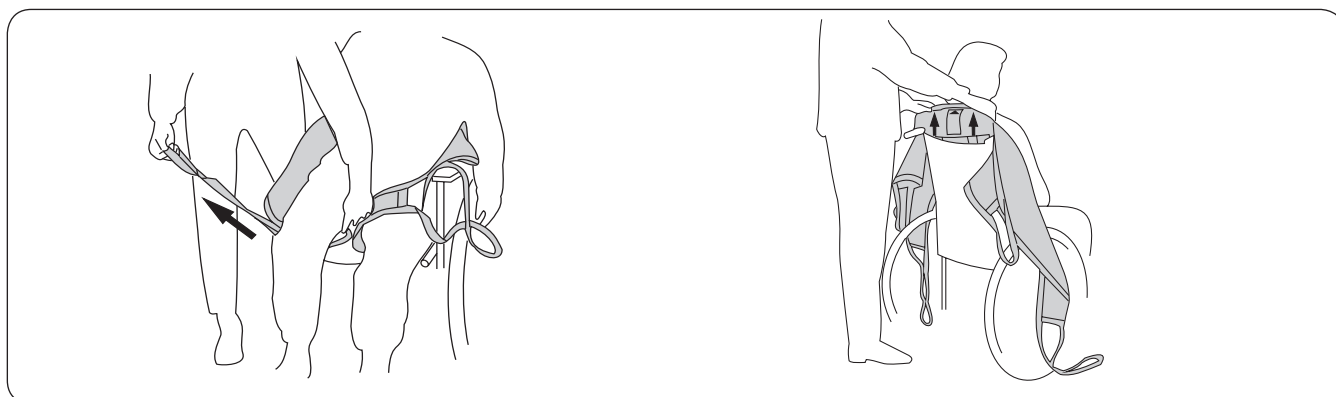

Tag forsigtig benstøtterne væk. Den blideste måde at gøre dette er at trække dem væk under stofdelen.

Fjern løftesejlet ved forsigtigt at trække det opad.

Løft til liggende



Før brugeren ind over sengen og hæv hovedgærdet for at få den bedste komfort.

Benstøtterne tages væk, ved at man trækker båndøjerne ud under stofdelen. Dette lettes, hvis brugeren bukker benene.

Fjern løftesejlet ved forsigtigt at trække det opad.


Løft til/fra toilet

I Likos sortiment findes flere andre løftesejl, som kan bruges til løft til/fra toilet, f.eks. Likos Toiletsejl, Liko Hygiejnevest m.fl.

Løft til toilet med Universalsejl – ”Trussetricket”

Denne metode anbefales ved løft til toilet. Den giver mulighed for at fjerne underbenklæder og ble under selve løftet. Man slipper for løftmomentet til/fra sengen, hvor af- og påklædning ellers kunne ske.


Metodens forudsætninger: Siddende kvinde med kjole/nederdel, som hun ikke sidder på. I denne beskrivelse har vi valgt at vise billeder uden kjolen for tydelighedens skyld.

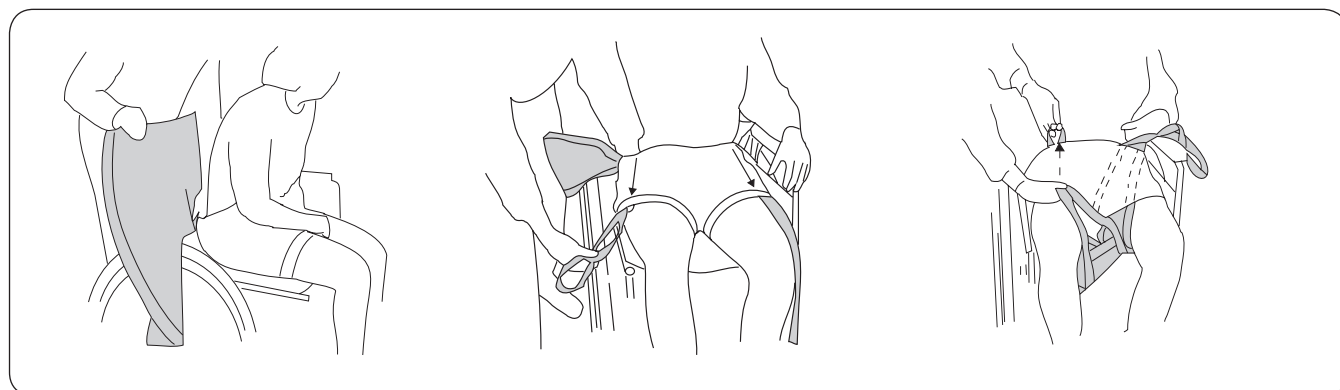

Læn brugeren fremad, så underbenklæderne kan føres ned mod stolesædet. Før løftesejlet til halebenet indenfor trussen og eventuel ble.

Træk benstøtterne frem indenfor trussen.


Påfør benstøtterne under benene. Vær opmærksom på, at stoffet når hele vejen rundt om benet. Træk benstøtterne tilbage opad under trussen.

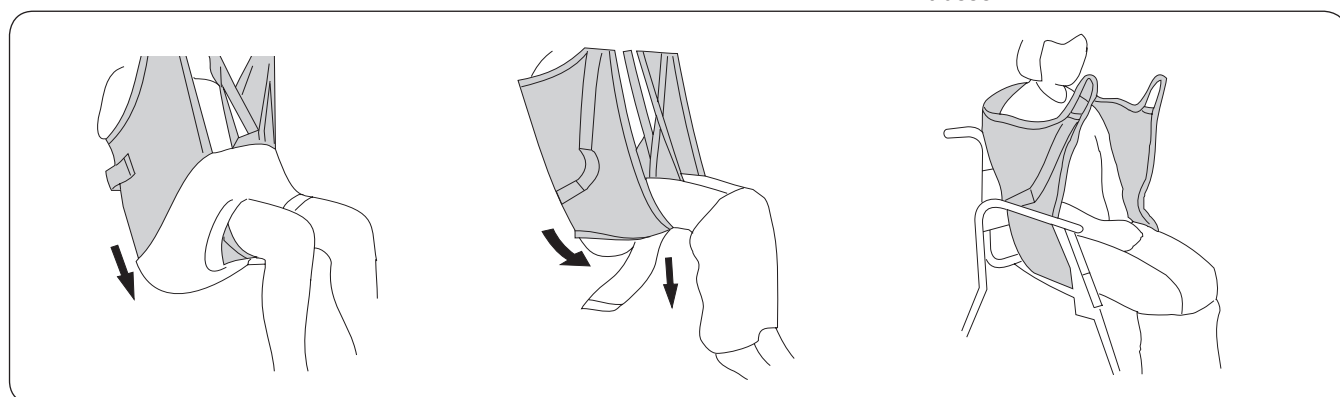

Påsæt løftebåndene til åget. Løft brugeren. Træk trussen ned.

Eventuel ble kan fjernes nu eller når brugeren sidder på toiletstolen.

Nedsænk toilettet eller den fritstående toiletstol. Afkrog benstøtteøjerne fra løfteåget. Bøj benstøtterne væk.

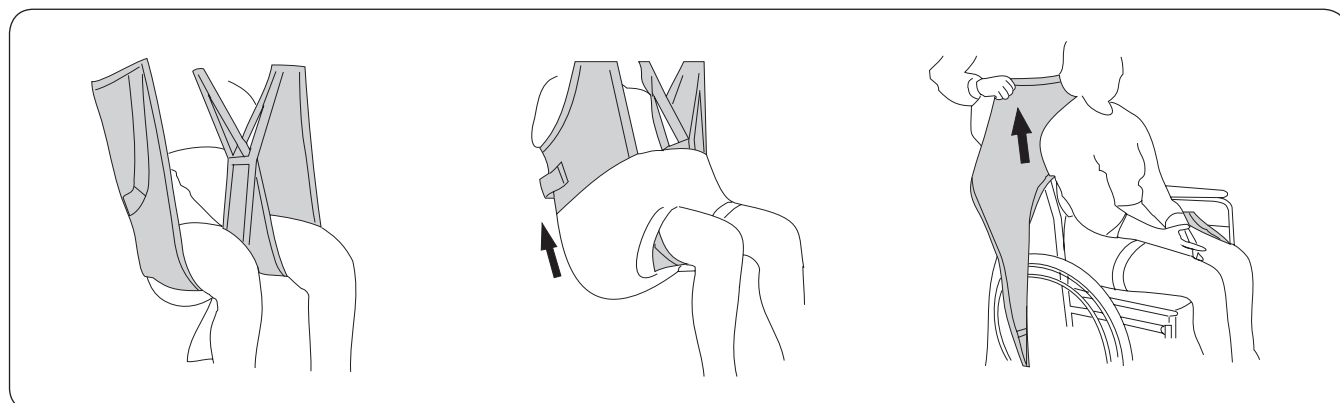


Efter afsluttet toiletbesøg: Påfør igen løftbåndet til åget. Løft. Eventuel ble placeres indenfor de krydsede benstøtter.

Træk trusserne op udenpå løftesejlet. Sænk brugeren.

Fjern og tag forsigtigt benstøtterne af, derefter båndøjerne. Træk løftesejlet opad, så det fjernes.

Oversigt Liko Universalsejl, mod. 00, 02

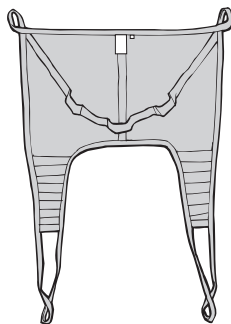

Artikel	Art. Nr.	Størrelse	Personvægt*
Liko Universalsejl	3500 -- 4	S Small	35-55 kg
Liko Universalsejl	3500 -- 5	M Medium	50-90 kg
Liko Universalsejl	3500 -- 6	L Large	80-120 kg
Liko Universalsejl	3500 -- 7	XL Extra Large	110-200 kg
Liko Universalsejl m. ekstra løftehøjde	3502 -- 5	M Medium	50-90 kg
Liko Universalsejl m. ekstra løftehøjde	3502 -- 6	L Large	80-120 kg

*OBS! Den angivne personvægt er kun vejledende – afvigelser kan forekomme.

For stor størrelse medfører risiko for at glide ud. For lille størrelse kan medføre, at benstøtterne skærer i skridtet og giver ubehag.

Likos løftesejl er godkendt til 200 kg maxlast eller mere, se produktmærkningen.

3500 -- 5

1 Polyester 2 Bomuld 3 Polyesternetvæv 4 Plastbelagt netvæv som kan aftørres og kan sprittes af

0 Uden afstivning eller polstring
1 Afstivede benstøtter
2 Polstrede med syntetisk lammeskind i siddedelen.

Bestillingseksempel: Varenr. 3500115
Liko Universalsejl, polyester, afstivede benstøtter, medium

Vaskeanvisning: Tørretumbling frarådes.

Læs altid vaskeanvisningen på løftesejlets mærkning før vask!

Anbefalede kombinationer med Liko Universalsejl og Likos løfteåg:	Løfteåg									
	Small åg 350	Universålg 350	Standard 450	Universålg 450	Universålg 670 *	Bredt åg 670	Univ. 670 Twin	Firpunktsbøjle	Krydsåg 450	Krydsåg 670
Universalsejl, S	2	2	1	1	2	2	2	1**	1	
Universalsejl, M	2	2	1	1	2	1	1	1**	1	1
Universalsejl, L	3	3	1	1	2	1	1	2**	2**	1
Universalsejl, XL	3	3	2	2	2	1	1	2**		1
Universalsejl m. ekstra løftehøjde, M	2	2	1	1	2	1	1	1**	1**	3
Universalsejl m. ekstra løftehøjde, L	3	3	1	1	2	1	1	2**	2**	3

Forklaring:
+1 Bedst
1 Anbefales
2 Acceptabelt
3 Frarådes
4 U hensigtsmæssigt

* Benstøtterne skal overlappes hinanden under benene, ikke krydses foran kroppen.

** Hovedstøtte, varenr. 1000-3551115 anbefales.

CE Medicinteknisk klasse I produkt

Liko Universalsejl er testet af godkendt testinstitut og opfylder alle krav i henhold til MDD klasse 1 produkter.

Det opfylder også alle krav i henhold til harmoniseret standard EN ISO 10535.

Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbeholder os ret til produktændringer uden forudgående varsel. Kontakt din Liko repræsentant for opdatering, information og råd.

⚠️ Vigtigt!

Løft og forflytning af en person indebærer altid en vis risiko. Læs derfor brugsanvisningen til både lift og lifttilbehør grundigt. Det er vigtigt, at du forstår indholdet i brugsanvisningen helt. Kun velinformerede personale bør anvende udstyret.

Kontrollér, at løftetilbehøret passer til den lift, der anvendes. Vær forsigtig og omhyggelig ved anvendelsen.

Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed.

Du skal være informeret om dennes muligheder for at håndtere løftesituationen.

Kontrollér løftesejlet med regelmæssige mellemrum, især efter vask. Se efter slitage eller skader på sømme, stof og øjestropper. Brug ikke beskadiget lifttilbehør.

Kontakt producenten/leverandøren, hvis du er i tvivl om noget. For kombinationer med lifte af andre fabrikater end Liko kontakt leverandøren.

Liko

www.liko.com

Fabrikant:

Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

Forhandler i Danmark:

Botved Plejeudstyr A/S
Nørrelundvej 5
2730 Herlev
Tlf: 80373737
Fax: 70203737
info@botved.dk

