

# Brugsanvisning Kowsky albuestokke med Derby håndgreb



## Indstilling:

Indstil albuestokken til den ønskede højde

- 1) Træk albuestokkens låseclips **A** ud
- 2) Træk/skub det forlængede underrør, indtil den ønskede længde nås
- 3) Sæt albuestokkens låseclips i igen - kontrollér at låseclipsen er forsvarligt og korrekt anbragt



## Anti-click muffe:

For at undgå click-lyde ved brug strammes muffen **B**



## Vedligeholdelse:

Kontrollér regelmæssigt låseclips **A** og dupsko **C** for skader - udskift hvis nødvendigt

Kontrollér regelmæssigt håndtagsskruen - stram efter hvis nødvendigt

Rengøring kan foretages med alle gængse- eller med ikke ætsende desinfektionsmidler såsom hospitalssprit eller Terralin og lignende



**Maks. brugervægt: 140 kg.**