


Liko Comfortvest, mod. 95

Brugsanvisning

7DK160144-01

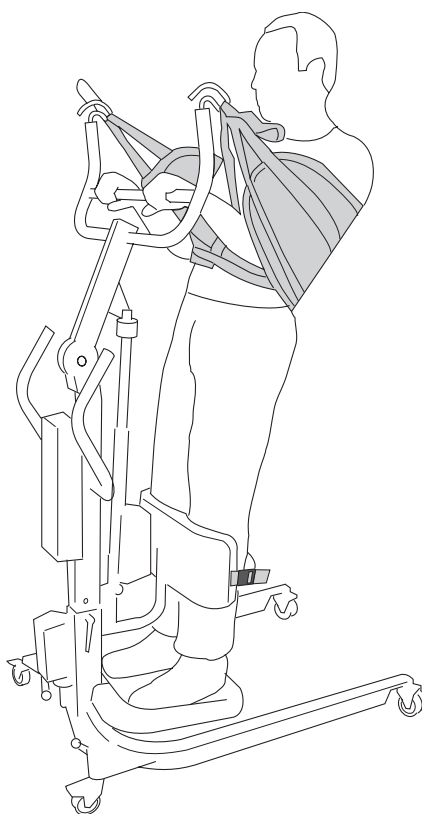

Liko Comfortvest

Liko Comfortvesten er en løftevest, som er unik, når det gælder sikkerhed, form og funktion. Comfortvesten løfter bag ryggen og uden på armene. Indersiden er beklædt med et materiale, som modvirker, at kroppen glider. Liko Comfortvesten fås i forskellige størrelser.


Det fastsyede taljebælte modvirker glidning og bidrager til sikkerheden ved at mindske risikoen for, at brugeren kan glide ud af løftevesten. Princippet går ud på, at vi kombinerer to løfteøjer på hver ophængningskrog. Liko Comfortvesten er beregnet til brug i kombination med Sabina ståliften med Comfortåg (600 mm).

△ er en advarselstrekant til situationer, hvor du skal være særlig opmærksom.

I brugsanvisningen kaldes den, der løftes, for brugeren, og den, der hjælper, for medhjælperen.

△ Læs brugsanvisning på både lift og løftesejl inden anvendelse. Brugsanvisninger kan downloades gratis på www.liko.com.

Beskrivelse af Liko Comfortvest

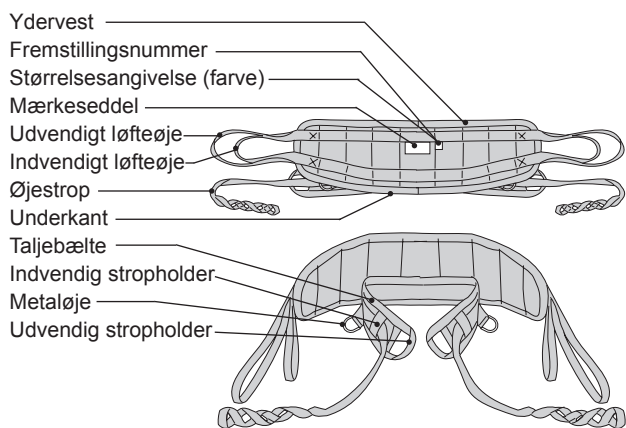

△ Tænk på!

- Om der er behov for én eller flere hjælpere, bedømmes for hvert tilfælde.
- Planlæg løftesituationen inden løft, så det sker så trygt og smidigt som muligt.
- På trods af at Likos løfteåg er forsynet med afkrogningsbeskyttelse, skal særlig opmærksomhed iagttages: Det er vigtigt, inden brugeren løftes fra underlaget, men når båndene er strakt ordentligt, at kontrollere at stropene er korrekt hængt på løfteåget.
- Løft aldrig brugeren højere fra underlaget end nødvendigt for løftets gennemførelse.
- Efterlad aldrig en bruger uden opsyn i en løftesituation.
- Check at hjulene på kørestol, seng, briks etc. er låste under arbejdsmomentet.

Beskrivelse af løfteøjernes funktion

A: Ydervestens løfteøjer

Ydervesten har to løfteøjer: et udvendigt og et indvendigt, som gør den mere fleksibel at anvende. Generelt anbefales det at sætte krogen i det indvendige løfteøje for at få den mest opretstående stilling. Det udvendige løfteøje anvendes, når brugers størrelse kræver det, eller når brugeren er lille i forhold til højden på Sabinas ophængningskroge. Hvis du vælger det indvendige løfteøje, anbefaler vi, at også det udvendige løfteøje hænges på krogen. Så har du en bedre visuel kontrol over løfteøjerne.




A:1 Ophængning i ydervestens udvendige løfteøje giver brugeren større afstand til liften og gør, at den ikke løftes så højt.

A:2 Ophængning i ydervestens indvendige løfteøje medfører, at brugeren kommer nærmere liften og løftes højere op.

B: Øjestropp

Øjestropperne giver mulighed for, at man kan stramme mere eller mindre ind rundt om taljen alt efter, hvilke af disse øjer, der kobles på Sabina stålliftens ophængningskroge. Hvis øjestropperne ikke er lange nok, kan de forlænges med Liko forlængerøjer.

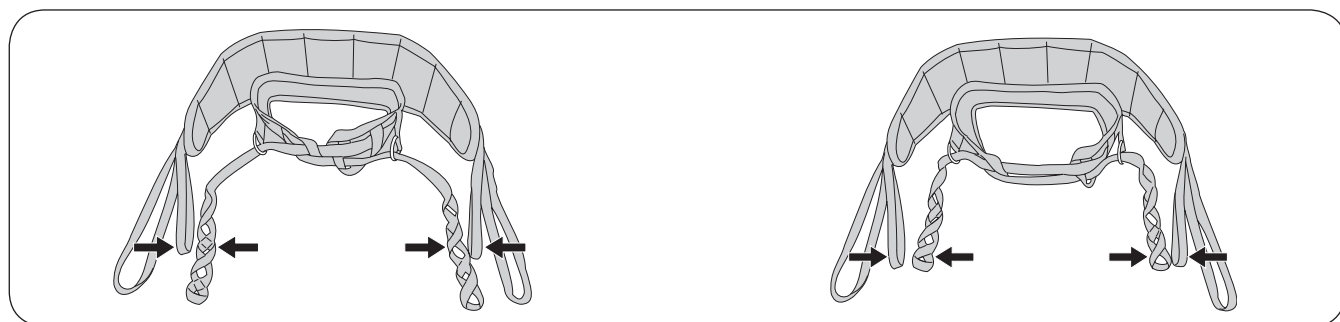


B:1 Det indvendige øje strammer mere til.

B:2 Det udvendige øje strammer mindre til.


Når både ydervestens løfteøjer og øjestropperne er koblet på Sabina stålliftens ophængningskroge under et løft, spændes vesten kun rundt om kroppen, så længe øjestropperne på ydervesten er slækkede. Når løfteøjerne er spændte, aflaster de øjestropperne, så tilstramningen ophører.

Øjeclips

Praktisk tilbehør til mærkning af de øjer, som er afprøvet til en bestemt person. Det gør det nemmere for medhjælperne at vælge det rigtige øje at hægte på løfteåget.

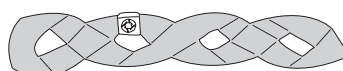


Forskellige måder at fastgøre øjestropperne

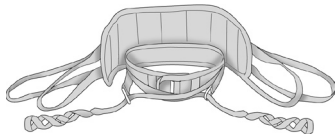


Alt A: Til meget små brugere

Træk øjestropperne gennem de indvendige stropholdere, inden de trækkes gennem metaløjernerne. Det giver mest mulig tilstramning.

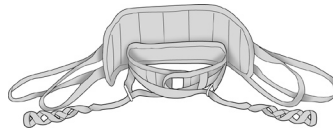

Alt B: Mellestilling

Træk kun den ene øjestrop gennem den indvendige stropholder. Kryds derefter øjestropperne og træk dem gennem metaløjernerne.

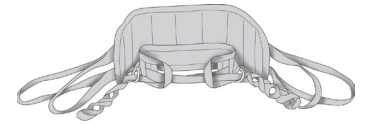

Alt C: Til større vidde

Lad øjestropperne gå gennem både de indvendige og begge udvendige stropholdere, før de trækkes gennem metaløjernerne.


Aktivt løft i Sabina stålift med Liko Comfortvest

1.




1. Før Comfortvesten ned bag brugers ryg til taljehøjde. Mærkesedlen placeres udad. Taljebæltets underkant skal vende ned mod taljen og anbringes tættest mod kroppen. Armene skal hænge uden på vesten og taljebæltet.

2.

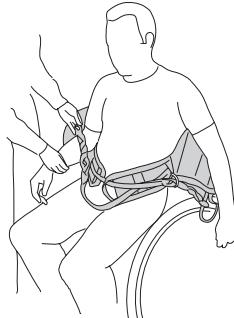


2. Kryds øjestropperne over hinanden, og før dem ind gennem metaløjernerne på den modsatte side. Se andre monteringsmetoder og -alternativer i beskrivelsen ovenfor.

3.

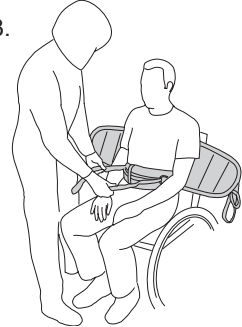

3. Træk øjestropperne frem, og kontrollér, hvordan de strammer til. Hvis taljebæltet ikke strammes helt til, justeres øjestroppernes placering.

4.

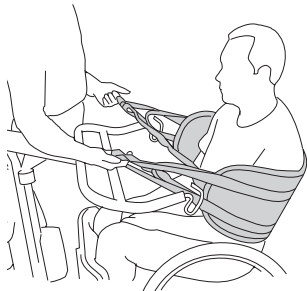

4. Vurdér om løfteøjernerne er passende, før de sættes på krogene ved at trække (skråt fremad/udad) i ydervestens løfteøjjer.


Se beskrivelse af løfteøjernerne på side 2, B: Øjestrop.

Prøv at finde en passende tilstramning rundt om taljen ved at vælge en kombination, hvor løfteøjjer og øjestropper har samme spænding under tilspænding/løft.

Kør Sabina ståliften frem, tilpas bredden på underdelen, så fødderne kan anbringes midt på fodpladen. Brugers underben skal være parallelle mod underbensstøtten. Justér støttens højde og dybde i forhold til underbenene, så den støtter lige under knæene. Sæt stroppen i, og spænd den fast om læggen.

Nu er de allerede afprøvede placeringer af øjestropperne og løfteøjernerne klar til at blive hængt på løfteågerne.


5.

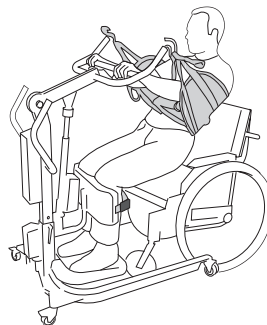

5. Løftning. Kontrollér løftebevægelsen ved hjælp af kontrolknapper op/ned. Der er to hastigheder. Hvis det er muligt, skal brugeren selv hjælpe aktivt til ved at gribe fat i håndtagene på løfteåget og trække sig op.

Tips! Vi anbefaler, at brugeren læner overkroppen tilbage, når der strammes til, for at kompensere for den svage strækmuskulatur i underkroppen. Det understøtter løftet, øger komforten og modvirker, at vesten glider (op).

6.

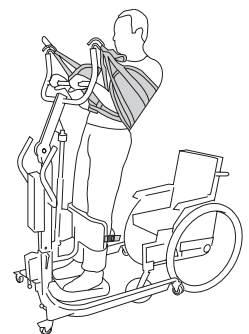

6. Hvor højt personen skal løftes, afgøres i hvert enkelt tilfælde. Det højeste mulige løft reguleres ved hjælp af:

- Højdeindstillingen af Sabina ståliften i løftebenet i underdelen. Se brugsanvisningen til din Sabina stålift.
- Valget mellem det indvendige og det udvendige løfteøjje på ydervesten. Se side 2, A: Ydervestens løfteøjjer.

Oversigt over Liko Comfortvest


Produkt	Varenr.	Størrelse	Personvægt*
Liko Comfortvest	3595414	Small	< 60 kg
Liko Comfortvest	3595415	Medium	50-80 kg
Liko Comfortvest	3595416	Large	70-110 kg
Liko Comfortvest	3595417	Extra Large	> 100 kg

* NB! Den angivne personvægt er kun vejledende – afvigelser kan forekomme.

Likos løftesejl er godkendt til en vægt på maks. 200 kg eller mere, se produktmærkningen.

Måletabel (cm)	A	B	C	D	E
Small	90	80	155	220	55
Medium	90	80	155	220	70
Large	110	105	180	240	85
Extra Large	110	120	180	240	100

De angivne mål er kun vejledende - afvigelser forekommer.

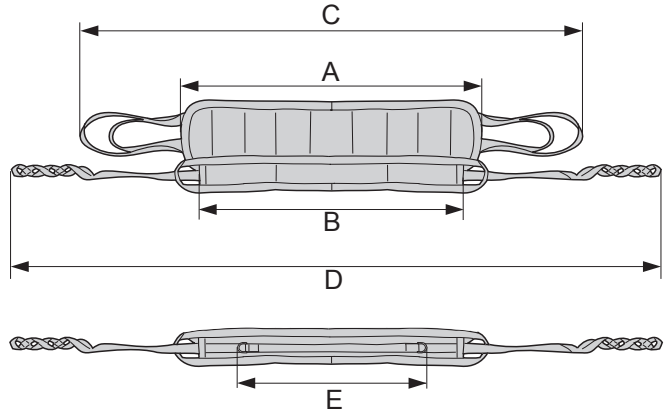

Vaskeanvisning:   Tørretumbling frarådes.

Læs altid vaskeanvisningen på løftesejlets mærkeseddel inden vask!

Liko Comfortvesten er udelukkende beregnet til brug i kombination med Liko Sabina ståliften. Vi anbefaler Sabina med Comfortåg (600 mm).

⚠ Forkert fastgørelse kan forårsage slitage på de indvendige båndløg, hvorved de brister. Læs derfor de forskellige monteringsalternativer på side 3.

CE Medicinteknisk klasse I-produkt

Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbeholder os ret til produktændringer uden forudgående varsel. Kontakt din Liko repræsentant for opdatering, information og råd.

⚠ Vigtigt!

Løft og forflytning af en person indebærer altid en vis risiko. Læs derfor brugsanvisningen til både lift og liftilbehør grundigt. Det er vigtigt, at du forstår indholdet i brugsanvisningen helt. Kun velinformerede personale bør anvende udstyret. Kontrollér, at løftetilbehøret passer til den lift, der anvendes. Vær forsigtig og omhyggelig ved anvendelsen. Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed.

Du skal være informeret om dennes muligheder for at håndtere løftesituationen.

Kontrollér løftesejlet med regelmæssige mellemrum, især efter vask. Se efter slitage eller skader på sømme, stof og øjestropper. Brug ikke beskadiget liftilbehør.

Kontakt producenten/leverandøren, hvis du er i tvivl om noget. For kombinationer med lifte af andre fabrikater end Liko kontakt leverandøren.



www.liko.com

Fabrikant:

Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

Forhandler i Danmark:

Botved Plejestyret A/S
Nørrelundvej 5
2730 Herlev
Tlf: 80373737
Fax: 70203737
info@botved.dk
www.botved.dk

