



Den optimale løsning for trykaflastning og positionering

Invacare **Vicair Academy** puderne giver en optimal kombination af trykaflastning, høj kvalitet og stabil positionering.

Puderne, der er klinisk testet, er individuelt justerbare og tilmed vedligeholdelsesfrie. De er sikre og enkle at anvende både for hjælper og bruger, og der er ikke behov for daglig kontrol. Vægten på puderne er utrolig lav med et gennemsnit på mindre end 750 gram.



Unik teknologi med bløde **SmartCells™**

Invacare **Vicair Academy** puderne benytter sig af **Vicair Technology™**, en unik og innovativ metode til støtte og aflastning af kroppen. Puderne indeholder flere hundrede små trekantede luftceller med afrundede hjørner kaldet **SmartCells**, der har en meget lav friktionsoverflade. Luftcellerne gør puden blød og komfortabel at sidde på, samtidig med at cellerne bevarer den lave friktion. Cellene glider let mod hinanden og former sig efter kroppens konturer og danner en stor overflade. Resultatet er en stabil og komfortabel støtte til kroppen, kombineret med en optimal trykfordeling. Puderne er inddelt i flere kamre, der kan justeres i forskellige fyldningsgrader for at minimere tryk og forskydningskræfter, samt give en stabil positionering.

Optimal positionering og trykaflastning

Vicair Academy er klinisk testet med vældigt gode resultater. Puderne kan bruges i de fleste alvorlige tilfælde af tryksår. Derudover giver puderne en høj grad af stabilitet, der medfører nedsat shear, god komfort og øget bevægelsesfrihed

Mange muligheder

Der er en række behov og hensyn, der skal tages højde for indenfor siddestillingsområdet. Puderne skal være trykaflastende, og samtidig kunne imødekomme forskellige individuelle behov for god positionering.

Det kan være for at korrigere eksisterende fejlstillinger eller for at forebygge nye. For at dække disse behov leveres **Vicair Academy** i flere forskellige modeller: **Academy Positioner Plus**, **Adjuster** og **Vector**, der alle leveres i højderne 6 og 100 mm. Alle **Vicair** puder kan justeres individuelt.

Standardpuder



Academy Positioner Plus

Inddelt i 4 kamre. De 2 sidekamre er specielt udviklet til at give sidestabilitet og forhindre udadrotation af benene. Giver optimal trykaflastning og har flere positioneringsmuligheder.



Academy Adjuster

Inddelt i 5 kamre for at tilbyde individuelle løsninger til brugere. Godejusteringsmulighedervedkompleksepositioneringsbehov fx asymmetrisk benlængde eller bækkenstilling og optimal trykaflastning.

Standardpuder



Academy Vector

Inddelt i 8 kamre for at give øget stabilitet til bækkenet, forhindre ind og udrotation af lårene samt fremadskridning på puden. En pude, der giver optimal trykaflastning og samtidig en funktionel stabil siddestilling.



Academy Vector Junior

Puden er 9 cm høj, fyldt med Baby **SmartCells**® og har samme funktion som **Vicair Vector**. Blot tilpasset en junior størrelse.



Academy Multifunctional

Opbygget som en **Adjuster** pude, men med lidt længere kamre bagtil for optimal tilpasning til dybdejusterbare stole. Findes også i serie, der er specialtilpasset til Invacare's komfortkørestole.

Specialpuder



Academy Asymmetric

Specialdesignet pude. Anbefales til brugere, som har behov for ekstra plads pga. proteser eller begrænset hoftebevægelighed. Kan også give god støtte til en høj femuramputation.



Academy All-Rounder

Giver øget frihed for brugerne. Designet til brug udenfor kørestolen fx siddende på gulvet. Monteres til kroppen, så man let kan flytte sig frem og tilbage - puden følger med!



Academy Pommel

Specialdesignet pude med løs abduktionspude. Velegnet til brugere med behov for trykaflastning samtidig med en abduktionspude. Og med mulighed for at fjerne abduktionspuden ved forflytning eller brug af kolbe.

Betræk



Betræk

Alle puderne leveres med slidstærkt, strækbart og komfortabelt betræk. Vælg mellem standard betræk eller inkontinensbetræk.

Tekniske data



Størrelser, se skema nedenfor



Vægt: 0,4-1,2 kg



Max. brugervægt 250 kg
(Academy Allrounder: 125 kg
Academy Vector Junior: 100 kg)



Rengøring af betræk: 90°



Vicair Academy Puder

Størrelser, mm (b x d)


	Positioner Plus	Adjuster	Vector	Vector Junior	Multi-functional	Allrounder	Pommel/Asymmetric
250 x 250				x			
300 x 300				x			
350 x 350				x			
350 x 400	x	x	x				x
400 x 400	x	x	x				x
400 x 450	x	x	x				x
430 x 430	x	x	x				x
450 x 400	x	x	x				x
450 x 450	x	x	x				x
400 x 500	x	x	x				x
450 x 500	x	x	x				x
500 x 450	x	x	x				x
500 x 500	x	x	x				x
370 x 540					x		
400 x 540					x		
450 x 540					x		
500 x 540					x		
500 x 380						x (one size)	
600 x 500			x				

Størrelser, mm (h)

Positioner Plus	Adjuster	Vector	Vector Junior	Multi-functional	Allrounder	Pommel/Asymmetric
60/100	60/100	60/100	90	80	50	100

Vicair Academy leveres i en række specialstørrelser. Kontakt Invacare for bestilling.

Betræk

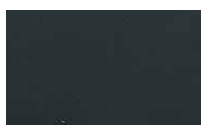

Sort



Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

© 2016 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Vicair Academy- DK - 01/2016



Yes, you can.®