

Sinanco sikkerhedsbælte



Sinanco sikkerhedsbælte anvendes hvor klienten behøver et bælte for at sikre imod at falde ud af stol/badestol eller kørestol.



Bæltet fastmonteres sikkert til stolen, før det påsættes rundt om klienten.

Bæltet er i hvidt blødt anti-glid materiale.


Kan vaskes ved 40 grader



Fås i størrelse: S, M og L


Sinanco sikkerhedsbælte

Brugervejledning

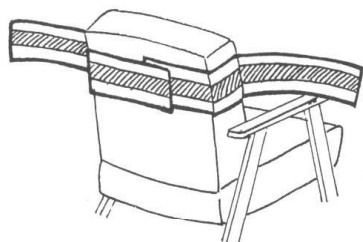

1

De to rygstykker med etiketter og de justerbare velcrobånd sættes fast om stoleryggen.

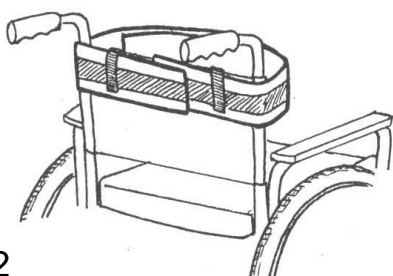


2

Når sikkerhedsbæltet anvendes på en kørestol, kan de to små stykker velcrobånd tages ind over stoleryggen og sættes fast på rygstykkets bagside og dermed forhindre, at denne glider ned.



3

Når personen sidder i stolen, sættes de to bæltestykker fast mod hinanden rundt om overkroppen. Hvis personen glider frem i stolen, kan bæltet anbringes længere nede på stoleryggen, så bæltet kommer rundt om hoften.

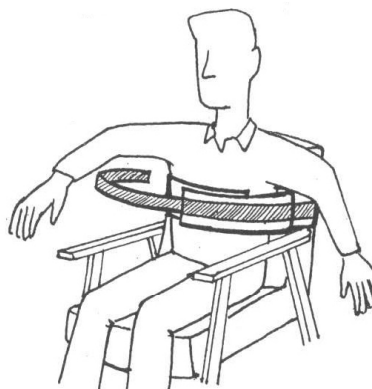


4

For og undgå at bæltet løsner sig med fare for at personen falder ud af stolen, kan det smalle sikkerhedsbånd på forsiden sættes rundt om personen og fastgøres på bagsiden.



5

Når sikkerhedsbæltet ikke anvendes, kan det med fordel blive siddende på stolen. Så sættes de to bæltestykker fast mod hinanden på bagsiden af stoleryggen.

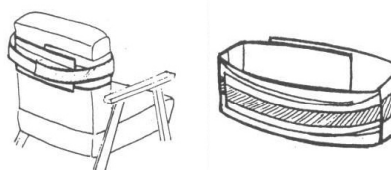

6

Vaskeråd: Sinanco sikkerhedsbælte kan vaskes ved 40-60 grader C. For at beskytte velcroen, sættes alle velcrobånd mod hinanden, før vask.



93/42/EØF CLASS I
EN ISO 10535
EN 60601-1-2

ergolet
løft verden

Ergolet A/S
Tårnborgevej 12 C
4220 Korsør

Tlf.: + 45 58 37 37 20
Fax: + 45 58 37 31 72
e-mail: ergolet@ergolet.dk
www.ergolet.dk