



Invacare®


Action[®]3
NG

En sikker stjerne!

Trusted Solutions,
Passionate People



Action³_{NG} er den nyeste generation af lette transportkørestole, der tilbyder et enkelt design sammen med forbedrede funktioner i form af øget stabilitet, komfort samt kompatibilitet mellem tilbehør fra øvrige kørestole fra Invacare. **Action³_{NG}** er velegnet til brugere, som skal anvende kørestolen til transportbrug. **Action³_{NG}** er lige anvendelig til brug i hjemmeplejen, på hospitaler, institutioner eller private, hvor man har brug for en transportkørestol til en bred målgruppe. **Action³_{NG}** har en god balance mellem omkostning, funktionalitet samt kvalitet og udgør et godt alternativ til den prisbevidste køber.

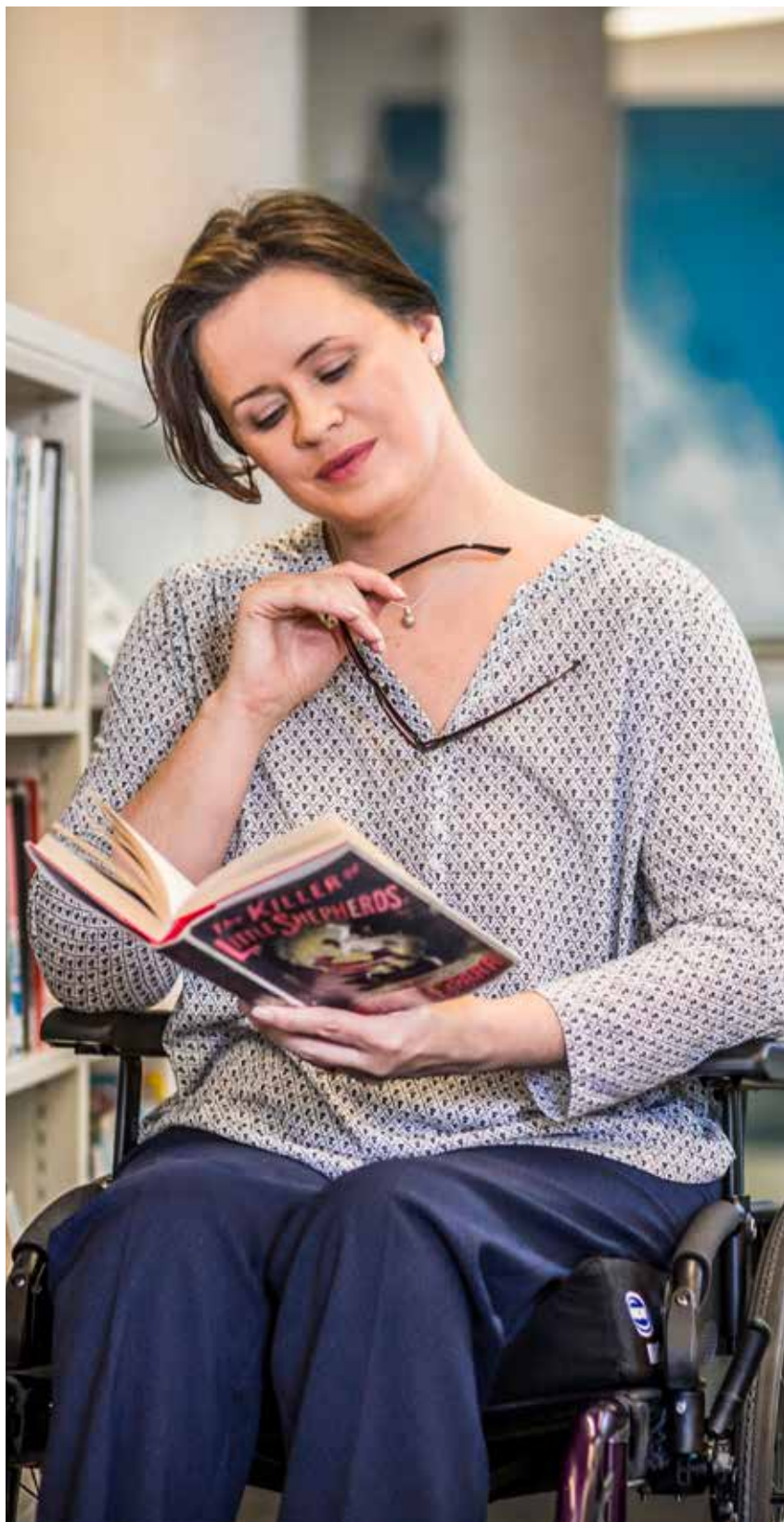

Funktionalitet

Invacare **Action³_{NG}**'s udformning af krydset under sædet gør stolen yderst stabil og gør sammenklapning og udfoldning meget nem.

Designet af **Action³_{NG}** er enkelt og moderne, og passer i de fleste danske miljøer.

Egenskaber

Invacare **Action³_{NG}** har en meget let konstruktion, der medfører en lav total vægt på ca. 14 kg. Dette er en fordel, både når brugeren skal køre stolen selv, og når hjælperen skal skubbe kørestolen. Køreegenskaberne er i top. Samtidig er det en fordel, at kørestolen er nem at løfte, når den skal transporteres i en bil.

Genbrugsegnet

Action³_{NG} er fleksibel, modulopbygget og yderst holdbar. Den er enkel at genbruge, og kan tilpasses med mange af Invacares øvrige kørestolskomponenter, fx armlæn og benstøtter.



14 kg letvægter

Den samlede vægt på ca. 14 kg giver en lettere håndtering, opbevaring og transport. Den laveste transportvægt (uden benstøtter, armlæn, for- og drivhjul) er 7,6 kg.



Bremsehåndtag

Bremsen kan foldes ned for at lette sideværts forflytning.



Eleverbare benstøtter

Ved udformningen af den eleverbare benstøtte opnås længdekompensation så benene ikke bliver presset op, når benstøtten eleveres.



Benstøtte

Benstøtten har en let betjent sving-ind / sving-ud funktion. Højden på benstøtten kan indstilles i trin på 10 mm. Selve fodpladen er udformet i et stabilt og skridsikkert materiale.



Justerbar ryg

Som tilbehør kan tilbydes stropryg for ekstra fleksibilitet, komfort og støtte.



Amputationsstøtte

Er vinkel-, dybde- og højdejusterbar, og kan svinges til siden ved forflytning.



Stokkeholder

Holder stokkene på plads under kørsel.







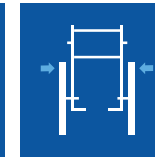









Hemiarmlæn

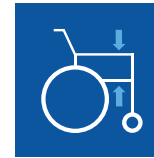Højde-, dybde- og vinkeljusterbare hemiarmlæn for at give optimal komfort og støtte for armen.

Tekniske data

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website: <http://www.invacare.dk/da>

	Sædebredde	Sædedybde	Sædehøjde	Ryghøjde	Armlæns højde	Benstøtte-længde	Total bredde
							
Invacare Action²_{NG}	405 / 455 / 505 / 550 ¹ mm	400 / 450 / 500 ² mm ³	Standard 485 mm	400 mm	180 - 280 mm	325 - 520 mm	Sædebredde + 190 mm

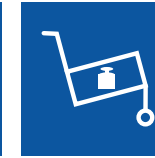	Total højde	Total længde inkl. benstøtter	Total længde uden benstøtter	Total bredde sammenfoldet	Total vægt	Max brugervægt	Transportvægt
							
Invacare Action²_{NG}	820 - 1020 mm	1000 mm	835 - 960 mm	295 mm	14,2 kg	125 kg	7,6 kg (uden armlæn, benstøtter og drivhjul)

Crash testet



Invacare **Action²_{NG}** ISO 7176-19³

1. Som specialprodukt, mod merpris, kan **Action²_{NG}** bestilles i sædebredde 550 mm.
2. Som specialprodukt, mod merpris, kan **Action²_{NG}** bestilles i sædedybde 500 mm.
3. Ved hjælp af stroppryggen kan sædedybden yderligere øges med ca. 50 mm.
4. Bemærk: Kørestolen er crashtestet og lever op til kravene i ISO 10542. Den har egenskaber, der øger sikkerheden for brugeren under transport i bil eller bus siddende i kørestolen. For at opnå den bedste sikkerhed anbefales at kørestolsbrugere så vidt muligt benytter bilens sæder og tilhørende sikkerhedssystem.


Stelfarve

Antracit sort



Betræk

Sort

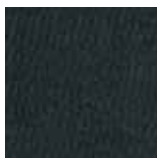

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.®