

# Air Flow Topmadras

Dynamisk, alternerende madrassystem



Fylde- og vedligeholdelsespumpe  
Plexus C-102

### Topmadras

- Topmadrasen anvendes ovenpå standardmadrasen.
- Madrasen er opbygget af 16 sammenhængende anatomisk udformede luftceller, som sikrer optimal trykfordeling og maksimal stabilitet under forflytning.
- Luftcellerne er af tynd, smidig og stærk nylonfolie.
- I bunden af madrasen er placeret propper til hurtig tømning af madrasen ved hjertestop.

### Betræk

- På madrasen er monteret et Techmaflex betræk der er strækbart i 2 retninger.
- Betrækket er åndbart og væsketæt.



Fylde- og vedligeholdelsespumpe  
Plexus C-102

### Plexus C-102 kontrolenhed/pumpe

- Brugervægt 40-160 kg.
- Logisk og brugervenligt display.
- Trykket i madrasen indstilles manuelt ud fra 'håndtest' og individuelle behov.
- Dynamisk funktion.
- Alternering med 5 minutters rolig cyklus.
- Madrasen fyldes med luft på ca. 20 min.
- Slinger med 'Quick Release' for hurtig tømning ved hjertestop (CPR) og i forbindelse med forflytninger.
- Ved strømudfald kobles slangerne og madrasen holder trykket.
- Indstillinger genoprettes efter strømudfald.

### Rengøring

- Luftblæren tømmes og afmonteres. Rengøres med mild sæbeopløsning eller desinficeringsmiddel.
- Techmaflex betrækket maskinvaskes ved 80-90° C.
- Bunden rengøres med mild sæbeopløsning eller desinficeringsmiddel.

### Tekniske data

El	230 V / 50 Hz, 0.5 A						
Ledningslængde	4,5 m						
Maks. brugervægt	40-160 kg						
	Vare nr.	HMI nr.	Bredde	Længde	Højde	Vægt	Garanti
Air Flow madras	80-10229	39721	85 cm	203 cm	9-15 cm	3,5 kg	2 år
Plexus C102 pumpe	80-10282	53386	10	8,0	23	1,22	2 år