

Tekniske data

Bremse: Hydrauliske tromlebremser på forhjul

Gear: 8 gear (Shimano Nexus)

El system: Bafang

2 størrelser på forreste plads

Tekniske Specifikationer	Co-Pilot 3-24		Co-Pilot 3-26	
	Front	Bag	Front	Bag
Længde i cm	204	208	215	
Bredde i cm	89		89	
Vægt i kg	30		31	
Krank længde i cm	150	170	150	170
Skridtlængde i cm	50-78	71-90	69-97	85-99
Sæde højde i cm	64-78	73-94	86-100	94-108
Max belastning i kg	180		180	
Dækstørrelse i ETRTO	47-406	47-507	47-406	47-559
Gear	8		8	

FAABORG REHAB 



Co-Pilot 3 Tandemcykel

Leder du efter en tandem som er ekstra stabil og sikker til for eksempel en lidt urolig passager, eller en passager med nedsat balanceevne? Så skal du opleve Co-Pilot 3 som er velegnet til både voksne og børn. Takket være det tredje hjul kan begge ryttere blive siddende jævnt når tandemmen står stille. Med denne tandem er det kun chaufføren på bagerste plads som kan styre, og passageren på forreste plads har blot et styr til vejledning og oplevelse. Co-Piloten kan også personliggøres til specifikke præferencer og behov.

Co-Piloten fås i to størrelser:

- Barn/Voksne
- Voksen/Voksen


Co-Piloten kan fås med hjælpemotor

FAABORG REHAB 

+45 70 20 55 53
www.faaborg-rehab.dk

Ladning:

- Det er en fordel at lade batteriet så ofte som det er muligt.
- Hvis cyklen bruges dagligt, sæt cyklen til ladning efter endt brug.
- Hvis cyklen henstilles i mere end 1 uge, anbefales det at tage laderen fra 24 timer efter endt ladning.
- Hvis cyklen henstilles i mere end 1 måned skal den oplades i 24 timer 1 gang om måneden.
- Den bedste temperatur er ca. 20°.
- Laderen slår automatisk fra ved 0°.

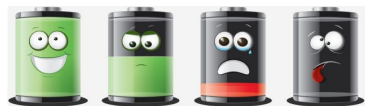

Pleje af cyklen

Regelmæssig vedligeholdelse af cyklen er vigtig af hensyn til funktionssikkerheden, og for at cyklen ser pæn ud. Derfor bør følgende punkter overholdes:

- Regelmæssig vedligeholdelse udført af en fagmand gør, cyklen bevarer sin værdi. Du kan selv gøre følgende for at undgå rust og andre skader:
- Lad ikke snavs indtørre, men vask det af med det samme med vand og en blød klud eller svamp. Brug aldrig en højtryksrenser til rengøringen, da det kan beskadige lejer, lak eller finish.
- Brug ikke skrappe rengøringsmidler.
- Lakskader skal udbedres straks.
- Dele, der er følsomme over for rust, skal behandles grundigt med et egnet konserverings- og plejemiddel, særligt op til og i vinterperioden.
- Lad ikke cyklen stå udenfor uden at være overdækket, Faaborg Rehab Technic ApS frasi-ger sig ethvert ansvar for misligholdelse af cyklen.
- Tjek altid om der er luft nok i dækket før du kører en tur. For lidt luft kan gøre cyklens træk evne svag og bruge mere strøm end nødvendigt.

Bemærk:

Garantien bortfalder, såfremt der er foretaget ændringer/reparationer af personer, som ikke er godkendt eller anvist af Faaborg Rehab Technic ApS

Garantien dækker ikke almene sliddele.

Garantien dækker ikke hvis det første service efter 6 mdr. ikke overholdes. Det er dit ansvar at kontakte Faaborg Rehab Technic ApS, når det er tid til service.

Du har også mulighed for at lave en service aftale med os, også kontakter vi dig når det er ved at være tid..

Prisen for et almindeligt service, uden reparationer, er typisk 1200,- + moms.

Hvis du efter læsning af denne brugervejledning savner svar på yderlige spørgsmål vedrørende din nye cykel, er du altid meget velkommen til at kontakte Faaborg Rehab Technic ApS

Politikken for Faaborg Rehab Technic ApS er til stadighed af at forbedre kvaliteten og drift sikkerheden af vores produkter. Vi forbeholder os derfor retten til, uden forudgående at ændre denne vejledning.

- 1 Op i hjælpe niveau
- 2 System tænd/sluk / MODE
- 3 Ned i hjælpe niveau
- 4 Batteri kapacitet
- 5 Hastighed km/t
- 6 Daglige kilometer (TRIP) - Total kilometer (ODO) - Højeste hastighed (MAX) - gennemsnitlig hastighed (AVG) - Rækkevidde (RANGE) - Energiforbrug (CAL(kun med momentsensor monteret)) - Rejse tid (TIME) - WATT ydelse (POWER)
- 7 Hjælpe niveau / gå assistance

