

Skwirrel 2



Skwirrel 2-stolen hvor du kommer både højt og lavt

Filosofien bag Skwirrel 2 er at give børnene maksimal mobilitet, således at de kan udforske omgivelserne og have maksimal rækkevidde, både højt og lavt. Ligeledes at være i stand til at overkomme dagens mange udfordringer, hvad enten det er i gulvhøjde, at nå noget på en hylde i forretningen, at åbne døren eller sidde i den rette højde ved bordet. Skwirrel 2 giver børnene selvstændighed og mulighed for at mestre dagligdagen.

Kvalitet og sikkerhed

Alle stolens dele er nøje kvalitetstestet, og stolen er testet, opfylder og produceres i henhold til alle gældende EN/ISO standarder. Den er godkendt i klasse B til kombineret brug ude og inde. Endvidere er stolen crashtestet med henblik på transport i bil.



Skwirrel 2



Giv stolen et personligt præg

Alle har sin egen personlighed. Se blot på vores tøj, frisurer etc. .Kørestolen er også med til at give barnet dets egen identitet, så derfor ønsker vi med Skwirrel 2 at give nogle valgmuligheder hvad angår farve og dekorering. Sæde og skjold kan leveres i en række forskellige farver og kombinationsmuligheder. Vi giver også mulighed for at dekorere med en masse forskellige motiver, f.eks. foto af dit kæledyr, dit favorit fodboldhold, fantasimotiver etc.. Der er virkelig mange muligheder.

Skwirrel 2

| | | | |
|---------------------------|----------|------------------------|-----------|
| Længde (mm) | 1080 | Batterikapacitet (Nh) | 2 x 73A |
| Bredde (mm) | 620 | Hastighed (km/t) | 6/10 km/t |
| Min. transportlængde (mm) | 950 | Kørelængde (km) | 30-40 |
| Vægt kørestol (kg) | 120 | Bremselængde (mm) | 1200 |
| Max brugervægt (kg) | 50 | Drejeradius (mm) | 110 |
| Elektronik | R-net® | Max kantforcering (mm) | 70 |
| El. højderregulering | standard | Sædehøjde | 250-780 |
| El. tilt regulering | ja | Tilt (grader) | 25 |
| Crashtestet ISO 7076-19 | ja | Godkendt EU12184 kl. B | ja |

Tekniske data Skwirrel II sædeenheder:

| Sædesystem Colibri Aktiv Plus | Str. 1 | Str. 2 | Str. 3 | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Sædebredde (justerbar) | 19-22cm | 24-27cm | 27-30cm | |
| Sædedybde (justerbar) | 21-24cm | 27-30cm | 33-36cm | |
| Ryghøjde | 33cm | 43cm | 53cm | |
| Rygbredde (justerbar) | 18/23cm | 21-26cm | 25/30cm | |
| Rygvinkel (grader) | -10 til +32 | -10 til +32 | -10 til +32 | |
| Max brugervægt | 50kg | 50kg | 50kg | |
| Vægt sæde | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg | |
| Bredde inkl armlæn | 43-45cm | 48,5-50,5cm | 52-54cm | |
| Benlængde | 21 til 31cm | 21-39cm | 21-39cm | |
| Crashtestet | bestået | bestået | bestået | |
| Kræver sæderamme | nr.1 | nr.2 | nr.2 | |
| Sædesystem Simba | Str. 1 | Str. 2 | Str. 3 | Str. 4 |
| Sædebredde | 20cm | 25cm | 31cm | 37cm |
| Sædedybde | 18-25cm | 23-30cm | 29-38cm | 36-43cm |
| Ryghøjde | 28cm | 37cm | 45cm | 54cm |
| Mål mellem sidestøtter | 13-22cm | 20-29cm | 25-34cm | 30-39cm |
| Ekstra sædebredde med tyndt polster | +4cm | +4cm | +4cm | +4cm |
| Justerbar rygbredde | ja | ja | ja | ja |
| Aktiv/standard ryg | begge std | begge std | begge std | begge std |



* Brug af Simba str. 4 har begrænsning i forhold til at køre sædet ned til gulv.

Skwirrel 2

At sidde rigtigt



At sidde rigtigt

Børn vokser og en korrekt siddestilling er yderst vigtig. Skwirrel 2 leveres standard med det nye Colibri eller Simba sædesystem - modulsystemer som enkelt tilpasses det enkelte barn. Sæde- og rygpuderne giver høj grad af komfort, og sæderne er forberedte til montering af forskelligt fikseringsudstyr, så som diverse side- og nakkestøtter, seler, veste og fodfiksering. Benstøtterne er monteret mellem stolens drivhjul, og gør det muligt at opnå en 90 graders knævinkel.

Elektrisk sædetilt sørger for en behagelig og stabil siddestilling, som er speciel vigtig under kørsel i terræn.

Køreegenskaber og fremkommelighed i topklasse

Kombinationen af forhjulsdrift, kraftige motorer og et godt affjedringssystem giver god fremkommelighed og behagelig kørsel både inde og ude. Nyt R-net elektronisk system giver tilstrækkelig med kraft til at forcere forhindringer ved lav

kørehastighed. Elektronikken muliggør endvidere programmering af 8 forskellige køreparametre, således at alle kan få stolen tilpasset sit færdighedsniveau.

Skwirrel 2 kan leveres standard med en hastighed på 6 km/t, eller med Speed Kit med en hastighed på op til 10 km/t. De fleste Skwirrel stole bliver solgt med bordstyring. Alternativt med armlænsmonteret styring. Stolen kan endvidere udstyres med ledsagerstyring og en række forskellige specialstyringer. Disse kan også eftermonteres.