

HÅRVASKEUNDERLAG

- nyhed fra Scan-Med



1



2



3

Til hårvask af liggende patienter

1. Underlaget placeres under patientens skuldre. Plastfolien skal vende opad. Der foldes et håndklæde under nakken af patienten.
2. Velcrobåndene sættes sammen så underlaget former en tragt.
3. I bunden af underlaget sættes en spand, som vandet kan samles i under hårvasken.

Sengen kan eventuelt tippes lidt bagover, således at vandet løber ned mod hovedgærdet.

Underlaget er et non-woven tæppe med folie, der måler 90 x 120 cm.

Scan-Med a|s
Denmark

Scan-Med A/S • Dalgårdsvej 17 • 8220 Brabrand

Tlf. 86 10 61 66 • Fax. 86 16 93 55

www.scanmed.dk, e-mail: scanmed@scanmed.dk