

Cobiflow 300 vekselryksmadras

Vekselryks helmadras til forebyggelse og behandling af tryksår

Cobiflow 300 er specielt udviklet til forebyggelse af tryksår, samt til behandling af tryksår stadie 0-3.

Cobiflow 300 kan med fordel anvendes på sygehuse, plejecentre og i hjemmeplejen, til brugere der midlertidigt er svækket for eksempel på grund af sygdom eller operation og derfor er mere sengeliggende end vanligt. Madrassen kan gøres statisk, hvilket letter plejen af bruger i sengen. Har brugeren brug for at sidde op i sengen, kan madrassen indstilles til det. Er særdeles velegnet til genbrug på grund af det lukkede system, hvilket letter rengøringen.

Anvendelig til brugervægt 30-180 kg.

Kan leveres med standard pumpe eller automatisk Dual Plus pumpe.

Madrassen

- Består af 20 forstærkede luftfyldte celler (13 cm høje).
- Består af en 5 cm skum undermadras, som er integreret i betrækket, så tilsmudsning undgås.
- Luftcellerne pumper op i en 1-2 cyklus, hvilket sikrer både bevægelse under bruger, og at peak pressure området flyttes. Tidscyklus kan ændres fra 10-25 minutter.
- Kan leveres i 2 længder: 200 cm eller 220 cm. Dermed kan selv den meget lange bruger få maksimal trykaflasting over hele liggefladen.

Betrækket

- Er fremstillet i 2/4 vejs strækbart, åndbart og antibakterielt polyuretan-belagt polyamid stof.
- Har svejsede sammenføjninger og lynlås.

Gælder for begge pumper

- Har Autofirm funktion som selv slår fra efter 20 minutter.
- Har Siddefunktion, hvilket er en stor fordel ved for eksempel lunge- og hjertesyg, som sidder meget op i sengen.
- Har audiovisuel alarm ved fejl som strømsvigt eller lufttab.
- Er forsynet med et tydelig og enkelt display.
- Arbejder næsten lydløst.

Standard pumpe

- Skal indstilles efter vægt.

Dual Plus pumpe

- Indstiller sig automatisk i forhold til brugerens vægt. Med mulighed for op- eller nedjustering.
- ## Kontraindikationer
- Personer med instabil fraktur, eller personer med osteoporose bør ikke placeres på vekselryk.
 - Personer med mange smerter for eksempel personer med cancer eller gigt kan opleve at deres smerter forværrer, når de ligger på vekselryk.
 - Personer med mange ufrivillige bevægelser kan opleve, at de får flere ufrivillige bevægelser eller smerter, når de ligger på vekselryk.

- Vekselryks helmadras
- Anvendelig til brugervægt 30-180 kg
- Til forebyggelse og behandling af tryksår
- Særdeles velegnet til genbrug
- Let at rengøre

30-180 KG

Standard pumpe har enkelt og let overskueligt display med audiovisuel alarm.



Kan også leveres med automatisk Cobiflow 500 Dual Plus pumpe.



Kan med fordel anvendes til...

Brugere, der har tryksår.


Brugere, der midlertidigt er svækket på grund af sygdom eller operation og derfor har brug for mere trykaflastning end vanligt, for eksempel efter femoris fraktur eller lungebetændelse.

TRYKAFLASTNING
HØJE MENNESKER

SPECIFIKATIONER

COBIFLOW 300 VEKSELTRYKSMADRAS

Brugervægt	30-180 kg
Længde	200 / 220 cm
Bredde	83 / 90 cm
Højde	18 cm
Madrassens vægt	8,5 kg
Standard pumpens vægt	2,5 kg
Standard pumpens mål	30 x 13 x 17 cm
Dual Plus pumpens vægt	2,8 kg
Dual Plus pumpens mål	32 x 21 x 13 cm
Sektionsopdelt madras	Nej
Alarm ved lufttab	Ja
Alarm ved strømsvigt	Ja
Batteribackup	Nej
Lyntømningsfunktion	Ja
Statisk funktion	Ja
Anvendelig direkte på sengebund	Ja
Anvendelig til indstillelig sengebund	Ja
Brandhæmmende betræk	Ja
Inkontinens betræk	Ja
Allergivenligt betræk	Ja
Vask- og desinficerbart betræk	Ja
Tryksårsforebyggende stadie	0-3
Madrasbetræk	42% polyuretan, 58% nylon/polyamid
Celler	100% nylon med TPU laminering
Pumpe	ABS flamme resistent UL
ISO - klassifikation	ISO 18 12 18 - 28

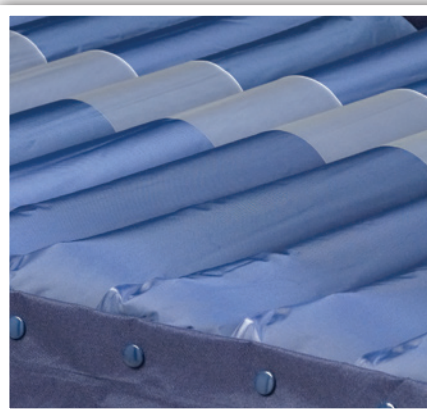

Kan fås i bredden 83 / 90 cm
og 200 / 220 cm i længden.

BESTILLING

Model	Længde cm	Bredde cm	Højde cm	Varenummer	HMI
Cobiflow 300 helmadras med standard pumpe	200	83	18	2300-083-200	36500
Cobiflow 300 lang helmadras med standard pumpe	220	83	18	2300-083-220	48008
Cobiflow 300 helmadras med standard pumpe	200	90	18	2300-090-200	34893
Cobiflow 300 helmadras med Dual Plus pumpe	200	83	18	2301-083-200	73208
Cobiflow 300 lang helmadras med Dual Plus pumpe	220	83	18	2301-083-220	73292
Cobiflow 300 helmadras med Dual Plus pumpe	200	90	18	2301-090-200	73295
Tilbehør					
Betræk til Cobiflow 300	200	83	18	2300-999-031	
Betræk til Cobiflow 300 lang	220	83	18	2300-999-034	
Betræk til Cobiflow 300	200	90	18	2300-999-032	
Opbevaringstaske Cobiflow				2500-999-100	