

Basic Tilt

- med brugerbetjent hvile- og tiltfunktion



Alum Bergen™

- **Total længdekompensering**
Sikrer brugeren optimal siddestilling, ligesom cher undgås
- **Kørestolen har sæde/ryg/benstøttefunktion og tilt**
Ryg og benstøtter justeres mod vandret og sædet kipper bagover.
Der opnås en hvilefunktion i kørestolen som trinløst kan reguleres.
Gør at brugerens siddestilling kan ændres efter behov
- **Sædeenheden justeres elektrisk af bruger/hjælper**
Giver frihed for brugeren og en lettelse for hjælperen
- **Mulighed for ekstra moduler og tilbehør**

Basic Tilt

- with user controlled recline and tilt function



Basic Tilt er en videreudvikling af Basic kørestolen, med de samme grundlæggende gode egenskaber. Basic Tilt udmærker sig ved at have en suveræn god siddekomfort med utallige brugerbetjente indstillingsmuligheder. Flexibiliteten giver en lang række muligheder for individuel indstilling af kørestolen til brugeren. I hele sædeenheden er der længdekompensering, som har stor betydning for siddekomforten i kørestolen.


Basic Tilt har to funktioner i sædeenheden; sædetilt og en sæde/ryg og benstøttefunktion, hvor ryg og benstøtter kan justeres ned mod vandret og sædet kipper bagover. Funktionerne kan kombineres trinløst af bruger via håndbetjeningen. Når tilt og sæde/ryg/benstøttefunktion kombineres, kan man få sædeenheden så langt bagover, at benene kommer over hjerteniveau (dette modvirker hævede ben).

1



Benstøtterne kører som standard op når ryggen lægges ned mod hvilestilling. Derudover kan der som tilbehør monteres elbenstøtter. Det giver brugeren frihed til selv at vælge i hvilken stilling benene skal være.

2

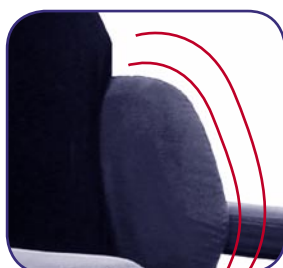

Rygvulster

kan leveres i forskellige størrelser og udformninger. Dermed kan kørestolen tilpasses brugerens behov for støtte.

3



Siddestillingen

ændres elektrisk af bruger eller hjælper ved brug af håndbetjeningen.


Håndbetjeningen er flytbar og der kan monteres forskellige typer af holdere.

4



2 delte lægstøtter

Er til stor fordel for personalet. Brugerens ben skal ikke løftes over lægstøtten når benstøtten skal tages af/svinges ud til siden. Ved at trække i udløserhåndtaget (pil1) vipper lægstøtten tilbage (pil2) og man kan nu løfte foden fri fra fodpladen. Herefter kan **benstøtterne** ved at trække i udløserhåndtaget (pil3) svinges ud til siden/tages af.

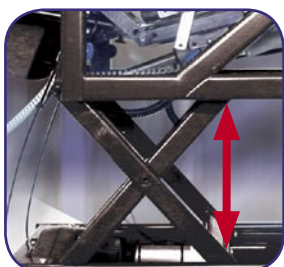

Modulopbygningen giver mange muligheder:

- Højdeløft
- Elbenstøtter
- Navmotorer
- Activeseat
- Katapult + meget mere

Basic Tilt

- with user controlled recline and tilt function




| | |
|------------------------------|---|
| Stel: | Stålrør, pulverlakeret, øvrigt metal korrosionsbeskyttet. |
| Sædeenhed: | Justerbar i dybde og vinkel. |
| Sæde/ryg/ benstøttefunktion: | Regulerbar via håndbetjening. |
| Plansæde: | Træ med gummigjorder. Betræk i skai. |
| Sædepude: | Koldskum, brandhæmmende. |
| Ryg: | Justerbar i vinkel, nedfældelig for transport. |
| Rygpulstring: | Koldskum i forskellige kvaliteter, brandhæmmende. |
| Rygvulster: | Granulat og koldskum, brandhæmmende. |
| Kørebøjle: | Stålrør med PV-skum. |
| Armlæn: | Polstrede, højde/vinkeljustering. Opklappelige. |
| Benstøtter: | Svingbare, aftagelige, højdejusterbare. |
| Lægstøtter: | Polstrede, justerbare i højde, dybde, bredde. |
| Fodplader: | Slagfast plast, justerbare i vinkel og højde. |
| Drivhjul: | 22" punkterfrie m/ plastdrivringe. |
| Svinghjul: | 8" punkterfrie. |
| Bremser: | Justerbare, let betjenelige. |
| Antitip/ tiltsikringer: | Justerbare i højde. |
| Stof: | Microfiber, flammehæmmende. |
| Håndbetjening: | (HB 42) for regulering af sæde/ryg/benstøtte og tilt |
| Lader: | Mascot 8714 |
| Værktøjspose | |
| Brugsvejledning. | |

Målskema

- Målt i mm hvis ikke andet er angivet
- Tolerance på ± 10 mm og $\pm 1^\circ$

| | | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|--------|-------|---------|
| A | Sædebredde | 400 | 450 | 500 | 550* |
| B | Sædehøjde excl. pude | 22" hjul ~ 450/med tilt 480 | | | |
| C | Sædedybde | 3 indst. på hhv. 450, 475 og 500 m.værktøj | | | |
| D | Ryghøjde ekskl. pude | 610 | | | |
| E | Armlæns højde fra plansæde | 210 ▶ 345 /indst. med 7,5 mm interval | | | |
| F | Bredde mellem armlæn | 400 | 450 | 500 | 550 |
| G | Benstøttelængde fra plansæde/målt uafhængig af hjulstr. | 22" hjul~ 370 ▶ 505/indst. m. 7.5 mm interval | | | |
| H | Kørehåndtagshøjde | 22" hjul ~ 920 ▶ 1060 /trinløs | | | |
| I | Total højde /klar til brug | 22" hjul ~ 1020 | | | |
| J | Total bredde /klar til brug | 620 | 670 | 720 | 770 |
| K | Total længde ekskl./inkl. benstøtter | 22" hjul~ 820/1020 | | | |
| L | Rygvinkel | Målt ved standardindstilling for sæde-/rygfunktion. Se iøvrigt særskilt oversigtsskema. | | | |
| M | Sædevinkel | Min. i aktiv: -3° Max. i hvile: $+45^\circ$ | | | |
| N | Benstøttevinkel | 120° ▶ 180° /trinløs | | | |
| P | Fodpladevinkel | $+90^\circ$ ▶ $+120^\circ$ / m. værktøj | | | |

* kan leveres med en sædebredde fra 510 til 700mm

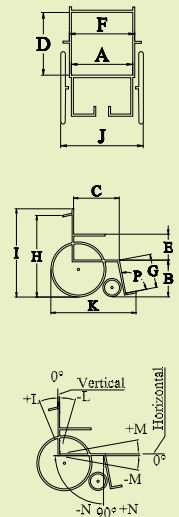

Producent & forhandler:

Comfort-Gruppen A/S
 Broholmvej 9
 DK-5463 Harndrup
 Tlf. +45 70 23 50 10
 Fax +45 70 23 50 12
 E-mail: info@comfort-gruppen.dk
 www.comfort-gruppen.dk

HMI NUMRE

| | |
|--------------|-------|
| Small 40cm | 21750 |
| Medium 45cm | 21751 |
| Large 50cm | 21752 |
| X-Large 55cm | 41069 |



Illum Bergen™

We are not a wheelchair company - we are a mobility provider