



BureTM
Gangbord

Nye muligheder for patienten. Nye forudsætninger for dig, der hjælper til.



Bure™

Gangbord

Gangbordet har en central funktion i plejen, men har alligevel levet et liv i skyggen. Nu har GATE kasseret alle gamle løsninger og er begyndt helt forfra. Resultatet er Bure Gangbord, som er unikt i sin ergonomi.

Forbedrer almentilstanden

Gangbordet er ud over at være en glimrende hjælp ved forflytning og oprejsning af patienter, også et værdifuldt redskab ved genoptræning. Genoptræning med gangborde stimulerer og holder patienters muskler og tarme i gang og bidrager samtidigt til at forbedre almentilstanden hos sengeliggende. Ved hjælp af god støtte bliver det nemmere for den benvage eller kraftløse patient at gå, og en del kan endda gå uden støtte fra plejepersonalet.

Bedre arbejdsergonomi

Bure Gangborde skaber mulighed for en meget bedre arbejdsergonomi for dig, der plejer, træner og arbejder sammen med patienter. Den åbne konstruktion giver for eksempel øget manøvreringsplads og gør det lettere at komme til i forbindelse med oprejsning eller påklædning. Sammenlagt giver Bure Gangborde en mindsket arbejdsbelastning og er en investering i personalets helbred.

Øget stabilitet

Bure har anatomisk udformede armstøttepuder med en let hældning, som hjælper skuldre og arme til at slappe af. Gangbordets konstruktion bidrager til at flytte fokus fra muskulatur i hænder, arme og skuldre til større muskelgrupper som ben- og brystmuskulatur. Stabiliteten forbedres, og bordet bliver lettere at styre, samtidigt med at vridning i kroppen dæmpes, og holdningen forbedres.

Flere muligheder – mere robust konstruktion

Fra og med 2019 vil alle gangborde med elmotor blive leveret med LiOn-batteri. Dette giver jer som kunder en mere robust løsning da denne teknik har større kapacitet og desuden holder længere end den nuværende Pb-løsning. Samtlige produkter vil også kunne vælges med motor fra Linak ("Nyhed") eller TiMotion.

(I kataloget vises hovedsageligt fotos af produkter med TiMotion).

NYT

Bure Double 2.0

EL

Det nye Bure Double er udstyret med dobbelt eldrift, dels med el-drevet løftning og sænkning og dels med eldrevet elbenspredning af bundstativet. Den nye version har en væsentligt lavere højde over bundstativet – for bedre adgang samt en højere brugervægt (150kg) sammenlignet med den tidligere version.

Holdbart

Gangbordet har ekstra forstærkninger omkring armstøttestøtterne for at forhindre, at disse sprækker ved påkørsel fra siden. Armstøtte i PU-skum fås som alternativ for yderligere komfort/hygiejne.

Lettilgængelig håndkontrol

Håndkontrollen er anbragt, så plejeren/brugeren nemt kan nå den med begge hænder.

Smidig trinløs justering

Med eldrevet hævnning og sænkning bliver det nemt at forudindstille gangbordet til rette højde. Når patienten derefter står på plads, kan højden finjusteres trinløst, så den bliver bekvem og giver optimal støtte for gang.

Eldrevet oprejsning

Bure Double er en fortrinlig assistent ved oprejsning af patienter. Belastningen af personalet minimeres, og dermed også risikoen for slidskader. En del patienter kan endda selv rejse sig op ved hjælp af gangbordet.

Ekstra velegnet i hjemmemiljø

Eftersom Bure Double er så fleksibelt, er det ekstra velegnet til hjemmemiljøer. Med benene i inderste position bliver gangbordet smalt og smidigt at manøvrere og kommer igennem de fleste døråbninger.

Højdejustering i håndtagene

Se tilbehør.

Ergonomiske håndtag

Ergonomisk udformede håndtag, som kan justeres trinløst i alle retninger for bedste individuelle tilpasning. Vigtigt ikke mindst for strokepatienter, som på denne måde kan nå deres "normale" håndstilling.

Stabilt

Gangbordet har anatomiske puder, som aflaster skuldre, arme og nakke. I stedet flyttes fokus til større muskelgrupper som ben- og brystmuskulatur. På den måde forbedres stabiliteten, og bordet bliver lettere at styre.

Åben konstruktion

Den åbne konstruktion giver samme stabilitet, men større manøvreringsplads. Patienten behøver ikke føle sig indelukket, og det bliver lettere for dig, der hjælper til ved oprejsning eller påklædning.

Lav højde

Den lave højde over gulvet minimerer problemer med at komme ind til brugeren eksempelvis ved sengsidning.

Låsable hjul

Bure Double har individuelt låsable hjul som standard på alle fire hjul.

Benstativ med elbenspredning

Elbenspredningen gør det enkelt at skubbe gangbordet helt hen til brugeren, uafhængigt af kørestolsbredde, sengekonstruktion eller stolebredde. Dette letter især ved oprejsning for plejepersonalet. Med benene i yderposition bliver gangbordet ekstra stabilt og kan med fordel benyttes af brugeren selv. Dette gør det især meget lettere for patienter med behov for ekstra gangplads.

Tåler vand

Alle el-detaller på Bure Double har el sikkerhedsklasse IP 65 og kan dermed også anvendes i våde rum.

Alle gangborde kan bestilles med 75, 100 eller 125 mm hjul – angiv venligst ved bestilling. (Hvis der ikke står noget andet, gælder højdemål nedenfor produkter med 125 mm hjul.) Nedenfor vises eksempler på mulige artikelmultipletter.

Tekniske specifikationer

CE-mærket ifølge MDD 93/42/EEC. Testet og godkendt ifølge EN-11199-3/2005

Art. Nr.	Produkt	Bredde	Max brugervægt	Længde	Højde	Armlæn/Indermål
56-303/75	Bure Double 2.0 EL, 75 mm hjul	64-95 cm	150 kg	87 cm	85-125 cm	25-50 cm
56-303	Bure Double 2.0 EL, 125mm hjul	64-95 cm	150 kg	87 cm	90-130 cm	25-50 cm

Bure Ortho/Space

ORTHO | ORTHO S

SPACE

Ortho er specielt udviklet til ortopædafdelingen og situationer hvor bruger kræver ekstra plads til benene. Ortho har en kraftig elmotor som er eldrevet med højdejustering. Den optimale højde på gangbordet kan derfor indstilles med patienten hvor gangbordet bruges som oprejsningshjælp. Ortho findes også i en smal version hvor Ortho S (kun tilgængelig i version GAS) kun er 65 cm bred.

Bure Space har ud over Orthos fordele også et bundstativ med ekstra plads for at komme ind til kørestol eller lignende. Bundstativet er gjort bredere, og indermålet er øget til 67 cm. Bure Space kan fås med elmanøvreret eller hydraulisk højdejustering.

Ergonomiske håndtag

Kan justeres trinløst i alle retninger.

Lettilgængelig håndkontrol

Anbragt, så plejeren alternativt brugeren nemt kan nå den med begge hænder

Tåler vand

Alle el-detaller på Bure Ortho har el-sikkerhedsklasse IP 65 og kan dermed også anvendes i våde rum.

Eldrebet oprejsning

Bure Ortho er en fortrinlig assistent ved oprejsning af brugere.

Ubegrænset gangplads fremad

Brugere med kontrakturer samt patienter med helbengsgips kan have et strakt ben og alligevel få bordet tæt på sig.



SPACE



Højdejustering i håndtagene

Se tilbehør.

Lav laveste højde

Kun 85 cm (når 75mm hjul anvendes).

Stabilit

Gangbordet har anatomiske puder, som aflaster skuldre, arme og nakke. I stedet flyttes fokus til større muskelgrupper som ben- og brystmuskulatur. På den måde forbedres stabiliteten, og bordet bliver lettere at styre.

Smidig trinløs justering

Gør det nemt at forudindstille gangbordet til rette højde.

Bremse og retningspærring

Placeres således, at brugeren selv kan nå den fra sin gå-position

Mere plads

Space har et bundstativ med indermål på 67cm - mere plads til at komme ind til en kørestol.

Åben konstruktion

Giver samme stabilitet som et almindeligt gangbord, men større manøvreringsplads.

Alle gangborde kan bestilles med 75, 100 eller 125 mm hjul – angiv venligst ved bestilling. (Hvis der ikke står noget andet, gælder højdemål nedenfor produkter med 125 mm hjul.) Nedenfor vises eksempler på mulige artikelskombinationer.

Tekniske specifikationer

CE-mærket ifølge MDD 93/42/EEC. Testet og godkendt ifølge EN-11199-3/2005

Art. Nr.	Produkt	Bredde	Max brugervægt	Længde	Højde	Armlæn
56-317T	Bure Ortho, 125 mm hjul	78 cm	150 kg	80 cm	90-130 cm	25-50 cm
56-318	Bure Ortho Gas, 125 mm hjul	78 cm	150 kg	80 cm	90-130 cm	25-50 cm
56-318-S	Bure Ortho S Gas, 125 mm hjul	65 cm	150 kg	79 cm	90-130 cm	30-45 cm
56-304	Bure Space EI, 125 mm hjul	78 cm	150 kg	79 cm	90-130 cm	25-50 cm
56-307	Bure Space Gas, 125 mm hjul	78 cm	150 kg	79 cm	90-130 cm	25-50 cm

Bure Standard Bure S

EL | GAS | MANUEL

Bure Standard og Bure S fås i tre udførelser: EL, GAS, og MANUEL. Bure S er en smallere version af Bure Standard specielt tilpasset til at fungere på trange steder. Samtlige modeller har en trinløs højdeindstilling af underarmsstøtten.

Ergonomiske håndtag

Ergonomisk udformede håndtag, som kan justeres trinløst i alle retninger for bedste individuelle tilpasning. Vigtigt ikke mindst for strokepatienter, som på denne måde kan nå deres "normale" håndstilling.

Lettilgængelig håndkontrol

Håndkontrollen er anbragt, så plejeren alternativt brugeren nemt kan nå den med begge hænder.

Eldrebet oprejsning

Bure Standard EL og Bure S er en fortrinlig assistent ved oprejsning af patient eller bruger. Belastningen af personalet mindskes, ligesom risikoen for slidskader. En del patienter kan endda selv rejse sig op ved hjælp af gangbordet.

Ekstra velegnet i hjemmemiljø

Bure S er ekstra velegnet i trange miljøer som fx hjemme eller på visse plejehjem. Bure S kommer igennem de allerfleste døråbninger, som er 70 cm eller bredere.

BURE S



EL

Bure Standard og Bure S EL passer til dig, som har brug for et gangbord, der er udstyret med oprejsningshjælp og kan indstilles i højden, når patienten er kommet op at stå.

GAS

Bure Standard og Bure S GAS passer til dig, som vil have et gangbord af høj kvalitet, hvor bordet kan indstilles hurtigt og trinløst, men som ikke behøver hjælp til oprejsning ved hjælp af elmotor.



MANUELL

Bure Standard og Bure S MANUELL er for dig, der har brug for et godt og individuelt tilpassningsbart gangbord, men ikke behøver indstille det i højden særlig ofte og ikke har brug for oprejsningshjælp ved hjælp af elmotor.



Højdejustering i håndtagene

Se tilbehør.

Holdbart

Gangbordene er konstrueret til at holde længe. Eksempelvis er der et ekstra forstærkningsbånd om armlænsputerne for at forhindre, at det revner ved påkørsel fra siden.

Stabilt

Gangbordet har anatomiske puder, som aflaster skuldre, arme og nakke. I stedet flyttes fokus til større muskelgrupper som ben- og brystmuskulatur. På den måde forbedres stabiliteten, og bordet bliver lettere at styre.

Smidig trinløs justering

Med eldrebet hævnning og sænkning bliver det nemt at forudindstille gangbordet til rette højde. Når patienten derefter er på plads, kan højden finjusteres trinløst, så den bliver bekvem, giver rette støtte og er optimal for gang.

Bremse og retningsspærring

Som tilbehør fås en- eller tohåndsbremse, der placeres således, at brugeren selv kan nå den fra sin gå-position. Håndbremsen virker på baghjulene, og i bremsekittet indgår også retningsspærrede hjul, der gør det lettere for brugeren at holde rette kurs under gang.

Åben konstruktion

Den åbne konstruktion giver samme stabilitet, men større manøvreringsplads. Patienten behøver ikke føle sig indelukket, og det bliver lettere for dig, der hjælper til, ved oprejsning eller påklædning.

Tåler vand

Alle el-detaller på Bure Standard EL og Bure S EL har el-sikkerhedsklasse IP 65 og kan dermed også anvendes i våde rum.

Alle gangborde kan bestilles med 75, 100 eller 125 mm hjul – angiv venligst ved bestilling. (Hvis der ikke står noget andet, gælder alle højdemål nedenfor produkter med 125 mm hjul). Nedenfor vises eksempler på mulige artikelkombinationer.

Tekniske specifikationer

CE-mærket ifølge MDD 93/42/EEC. Testet og godkendt ifølge EN-11199-3/ 2005

Art. Nr.	Produkt	Bredde	Max brugervægt	Længde	Højde	Armlæn/Indermål
56-312T	Bure Standard EL	78 cm	150 kg	80 cm	90-130 cm	25-50 cm
56-311	Bure Standard GAS	78 cm	150 kg	80 cm	90-129 cm	25-50 cm
56-310	Bure Standard MANUELL	78 cm	150 kg	80 cm	90-133 cm	25-50 cm
56-302T	Bure S EL	66 cm	150 kg	79 cm	90-130 cm	30-45 cm
56-301	Bure S GAS	66 cm	150 kg	79 cm	90-129 cm	30-45 cm
56-300	Bure S MANUELL	66 cm	150 kg	79 cm	90-133 cm	30-45 cm

Bure Low

EL | GAS

Bure fås nu også i en lavere model til korte brugere. Modellen er den samme som Bure Std / S, bortset fra at min/max højde er betydeligt lavere (70-95cm med 75mm hjul). Bure Low fås med to forskellige bundstativer, Std og S. Begge varianter kan fås med elektrisk højdejustering alternativt højdejustering med gascylinder.

Ergonomiske håndtag

Ergonomisk udformede håndtag, som kan justeres trinløst i alle retninger for bedste individuelle tilpasning. Vigtigt ikke mindst for strokepatienter, som på denne måde kan nå deres "normale" håndstilling.

Lettilgængelig håndkontrol

Håndkontrollen er anbragt, så plejeren alternativt brugeren nemt kan nå den med begge hænder.

Eldrebet oprejsning

Bure Standard EL og Bure S er en fortrinlig assistent ved oprejsning af patient eller bruger. Belastningen af personalet mindskes, ligesom risikoen for slidskader. En del patienter kan endda selv rejse sig op ved hjælp af gangbordet.

Ekstra velegnet i hjemmemiljø

Bure S er ekstra velegnet i trange miljøer som fx hjemme eller på visse plejehjem. Bure S kommer igennem de allerfleste døråbninger, som er 70 cm eller bredere.

Højdejustering i håndtagene

Se tilbehør.

Holdbart

Gangbordene er konstrueret til at holde længe. Eksempelvis er der et ekstra forstærkningsbånd om armlæns puderne for at forhindre, at det revner ved påkørsel fra siden.

Stabilt

Gangbordet har anatomiske puder, som aflaster skuldre, arme og nakke. I stedet flyttes fokus til større muskelgrupper som ben- og brystmuskulatur. På den måde forbedres stabiliteten, og bordet bliver lettere at styre.

Smidig trinløs justering

Med eldrebet hævnning og sænkning bliver det nemt at forudindstille gangbordet til rette højde. Når patienten derefter er på plads, kan højden finjusteres trinløst, så den bliver bekvem, giver rette støtte og er optimal for gang.

Bremse og retningsspærring

Som tilbehør fås en- eller tohåndsbremse, der placeres således, at brugeren selv kan nå den fra sin gå-position. Håndbremsen virker på baghjulene, og i bremsekittet indgår også retningsspærrede hjul, der gør det lettere for brugeren at holde rette kurs under gang.

Åben konstruktion

Den åbne konstruktion giver samme stabilitet, men større manøvreringsplads. Patienten behøver ikke føle sig indelukket, og det bliver lettere for dig, der hjælper til, ved oprejsning eller påklædning.

Tåler vand

Alle el-detaller på Bure Standard EL og Bure S EL har elsikkerhedsklasse IP 65 og kan dermed også anvendes i våde rum.



Bure Std

Bure Low



Alle gangborde kan bestilles med 75, 100 eller 125 mm hjul, det skal angives ved bestilling. (Hvis ikke andet er angivet, gælder højdemål nedenfor produkter med 125 mm hjul.) Nedenfor vises eksempler på mulige artikelskombinationer.

Tekniske specifikationer


CE-mærket ifølge MDD 93/42/EEC. Testet og godkendt ifølge EN-11199-3/ 2005

Art. Nr.	Produkt	Bredde	Max brugervægt	Længde	Højde	Armlæn (Indermål)
56-321/75	Bure Low El, 75 mm hjul	78 cm	150 kg	80 cm	70-95 cm	25-50 cm
56-321-S/75	Bure Low S, El 75 mm hjul	66 cm	150 kg	79 cm	70-95 cm	30-45 cm
56-322/75	Bure Low Gas, 75 mm hjul	78 cm	150 kg	80 cm	70-95 cm	25-50 cm
56-322-S/75	Bure Low S Gas, 75 mm hjul	66 cm	150 kg	79 cm	70-95 cm	30-45 cm

NY 2019
Bure XL

EL

Bure XL er udviklet til større og tungere patienter og har derfor ekstra plads og styrke. Eftersom det ved behandling og pleje af tungere patienter er ekstra vigtigt med kraftige hjælpemidler, leveres Bure XL altid med eldrift. Bure XL har PU-armlænspunder som standard, hvilket letter rengøring/aftørring.

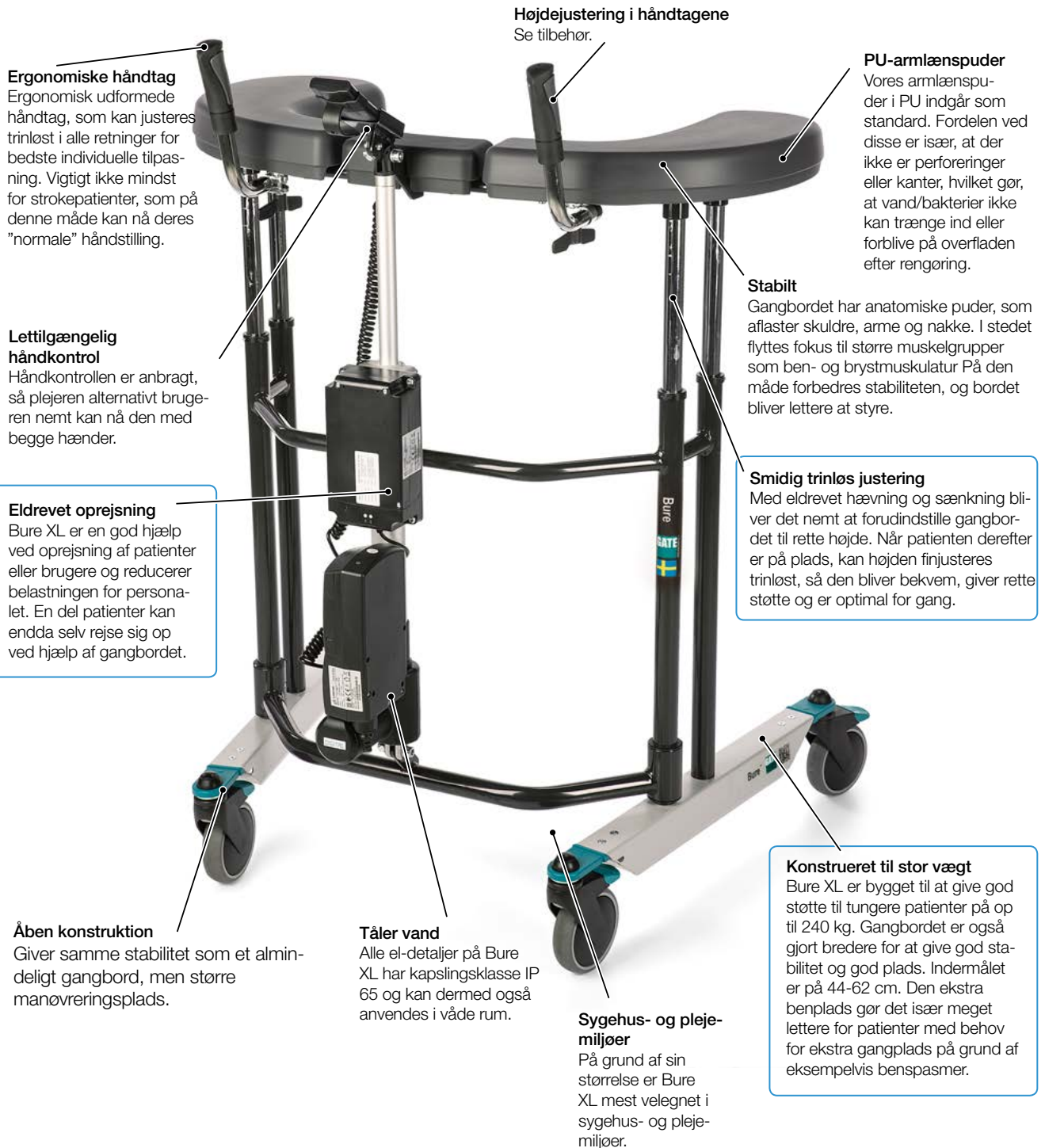

Samtlige Gangborde kan bestilles med 75, 100 eller 125mm hjul – angives ved bestilling. (Hvis ikke andet er angivet, gælder højdemål nedenfor produkter med 125mm hjul). Nedenfor vises eksempler på mulige artikelkombinationer.

Tekniske specifikationer

CE-mærket ifølge MDD 93/42/EEC. | Testet og godkendt ifølge EN-1199-3/ 2005

Art. Nr.	Produkt	Bredde	Max brugervægt	Længde	Højde	Armlæn/Indermål
56-314	Bure XL (2019) EL	88 cm	240 kg	78 cm	91-131 cm	44-62 cm

Tilbehør

NYHEDER

Ny forbedret ståplade

Vi har udviklet en ny ståplade, som erstatter den nuværende ståplade i aluminium (gælder ikke Bure Ortho, Bure XL). Den nye hænges på gangbordene på forsiden og har egne baghjul for at lette manøvrering. Den nye ståplade er enkel at anvende og lettere at håndtere og har desuden lavere vægt og er mindre i omfang.



Kørehåndtag for enklere manøvrering

For at du som plejer skal kunne hjælpe din bruger på bedste og smidigste måde, har vi udviklet et nyt kørehåndtag. Kørehåndtaget gør det muligt på en enkel måde at manøvrere vores gangborde, specielt når brugeren anvender ståplade. Kørehåndtaget er enkelt at montere og kan eftermonteres på alle Bure Gangborde (ikke Bure XL).



Underbensstøtte

For yderligere at udvide og forbedre anvendelsen af vores standardgangborde fås der nu en underbensstøtte, som kan anvendes ved mobilisering/oprejsning. Tilbehøret kan anvendes til samtlige gangborde bortset fra Rise&Go (DB) og Bure XL.



Pga. vælterisiko afhængigt af gangbordsmodel og patient anbefaler vi, at tilbehøret kun benyttes i kombination med ståplade og/eller Træderør/Væltebeskyttelse.

GATE PLUS

Vidste du, at GATE nu tilbyder flere funktioner i hvert elektrisk gangbord? De nye funktioner er indbygget i håndkontrollen/PLUS (tilbehør), og vi kalder disse nye funktioner for GATE PLUS.

Håndkontrol/PLUS passer til alle gangborde (ikke Bure XL), der er fremstillet efter 2015-11-25.

Ved at bestille håndkontrol/PLUS i forbindelse med ordre eller som efterbestilling som tilbehør får du disse funktioner:

- Flere hastigheder – ud over den nuværende standardhastighed også et hurtig hastighed (+40% sml. med standardhastigheden).
- Batteriindikator i håndkontrollen – for enklere at have styr på hvornår der skal oplades.
- Serviceindikator – for at have styr på hvornår der skal udføres vedligeholdelse/service på dit gangbord (mindst en gang/år).



"Hygiene management" – nye armlænspudder i PU

Som et supplement til de nuværende armlænspudder i koldskum lancerer vi nu et alternativ i formstøbt PU. Fordelen er især, at de nye pudder ikke har nogen perforeringer eller kanter, som tillader vand/bakterier at trænge ind og blive på overfladen efter rengøring/desinficering. På denne måde bliver det enklere at holde gangbordene rene mellem hver bruger.

Vores nye armlænspudder i PU fås til samtlige gangborde. De nye pudder kan bestilles i forbindelse med nye ordrer eller som tilbehør til eftermontering. Bemærk, at ydermål med PU-pudder forøges med 5cm.



Styring af gangbordets bevægelse med knapper i håndtagene

Vi kan nu tilbyde styring også via knapper i håndtagene. Vi tilbyder styring med trykknop alternativt vippekontakt. Samtlige funktioner kan manøvreres på denne måde, og dette tilbehør kan også eftermonteres og ved behov også benyttes i kombination med ordinær håndkontrol.



Gåtræningssele STD

Mange har ønsket en funktionel gåtræningssele også til vores standardborde.

Vores Gåtræningssele fæstnes på 4 punkter og derigennem opnås god støtte ved træning samt sikkerhed ved evt.fald.

Max brugervægt = 150 kg.

Dropholder med fæste

Skaber gode muligheder for patienten for at bevæge sig frit i rummet, på afdelingen eller i hjemmet. Leveres sammen med fæste.

Håndkontrol

GATE PLUS indebærer et antal ekstra funktioner såsom flere hastigheder og service/batterindikator i håndkontrollen.

PU-puder

PU-puder kan vælges ved bestilling alternativt efterbestilles. Disse puder har ingen perforeringer eller smuds-samlende kanter. Et godt alternativ, når man stiller høje krav til Hygiene Management. Bemærk, at ydermål med PU-puder forøges med +5cm.

Blød kurv med fæste

Kurv med fæste har plads til det allervigtigste.



Træderør

Fungerer som modvægt og giver ekstra stabilitet og sikkerhed, når gangbordet skal anvendes ved oprejsning. Standard på Bure Rise & GO. Kan ikke anvendes på bord med spredbart bundstativ.

Håndbremse, en eller to bremser

Forsyner gangbordet med håndbremse, så brugeren ved gangtræning selv kan bremse bordets bevægelse. Retnings-spærrede hjul for ekstra sikkerhed/hjælp. Enhåndsbremse fås både som venstre og højre.

Når håndbremsesættet er monteret, øges bundstativets bredde med 2 cm.



Styring af løft/sænk samt brenspreddning i håndtagene

Vi tilbyder styring med tryknap alternativt vippekontakt. Samtlige funktioner kan manøvreres på denne måde, og dette tilbehør kan også eftermonteres og ved behov også benyttes i kombination med ordinær håndkontrol.

Indstillelig sidestøtte

Forhindrer at armene glider af armstøttepuderne. Justeres trinløst langs med gangbordets side, hvilket stabiliserer gangen yderligere. Sidestøtten fås også i PU-udførelse.

Ittflaskeholder med fæste

Gør, at patienten ikke længere behøver være begrænset til sengen.

Underbensstøtte

Underbensstøtten letter mobilisering/oprejsning. Bør dog anvendes med ståplade og træderør alt. væltebeskyttelse pga. vælterisiko bagud.

Ståplade

Ståpladen er et glimrende supplement i de tilfælde, hvor man ønsker at anvende gangbordet til mobilisering/forflytning. Fås i en kort og lang version.

Hælbånd til ståplade


Håndbremsesæt

Retningsspærret hjul

125 mm
100 mm
75 mm

Hjul med bremse

125mm
100mm
75mm

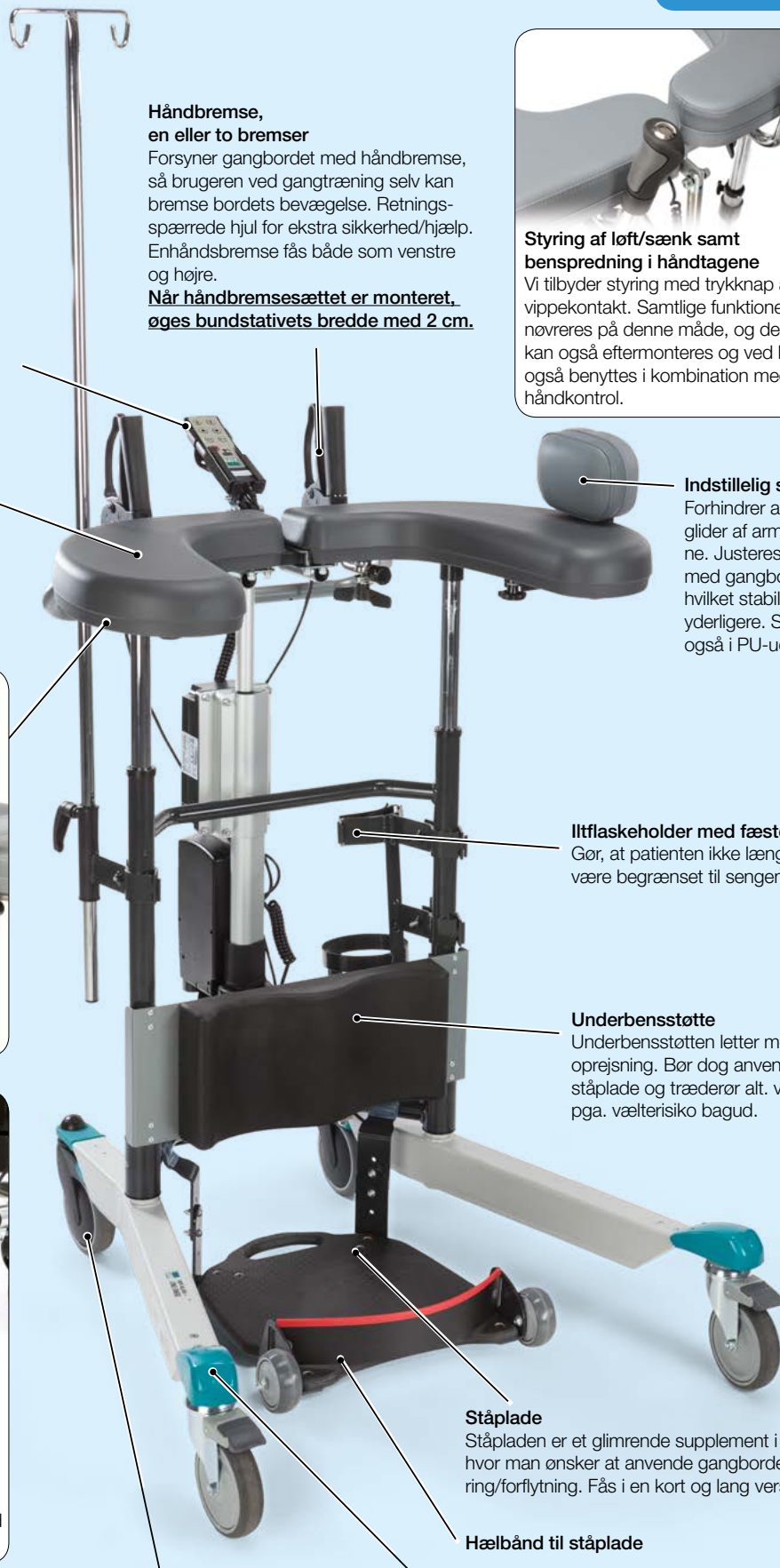

Tilbehør

NYHEDER



Dropholder med fæste



Sidestøtte/Sidestøtte PU



Ståplade kort/lang



Ståplade kort/lang, svinghjul (SW)



Håndbremsesæt DB



Håndbremsesæt standard



Hjul med bremse 75, 100, 125 mm



Hjul med retningspærre 75, 100, 125mm



Underbensstøtte



Blød kurv



Iltflaskeholder med fæste



Armstøttestødder, PU



Kørehåndtag



Hælbånd til ståplade



Styring/håndtag - vippekontakt



Styring/håndtag - trykstrømafbryder



Væltebeskyttelse - bagud



Træderør



Håndkontrol PLUS

Du ved vel, at...


TIP!



Det nye Bure DB DB har en lavere frihøjde end tidligere, hvilket gør det betydeligt nemmere at komme ind under sengen og dermed komme nærmere på brugeren. Særlig lav bliver Bure DB i kombination med 75mm hjul.



Hvis du vælger et gangbord med elektrisk indstillelig spredning, så vælger du også en øget fleksibilitet. Du kommer tæt på patienten, uanset bredde på kørestol, stol. Læg også mærke til, at ståpladen i de fleste tilfælde også kan være mellem kørestolens forhjul.

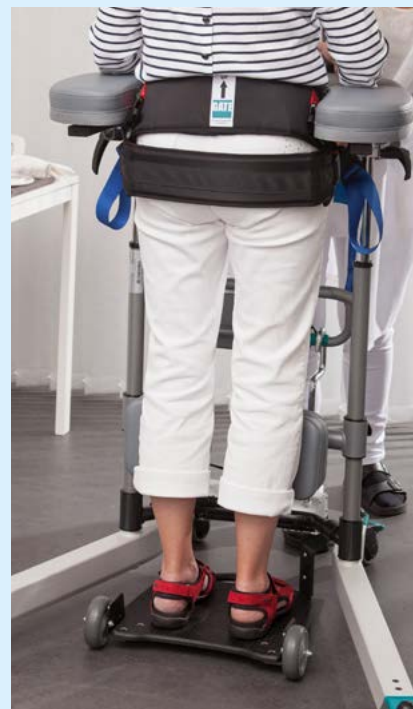

Ståpladen er et glimrende tilbehør i de tilfælde, hvor man ønsker at anvende gangbordet til mobilisering/oprejsning eller forflytning. Ståpladen er tilstrækkelig smal til at kunne anvendes med de fleste kørestole.

Vejledning

TILBEHØR

Armstøttepuder/Knæstøttepude PU, Rise & Go (DB)	57-372						
Armstøttepuder PU, Std/Low/DB/Ortho/Space/XL	57-361-PAR	X	X	X	X	X	X
Armstøttepuder, Std/Low/DB/Ortho/Space/XL	56-366-PAR	X	X	X	X	X	X

Benævnelse	Art#	Bure Std/S	Bure Low	Bure Ortho	Bure Space	Bure DB 2.0	Bure XL
Armstøttepuder PU, Std/Low/DB/Ortho/Space/XL	57-361-PAR	X	X	X	X	X	X
Armstøttepuder (Std) Skum, Std/Low/DB/Ortho/Space	56-366-PAR	X	X	X	X	X	
Dropstativ med fæste	56-338	X	X	X	X	X	X
Elmotorsæt + batteri inkl batterihylde, Low	56-332T-LOW		X				
Elmotorsæt + batteri inkl batterihylde, Std	56-332T	X					
Gascylindersæt inkl. htg, Low	56-330-LOW		X				
Gascylindersæt inkl. htg, Std	56-330	X					
Gåtræningssele STD	56-388	X	X	X	X	X	
Hjul							
Hjul med bremse 75 mm	56-387	X	X	X	X	X	X
Hjul med bremse 100mm	56-358	X	X	X	X	X	X
Hjul med bremse 125mm	56-361	X	X	X	X	X	X
Hjul med retningsspærre 75 mm	57-043	X	X	X	X	X	X
Hjul med retningsspærre 100mm	56-355	X	X	X	X	X	X
Hjul med retningsspærre 125mm	56-359	X	X	X	X	X	X
Hælbånd/ståplade	58-328-1	X	X	X	X	X	
Underbesøtte	56-352	X	X	X	X	X	
Kørehåndtag	57-368	X	X	X	X	X	X
Manuel bremse							
Manuel bremse, 2 hånds, Std/Low/Ortho/Space/XL	56-339-1-0	X	X	X	X		X
Manuel bremse, 1 hånds, Std/Low/Ortho/Space/XL	56-339-1-1	X	X	X	X		X
Manuel bremse, 2 hånds, DB 2.0	56-339-2-0					X	
Manuel bremse, 1 hånds, DB 2,0	56-339-2-1					X	
Blød kurv inkl. fæste	56-389	X	X			X	X
PLUS							
Håndkontrol PLUS inkl. holder, Std/Low/Ortho/Space	58-375-1	X	X	X	X		
Håndkontrol PLUS inkl. holder, DB/Rise & Go DB	58-375-2					X	
Sidestøtte	56-337	X	X	X	X	X	X
Sidestøtte, PU	56-337-PU	X	X	X	X	X	X
Styring/Håndtag							
Knapsæt FK, Op/Ned, Normal hastighed, et htg*	58-387-1	X	X	X	X	X	
Knapsæt FK, Op/Ned, Høj hastighed, et htg*	58-387-2	X	X	X	X	X	
Knapsæt FK, Spredning, et htg*	58-387-3					X	
Knapsæt TK, Op/Ned, Normal hastighed, to htg*	58-388-1	X	X	X	X	X	
Knapsæt TK, Op/Ned Høj hastighed, to htg*	58-388-2	X	X	X	X	X	
Knapsæt TK, Spredning, to htg*	58-388-3					X	
Y-kabel til knapsæt - et per Gangbord*	57-022-1	X	X	X	X	X	
Y-kabel til anvendelse af Håndkontrol sammen med Knapsæt	57-022-3	X	X	X	X	X	
Ståplader***							
Ståplade kort, STD	56-333-STD, 56-333/SW-STD	X	X				
Ståplade kort, DB	56-333-DB, 56-333/SW-DB					X	
Ståplade kort, SPACE	56-333-SPACE, 56-333/SW-SPACE				X		
Ståplade kort, XL	56-333-XL						X
Ståplade lang, STD	56-383-STD, 56-383/SW-STD	X	X				
Ståplade lang, DB	56-383-DB, 56-383/SW-DB					X	
Ståplade lang, SPACE	56-383-SPACE, 56-333/SW-SPACE				X		
Ståplade lang, XL	56-383-XL						X
Ståplade Aluminium kort, Ortho	56-392			X			
Ståplade Aluminium lang, Ortho	56-394			X			
Væltebeskyttelse bagud, Std/Low/Ortho/Space**	57-387	X	X	X	X		
Træderør, Std/Rise & Go	56-331-1	X	X				
Rørholder inkl. fæste	56-336	X	X	X	X	X	X
Rørholder inkl. fæste (2019)	56-651	X	X	X	X	X	X

*Ved eftermontering kræves der udstyr til at bore huller i stativet.

**Kan ikke monteres med en Manuel bremse.

*** /SW er en variant med svinghjul.

BureTM

Gangbord

- Mere menneskelig formgivning med tilpassede linjer, som ikke lukker patienten inde.
- Konstruktion, som øger stabilitet og kontrol.
- Fås i otte grundversioner med store muligheder for individuel tilpasning.
- En række funktionelt tilbehør fuldender den individuelle pasform.
- Formgivning og funktioner, som skaber god arbejdsergonomi og letter det daglige arbejde.
- Eldrevet oprejsningshjælp gør, at patienten ofte selv kan deltage ved oprejsningen.
- Elbenspredning skaber større frihed og giver en bedre funktion ved oprejsning eller forflytning.



GATE

WE DO BETTER.

Vil du vide mere?

Kontakt os på: tel +46 371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | SE-333 75 Reftele
info@gaterd.com | www.gaterd.com



GATE COLLECTION