


Meyland Carlift®

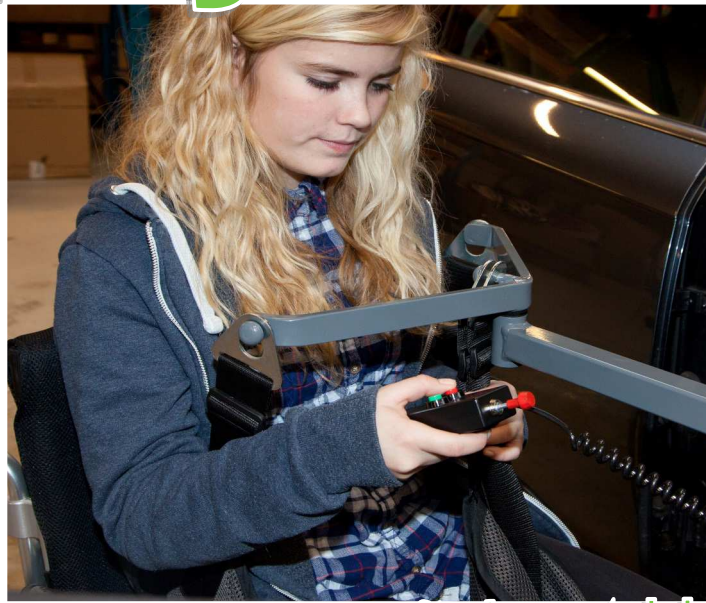

Unik løsning til at løfte kørestolsbrugere fra kørestolen ind i bilen

MEYLAND CARLIFT er den ideelle løfteløsning i bilen! Meyland CARLIFT løfter enkelt personer med handicaps ind og ud af deres bil.

MEYLAND CARLIFT løfter problemløst handicappede ind og ud af bilen. Liftten kan betjenes af den handicappede selv - eller om nødvendigt - af en hjælper.

Til brug i bilen

MEYLAND CARLIFT kan monteres i fører- eller passager siden i to- eller fire-dørs biler, og løftearmen er udskydelig for tilpasning til forskellige bilstørrelser.

Hæve-sænke funktionen udføres af en 12 volt motor, der forsynes med spænding fra bilens akkumulator. Styringen sker fra en lille kontrolboks med trykknapper, og boksen er magnetisk, så den kan sættes

vilkårligt på liftten, når den ikke skal bruges. Boksen er forbundet til liftten med en spiralledning, så en hjælper uden for bilen kan betjene liftten. Side og svingbevægelsen sker manuelt. MEYLAND CARLIFT leveres med et løftesejl der er trepunktsophængt for sikkert løft, og sejlet fås i 2 størrelser.

Flexibel

Når MEYLAND CARLIFT ikke benyttes og under kørslen kan den med ét enkelt greb løftes af og lægges i bagagerummet. Ved demontering af liftkonsollen opstår der ingen synlige spor efter liftten i bilen.

Samme lift / mange muligheder

MEYLAND CARLIFT er den ideelle løfteløsning i hjemmet! MEYLAND CARLIFT kan også anvendes indendørs f.eks. i

soveværelset eller badeværelset og betjenes på samme måde som i bilen.


Liftten kan anvendes til løft mellem kørestol og seng, toilet, badekar osv. Desuden kan MEYLAND CARLIFT løfte en person fra gulvet!

Til brug i hjemmet fås en højdeindstillelig vægkonsol, der skrues fast på væggen det ønskede sted.

Let at håndterer

MEYLAND CARLIFT hægtes på konsollen og forsynes med spænding fra en 12/230 volt transformator. Både lift og transformator kan benyttes til flere løftsteder i hjemmet.

Der kan desuden fås et forlængerled, så løftearmen svinger over et større område. Den er også praktisk hvor pladsforholdene er trange eller vanskelige.

Artikel-Nr.	Betegnelse	
123070	Meyland Carlift®, komplet med liftsejl nr. 5	


Tilbehør til Meyland Carlift®









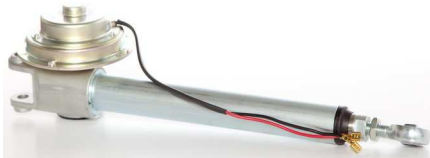
123046	Ekstra autokonsol til montering i bilen	
--------	---	--

130008	Kabel med sikringsholder og hunstik	
--------	-------------------------------------	---

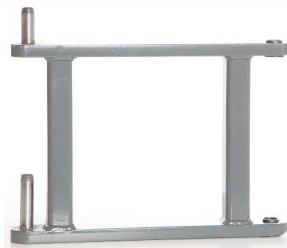
123068-1	Ekstra liftsejl, sort net, str. 1	
----------	-----------------------------------	--

123068-5	Ekstra liftsejl, sort net, str. 5 (standard)	
----------	--	--

123071	Vægkonsol	
--------	-----------	--

Artikel-Nr.	Beskrivelse	
123072	Forlængerled 300 mm. For vægkonsol	
131003	Mobilliftstativ med hjul, inkl. Batteri og lader. (uden Carlift og sejl)	
130007	Håndkontrol, komplet inkl. Relæ og spiralkabel	
130007a	Håndkontrol, komplet med spiralkabel	
123023	Forhøjertap for åg	
131010	Forhøjertap for åg til mobilstativ	
BATT12V	Batteri 12V/7,2Ah	
CHARG	Lader, 14,6/13,6V1A	
SKFACT	Aktuator, komplet m. motor	

Sejl til Meyland Carlift

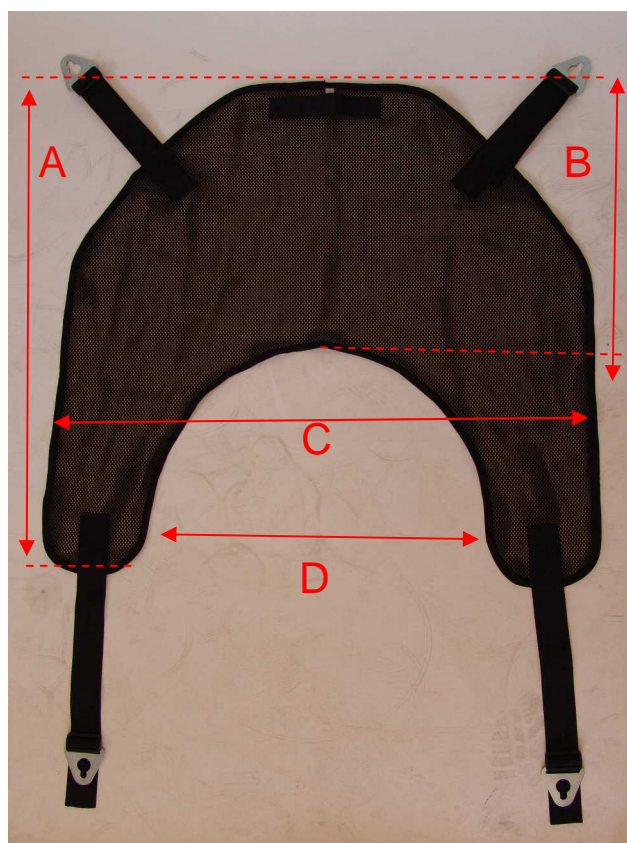

Se Carliften i funktion



Tekniske data	
Længde	57-65 cm
Vide	10 cm
Sejl standard	No. 5
Min. højde	35 cm
Løfte højde	39 cm
Max. belastning	125 kg
Vægt carlift	13,5 kg

Sejlet er til rådighed i to størrelser

Sejl størrelse:	A	B	C	D
No. 1	102 cm	46 cm	91 cm	56 cm

Størrelse svarer ca. til en kropsvægt på 70 - 125 kg og en højde på 1,70 m eller mere.

No. 5 (std.)	83 cm	46 cm	86 cm	50 cm
--------------	-------	-------	-------	-------

Størrelse svarer ca. til en kropsvægt på op til 70 kg og en højde på mindre end 1,75 m.