



Yes, you can.®



Invacare® Action® 3 NG

Quickguide



At folde kørestolen ud

1. Hold fast i armlænene eller siderøret på kørestolen med en hånd og vip stolen forsigtigt mod dig, således at hjulene på den modsatte side løftes fra underlaget.

2. Med den anden hånd skubbes sædebetrækket ned til rammerøret og strækkes helt ud.

3. Derefter aktiveres begge bremser på drivhjulene, benstøtterne svinges på plads og afstanden mellem fodpladerne tjekkes.

Nu er kørestolen klar til brug.

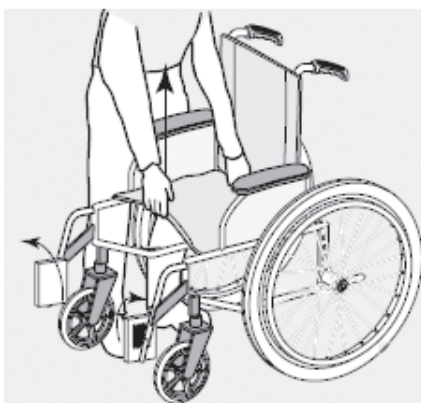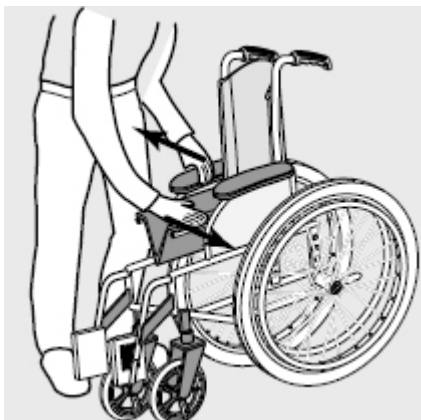

At folde kørestolen sammen

1. Vip fodpladerne op og sving benstøtterne ud til siden

2. Træk op med begge hænder i kørestolssædet og skub stolen sammen.

Daglig vedligeholdelse:

Ved rengøring af betrækket kan du se instruktioner på mærkaterne på sædet, polstringen og ryglæns polstringen.

Kontroller hjul og nav for smuds og hår.

Ved yderligere information om daglig vedligeholdelse m.v. se venligst **Action3NG** Brugermanualen eller Invacares hjemmeside: www.invacare.dk/da

