

Quickguide Betjening

PRO-betjeningsboks




Tænd/Sluk



Tryk på knappen for at tænde og slukke systemet.

Zoom

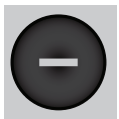

Tryk på knappen for at formindske.



Tryk på knappen for at forstørre.

Manuel og autofokus

Autofokus slås fra ved at trykke begge Zoom-knapper ned på én gang, indtil du hører et "beep". Herefter bruges Zoom-knapperne til at fokusere med. Autofokus aktiveres ved at trykke på begge Zoom-knapper samtidigt, indtil du hører et "beep".

Split COBRA HD og PC



For at dele skærmen mellem billedet fra COBRA HD og PC-billedet, tryk på PC-knappen. Tryk på knappen igen for at flytte PC-billedet på skærmen.



Hold centerknappen nede til du hører et "beep" for at gå tilbage til fuldt COBRA HD-billede.

Tag billede med COBRA HD



Hold fotoknappen nede til du hører et "beep" for at tage et billede med COBRA HD.

Betjening

PRO-betjeningsboks



Funktionsvælger



Positiv - naturlige farver - negativ.

Farvevalg



Sort/hvid - blå/gul - sort/gul - sort/grøn.



Vælg mellem varmt eller koldt lys (hvidbalance), hvis du arbejder i naturlige farver.
Vælg mellem tre kontrastniveauer, hvis du arbejder i positive eller negative farver.

Lysjustering



Kort tryk ændrer lysniveauet på skærmen mellem to lagrede niveauer.

Langt tryk efterfulgt af "beep" øger lyset på skærmen gradvist. I begge tilfælde viser en gul/sort indikatorbar nederst i billedet, hvilket niveau, der er valgt.

Læsefelt



Tryk på knappen for at aktivere læsefeltet på skærmen. Gardinerne kan flyttes op eller ned ved at holde piltasterne på funktionsvælgeren nede.

Betjening

TAGARNO HD VisionLab-betjening



Zoom



Tryk på denne knap for at forstørre.



Tryk på denne knap for at formindske.

Manuel og autofokus



Tryk på denne knap for at slå autofokus til og fra.

Funktionsknapper



Tryk på denne knap for at vise billedet i naturlige farver.



Tryk på denne knap for at vise billedet i positiv kontrast.



Tryk på denne knap for at vise billedet i negativ kontrast.



Tryk på denne knap for at vise billedet i sort/hvid.



Tryk på denne knap for at vise billedet i blå/gul.



Tryk på denne knap for at vise billedet i sort/gul.



Tryk på denne knap for at vise billedet i sort/grøn.

Lysjustering



Tryk på denne knap for at ændre lysstyrke fra 100% til 50%.



Tryk på denne knap for at ændre hvidbalancen fra 100% til 50%.

Læsefelt



Tryk på knappen for at aktivere læsefeltet på skærmen. Gardinerne kan flyttes op eller ned ved at holde piletasterne på betjeningsboksen nede.

Tag billede med COBRA HD



Hold fotoknappen nede til du hører et "beep" for at tage et billede med COBRA HD.

Gennemse billeder



Tryk på knappen for at gennemse de billeder du har taget med COBRA HD.



Tryk på denne knap for at vise forrige billede.



Tryk på denne knap for at vise næste billede.



Tryk på denne knap for at kopiere billedet til udklipsholder.



Tryk på denne knap for at gemme billedet.