



## Justeringsmuligheder

### Hovedstøtten

Indstil dybde, højde og vinkel på hovedstøttens skruer.

### Nakkestøtte

Nakkestøtten kan tilpasses til en lodret, sideværts eller fremadrettet position.

### Hoftevinkel

Indstil vinklen ved først at løsne de to skruer bag på stolen (11) og derefter skruerne (2). Justér til ønskede vinkel og stram skruerne igen

### Knævinkel

Justér vinklen ved at løsne skruer i begge sider (3). Hold fodstøtten med den ene hånd. Træk op eller skub ned for at finde den ønskede knævinkel. Stram skruerne igen.

### Forlængelse af fodstøtte

Fodstøtten forlænges ved at løsne skruerne (5). Træk ud i fodstøtten. Find den ønskede længde. Stram skruerne igen.

### Ankelvinkel

Indstil vinklen ved at løsne skruerne (4). Indstil vinklen og stram skruerne igen.

### Skubbehåndtag

Højden indstilles ved at løsne fingerskruen (5) og trække håndtaget op/ned. Stram skruerne.

Vinklen på håndtaget kan også ændres ved at løsne skruerne på skubbehåndtaget (8 + 9).

Stram skruerne igen. Sørg for, at rillerne passer sammen.

### Betjening af tiltfunktion

Funktionen aktiveres ved tryk på det lille håndtag på højre skubbehåndtag (10).

Brugers vægt er medvirkende til, at kørestolen kan tiltes bagover. Det lille håndtag aktiveres igen, når bruger og kørestol skal tilbage i position.

### Daglig rengøring af kørestolen

Bomuldsbetrækket på Kelvin Komfortkørestol kan vaskes på 60°C og tørretumbles.

Kørestolens stel, sæde og armlæn rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Kørestolens stel, puder og skubbehåndtag kan også desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

⚠ Desinficer altid Kelvin Komfortkørestol, hvis den skal overgå til ny bruger. Det skal ske for at undgå krydskontamination.



## QUICK GUIDE

### Kelvin Komfortkørestol

#### Justeringsmuligheder - oversigt

Når der skal justeres på kørestolen, skal boltene oftest findes under en lynlås. Boltens placering vises herunder.

1. Håndbremse
2. Justering af hoftevinklen
3. Justering af knævinklen
4. Justering af ankelvinklen
5. Justering af benlængden
6. Nakkestøtte
7. Flex arme
8. Justering af højde på skubbehåndtag



9. Justering af vinkel på skubbehåndtag
10. Betjening af tiltfunktion
11. Skruer til justering af hoftevinkel
12. Beslag til isætning af nakkestøtte
13. Anti-tip
14. Fodbremse