



Monteringsbilleder

Sådan monterer du vores bæltter

Se hvordan du monterer vore bæltter på:

Manuelle kørestole • Azalea • XLT • Cross • Cross XL • Next • Transit •

Sting Panther • S2 • U2 • Bambino • Quickie Neon • Humlan •

Assist • Mika • Sunny • HD650/600/500

El-kørestole • C400 • C500 • K450 • Koala • Minflex •

Minflex ABC • Storm 3 • Storm 4 • 1103 • Compact 905

Anatomic SITT A/S godkender montering, uden der er behov for en kombinationsaftale.

Følg disse monteringsvejledninger, så regnes det ikke som en specialtilpasning.

Indholdsfortegnelse

Sådan monterer du vores bæltter

Manuelle kørestole

Invacare

Azalea	4
XLT	5

ETAC

Cross	6
Cross XL	7
Next	8
Transit	9
Sting	10
Panther	11

Panthera

S2	12
U2	14
Bambino	14

Sunrise

Quickie Neon SA	15
-----------------------	----

TA - service

HD	16
----------	----

El-kørestole

Permobil

C400/K450	17
C500	18
Koala	19

Eurovema

Minflex	20
Minflex ABC	21

Invacare

Storm 3	22
Storm 4	23

Minicrosser

1103	24
------------	----

Meyra

Compact 905	25
-------------------	----

Anatomic SITT A/S godkender montering, uden der er behov for en kombinationsaftale.
Følg disse monteringsvejledninger, så regnes det ikke som en specialtilpasning.

Spænder



A

B

C

D

E



F

G

H

I

A. Spænde 742

B. Autospænde

C. Spænde S40

D. Spænde 740

E. Spænde 340

F. Sikkerhedsspænde

G. Flyspænde

H. Chromeline

I. DWSR

Dobbeltræk (mest populær)

Kraftigt spænde i metal

Stærkere end 742, knap på siden

Fixlås, Enkeltræk

Kraftigt låsbart spænde

Forhindrer uønsket åbning

Findes både til autospænde & chromeline

Kraftig konstruktion

Lækkert spænde i metal

Dobbeltræk (Standard)

Montering af firepunktsbælte, antirotationsbælte på Azalea (Invacare)



Sittbælte med fire fastgørelsespunkter
Til montering på Azalea (Invacare)



Antirotationsbælte
Til montering på Azalea (Invacare)

Montering af to- og firepunktsbælte på XLT (Invacare)



Sittbælt Comfort

Til montering på XLT (Invacare)



Sittbælt med fire fastgørelsespunkter

Til montering på XLT (Invacare)

Montering af to- og firepunktsbælte, antirotationsbælte på Cross (Etac)

Sittbælte med fire fastgørelsespunkter og antirotationsbælte, monteret bagtil med universalfæste til hoftebælte.

Universalafæste hoftebælte 25 mm, M6 (4 stk.), vare nr. 371910

Universalafæste hoftebælte 25 mm, M6 (2 stk.), vare nr. 371912



Sittbælte Comfort
Til montering på Cross (Etac)



Sittbælte med fire fastgørelsespunkter
Til montering på Cross (Etac)



Antirotationsbælte
Til montering på Cross (Etac)

Montering af firepunktsbælte, antirotationsbælte på Cross XL (Etac)

Sittbælte monteret (forreste fastgørelsespunkt) med universalfæste til hoftebælte.

Universalfæste hoftebælte 25 mm, M6 (4 stk.), vare nr. 371910

Universalfæste hoftebælte 25 mm, M6 (2 stk.), vare nr. 371912



Sittbælte med fire fastgørelsespunkter

Til montering på Cross XL (Etac)



Antirotationsbælte

Til montering på Cross XL (Etac)

Montering af to- og firepunktsbælte, antirotationsbælte på Next (Etac)



Sittbælt Comfort
Til montering på Next (Etac)



Sittbælt med fire fastgørelsespunkter
Til montering på Next (Etac)



Antirotationsbælte
Til montering på Next (Etac)

Montering af to- og firepunktsbælte, antirotationsbælte på Transit (Etac)



Sittbælt Comfort
Til montering på Transit (Etac)



Sittbælt med fire fastgørelsespunkter
Til montering på Transit (Etac)



Antirotationsbælte
Til montering på Transit (Etac)

Montering af to- og firepunktsbælte, antirotationsbælte på Transit (Etac)



Sittbælt med fire fastgørelsespunkter
Til montering på Sting (Etac)



Antirotationsbælte
Til montering på Sting (Etac)

Montering af firepunktsbælte, antirotationsbælte på Panther (Etac)



Sittbælte med fire fastgørelsespunkter
Til montering på Panther (Etac)



Antirotationsbælte
Til montering på Panther (Etac)

Montering af to- og firepunktsbælte, antirotationsbælte på S2 (Panthera)



Sittbelt Comfort
Til montering på S2 (Panthera)



Sittbelt med fire fastgørelsespunkter
Til montering på S2 (Panthera)



Antirotationsbælte
Til montering på S2 (Panthera)

Montering af toppunktsbælte U2 (Panthera)



Sittbælt Comfort

Til montering på U2 (Panthera)

Montering af firepunktsbælte, antirotationsbælte på Bambino (Panthera)



Sittbælte med fire fastgørelsespunkter
Til montering på Bambino (Panthera)



Antirotationsbælte
Til montering på Bambino (Panthera)

Montering af to- og firepunktsbælte, antirotationsbælte på Quickie Neon (Sunrise Medical)



Sittbelt Comfort

Til montering på Quickie Neon
(Sunrise Medical)



Sittbelt med fire fastgørelsespunkter

Til montering på Quickie Neon
(Sunrise Medical)



Antirotationsbælte

Til montering på Quickie Neon (Sunrise Medical)

Montering af to- og firepunktsbælte, antirotationsbælte på HD (TA-service)

Her monteret med HD originalfæste.



Sittbælt Comfort
Til montering på HD
(TA-service)



Sittbælt med fire fastgørelsespunkter
Til montering på HD
(TA-service)



Antirotationsbælte
Til montering på HD (TA-service)

Montering af firepunktsbælte, antirotationsbælte på C400 (Permobil)

Monteres med universalfæste til hoftebælte.

Universalfæste hoftebælte 25 mm, M6 (4 stk.), vare nr. 371910

Universalfæste hoftebælte 25 mm, M6 (2 stk.), vare nr. 371912



Sittbælt med fire fastgørelsespunkter

Til montering på C400 (Permobil)



Antirotationsbælte

Til montering på C400 (Permobil)

Montering af firepunktsbælte, antirotationsbælte på C500 (Permobil)

Monteres med Universalfæste til hoftebælte.

Universalfæste hoftebælte 25 mm, M6 (4 stk.), vare nr. 371910

Universalfæste hoftebælte 25 mm, M6 (2 stk.), vare nr. 371912



Sittbælte med fire fastgørelsespunkter

Til montering på C500 (Permobil)



Antirotationsbælte

Til montering på C500 (Permobil)

Montering af firepunktsbælte, antirotationsbælte på Koala (Permobil)

Her monteret i originalfæste (bagerste) og Universalafæste (forreste) til hoftebælte.

Universalafæste hoftebælte 25 mm, M6 (4 stk.), vare nr. 371910

Universalafæste hoftebælte 25 mm, M6 (2 stk.), vare nr. 371912



Sittbelt Comfort

Til montering på Koala (Permobil)



Sittbelt med fire fastgørelsespunkter

Til montering på Koala (Permobil)



Antirotationsbælte

Til montering på Koala (Permobil)

Montering af firepunktsbælte, antirotationsbælte på Miniflex (Eurovema)

Monteres med Universalfæste til hoftebælte.

Universalfæste hoftebælte 25 mm, M6 (4 stk.), vare nr. 371910

Universalfæste hoftebælte 25 mm, M6 (2 stk.), vare nr. 371912



Sittbælt med fire fastgørelsespunkter

Til montering på Miniflex (Eurovema)



Antirotationsbælte

Til montering på Miniflex (Eurovema)

Montering af firepunktsbælte, antirotationsbælte på Miniflex ABC (Eurovema)

Monteres med Universalfæste til hoftebælte.

Universalfæste hoftebælte 25 mm, M6 (4 stk.), vare nr. 371910

Universalfæste hoftebælte 25 mm, M6 (2 stk.), vare nr. 371912



Sittbelt Comfort

Til montering på Miniflex ABC
(Eurovema)



Sittbelt med fire fastgørelsespunkter

Til montering på Miniflex ABC
(Eurovema)



Antirotationsbælte

Til montering på Miniflex ABC (Eurovema)

Montering af firepunktsbælte, antirotationsbælte på Storm 3 (Invacare)

Monteres med universalfæste til hoftebælte.

Universalfæste hoftebælte 25 mm, M6 (4 stk.), vare nr. 371910

Universalfæste hoftebælte 25 mm, M6 (2 stk.), vare nr. 371912



Sittbælte med fire fastgørelsespunkter

Til montering på Storm 3 (Invacare)



Antirotationsbælte

Til montering på Storm 3 (Invacare)

Montering af firepunktsbælte, antirotationsbælte på Storm 4 (Invacare)

Monteres med universalfæste til hoftebælte.

Universalfæste hoftebælte 25 mm, M6 (4 stk.), vare nr. 371910

Universalfæste hoftebælte 25 mm, M6 (2 stk.), vare nr. 371912



Sittbælte med fire fastgørelsespunkter

Til montering på Storm 4 (Invacare)



Antirotationsbælte

Til montering på Storm 4 (Invacare)

Montering af firepunktsbælte, antirotationsbælte på 1103 (Minicrosser)

Monteres med universalfæste til hoftebælte.

Universalfæste hoftebælte 25 mm, M8 hul (4 stk.), vare nr. 371911

Universalfæste hoftebælte 25 mm, M8 hul (2 stk.), vare nr. 371913



Sittbælte med fire fastgørelsespunkter

Til montering på 1103 (Minicrosser)



Antirotationsbælte

Til montering på 1103 (Minicrosser)

Montering af firepunktsbælte, antirotationsbælte på Compact 905 (Meyra)

Monteres med universalfæste til hoftebælte.

Universalfæste hoftebælte 25 mm, M6 (4 stk.), vare nr. 371910

Universalfæste hoftebælte 25 mm, M6 (2 stk.), vare nr. 371912



Sittbælt med fire fastgørelsespunkter

Til montering på Compact 905 (Meyra)



Antirotationsbælte

Til montering på Compact 905 (Meyra)



Anatomic SITT A/S

Adresse Viengevej 4, 8240 Risskov

Telefon 86 17 01 74 **Fax** 86 17 01 75

E-mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

Hjemmeside www.anatomicsitt.com