



Scan koden og få flere produktinformationer.



**COBI**  
REHAB

## QUICK GUIDE

# Cobiflow 300 vekseltryksmadras med standard pumpe

### BRUGERVÆGT

Madrasen er beregnet til brugervægt fra 30-180 kg.

### KONTROL AF TRYKAFLASTNINGEN

Guide indstillingen på forsiden er vejledende.

**⚠ VIGTIGT!** Den størst mulige trykaflastning forefindes jo dybere bruger ligger på madrassen, dog uden at bruger ligger madrassen igennem, og derved kommer i berøring med underlægningsmadrassen.

Kontrollér ved at stikke hånden ind mellem madras og bruger for at sikre, at bruger er uden berøring med underlægningsmadrassen. Hånden skal kunne skubbes ind med let modstand. Hvis modstanden er lille, er tryk for højt. Hvis modstanden er stor, er tryk for lille. Cobi Rehab anbefaler en afstand mellem bruger og bunden af madrassen på 2-4 cm.

### FIRM/PLEJE FUNKTION

Firm funktionen bruges når der skal plejes i sengen, den pumper madrassen hård i 20 minutter og skifter derefter automatisk tilbage til vekseltryk. (Figur 5)

### UPRIGHT/SIDDE FUNKTION

Upright funktionen benyttes når brugeren sidder med eleveret hovedgærde i flere timer. For at deaktivere Upright funktionen tryk igen på Upright. (Figur 6)

### CPR/VED HJERTESTOP

Skal der gives hjertemassage, lukkes luften straks ud ved at hive i CPR flap ved hovedgærdet og tilslutningslanger afmonteres ved pumpen.

### VED DRIFTSFORSTYRRELSER

Alarmpnappen går i gang efter ca. 5 minutters driftsforstyrrelser. Kontroller stik og slanger er sat i. Se fejlsøgningsskema i brugsanvisning eller kontakt tekniker/depot.

### RENGØRING

Luftmadras og pumpe skal rengøres omhyggeligt ved skift mellem brugere for at undgå krydskontaminering. Følgende er en god retningslinje, men lokale beslutninger vedr. rengøring bør ligeså følges.

- Daglige rengøringer kan udføres ved sengen med desinfektionsmidler, vand og mildt rengøringsmiddel samt en ren og tør klud.
- Rengøring af pumpen kan udføres med en hårdt opvredet klud med vand eller med lidt neutral sæbe.
- Vær omhyggelig med, at celler og betræk er HELT tørre før brugeren igen ligger på overfalden.
- Betrækket kan maskinvaskes op til 95° C.
- Betrækket kan tørretumbles ved lav varme. Betrækket skal være helt tørt før påmontering.
- Betrækket må ikke tørres i tørreskab og må IKKE stryges.

### OPSÆTNING AF MADRAS OG PUMPE

- Læg madrassen direkte på sengebunden, så cellerne vender opad og fodsymbolet på betrækket er placeret i fodenden.
- Fastgør madrassen i hvert hjørne ved hjælp af stropperne.
- Efterse at alle sengens funktioner kan bruges, når madrassen er spændt fast på liggefladen, før næste trin udføres.
- Hæng pumpeenheden på sengegavlen ved hjælp af krogene.
- Tjek at madrassens CPR flap/knap i venstre side af hovedenden er placeret korrekt, lukket og at CPR skiltet er tydeligt.
- Tilslut madrassens luft slanger til quick release koblingerne på pumpe enhedens udtag.
- Sæt stikket i en kontakt og tænd for pumpe enheden på vippekontakten på enhedens venstre side.
- Tryk Power/mute knappen (figur 1) for at starte luftpåfyldning af madrassen. Vent ca. 30 sekunder før yderligere indstilling af pumpen.
- Indstil patientens vægt på "Patient Weight" knappen (figur 2) på det antal kg der er nærmest brugerens egen vægt i kg. Vent ca. 30 minutter før madrassen er klar til brug og "pressure monitoring" lyser grønt (figur 3).  
Indstil vekseltiden "Cycle/Float" (figur 4) på mellem 10-25 minutter. (10 eller 15 minutter anbefales).
- Læg et løst lagen på madrassen.
- Læg brugeren centreret på madrassen.
- Kontrollér trykaflastningen er korrekt.  
Se side 2 (bagsiden)

