



Pumpens funktion

Autofirm MAX-funktion

Autofirm MAX-funktionen bruges til pleje i sengen. Funktionen fylder madrassen med den maksimale mængde luft, hvilket letter pleje og forflytning. Trykket holder i 15 minutter. Bagefter vender pumpen automatisk tilbage til vekseltryk.

Tryk på Autofirm MAX (figur 5) for at afbryde funktionen.

Upright/Siddefunktion

Pumpen har en siddefunktion (Upright), som er beregnet til fx lunge- og hjertesyg, som sidder meget op i sengen. Funktionen aktiveres ved at trykke på Upright-knappen (figur 6).

I tilfælde af hjertestop

Madrassen skal være flad, hvis der skal gives hjertemassage. Hurtig tømning af madrassen sker ved at trække i CPR-stroppen ved hovedgærdet. Bagefter trækkes tilslutningsslangerne ud af pumpen. Start hjertemassagen, mens madrassen tømmes!

Driftsforstyrrelser

Hvis madrassen mangler strøm eller trykket er for lavt, vil alarmknappen på frontpanelet bippe og lyse (figur 8).

Tjek, at luftslinger, strømstik og CPR-stroppen sidder korrekt. Kontakt Cobi Rehab for yderligere hjælp.

Rengøring af Cobiflow 500

- Til daglig rengøring af madrassen bruges vand, et desinfektions- og/ eller et mildt rengøringsmiddel samt en ren, tør klud.
- Betrækket kan maskinvaskes ved 60° C.
- Betrækket kan tørretumbles ved lav varme. Betrækket skal være **helt** tørt, før det lægges på madrassen igen.
- Betrækket må ikke tørres i tørreskab eller stryges.
- Vaskes cellerne under betrækket, skal de være **helt** tørre, inden betrækket lægges på.
- Pumpen kan rengøres med en hårdt opvredet klud med vand og lidt neutral sæbe.

Cobiflow 500 vekseltryksmadras med dual plus pumpe

Klargøring af madras og pumpe

- 1 Læg madrassen direkte på sengebunden, så cellerne vender opad.
- 2 Fastgør madrassen i hvert hjørne ved hjælp af stropperne.
- 3 Tjek, at sengens elevationsfunktion virker, når madrassen er blevet spændt fast til sengebunden.
- 4 Hæng pumpen på sengegavlen ved hjælp af krogene.
- 5 Tjek, at CPR-stroppen ved hovedgærdet kan ses og sidder korrekt.
- 6 Slut madrassens luftslinger til quick release koblingerne på siden af pumpen.
- 7 Sæt strømstikket i stikkontakten.
- 8 Tænd pumpen på vippekontakten på pumpens højre side. Tryk bagefter på tænd- og slukknappen (figur 1).

Pumpen viser 10 i Timer (figur 4) og 0 i komfortindstilling (figur 3). Madrassen er klar til brug, når Cycle Timer lyser grønt. Læg et løst lagen på madrassen inden brug.

- 9 Pumpen indstiller sig automatisk til brugerens vægt. Madrassen kan gøres blødere eller hårdere ved at trykke på komfortindstilling (figur 3).

Komfortindstilling aktiveres ved at holde tænd- og slukknappen (figur 1) inde i 5 sekunder. Nu kan alle frontpanelets knapper og funktioner bruges.

Håndprøven

Kontrollér altid, at madrassen har den korrekte mængde luft i sig under brugeren.

Det gøres ved at føre hånden ind mellem cellerne under brugerens tungeste del (fx bækkenet).

Madrassen skal være præcis så fyldt, at brugeren ligger/sidder halvvejs nede i madrassen.

