



## Loftlift JH270 med ladning gennem skinne

Denne loftlift oplades automatisk gennem skinnen ved at køre liftmotor helt ud i enden af traversskinne og derefter helt ud hjørnet (der hvor den sorte lader sidder på væggen), der vil i displayet stå "charging" og lampen vil starte med at blikket rød og herefter vil den lyse kontant rød. Det er en god idé at lade liften regelmæssigt.

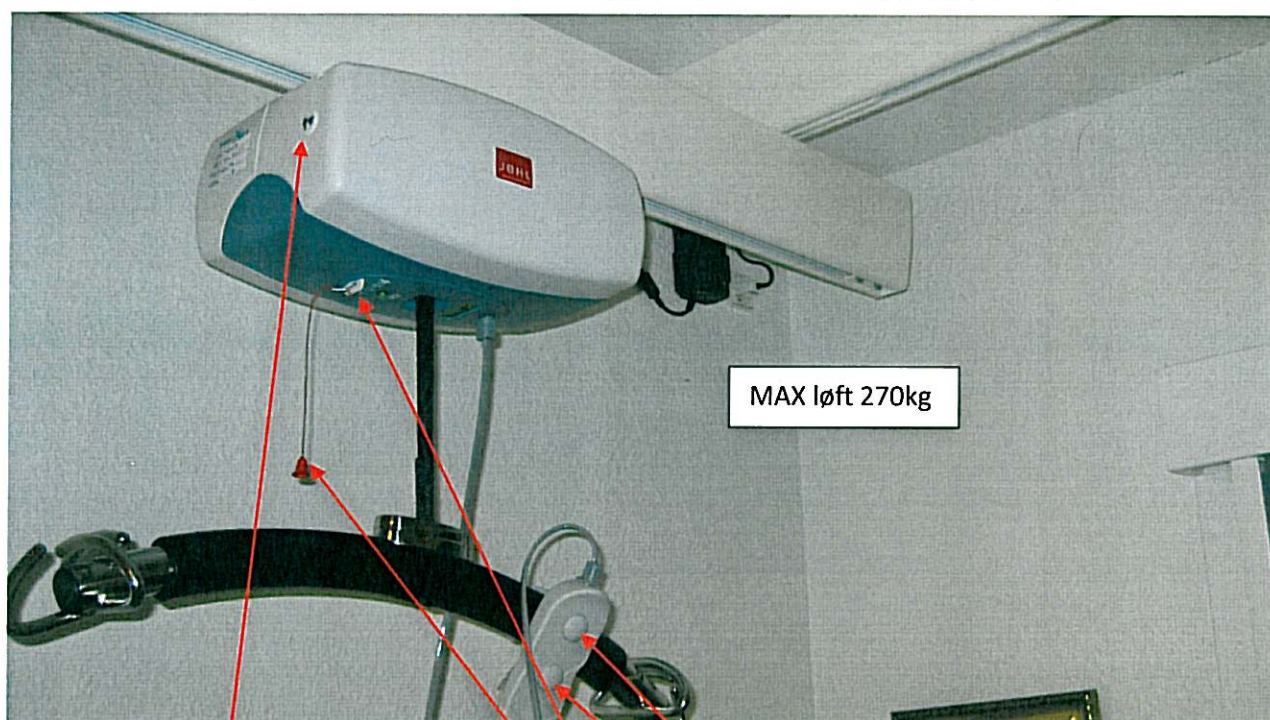

MAX løft 270kg

Nødfir isættes, herefter kan liften manuelt køres op og ned

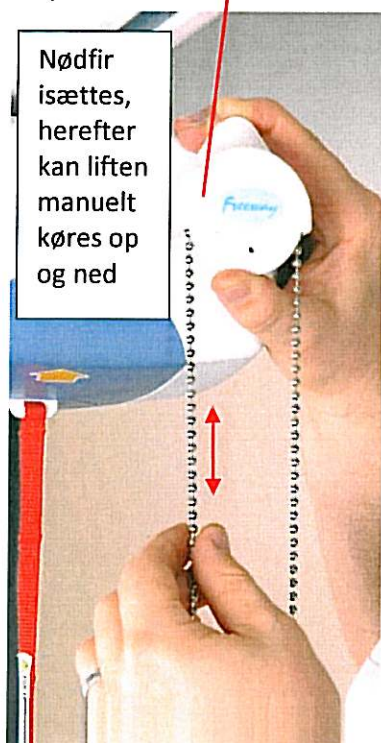

Når du vil løfte trykkes på op-knappen  
Når du vil sænke trykkes på ned-knappen  
Efter brug kan håndkontrollen placeres på løfteåg eller hænge frit i luften.  
Ved en nødsituation kan nødstopet aktiveres ved at trække i den røde snor, for at nulstille trykkes den hvide knap op.

For yderligere information læs den fulde brugsanvisning eller kontakt **JØHL**

Firskovvej 6  
2800 Kgs. Lyngby

Telefon 3920 2007  
www.johllhumancare.dk  
info@johllhumancare