



Zibo Athene

...gør en forskel

# Quickguide

## ProCare Auto

 <b>Power</b>	Tænd/sluk for pumpen.
 <b>Låsefunktion</b>	Når den grønne diode lyser er panelet låst. For at låse/låse op, tryk på hængelås-symbolet i 5 sek. til det grønne lys tænder/slukker. Panelet låses når det ikke har været i brug i 3 min.
 <b>Plejefunktion</b>	Funktionen benyttes ved pleje/mobilisering. Madrassen bliver hård/statisk. Funktionen slår automatisk fra efter 20 minutter og vender tilbage til forrige indstilling. For selv at slå funktionen fra, trykkes på plejefunktions-knappen igen.
 <b>Automatisk trykindstilling</b>	Juster trykket i madrassen baseret på patientens vægt – når der kun er ét lys er trykket indstillet. OBS - pumpen indstiller løbende trykket, alt efter brugerens position. AUTO-knappen er kun til brug ved ønske om øjeblikkeligt justering.
 <b>Komfortindstilling</b>	"0" er det tryk systemet automatisk finder. "+ " er et lidt højere tryk = mere fast madras. "- " er et lidt lavere tryk = blødere madras.
 <b>Terapi-valg</b>	 <b>Veksletrykfunktion:</b> Systemet vil veksle mellem hver 2. celle tømt for luft, og hver anden celle fyldt med luft, hvert 10. minut.  <b>Statisk funktion:</b> Madrassen er stillestående med samme lave tryk i alle celler.  <b>Siddefunktion:</b> Siddefunktion giver brugeren yderligere støtte i den siddende stilling (eks. spise).
 <b>Alarm</b>	Ved tryk på alarmknappen, gøres alarmer lydløse.



# Alarmer

## ProCare Auto

24 timers teknisk service: tlf.: 70 900 407

<b>LAVT TRYK</b>	Lavt tryk lampe lyser ud for symbolet: 
<b>Årsag</b>	CPR-ventilen kan være udløst/drejet eller der er en lækage i madrassen.
<b>Løsning</b>	Luk CPR-ventilen eller check mulig lækage i madrassen eller utæthed i celle/luftslange. Check at slangerne er sat ordentlig fast ind i pumpen.
<b>STRØMSVIKT</b>	Strømsvigt lampe lyser ud for symbolet: 
<b>Årsag</b>	Fejl i strømforsyningen, der er slukket for stikkontakten, ledningen er frakoblet eller, der er slukket for pumpen.
<b>Løsning</b>	Sæt ledningen i stikkontakten eller pumpen. Sikr dig at pumpen er tændt.
<b>SERVICE</b> Tid til serviceeftersyn	En grøn lampe lyser ud for servicesymbolet 
<b>Årsag</b>	Tilstoppet filter eller slidt pumpemembran.
<b>Løsning</b>	Kontakt Zibo Athene for hjælp.
<b>NØDSITUATION</b> <b>HJERTESTOP,</b> <b>CPR</b>	 Den røde CPR-ventil findes på siden af madrassen i hovedenden.
<b>Løsning</b>	CPR-ventilen drejes så luften hurtigt tømmes af madrassen. Slangerne kan også kobles fra pumpen for at tømme madrassen hurtigere for luft.