


# Dyna-Form® Mercury Advance

# Dyna-Form® Mercury Advance Bari

Dette er en quick guide til Dyna-Form Mercury Advance / Mercury Advance Bari (se brugermanualen for yderligere information).

Product Code MAS12/MAS15

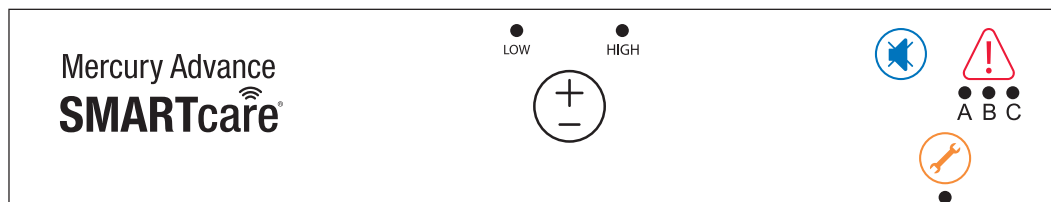

## Tænd/sluk kontakt akustisk advarsel nulstilling

Tænd/sluk kontakten tænder og slukker for strømmen til pumpen.

Når pumpen registrerer en akustisk advarselstilstand, kan denne gøres lydløs og nulstilles ved at slukke og tænde pumpen.



## CPR ventil

Sørg for at CPR stikket altid er sat helt i, inden madrassen oppustes.

OBS: Madrassen kan ikke pustes ordentligt op, hvis ikke dette er tilfældet.

CPR ventilen bør kun bruges i tilfælde af et nødstilfælde. Trækkes CPR ventilen ud, vil madrassen hurtigt tømmes for luft og være klar til transport eller statisk indstilling.

LOW HIGH



Strøm tænd / sluk  
Vekslende / statisk indstilling

LOW HIGH



LOW / komfort indstilling



Gør alarm lydløs



A B C  
Fejl med akustisk alarm

## LED indstillinger

Når dette symbol lyser, indikerer det, at madrassen er tændt.







For patienter med eksisterende tryksårsskader eller de patienter der er i meget høj risiko for at udvikle tryksår, anbefales det, at systemet sættes på HIGH. Dog skal der altid foretages en klinisk vurdering inden anvendelse. Systemet indstilles til HIGH ved at trykke på knapperne +/- én gang. Disse er placeret på pumpens top. I HIGH indstilling minder madrassystemet om en vekseltryksmadras, imens der stadig drages fordel af de statiske skum kerner. Ved gentaget tryk på +/- knapperne kan der skiftes i mellem LOW og HIGH.

Pumpen starter automatisk op på indstillingen LOW hver gang systemet tændes på ny. Indstillingen LOW er ideel for patienter med en lavere kropsvægt, hvis de ikke ligger komfortabelt, eller er sensitiv over for cellernes bevægelse.

Denne funktion bruges til at gøre alarmen lydløs. LED lampen vil forblive tændt hvis alarmens lyd tidligere er blevet slukket, men der er stadig en defekt eller fejl i madrassen. For at nulstille fuldstændigt skal systemet slukkes og tændes igen. Hvis alarmen fortsætter, sammen med det oplyste lys, skal en tekniker tilkaldes.

Dette symbol indikerer en "fejl med den akustiske alarm".  
Se venligst guide til fejlfinding nedenfor for vejledning til at nulstille alarmen.

## Fejlfinding

Advarsel / Fejl	Problem	Løsning
<b>Pumpen pumper ikke; intent display lys er tændt</b>	Pumpen er muligvis ikke tilsluttet en strømkilde, eller en sikring skal skiftes.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tjek at pumpen er tilsluttet strøm med de korrekte volt.</li> <li>2. Sørg for at pumpen er tændt. Sluk og tag stikket ud før genstart.</li> <li>3. Tjek strømstikkets sikringer (5 AMP) og tjek derefter pumpens sikring (1 AMP). Sikringen kan tages ud med en skruetrækker.</li> </ol> <p>⚠ Pøv ikke at åbne pumpen. Åbning af pumpen kan medføre skader på personer eller udstyr.</p> <p>⚠ Sørg for at udskiftning af sikringer udføres i overensstemmelse med lokal lovgivning.</p>
 <b>Advarsel LED C + Akustisk advarsel</b>	Strømfejl	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tjek at pumpen er tilsluttet strøm med de korrekte volt.</li> <li>2. Sørg for at pumpen er tændt. Sluk og tag stikket ud før genstart.</li> <li>3. Tjek strømstikkets sikringer (5 AMP) og tjek derefter pumpens sikring (1 AMP). Sikringen kan tages ud med en skruetrækker.</li> </ol> <p>⚠ Pøv ikke at åbne pumpen. Åbning af pumpen kan medføre skader på personer eller udstyr.</p> <p>⚠ Sørg for at udskiftning af sikringer udføres i overensstemmelse med lokal lovgivning.</p>
 <b>Advarsel LED B + Akustisk advarsel</b>	Tryk for lavt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nulstil advarslen - Sluk for strømmen og tryk på kontakten, der gør alarmen lydløs.</li> <li>2. Tjek at CPR stikket sidder sikkert i pumpen (på venstre side af pumpen). Tjek at alle luft slanger inde i madrassen sidder sikkert i. Tjek at alle luftceller er sikkert tilsluttet til deres luftrør.</li> <li>3. Tjek alle celler, rør og slanger inde i madrassen for lækager.</li> <li>4. Tjek at luftfilter dækslet sidder korrekt, og at luftfilteret er rent.</li> <li>5. Tænd for strømmen.</li> </ol>
 <b>Advarsel LED B+C + Akustisk advarsel</b>	Tryk for lavt / luftrør bøjet eller knækket	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nulstil advarslen - Sluk for strømmen og tryk på kontakten, der gør alarmen lydløs.</li> <li>2. Tjek at den eksterne blå luftslange, der forbinder madras og CPR stikket, ikke er knækket, snoet eller bøjet.</li> <li>3. Tjek alle luftslanger der sidder inde i madrassen - alle bør sidde sikkert fast.</li> <li>4. Tjek at hver luftcelle er sikkert tilsluttet dets tilhørende luftrør.</li> </ol>
 <b>Advarsel LED A + Akustisk advarsel</b>	Tryk for højt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nulstil advarslen - sluk for strømmen og tryk på kontakten, der gør alarmen lysløs.</li> <li>2. Afkoppel luftslangen for at reducere trykket. Gentilslut når trykket er faldet.</li> <li>3. Tjek luftslangerne mellem madras og pumpen for snoninger, bøjninger eller knæk.</li> <li>4. Tænd for pumpen.</li> </ol>
 <b>Advarsel LED A+B + Akustisk advarsel</b>	Vekseltryksfejl (ingen vekseltryk)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nulstil advarslen - sluk for strømmen og tryk på kontakten, der gør alarmen lydløs.</li> <li>2. Afkoppel luftslangen for at reducere trykket. Gentilslut når trykket er faldet.</li> </ol>
 <b>Advarsel LED A, B+C + Akustisk advarsel</b>	Fejl ved opstart	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nulstil advarslen - sluk for strømmen og tryk på kontakten, der gør alarmen lydløs.</li> <li>2. Tjek at strømkablet er tilkoblet korrekt til pumpen, og at det sidder korrekt i strømuttaget. Tjek at der er tændt for strømuttaget.</li> <li>3. Tjek pumpens sikring (1 AMP) – sikringer kan tages ud med en skruetrækker.</li> </ol>



Moving Health Forward

**PRESSURE ULCER PREVENTION**  
**SAFE MOVING & HANDLING**  
**SPECIALIST THERAPIES**  
**BATHROOM SAFETY**  
**RENTAL & SERVICE SOLUTIONS**



Direct Healthcare Group Ltd  
 Withey Court, Western Industrial Estate  
 Caerphilly, United Kingdom  
 CF83 1BF

T: +44 (0) 800 043 0881  
 F: +44 (0) 845 459 9832  
 E: info@directhealthcaregroup.com



**EU Authorised Representative, Importer, and Distributor:**

Direct Healthcare Group Sverige AB,  
 Torshamnsgatan 35, SE-164 40, Kista  
 Sweden  
 T: +46 (0) 8 557 200