









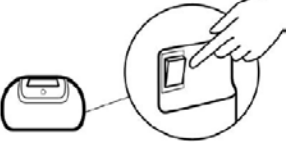


Quickguide

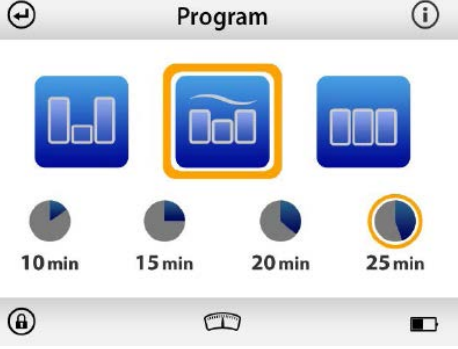CuroCell Uno - vekseltryksmadras

 <p>Start</p>	<p>Pumpen tændes på tænd/sluk knappen på siden af pumpen.</p> <p>Sikr dig at ledningen er sat i stikkontakten og pumpe og madras er koblet ordentligt sammen: se brugervejledning.</p>
 <p>Trykindstilling</p>	<p>Trykket i madrassen indstilles efter brugerens vægt og justeres under brug ved stillingsskift.</p> <p>OBS: vægten skal ikke indstilles på denne pumpe – det finder systemet selv ud af!</p>
 <p>Valg af indstillinger</p>	<p>Comfort: Til indstilling af bedst mulig komfort for patienten.</p> <p>Program: Valg mellem vekseltryk, pulserende eller statisk indstilling samt valg af tid for vekseltrykscyklus.</p> <p>MAX: Plejefunktion – bruges ved forflytning, mobilisering og pleje.</p>
 <p>Program</p>	<p> Vekseltryk – trykket veksler mellem cellerne.</p> <p> Pulserende – kombination af statisk lavt tryk med vekslende tilstand.</p> <p> Statisk – trykket er ens i alle celler.</p>
 <p>Skærmlås</p>	<p>Skærmlås – når hængelåsen vises er skærmen låst.</p> <p>Tryk én gang på skærmen og tryk på  for at låse op.</p>

 <p>CPR-ventil Hjerte-lungeredning</p>	<p>I tilfælde af hjertestop, eller behov for at få madrassen tømt for luft – hurtigt, udløses den røde CPR-ventil på siden af pumpen.</p>
 <p>Meddelser</p>	<p>Meddelelser slås fra og bekræftes (deaktiveres – ved at trykke på den runde knap forrest på pumpen).</p>
<p>Transportfunktion</p>	<p>Det anbefales at man anbringer pumpen i statisk tilstand og venter 5 minutter.</p> <p>Tag stikket ud af stikkontakten – madrassen holder luft i 8 timer. Hvis pumpen har batteribackup tager denne over.</p>