



HURTIG START GUIDE

Introduktion

SmartVision er den første Android smartphone specifikt designet til personer med et synshandicap. SmartVision er den første fuldt tilgængelige og assisterende teknologirige alt-i-en smartphone med et fysisk tastatur, touchskærm og stemmekontrolleret brugerflade.

Brugerfladen og funktionerne er tilpasset fuldstændigt for at sikre at SmartVision er nem at håndtere og nem at benytte. Applikationerne er organiseret så de giver en forenklet tilgang, blandt andet også med mulighed for større font.

SmartVision brugerfladen inkluderer også stemmeaktiverende kommandoer og stemme-kontrolleret «diktering» til beskeder. Desuden også applikationer såsom turn-by-turn navigation for fodgængere(*), digital forstørrelse med kontraster, OCR(*) med automatisk dokumentgenkendelse og NFC(*) teknologi er alle inkluderet i SmartVision.

SmartVision leverer de bedste funktioner, simple at benytte og med enestående tilgængelighed.

Denne Hurtig Start Guide beskriver kun de mest benyttede funktioner. For at få mere detaljerede oplysninger om SmartVision, se venligst brugermanualen på «www.instrulog.dk» under Download sektionen.

-1-

SmartVision fra KAPSYS - Beskrivelse

Fronten



Bagside



- 1 Tænd/Sluk (Tryk og hold)
Gå til Aktiv tilstand (Hurtigt tryk)
- 2 Lydstyrke knapper + / -
- 3 Micro USB port (Opladning og computer tilslutning)
- 4 Hovedtelefon port 3.5 mm
- 5 ☰ Menu knyttet til det aktuelle skærbillede
🏠 Hjemmeskærm
⏪ Tilbage (Forrige skærbillede)
- 6 OK Besvar opkald eller bekræft bruger input
☑ Naviger i menuen eller rundt på aktuelle skærm
C Afslut aktuelle opkald eller slet bruger input
- 7 SOS knap - Tryk ind og skub den nedad for at udløse nødproceduren
- 8 Kamera linse
- 9 Blitz
- 10 Kontaktflader til ladestationen

Når din SmartVision skifter til standby tilstand vil et hurtigt tryk på Tænd/Sluk knappen genaktivere skærmen.

-2-


-3-

Kom godt i gang

Indsæt SIM kort og batteri



- 1 Vend telefonen om, find indhakkert i nederste venstre hjørne og løft bagcoveret væk
- 2 Indsæt SIM kortet med kontaktfladerne nedad og det afskårede hjørne placeret nederst til højre. Skub SIM kortet op i holderen.

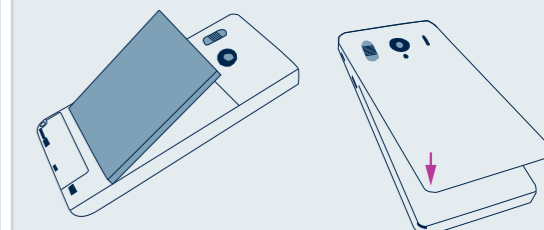


- 3 Indsæt batteriet ved først at sætte nederste del i enheden med kontaktfladerne nederst til højre. Klik herefter forsigtigt resten af batteriet på plads.
- 4 Til sidst, placer den øverste del af bagcoveret på den øverste del af telefonen og klik forsigtigt resten af bagcoveret på telefonen.

-4-

Opladning af batteriet

Inden du tager din SmartVision smartphone i brug første gang, anbefales det at oplade batteriet i mindst fire timer. Oplad batteriet ved enten at benytte ladestationen eller tilslut kablet der fulgte med i æsken direkte til en USB adapter.

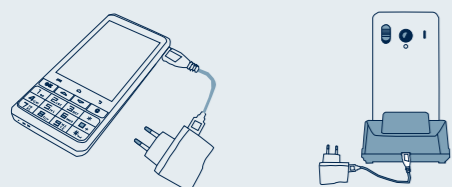

SmartVision telefonen kan ikke placeres i ladestationen(*) såfremt etuiet(*) benyttes.

Tilbehør

SmartVision fra KAPSYS leveres med:

- Et batteri
- En 220/110 volts strømforsyning - 5 volts USB
- En ladestation til opladning(*)
- Et USB / micro-USB kabel
- En halsrem
- Et sæt stereo hovedtelefoner med en mikrofon og en knap
- Et beskyttelses etui(*)
- Dokumentation

-5-

Tænd / Sluk for din SmartVision

Tænd for din SmartVision ved at trykke og holde på Tænd/Sluk knappen lokaliseret på toppen af telefonen.



Når telefonen tændes for første gang, følg da venligst installations instruktionen.

SmartVision er klar til brug når hjemmeskærmen vises.

For at slukke for SmartVision, tryk og hold Tænd/Sluk knappen og følg instruktionen på skærmen.

-6-

Hjemmeskærm

Hjemmeskærmen viser hovedfunktionerne og



- ☎ Telefon applikationen gør det muligt at foretage opkald, gennemgå ubesvarede opkald og er genvej til din voice mail.
- ✉ Beskeder applikationen bruges til at sende og modtage SMS og MMS.
- ✉ Email applikationen gør det muligt at sende og modtage elektronisk post, forudsat at du har udført opsætning af din email konto.
- ☰ Applikation ikonet giver dig en oversigt over alle applikationerne der er tilgængelige på din SmartVision.
- ★ Favoritter ikonet giver dig adgang til dine mest benyttede applikationer.
- ⚙ Indstillinger ikonet giver mulighed for at konfigurere din telefon.

Meddelelses baren i toppen af Hjemmeskærmen giver et antal nyttige informationer såsom niveau af netværk modtagelse, batteriniveau og så videre.

For at returnere til Hjemmeskærmen når som helst, tryk 🏠 (Hjemmeskærm knap).

-7-

Tastatur, Touchskærm og Stemmekommando

SmartVision giver tre forskellige brugerflader eller funktionsmetoder, nemlig tastaturet, touchskærmen og stemmekommandoer.

☐ Tastatur metoden giver mulighed for at indskrive data såsom numre og tekst via multi-tap måden. For at blive bekendt med tastaturet, se venligst introduktionen ovenfor hvor funktionerne af hver tast og knap er beskrevet.

☐ Touchskærm metoden er den metode man normalt benytter på smartphones. Det giver dig mulighed for at navigere gennem de forskellige menuer med dine fingerspidser. Tryk på skærmen for at vælge et element eller bekræfte en handling. I tilgængeligheds tilstand supporterer SmartVision yderligere kommandoer og kontrol gestures for nemmere navigering gennem skærbilledet og interaktionen med din smartphone.

☐ Stemmekommando metoden giver kontrol over SmartVision med stemmen eller indskrivning af data med en naturlig tale. For at aktivere stemmekommandoer, tryk på stemmekommando knappen på højre side af telefonen.



Stemmegenkendelses funktionen er resultatet af den seneste teknologi på markedet. Alle elementer der vises på skærmen kan kaldes via stemmen. Det betyder at du kan kontrollere og navigere på telefonen med din stemme.

Et hurtigt tryk efterfulgt af et lydsignal gør det muligt for dig at aktivere et element på skærmen ved at udtale det (for eksempel at starte en applikation eller aktivere en indstilling og så videre), eller benytte et specifikt nøgleord(1) for at indhente information om SmartVision status (for eksempel «Batteriniveau?» eller «Hvad er klokken?»).

Trykke og holde stemmekommando knappen nede muliggør indtaling af tekst (såsom «Hej komma hvordan går det spørgsmålstegn») i edit felter. Slip igen knappen for at afslutte dikteringen. Vær venligst opmærksom på at disse funktioner kræver netadgang, enten via 3G eller et Wi-Fi.


Du kan kombinere de forskellige data input metoder. For eksempel kan du starte med at give en stemmekommando og efterfølgende benytte touchskærms- eller tastatur metoden til at tilføje tekst eller numre og lave rettelser med C tasten.

(1) En fuld oversigt over nøgleordene kan findes i SmartVision brugermanualen.

-9-

Foretag et opkald

Tastatur metoden

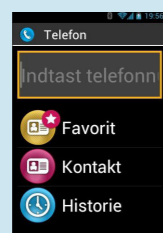

1. Fra Hjemmeskærmen, benyt de fysiske op og ned taster til applikationen Telefon. Tryk på OK og Telefon applikationen starter.
2. Indskriv nummeret du ønsker at ringe til via tastaturet og tryk på OK knappen for at bekræfte og starte opkaldet.


Såfremt du indtaster et forkert nummer, tryk på C knappen for at slette den seneste karakter.

Touchskærm metoden



1. Tap på Telefon ikonet og følg vejledningen på skærmen.

-10-

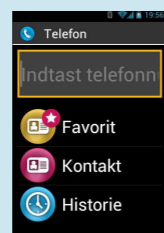

2. Vælg "Kontakt" elementet for at tilgå og ringe til en af dine kontakter gemt i din kontaktoversigt.

3. Vælg "Favorit" elementet for at tilgå og ringe til en af dine kontakter gemt i som «Favorit».

4. Vælg "Historie" elementet for at vise historikken over opkald.

Stemme kommando metoden



Fra hjemmeskærmen, tryk hurtigt på stemmekommando knappen. Efter det korte lydsignal, sig nøgleordet «Ring op» efterfulgt af navnet på personen du ønsker at ringe til. Vær venligst opmærksom på at navnet skal fremgå af din kontaktliste. Følg instruktionerne for at bekræfte opkaldet.

Eksempler på stemmekommandoer:

1. «Ring op Paul Johnson»
3. «Ring op Paul Johnson Mobil» (såfremt du har gemt flere numre for denne kontaktperson)

-11-

Du kan også starte et opkald direkte fra dine Kontakter, Favoritter eller Historie ved at sige navnet på kontakten.

Besvare et opkald

Når du modtager et opkald vises nummeret på skærmen, eller navnet på nummerets ejer såfremt det er gemt i listen over kontakter.



Benytter du tastatur metoden, brug OK eller C knapperne til henholdsvis at besvare eller afvise et opkald.

Du kan også besvare et opkald ved at trykke på den grønne Svar eller afgøre Godkend at besvare opkaldet og trykke på den røde Afvis knap.

-12-

Send en besked


Tastatur metoden

Fra hjemmeskærmen, benyt op eller ned pil til Beskeder applikationen, og tryk på OK. Beskeder applikationen starter.

1. Benyt op eller ned pil for for at vælge Ny besked elementet og tryk OK.
2. Indskriv modtagerens nummer og vælg herefter Skriv besked, og tryk på OK for at bekræfte.
3. Skriv din besked ved brug af det alpha-numeriske tastatur. Når du har færdiggjort dn besked, vælg Send, og bekræft ved at trykke OK.


Touchskærm metoden

Fra hjemmeskærm, vælg Beskeder ikonet. Beskeder applikationen starter.

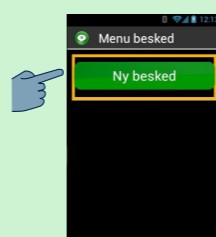


1. Vælg elementet Ny besked for at oprette en ny SMS eller MMS.

-13-

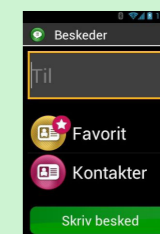

2. Indskriv modtagerens nummer eller vælg fra Kontakter eller Favorit.

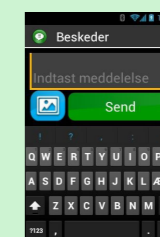

3. Vælg Skriv besked, indskriv din besked med det virtuelle tastatur og tryk på Send for at sende beskeden..

For at indskrive tal, tap på 123 knappen, og for at skrive bogstaver igen, tryk på ABC knappen.

Stemme kommando metoden




Fra hjemmeskærmen, tryk hurtigt på stemmekommando knappen. Efter lydsignalet, sig «Send besked til» efterfulgt af navnet på personen du ønsker at skrive til. Vær venligst opmærksom på at navnet skal fremgå af din kontaktliste. Følg instruktionerne til at skrive beskeden og sende den.

Eksempel på stemmekommando: «Send besked til til Paul Johnson».


-14-

Opret en Kontakt

1. Fra hjemmeskærmen, vælg først Applikation ikonet og herefter "Kontakter" elementet for at starte Kontakt applikationen.

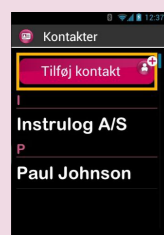

2. Vælg Tilføj kontakt feltet. Ny kontakt skærmen vises.

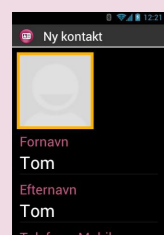

3. Udfyld felterne en efter en (Fornavn, Efternavn, Telefonnummer og så videre...). Tryk på OK nederst i formularen for at oprette og gemme din ny kontakt.

4. Du kan også vedhæfte et billede til denne kontakt. SmartVision anbefaler at du enten tager et billede eller vælge et fra Galleriet.


Du kan oprette dine kontakter ved at benytte alle tre inputs metoder, herunder tastatur, touchskærm og stemmekommando

-15-

SOS (alarm) funktion

SmartVision har for din sikkerhed inkluderet en SOS funktion der gør det muligt i nødstilfælde at starte automatiske opkald og/eller sende lokaliserings-/placeringsoplysninger til prædefinerede kontaktpersoner (med en begrænsning på i alt ti kontakter) når SOS knappen aktiveres.

Opstår der et nødstilfælde, aktiver SOS funktionen via SOS knappen på bagsiden af telefonen ved at trykke ind og skubbe knappen ned ad.

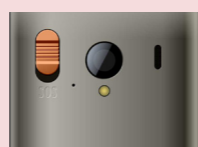

Før du kan få udbytte af SOS funktionen skal den konfigureres i applikationen.

Konfigurer SOS funktionen

Fra hjemmeskærmen, vælg først Applikation ikonet og herefter "SOS" elementet for at starte SOS applikationen.



Alarm knap: Aktiver eller deaktiver knappen på bagsiden af SmartVision.

Afspil en alarm: Afspiller et højt advarsels lydsignal.


Indstil telefonnumre: Indstil og gem de telefonnumre/kontakter du ønsker skal have et opkald eller en besked når SOS knappen aktiveres.

Telefon opkald: Tillader telefon opkald til numre når SOS knappen aktiveres.

Send besked: Tillader afsendelse af tekst beskeder til numre når SOS knappen aktiveres.

Send placering: Tillader SmartVision at sende din placering i nødmeddelelserne. Bemærk venligst at denne information ikke kan garanteres.

Besked tekst: Mulighed for at tilpasse den besked der sendes ud i nødstilfælde.

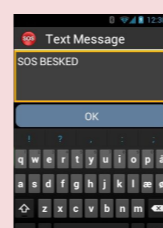

-16-

Andre applikationer

- Ur : Indstil dine alarmer
- Assistance : Tillader at en tredje person kan overtage kontrollen over telefonen
- Browser : Søg på internettet
- Lommeregner
- Kalender : Planlæg dine aftaler
- Kamera : Tag billeder eller optag videoer
- FM Radio : Lyt til radio
- Galleri : Sorter og gennemse dine billeder og videoer
- KAPTEN(*) : Bevæg dig frit rundt med denne integrerede GPS navigation
- Forstørrelse : Forøg størrelsen på et billede eller af en tekst
- Musik : Lyt til musik gemt på din telefon
- NFC(*) : Programmér og aflæs NFC tags
- OCR(*) : Scan og rediger dine dokumenter

- Lydoptager : Optag og afspil dine stemme memoer
- Søg : Find elementer på din telefon
- Video Player : Se dine video optagelser

Se venligst SmartVision Brugermanualen for nærmere beskrivelser af disse andre applikationer.

(*)Ikke tilgængelig på SmartVision, kun

SmartVision Plus

Om denne guide

Informationen publiceret i dette dokument kan ændres uden varsel. KAPSYS forbeholder sig retten til at ændre indholdet af dette dokument uden forpligtelse til at informere personer eller virksomheder. KAPSYS kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af tekniske eller publicerede fejl eller udeladelser herom. KAPSYS bestræber sig på løbende at forbedre kvaliteten og funktionerne af deres produkter og KAPSYS opfordrer til regelmæssigt at besøge hjemmesiden (www.kapsys.com) for at hente de seneste opdateringer og dokumentation omhandlende brugen af produkterne.

-18-

-19-