

Quick Start Guide

Safecall GPS enhed type SL14



- 1** Oplad GPS sålen. Sæt strøm til ladestationen med USB ledningen der medfølger. Læg GPS sålen på ladepladen. Sørg for at markeringen på sål og opladestation ligger ovenpå hinanden. Når opladningen starter skifter lyset på ladestationen fra grønt til blåt lys, og der høres et lille "bip". Vær opmærksom på at sålen skal ligge skråt henover pladen, så lysindikatoren på ladestationen er synlig. Opladetid: ca. 2 timer. Opladning af enheden kan ikke foregå mens den er placeret i en sko. Sålen SKAL tages ud af skoene under opladning.

- 2** SL14 har ingen tænd og sluk knap, og ingen lamper der blinker. Det betyder at den altid er tændt når den er opladet. Det er altså ikke nødvendigt at tænke på at få tændt for enheden hver gang den skal bruges.

- 3** Når enheden er fuldt opladet, kan det være en god idé at afprøve funktionaliteten ved at placere den i en vindueskarm i 5 minutter. Herefter kan den checkes på lokaliseringssystemet at SL14 har fundet den korrekte GPS position, og samtidigt oplyses batteriets tilstand i %.


Sålen er forsynet med en bevægelsessensor der bevirker at den som standard afgiver GPS lokationer med 5 minutters interval under bevægelse, og 2 timer under stilstand. Intervallerne kan ændres på lokaliseringssystemet.

- 4** SL14 kan klippes til - så den passer nøjagtigt til brugerens sko. KLIP IKKE I SÅLEN FØR PUNKT 1-3 OVENFOR ER GENNEMFØRT. NÅR DER ER KLIPPET I SÅLEN KAN DEN IKKE RETURNERES.

Vær opmærksom på IKKE at klippe under den markerede linie.



- 5** SL14 GPS enheden er placeret i den højre sål, men for at sålerne skal føles lige høje for brugeren, er den venstre sål samme størrelse. Sålerne er konstrueret til at modstå de normale påvirkninger der kan forekomme i en sko.

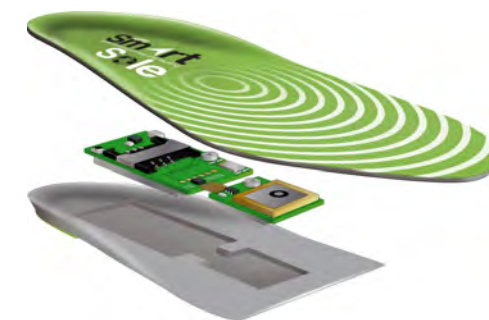

Quick Start Guide

Safecall GPS lokaliseringsystem




Log ind:
Adgangskode:



1 GPS enheden kan spores via Internetside, APP eller SMS fra mobiltelefon. På Safecall's hjemmeside får man let adgang til at spore enheden. Find punktet "SAFELOC LOGIN" øverst på www.safecall.dk

2 Brug oplysningerne på det medfølgende plastikkort til at logge ind på sporingssystemet. I nogle tilfælde har man fået udleveret en fælles kode der anvendes til flere GPS enheder. Da bruges dette i stedet.

3 Så snart der er logget ind, vises der en oversigt over GPS enheder man har adgang til. Brug "globus" ikonet til at få vist den øjeblikkelige position på et kort.

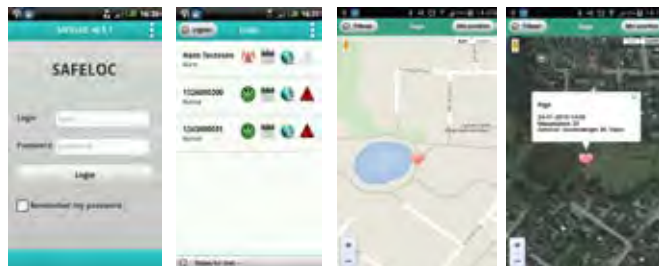

4 Enhederne kan også lokaliseres via APP. Find APP'en "Safeloc" på dit normale download sted for APP's. Den findes både til Android, iOS og Windows

5 Login findes på det lille medfølgende plastikkort, og er sædvanligvis det samme, uanset om du logger ind via PC eller APP. På APP er det muligt at få vist en liste over GPS enheder, ændre deres status (kommunikationsinterval), og lokaliser dem. Samtidigt kan man bede om at få vist sin egen nuværende position.

6 Lokalisering kan foretages via SMS beskeder. På det medfølgende plastikkort er der anført den SMS modtager hos Safecall man kan sende forespørgsler til. Mobilnummeret der anvendes skal i forvejen være "kendt" i systemet. Det skal altså have adgang til at spore den enkelte GPS enhed.

Der findes udførlige brugervejledninger på www.safecall.dk. Vores vejledninger er udformet som små videofilm, der viser hver enkelt funktion