


RUBY 7 HD

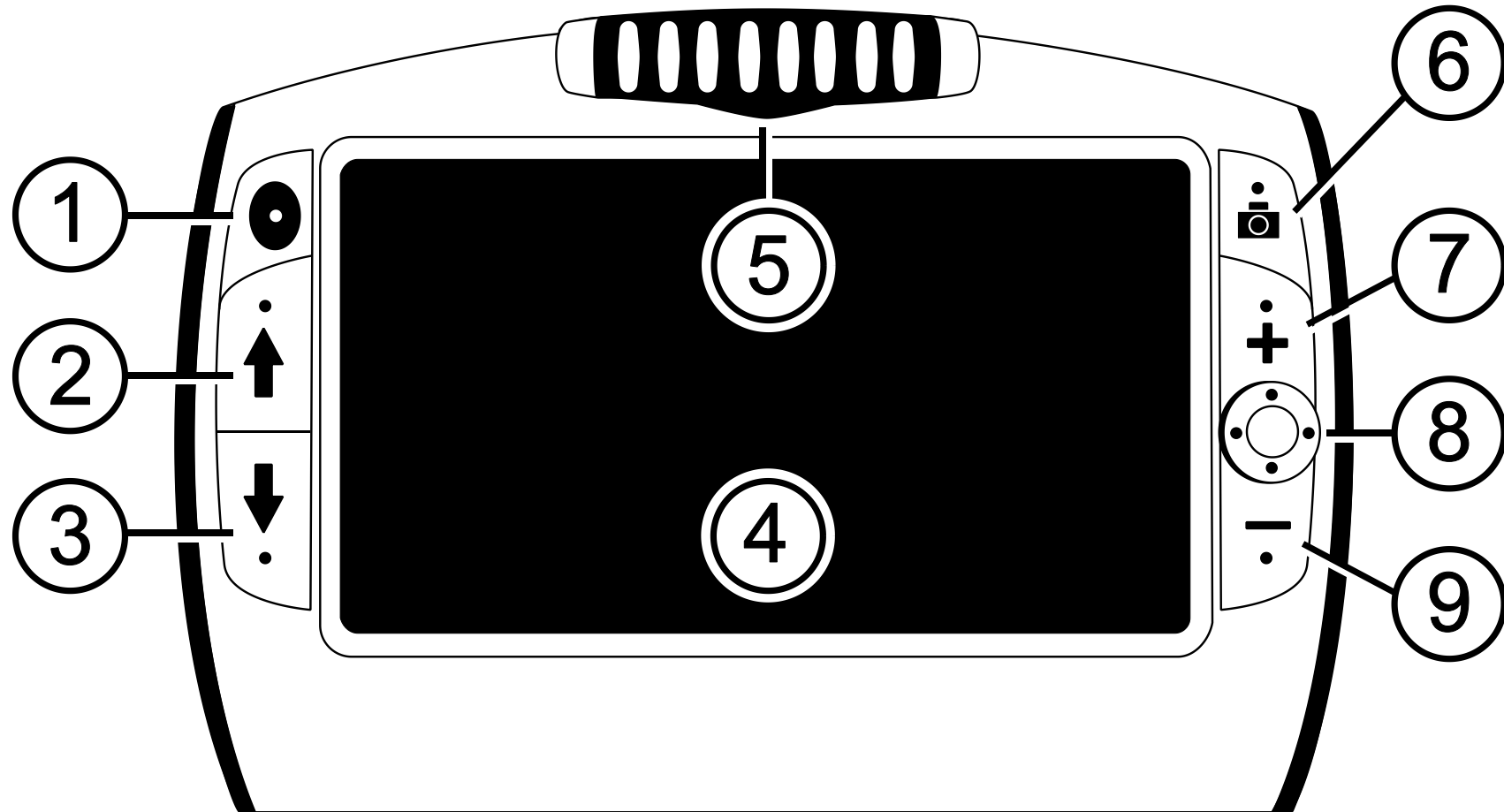

- | | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Tænd/Sluk knap (Grøn/Gul) | 4. 7" LCD Skærm | 7. Forstørrelse knap OP (Gul) |
| 2. Kontrast knap OP (Blå) | 5. PivotCam™ Kamera | 8. Navigerings knap (Sort) |
| 3. Kontrast knap NED (Blå) | 6. Frys billede knap (Rød) | 9. Forstørrelse knap NED (Gul) |

Funktion	Knapkombination
Kontraster - Aktiver og deaktiver kontraster	Tryk og HOLD den grønne/gule Tænd/Sluk knap og tryk på den blå Kontrast pil OP. Bibehold tryk på den grønne / gule Tænd/Sluk knap og benyt den blå Kontrast pil OP til at ændre kontrasten og den blå Kontrast pil NED til at aktivere eller deaktivere den specifikke kontrast.
Læselinjer og masker - Aktiver og deaktiver	Tryk og HOLD den grønne/gule Tænd/Sluk knap og tryk på begge gule Forstørrelses knapper (OP og NED) for at aktivere læselinjer. Gentag for masker. Gentag for deaktivering. Størrelse og position kan justeres ved at bibeholde tryk på den grønne/gule Tænd/Sluk knap og trykke på enten Forstørrelses knap OP eller Forstørrelses knap NED.
LED Læselamper - Tænd og sluk	Tryk og HOLD den grønne/gule Tænd/Sluk knap og tryk på den røde Frys billede knap for at slukke for LED lamperne. Gentag for at tænde igen.
Frys og gem - Lagring af billeder	Tryk på den røde Frys billede knap for at fryse et billede. Tryk og HOLD den røde Frys billede knap i tre sekunder for at gemme billedet. Benyt de blå Kontrast knapper (OP og NED) for at navigere gennem dine gemte billeder. For at fjerne et gemt billede, benyt de gule Forstørrelses knapper (OP og NED) samtidigt for at fjerne flueben. Tryk og HOLD den røde Frys billede knap i seks sekunder for at vende tilbage til live mode.

Se brugervejledningen til enheden for yderligere gennemgang.

Instrulog A/S

Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre

Web: instrulog.dk E-mail: info@instrulog.dk Telefon: +45 44 97 94 77 Skype: Instrulog.dk