

# Quick Guide for Actiumplus letvægts kvalitets rollator



# Før ibrugtagning

Actiumplus rollator leveres 100% samlet og klar til brug. For at være køreklar følg disse 3 simple trin.

**1**



For at åbne/folde rollatoren ud tryk på den røde knap/lås og med begge hænder træk håndtegene alternativt sæderørene fra hinanden.

**2**



Pres sæderørene ned med begge hænder indtil du hører låsen-tydelig klik lyd. Det betyder at rollatoren er foldet helt ud og låst.

**3**



Indstil højden af skubbehåndtagene i begge sider. Det gøres ved at løsne fingerskruen ved siden af sæderøret, løfte skubbehåndtaget op til passende højde, stop ved den svage klik lyd og spænde fingerskruen igen. Nu er rollatoren klar til brug.

# Daglig anvendelse

Actiumplus rollatoren sikrer let og præcis styring.

4



**Kørebremse: Træk bremsehåndtaget opad.**

5



**Parkeringsbremse: Tryk bremsehåndtagene nedad i begge sider, indtil bremserne aktiveres og baghjulene låser.**

6



**Vippefunktion: Træd på vippepedal ved baghjulene, så rollatoren nemmere kommer over kantsten, dørtrin og andre små forhindringer.**

## Foldning af rollator

Actiumplus rollator er let at folde sammen, opbevare og transportere i bilen, bussen osv. Rollatoren forbliver stående på sine hjul i foldet position og optager meget lidt plads. For at gøre det følg disse 2 lette trin.

**7**



For at folde rollatoren sammen igen, løftes først i stroppen på sædet, hvorved låsen udløses.

**8**



Med begge hænder trykkes sæderørerne mod hinanden og presses sammen indtil man hører en klik lyd. Den røde knap har nu låst den sammenfoldet.

Sænk evt. håndtagene hvis de skal fylde mindre, ved at løsne fingerskruen vist og forklaret under punkt 3.