


Kom i gang med myAbilia og CARY Base




Kom i gang med myAbilia – trin for trin

1. Konfigurerer myAbilia-kontoen

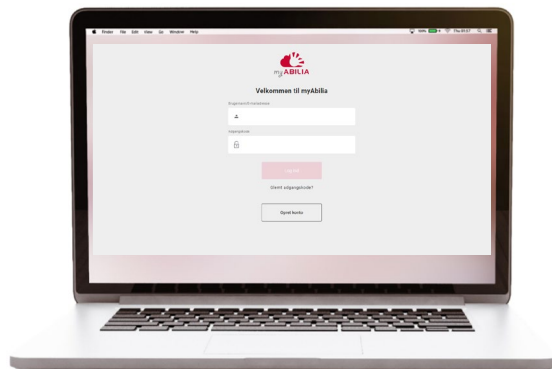


- Gå til www.myabilia.com på en computer, mobiltelefon eller tablet.
- Opret en brugerkonto på myAbilia.
- Log ind på myAbilia
- Vælg kalendermodulet CARY.**
- Importer billedbiblioteket CARY.**

2. Opret forbindelse mellem CARY Base og myAbilia

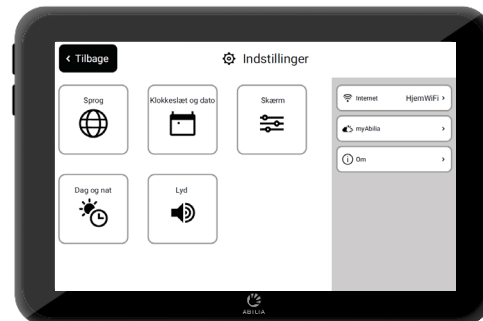

Sørg for, at enheden er tilsluttet Wi-Fi, og log ind med brugerkontoen.

3. Tilføj aktiviteter

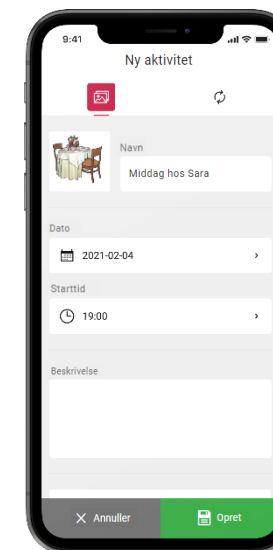


Log ind på www.myabilia.com på en computer, mobiltelefon eller tablet.

Brug myAbilia til at administrere kalenderen i CARY Base.


Hvis du har brug for mere hjælp, så følg instruktionerne i denne vejledning.

Opret en brugerkonto på myAbilia

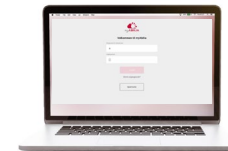

1. Åbn en webbrowser, og gå til www.myabilia.com.
2. Vælg **Opret konto**.
3. Vælg kontotype **Bruger**, og følg vejledningen.

www.myabilia.com



Velkommen til myAbilia

Brugernavn/E-mailadresse


Adgangskode

Log ind

Glemt adgangskode?

Opret konto

Log ind på myAbilia

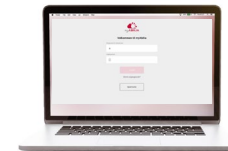

1. Åbn en webbrowser, og gå til www.myabilia.com.
2. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og vælg **Log ind**.

The image shows two side-by-side screenshots. On the left is the myAbilia login page, and on the right is a mobile app interface.

myABILIA Login Page:


- Logo: myABILIA (with a red hand icon)
- Header: Velkommen til myAbilia
- Form: Brugernavn/E-mailadresse: ✓
- Form: Adgangskode: ✓
- Button: Log ind (red)
- Text: Glemt adgangskode?
- Button: Opret konto (white)

Mobile App Interface:


- Header: Anna (profile icon), Ny (green button)
- Calendar: Uge 34 (week view), Handlinger (dropdown)
- Grid: Calendar grid with days of the week (mandag 23 to søndag 29) and hours (24h to 23h)
- Bottom Menu (dark): Kalender, Standardaktiviteter, Standardtimere, Tjekliste, Billedarkiv, Notater, Diktafon

A red arrow points from the "Log ind" button on the login page to the "Standardaktiviteter" menu item in the mobile app.

Vælg kalendermodulet CARY

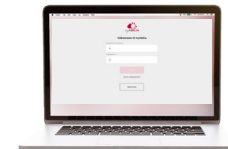

1. Vælg  og **Min profil** i menuen.
2. Vælg fanen **Moduler**, og vælg de moduler, der skal bruges med CARY:
 - Kalender – CARY
 - Basale aktiviteter
 - Billedarkiv
3. Vælg **Gem**.

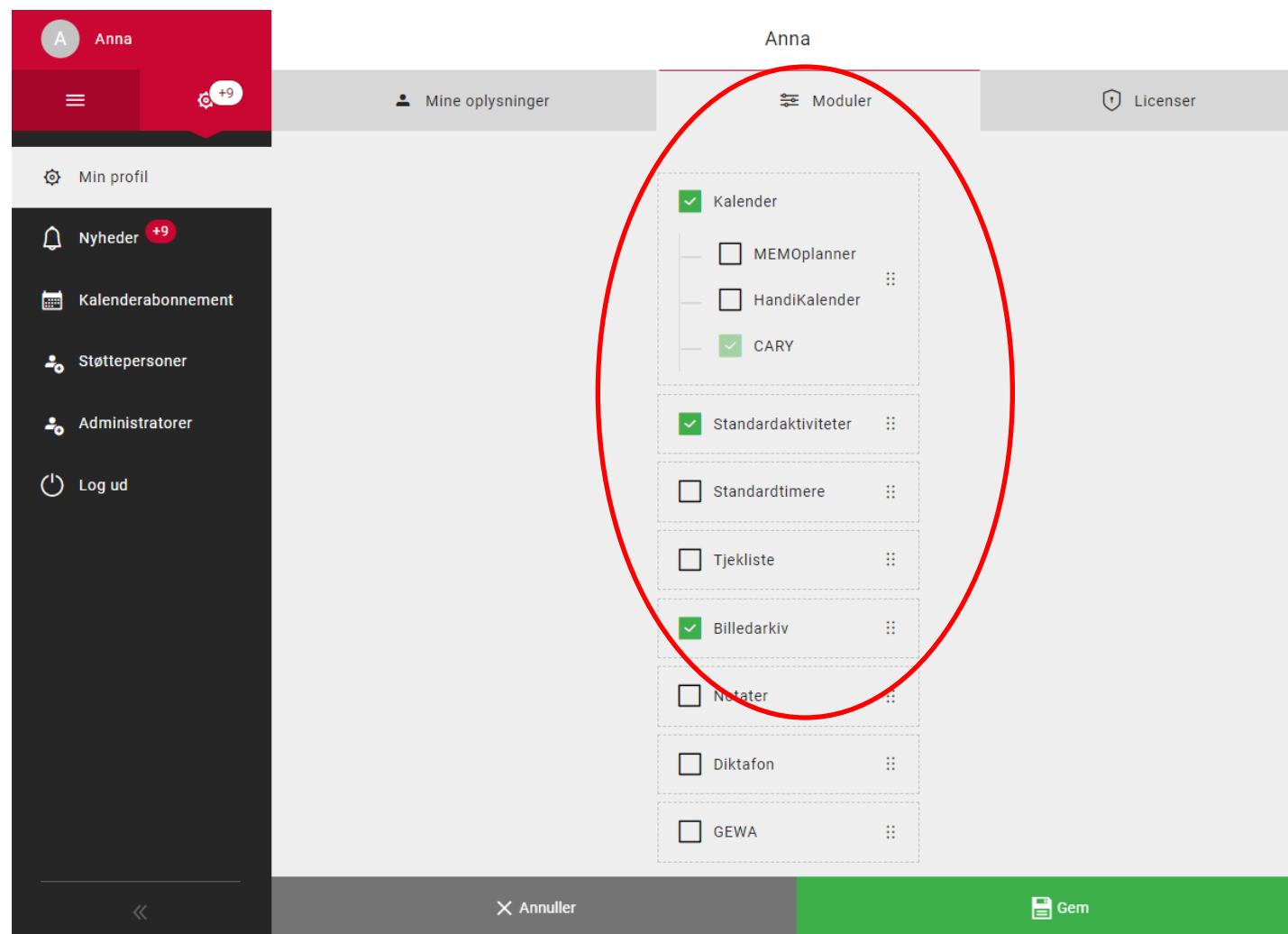

Anna

Mine oplysninger | Moduler | Licenser

Min profil

Nyheder +9

Kalenderabonnement

Støttepersoner

Administratører

Log ud

Kalender

- MEMOplanner
- HandiKalender
- CARY

Standardaktiviteter

Standardtimere

Tjekliste

Billedarkiv

Notater


Diktafon


GEWA

Annuller | Gem

Importer billedarkivet CARY



1. Vælg  og **Billedarkiv** i menuen.
2. Vælg **Ny** og **Importer fra billedbibliotek**.
3. Vælg billedarkivet **CARY** og **Tilføj**.

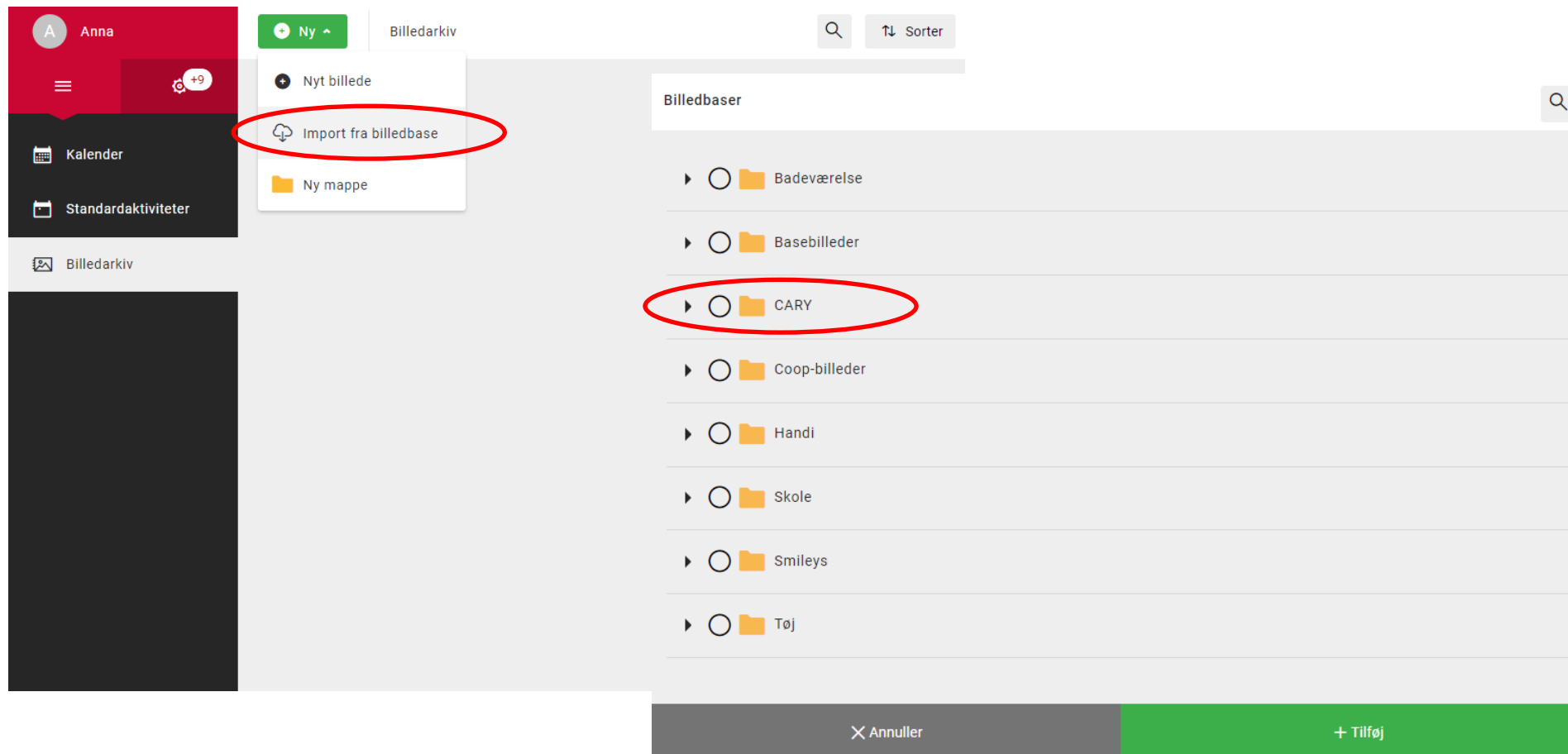

The screenshot shows the ABILIA interface. On the left, a red header bar contains the user name 'Anna' and a hamburger menu icon. Below the header, a dark sidebar lists 'Kalender', 'Standardaktiviteter', and 'Billedarkiv'. The 'Billedarkiv' section is active, showing a dropdown menu with options: 'Nyt billede', 'Import fra billedbase' (circled in red), and 'Ny mappe'. The main area displays a list of 'Billedbaser' (image bases) with folders: 'Badeværelse', 'Basebilleder', 'CARY' (circled in red), 'Coop-billeder', 'Handi', 'Skole', 'Smileys', and 'Tøj'. At the bottom, there are two buttons: 'Annuller' (cancel) and '+ Tilføj' (add).


Opret forbindelse mellem CARY Base og myAbilia



1. Gå til menuen Power, og vælg **Indstillinger**.




2. Hvis enheden ikke har forbindelse til internettet, skal du vælge **Internet** og vælge et tilgængeligt trådløst netværk (Wi-Fi).
3. Vælg **myAbilia**.
4. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og vælg **Log ind**.
5. Vælg **Tilbage** og derefter **Luk** for at vende tilbage til hovedvisningen.

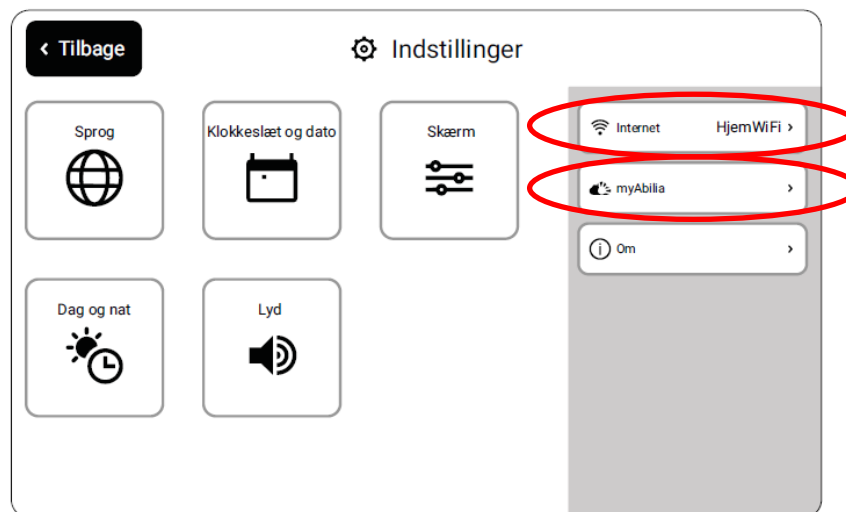

Tilføj aktiviteter


1. Log ind på www.myabilia.com med din brugerkonto.
2. Tryk direkte på kalenderen for at vælge **Dato** og **Starttid** for aktiviteten.
3. Indtast aktivitetens navn i feltet **Navn**.
4. Føj et **billede** og en **beskrivelse** til aktiviteten (valgfrit).
5. Vælg for at afspille en **besked** eller **tekst**, når påmindelsen vises (valgfrit).
6. Vælg **Opret** for at gemme aktiviteten.

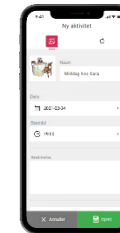

CARY ▾ Ny aktivitet

Navn & Billede | Gentagelse

Billede



Navn
Lufte hunden

Dato
2021-08-27

Beskrivelse
Glem ikke plastikposer

Starttid
16:00

Optag besked

Ekstrainstillinger
 Vis i dagsplan Afspil tekst ved alarm

✕ Annuller **Opret**

Besked =
Optaget lyd eller læsning af tekst (navn og beskrivelse)

Afspil igen ✓ OK




Navn
Lufte hunden

Beskrivelse
Glem ikke plastikposer

Billede =
Billede fra billedarkivet eller dit eget foto.

Sådan virker myAbilia

Tilføj en aktivitet i CARY Base via myAbilia

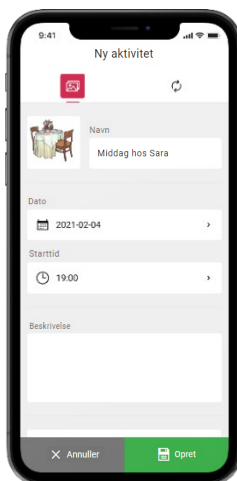

Aktiviteten vises i CARY Base



CARY Base er opdateret:
- Hvert 5. minut
- Når du trykker på Kalender

BEMÆRK!

- Aktiviteter, der tilføjes via myAbilia, kan ikke ændres i CARY Base.
- Aktiviteter, der tilføjes i CARY Base, vises ikke i myAbilia.
- Billedarkivet i myAbilia vises ikke i CARY Base.