





Quick Start Guide

TOPRO Troja Original

TOPRO Troja 5G

TOPRO Olympos ATR

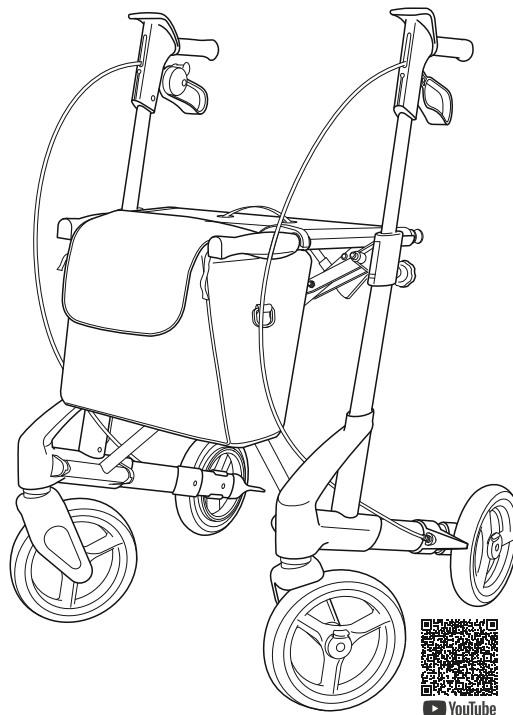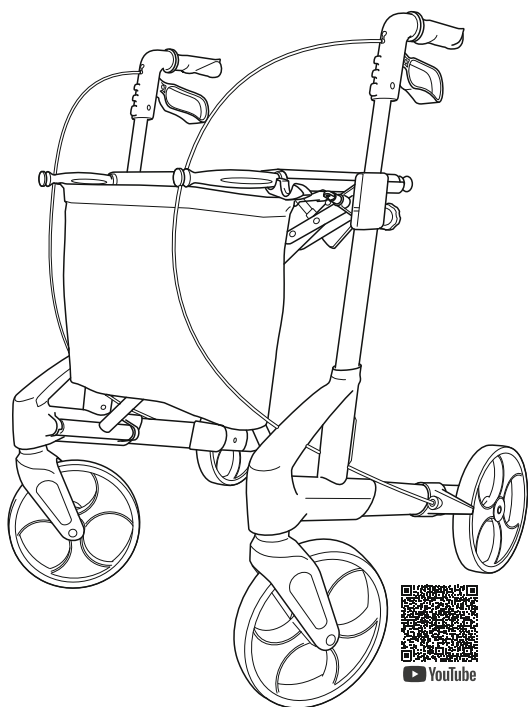


topromobility.com

made in Norway




At folde ud

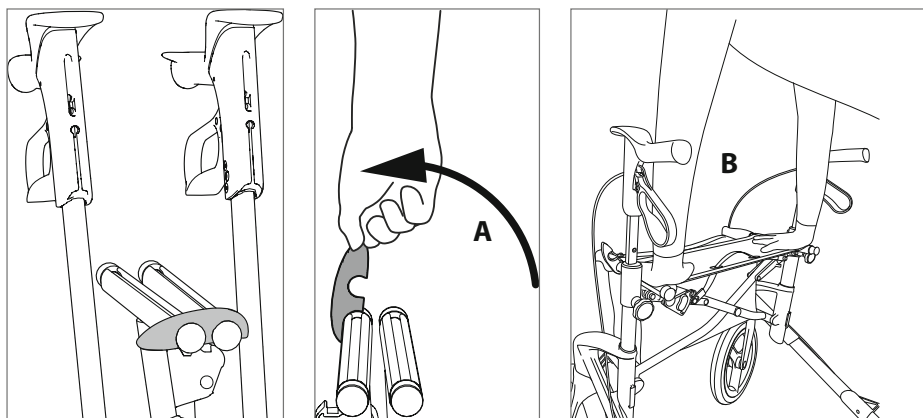

Bemærk: Du vil høre en kliklyd, når rollatoren er sikkert låst i brugsposition.


Højdejustering

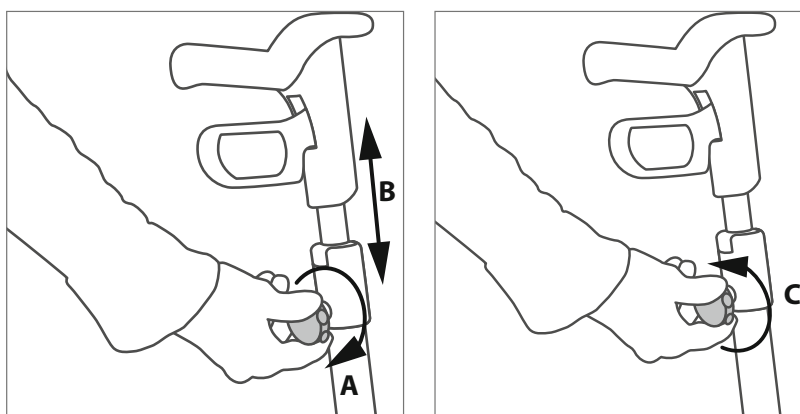

Bemærk: Det anbefales, at håndtagene er indstillet til samme højde som dine håndled, når dine arme hænger langs kroppen.


Memoryfunktion: Du har mulighed for at indstille højden på håndtagene til en standardindstilling, så du nemt kan finde samme højde igen – se venligst brugsanvisningen for yderligere information.

I brug

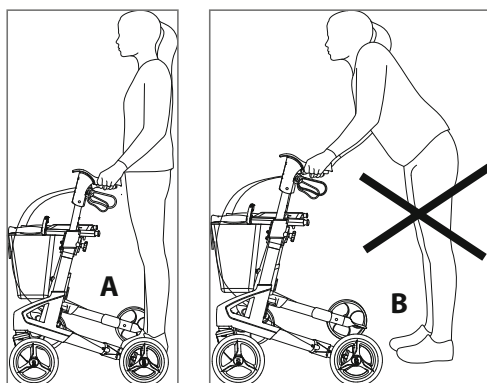

Bemærk: For at give den rigtige støtte og sikkerhed skal du sikre dig at rollatoren holdes så tæt på din krop som muligt. Gå mellem baghjulene (A), ikke bag dem (B).


Bremser

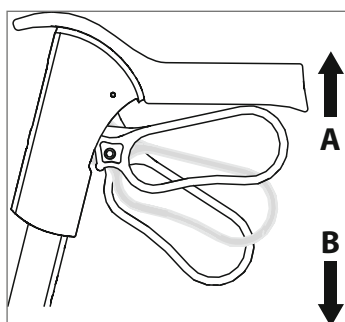

- A Kørebremser
- B Parkeringsbremser

Bemærk: For at justere bremserne – se venligst brugsanvisningen.

Brug af sæde

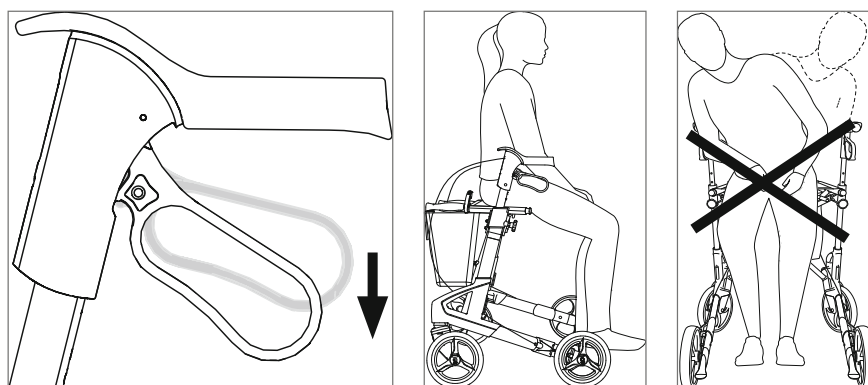

Scan QR-koderne på forsiden for yderligere information.