

QUICK GUIDE - Easy-Up Vakuumpattform



Easy-Up modeller

Easy-Up Vakuumpattform består af et modstandsdygtigt ABS-kabinet, som indeholder en vakuumpumpe.

- **Modellerne ER-450 og ER-470 omfatter:**
 - Hoveddelen, batteri (genopladeligt og fuldt opladt) – klar til drift
 - En AC/DC-oplader:
 - Indgang: AC 100 ~ 240V 50/60 Hz 0,5A max.
 - Udgang: DC 12V, 1000mA







Easy-Up's funktion

Vakuumprocessen startes ved at tænde for enheden på kontakten. Easy-Up's neopren-overflade forsegler bunden af det påsatte objekt udefra. Mens pumpen kører, opretholdes dette vakuum, hvorfor objektet fastholdes på platformen, og Easy-Up holdes sikker fastgjort til arbejdsfladen.

Easy-Up er beregnet til at fastgøre genstande i standardemballage, såsom dåser, glas, flasker, beholdere til drikkevarer samt køkkengrej og lign.

VIGTIGT! Apparatet må kun bruges under sikre forhold for at undgå farer. Enhver anden brug end den, der er angivet i brugervejledningen betragtes som forkert.

Easy-Up tilbehør

	<ul style="list-style-type: none"> • EE-400 <p>Easy-Egg™</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 stk. æggeholder, så du kan pille blødt eller hårdkogte æg.
	<ul style="list-style-type: none"> • EW-400* <p>Easy-Warm™</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 stk. firkantet silikonering til varme gryder, pander osv. (maks. 200°C).
	<ul style="list-style-type: none"> • ED-400 <p>Easy-Drink™</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sæt med 2 stk. kopper til fastgørelse af PET 500 ml (plastflasker) + 1L (TetraPak) + 300 ml og ½ L flasker.
	<ul style="list-style-type: none"> • ER-400 <p>Easy-Release™</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Innovativt værktøj til enkelt og nemt at fjerne vakuum i glas.
	<ul style="list-style-type: none"> • EC-400 <p>Easy-Cover™</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sæt med 5 stk. beskyttende duge, så du undgår, at din Easy-Up bliver beskidt.
	<ul style="list-style-type: none"> • EM-400 <p>Easy-Mini™</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sæt med 1 stk. ring til at fastholde f.eks. et pilleglas og 1 stk. rektangulær firkant til at fastholde f.eks. smør- og makrelbakker.

*(Easy-Warm™ har tidligere bestået af 2 stk. runde silikoneringe i forskellig størrelse, men denne nye firkantede udgave kan benyttes til alle størrelser genstande, der skal betjenes via Easy-Up – funktionen er ens uanset form).



Vær opmærksom

- For optimal placering, skal din Easy-Up placeres på en flad, ren og tør overflade.
- Den **vandrette hældning** under brug **bør ikke overstige 5°**.
- Din Easy-Up kan bruges med en belastning **på op til 5 kg**.
- Silikoneringsen (Easy-Warm) **må ikke anvendes** til genstande med en temperatur **over 200°C**.
- Din Easy-Up må ikke bruges af personer, der IKKE har læst og forstået den fulde bruger-vejledning.
- Producenten anbefaler, at silikoneringsen (Easy-Warm), som du placerer på vakuumpattformen, bliver udskiftet årligt for at sikre en konstant tilstrækkelig drift.
- Din Easy-Up kan betjenes ved temperaturer fra 10°C - 40°C og i miljøer med op til 100% fugtighed.
- Din Easy-Up **er udviklet til indendørs brug**. Udendørs brug frarådes.
- Din Easy-Up må ikke anvendes i farlige områder.

Rengøring

- Din Easy-Up bør kun rengøres, når den er slukket.
- Din Easy-Up må ikke skilles ad.
- I tilfælde af en defekt skal du kontakte din leverandør, så I kan aftale nærmere om reparation/udskiftning.

Tekniske specifikationer

Vægt i kg.	0,400
Mål (Ø x h)	165 x 42 mm
Omgivelsestemperatur °C	10 til 40°C
Støjemission (dB (A))	79 dB (A)
Tryk-generet (Vakuum):	-50 Kpa
Drevet af genopladeligt batteri	8.4V Ni-MH

Leverandør

CarePartner



Lindevej 2

DK-4200 Slagelse

Tlf: 58 55 10 99

CVR: 34 57 88 85

Mail: kontakt@carepartner.dk

Web: www.carepartner.dk

Begynd at bruge Easy-Up -

Udpakning og klargøring

1. Tag Easy-Up enheden ud af æsken.
2. Fjern den ydre indpakning og enhver anden emballage, der dækker materialer (såsom folier, fyld, kabelbindere osv.).
3. Kontrollér pakkens indhold.
4. Kontrollér enheden for eventuelle transportskader for at undgå risici. Skulle det mod forventning vise sig, at indholdet af kassen er ufuldstændigt, eller at der er synlige skader på produktet, skal du ikke betjene produktet, men i stedet kontakte din forhandler.

Easy-Up ER-450 og ER-470 er drevet af et 8.4V Ni-MH-batteri i størrelse med et 9V-blokbatteri, som allerede er isat fra fabrikken, og batteriet er opladt ved afsendelse.

Anvendelse

1. Tænd for din Easy-Up enhed på kontakten. Hvis du kan høre motoren køre, er den klar til brug, og du kan slukke igen, indtil du er klar.
2. **VIGTIGT!** For maksimal driftstid efter første opstart anbefales det, at du oplader enheden helt.
3. Placér objektet på platformen, så det dækker hullet i midten.
4. Tænd for din Easy-Up igen på kontakten. Du vil nu høre vakuumpumpen sætte i gang, og vakuumsfunktionen starter. Efter kun et øjeblik fastgøres objektet automatisk på overfladen af din Easy-Up.

NB! Du kan hjælpe vakuumsystemet ved forsigtigt at trykke ned på toppen af objektet, der skal fastholdes, med en finger eller din håndflade, for derved at fastgøre objektet til platformen.

Din Easy-Up kan allerede bruges under opladning. Opladningstiden øges en smule ved brug, men generelt er opladningsprocessen færdig efter højst 2 timer.

Efter Brug

1. Sluk for din Easy-Up på kontakten, og vakuumsprocessen afbrydes.
2. Objektet kan øjeblikkeligt fjernes fra platformen.

Restriktioner – Easy-Up –

- må ikke betjenes i en synligt defekt tilstand, f.eks. med et ødelagt kabinet.
- bør ikke bruges, hvis der er nogen tvivl om resultatet af en bestemt anvendelse.
- må ikke være tændt hele tiden.
- må ikke bruges til at fastgøre kropsdele.
- må ikke rengøres i opvaskemaskinen.
- må ikke bruges på en varm kogeplade, i en varm ovn eller i mikrobølgeovnen.
- må ikke bruges til at absorbere væsker.
- må ikke anvendes på det medicinske område.
- må ikke anvendes i kontakt med brandfarlige og/eller eksplosive væsker.
- må ikke bruges af børn uden opsyn af voksne.
- er ikke beregnet til kommerciel brug.

