

Vaskeråd pude

Vask i hånden

1. Luk luftventilen inden vask i hånden
2. Brus med koldt vand
3. Vask med opvaskemiddel og lunkent vand

(Hvis du ikke kan komme ordentligt til mellem cellerne, luk mere luft ud af puden og luk herefter ventilen).

Alternativt

Maskinvask

1. Luk luften ud og luk samtlige ventiler inden vask.
2. Læg puden i et hovedpudebetræk/vaskepose. Anvend flydende vaskemiddel uden blegemiddel.
3. Max 60°C i 10 min.

OBS! Må ikke centrifugeres eller tørretumbles.

Star Lock: Er der vand i pumpen efter maskinvask skal den fjernes og tømmes for vand. Sæt derefter pumpen tilbage hvor den var påmonteret.

Desinficering

Punktdesinficering:

1. Bearbejd overfladen forsigtigt med et desinfektionsmiddel *(f.eks. Dax Overfladedesinfektion Plus)

Hele produktet:

1. Vask forsigtigt med desinfektionsmiddel* (f.eks. Virkon, Perasafe)

2. Skyl grundigt

* vælg midler efter lokale anvisninger



Star Lock pude med pumpe

Vaskeråd betræk

Maskinvask

80°C med vaskemiddel til kulørt vask. Tørretumbles eller dryptørrer.

Må ikke renses.

Desinficering

Læg betrækket i blød i desinficeringsopløsning*, skyl grundigt.

* Vælg et middel efter lokale anvisninger



Star Stabil Air