





Shark RS/RT

Brugervejledning

RGK

www.sunrisemedical.com

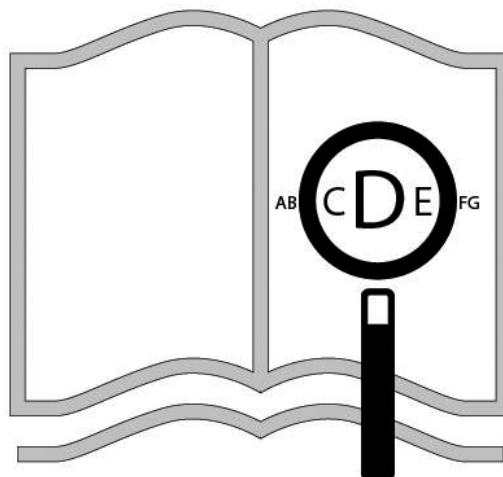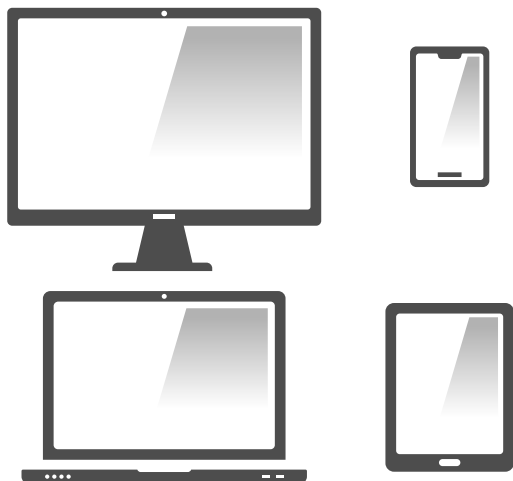

Kørestolskomponenter


DK 

SUNRISE MEDICAL er godkendt i henhold til ISO 13485, som bekræfter kvaliteten af vores produkter på alle stadier fra udvikling til produktion. Dette produkt opfylder de standarder, der er angivet i EU- og UKCA-bestemmelser. Det viste ekstraudstyr eller tilbehør kan købes mod tillægspris.



Håndcykel:

1. Baghjul
2. Nakkestøtte
3. Rygpolstring
4. Gearskifter
5. Forhjul
6. Benstøtte
7. Parkeringsbremse
8. Slagbeskyttelse

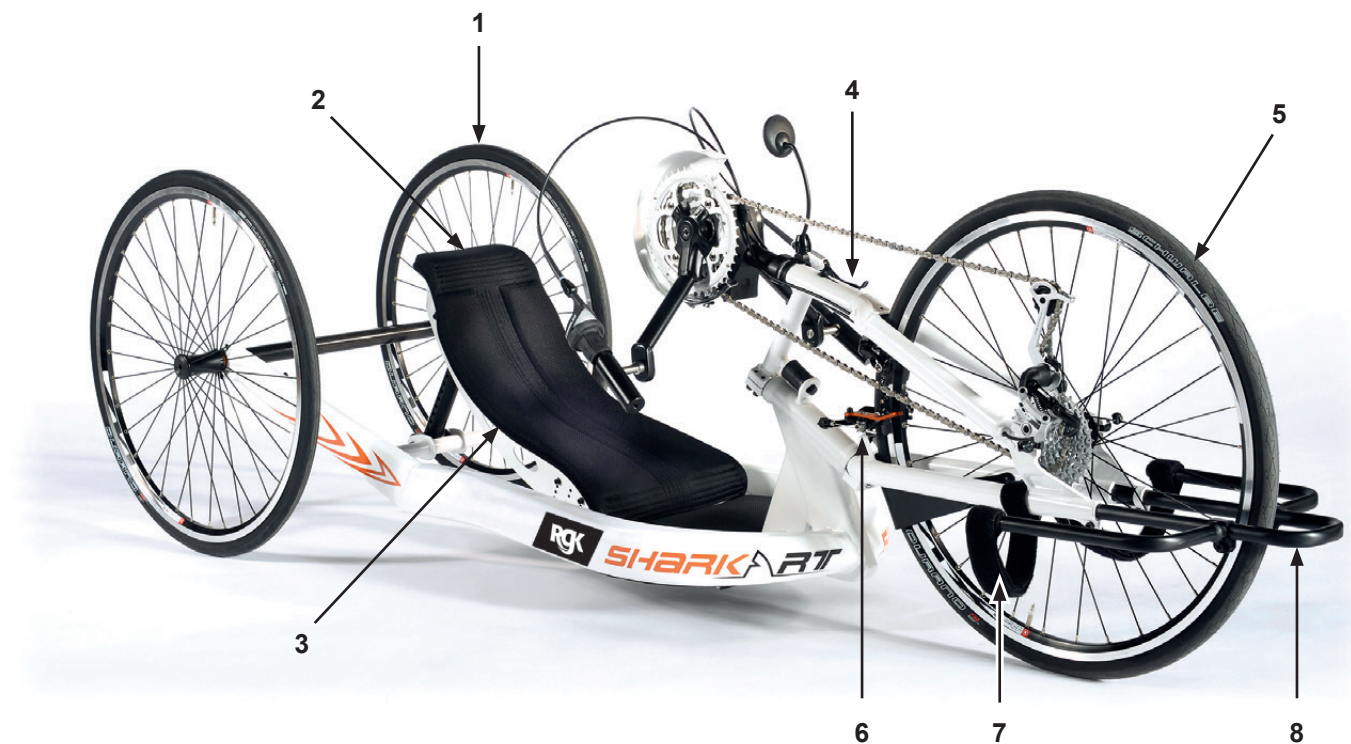

Forord

Kære kunde,

Det glæder os meget, at De har valgt et førsteklasses produkt fra SUNRISE MEDICAL.

Denne brugervejledning giver adskillige tips og ideer således at din håndcykel kan blive en pålidelig og og driftssikker partner i dit liv.

Det at have en tæt kontakt med vores kunder betyder meget for Sunrise Medical. Derfor vil vi gerne holde dig informeret om nye og aktuelle produkter. Det at have en tæt kontakt med vores kunder er ensbetydende med: hurtig service, så lidt bureaukrati som muligt, arbejde side om side med vores kunder. Når du har brug for reservedele eller tilbehør, eller hvis du blot har et spørgsmål om din håndcykel – er vi altid til rådighed.

Vi ser naturligvis helst, at du er tilfreds med vores produkter og service. Hos Sunrise Medical arbejder vi konstant på at forbedre vores produkter. Der kan derfor forekomme ændringer i udvalget af produkter, hvad angår udformning, teknologi og udstyr. Som følge heraf kan der ikke rejses erstatningskrav på baggrund af oplysninger eller illustrationer i denne brugervejledning.

SUNRISE MEDICALs kvalitetsstyringssystem er godkendt i henhold til EN ISO 13485 og ISO 14001.



Som producent erklærer SUNRISE MEDICAL hermed, at dette produkt overholder bestemmelserne i Forordning om medicinsk udstyr (2017/745).

BEMÆRK:

Generelle brugerråd.

Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det resultere i personskade, beskadigelse af produktet eller skade på miljøet.

Bemærkning til brugeren og/eller patienten: Alvorlige hændelser, der opstår i relation til enheden, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brugeren og/eller patienten bor.

B4Me særlige indretninger

Sunrise Medical anbefaler på det kraftigste, at brugeren læser og forstår alle oplysninger, der leveres sammen med B4Me produktet, før produktet anvendes første gang. Dette skal gøres for at sikre, at B4Me produktet fungerer efter producentens hensigt.

Sunrise Medical anbefaler ligeledes, at oplysningerne om produktet ikke bortskaffes, når de er blevet læst, men opbevares til fremtidig brug.

Kombinationer med medicinsk udstyr

Dette medicinske udstyr kan muligvis kombineres med andet medicinsk udstyr eller et andet produkt. Information om hvilke kombinationer, der er mulige, kan findes på SunriseMedical.dk. Alle de angivne kombinationer er blevet valideret, så de opfylder kravene til generel sikkerhed og ydeevne, Bilag I, punkt 14.1 i Forordning om medicinsk udstyr 2017/745.

Vejledning om kombination, så som montering, kan findes på SunriseMedical.dk

Du bedes kontakte din lokale autoriserede SUNRISE MEDICAL-forhandler, hvis du har nogle spørgsmål angående anvendelse, vedligeholdelse eller din håndcykels sikkerhed.

Såfremt der ikke findes en autoriseret forhandler i dit område, eller hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe til os:

Sunrise Medical Aps

Mårkærvej 5-9

2630 Taastrup

Denmark

+45 70 22 43 49

info@sunrisemedical.dk

Sunrisemedical.dk



VIGTIGT:



DU BØR UNDLADE AT BRUGE DENNE HÅNDCYKEL FØR DU HAR LÆST OG FORSTÅET DENNE BRUGERVEJLEDNING.

Anvendelsesområde

Indikationer

De mange forskellige monteringsmuligheder samt kørestolens modulbaserede konstruktion betyder, at denne kørestol er egnet til brugere, som er gangbesværede eller bevægelseshæmmede på grund af:

- Lammelse
- Tab af lemmer (benamputering)
- Deformiteter/misdannelser i benene
- Ledkontraktion/ledskader
- Sygdomme som f.eks. hjerte- eller kredsløbsproblemer, manglende balanceevne eller kakeksi. Desuden er kørestolen egnet til ældre personer, som stadig har kræfter i overkroppen.
- Håndcyklen kan betjenes af personer, der er fysisk og mentalt i stand til at betjene skubbeanordningen i alle driftssituationer (op ad bakke, ned ad bakke osv.) og kan opfylde de lovmæssige krav for brug på offentlige veje.

Kontraindikationer

Kørestolen/håndcyklen må ikke anvendes i tilfælde af:

- Perceptionsforstyrrelse
- Ubalance
- At begge arme mangler
- Ledkontraktur eller ledskade på begge arme
- Nedsat siddefunktion

Brugstid

Håndcyklens forventede levetid er 5 år, på betingelse af: At den udelukkende bruges til det tilsigtede formål Alle service- og vedligeholdelseskrav opfyldes.

Indholdsfortegnelse	
Forord	4
Anvendelsesområde	4
Indholdsfortegnelse	5
Forklaringer	5
1.0 Anmærkninger om sikkerhed og fare	6
2.0 Garanti	7
3.0 Håndtering	8
4.0 Indstillinger	8
Bremse	8
Fodstøtte	9
RT gearstang	10
RS gearstang	10
Ryglænets justering	11
Højde- og dybdejusterbar gaffel	11
Bagaksel	12
5.0 Vedligeholdelse og pleje (kontroller der skal foretages inden brug)	12
6.0 Vedligeholdelse af dæk	13
7.0 Bortskaffelse/Genbrug af materialer	13
8.0 Navnemærkat	14
9.0 Tilspændingsmomenter	15

BEMÆRK:

Bemærk venligst, at kørsel med kørestol kræver tilstrækkelige kognitive, fysiske og synsevner. Brugeren skal være i stand til at vurdere følger af handlinger under betjening af kørestolen og, om nødvendigt, korrigere dem. Disse egenskaber og sikker brug af de ekstra monterede komponenter kan ikke vurderes af Sunrise Medical som producent. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for eventuelle skader som følge heraf.

Se betjeningsvejledningen til kørestolen og de ekstra monterede komponenter. Instruér brugeren i sikker brug af kørestolen og de ekstra monterede komponenter. Informér brugere om specifikke advarsler, der skal læses, forstås og overholdes.

Forklaringer

Forklaringer på advarselstekster brugt i denne vejledning

Tekst	Forklaring
 RISIKO!	Gør brugeren opmærksom på mulig risiko for alvorlig personskade eller livsfare, hvis det viste råd ikke overholdes
 ADVARSEL!	Gør brugeren opmærksom på mulig risiko for personskade, hvis det viste råd ikke overholdes
 VIGTIGT!	Gør brugeren opmærksom på mulig risiko for beskadigelse af kørestolen og dens udstyr, hvis det viste råd ikke overholdes
BEMÆRK:	Generelle råd eller oplysninger om bedste fremgangsmåde
	Henviser til yderligere dokumentationsmateriale

BEMÆRK:

Skriv adresse og telefonnummer på din lokale servicerepræsentant i det blanke felt. I tilfælde af funktionssvigt bør du kontakte vedkommende og forsøge at give dem alle de relevante oplysninger om problemet, så de hurtigst muligt kan hjælpe dig.

Forhandlerunderskrift- og stempel

1.0 Anmærkninger om sikkerhed og fare

Teknologien og konstruktionen af denne håndcykel er blevet designet til at give maksimal sikkerhed, og enten opfylder eller overgår gældende internationale sikkerhedsstandarder.

Brugeren kan ikke desto mindre blive udsat for risiko ved at bruge håndcyklerne på en forkert måde. Af sikkerhedsmæssige grunde skal nedenstående regler overholdes.

Uautoriserede eller ukorrekte tilpasninger eller justeringer øger risikoen for ulykker. Som en bruger af en håndcykel, bliver du også en del af den daglige trafik på vejene og fortovene, lige som alle de andre. Derfor vil vi gerne minde dig om, at du dermed skal overholde alle gældende færdselsregler.

Du skal udvise forsigtighed under din første tur i denne håndcykel. Lær din cykel at kende.

Følgende bør kontrolleres hver gang, inden kørestolen anvendes:

- Faste aksler eller quick-release aksler på baghjulene.
- Velcro på sæde og ryg
- Dæk, dæktryk og bremses og hovedbremse.
- Inden hver tur skal du foretage en visuel inspektion af stellet, og tjekke om der er revner eller andre skader.



Inden du ændrer nogle af håndcyklens justeringer, er det vigtigt at du læser den tilsvarende sektion af brugervejledningen.

ADVARSEL!

DU MÅ ALDRIG overskride den maksimale belastning på 125 kg for passageren plus eventuelle genstande på håndcyklen. Hvis du overskrider den maksimale belastning, kan det resultere i beskadigelse af håndcyklen, tab af kontrol, eller alvorlige personskader for brugeren og andre personer.

ADVARSEL!

- Udvis forsigtighed når du bruger håndcyklen. F.eks. bør du altid undgå at køre ind mod eller over forhindringer (såsom trin og kantsten) uden at bremse imens, og du bør ikke køre hjulene hårdt ned i huller, mellemrum o.l.
- Din håndcykel er ikke beregnet til transport i et køretøj. DU MÅ IKKE sidde på håndcyklen når den transporteres i et køretøj; du skal altid bruge et korrekt fastgjort køretøjssæde!!
- Denne håndcykel må udelukkende bruges til at transportere en person ad gangen. Enhver anden form for anvendelse er ikke i overensstemmelse med det tilsigtede formål.
- Cyklen må kun bruges af en person med en maksimal vægt på op til 125 kg.
- Brug af cyklen anbefales kun for personer, som har et korrekt fysisk og psykologisk helbred, der er i stand til at håndtere den offentlige trafik.
- Som en begynder bør du køre særdeles forsigtigt i begyndelsen.

- Gør dig selv bekendt med de generelle trafikregler! For at opnå en stabil tur når du kører lige ud, bør du såvidt muligt undgå hurtige styrebevægelser, når du kører hurtigt eller drejer rundt om hjørner.
- Når du kører eller bremser, skal du altid holde godt fast i håndtagene med begge hænder, da der i modsat fald er en høj risiko for en ulykke hvis der opstår en styrefejl.
- Cyklen er en mekanisk trækanordning. Hastigheden skal justeres for at passe til cyklens og terrænets tekniske evner.
- Om natten og dagskæret/skumringen skal du altid tænde lygterne. Når du kører lange afstande, anbefaler vi at du medbringer et ekstra batteri.
- Du bør kun gøre på asfalterede stier, eller faste og jævne overflader. Når du kører over kantsten, trin samt vandpytter, er der en højere risiko for at du kæntrer.
- Juster din køremetode ifølge dine evner. Kør langsomt og forsigtigt, specielt når du kører rundt om hjørner.
- Du må ikke placere dine hænder i kædens område.
- Din cykel skal efterses af din forhandler med jævnlige mellemrum.
- Vær ekstra forsigtig i nærheden af åben ild, især glødende cigaretter. Sædet og rygpollstringen er fremstillet af materialer, som let kan antændes.
- Med alle bevægende dele er der altid risiko for at fingrene kommer i klemme. Du bedes altid udvise forsigtighed.
- Hvis håndcyklen udsættes for direkte sollys / lave temperaturer i lange perioder, kan håndcyklens dele blive meget varme ($>41^{\circ}\text{C}$) eller meget kolde ($<0^{\circ}$).
- Du skal altid sørge for at baghjulenes hurtigspændere er indstillet korrekt.
- Håndcyklen må ikke bruges i kraftigt regnvejr, snevejr eller på glatte eller beskadigede overflader. Endvidere bør du undgå farlige områder.
- Sørg for, at der er slidbanemønster nok på alle dækkene!
- Du bedes bemærke at du er underkastet alle trafikregler når kører i den offentlige trafik.
- Du må aldrig bruge benstøtten eller slagbeskyttelsen til at løfte håndcyklen
- Gør dig selv bekendt med bremseafstanden med forskellige hastigheder
- Du bør kun bruge produktkombinationer, der er blevet godkendt af Sunrise Medical.

De håndcykler, der er vist og beskrevet i denne brugervejledning, svarer muligvis ikke præcis til din egen model. Dog er alle vejledninger stadig fuldt ud relevante uanset de forskellige detaljer, der måtte være.

Producenten forbeholder sig ret til at ændre enhver form for vægtangivelser, mål eller andre tekniske data indeholdt i denne vejledning uden forudgående varsel. Alle tal, mål og kapaciteter vist i denne vejledning er omtrentlige og udgør altså ikke tekniske specifikationer.

Inden hver brug skal du foretage følgende sikkerhedskontroller



- Inden hver tur, skal du kontrollere dæktrykket. Hvis lufttrykket er for lavt, er der en stigende risiko for at du vælter når du kører rundt om hjørner, og dette kan føre til stigende slitage, og at rullemodstanden stiger.
- Undgå at beskadige gearstangens og bremseenhedernes Bowden-kabler. Der er en risiko for at knække kablerne når du stiger over på/forlader cyklen, hvis du betjener kranken forkert.
- Kontroller at fodpladerne er fastgjorte.
- Kontroller om alle komponenter, specielt alle skruer, er fastgjorte.
- For at undgå alvorlige personskader, skal du forsvarligt placere dine fødder i fodstøtten ved hjælp af Velcro-remmene inden du starter din tur.
- Du skal altid bære en sikkerhedshjelm.
- På grund af cyklens lave højde, skal du altid køre med et sikkerhedsflag, da du kan være mindre synlig for andre trafikanter.

2.0 Garanti

Garanti

DENNE GARANTI INDSKRÆNKER IKKE DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL KØBELOVEN.

Garantibetingelser

1) Reparationer eller udskiftning foretages af en autoriseret Sunrise Medical-forhandler/serviceagent.

-

2) For at opfylde garantiens betingelser, skal servicering foretages på håndcyklen ifølge denne aftale, og du skal straks kontakte din Sunrise Medical kundeservicemedarbejder, med en detaljeret beskrivelse af problemet. Hvis du skal bruge håndcyklen udenfor det område, der af dækket af din Sunrise Medical kundeservicemedarbejder, bliver arbejdet foretaget ifølge "garantiens betingelser" af et andet bureau, som henvises af producenten.

3) Hvis nogen del af håndcyklen har brug for reparation eller udskiftning på grund af en specifik fabrikations- eller materialefejl indenfor 24 måneder (5 år for stellet) fra den dato hvor produktet blev overført til den originale køber, og betinget af den resterende af det ejerskab, bliver delen repareret eller udskiftet gratis, hvis den returneres til den autoriserede serviceagent.

BEMÆRK: Denne garanti kan ikke overdrages.

4) Garantien dækker også alle reparerede eller udskiftede dele i den resterende garantiperiode for håndcyklen.

5) Dele, som udskiftes efter starten på den oprindelige garantiperiode, dækkes i yderligere 24 måneder fra udskiftningsdatoen.

6) Dele, som nedslides løbende, dækkes almindeligvis ikke af denne garanti, medmindre disse dele har været udsat for unødvendig slitage som direkte følge af en oprindelig fabrikationsfejl. Disse dele omfatter bl.a. betræk, dæk, slanger og lignende.

7) Ovenstående garantibetingelser gælder for alle produktdele på modeller købt til fuld detailpris.

8) Normalt påtager vi os ikke ansvaret, hvis der er brug for reparation eller udskiftning af håndcyklen på grund af følgende årsager:

a) Kørestolen eller delen ikke er vedligeholdt i henhold til producentens anbefalinger som angivet i brugervejledningen og/eller den tekniske vejledning. Der er anvendt andet tilbehør end det, der er angivet som originalt tilbehør fra producentens side.

b) Hvis håndcyklen eller en del er blevet beskadiget på grund af forsømmelse, ulykke eller ukorrekt anvendelse.

c) Hvis der er foretaget ændringer af håndcyklens eller dele, som ikke er i overensstemmelse med producentens specifikationer, eller hvis der foretages reparationer uden at informere kundens servicemedarbejder.

3.0 Håndtering

Levering

Din nye Shark RS / RT leveres fuldkommen monteret i en papkasse. For at undgå nogen beskadigelse under transporten, er de løse eller andre dele, som for eksempel baghjul pakket separat i papkassen.

Udpakning:

- Kontroller om transportpapkassen har eksterne beskadigelser som kan være forårsaget under transporten.
- Fjern alt emballeringsmaterialet.
- Tag alle cyklens dele (inklusive hjul) forsigtigt ud af kassen og kontroller at de er fuldstændige.
- Kontroller alle dele mod overfladeskader, ridser, revner, buler, deformationer og andre defekter.
- Hvis du finder nogle skader, eller hvis nogle dele mangler bedes du straks informere os.

Sådan transporteres Shark RS / RT:

For at holde Shark RS / RT så kompakt som muligt, er baghjulene blevet fjernet inden leveringen, og pakket separat i kassen.

Hjulene monteres på bagakslen ved simpelthen at skubbe dem eller ved at skrue dem på, afhængigt af hvilke aksler du har valgt.

⚠ VIGTIGT!

Inden hver brug, skal du kontrollere at skruen og stikforbindelserne er fastgjorte!

4.0 Indstillinger

Bremse

Cyklen har to bremsesystemer som fungerer uafhængigt af hinanden.

Parkeringsbremse (Fig. 4.1 + 4.2)

Parkeringsbremsen, der er monteret på gaflen fungerer som hjullåse. De kan også aktiveres ved hjælp af et bremsehåndtag. For at disse kan fungere korrekt, skal låsestangen være låst på plads. Cyklen må ikke rulle når parkeringsbremsene er trukket an. Dette er den eneste måde at garantere sikker overførsel til og fra cyklen.

Hovedbremses (Fig. 4.3)

Bremsene lader dig sikkert og behageligt bremse din håndcykel.

⚠ VIGTIGT

Hvis hovedbremsene svigter, kan parkeringsbremsene bruges til at bremse i nødstilfælde. Derefter skal hovedbremsene repareres.

Fig. 4.1

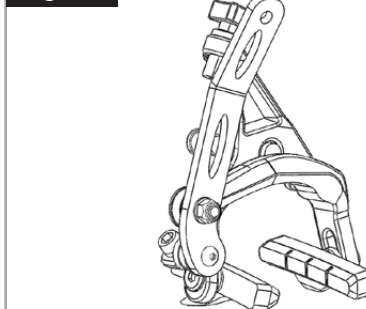


Fig. 4.2


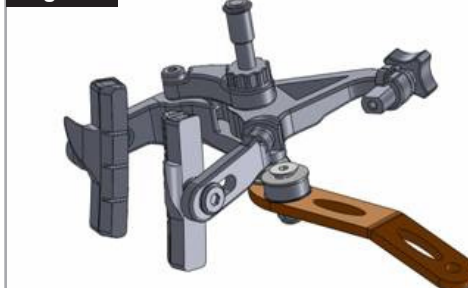


Fig. 4.3

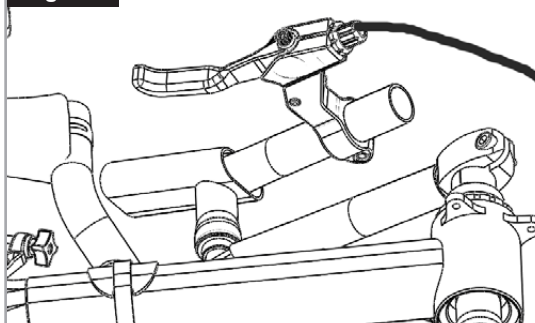

VIGTIGT!

Følgende medfører nedsat bremsefunktion:

Dækkets slidbane er slidt, for lavt lufttryk, snavsede eller våde dæk.

Men jordens overflade kan også spille en væsentlig rolle til at forsinke bremsefunktionen. Bremsefunktionen bliver væsentligt nedsat, hvis vejene og stierne er våde og snavsede, såvel som sandet eller stenet jord. Snavsede og våde fælge og bremseklodser nedsætter også bremsefunktionen, når der bruges fælgbremser. Af denne årsag skal du altid tilpasse din køremetode til de miljømæssige forhold, for at undgå alvorlige ulykker. Du skal altid kontrollere bremsernes effektivitet inden du starter din tur, og sikre at bremsefunktionen er tilstrækkelig. Bremserne skal kontrolleres med jævne mellemrum af din forhandler, og justeres om nødvendigt.

Tilbageløbsbremse (Fig. 4.4 - 4.6)

Tilbageløbs bremsefunktion lader dig bremse ved at cykle baglæns, når den bruges i kombination med kædens gearskifter (Fig. 4.5). Denne funktion er specielt nødvendigt for brugere med begrænset eller ingen fingerfunktion.

Bremsesystemet kan kun frakobles for manøvrering (Fig. 4.6).

Når du kører eller bevæger dig fremad, skal du bruge vippearmen til at sætte systemet i driftsposition.

VIGTIGT!

Kørsel med den bageste cykelbremse deaktiveret er ikke tilladt, og kan resultere i en stigende risiko for ulykker.

Fig. 4.4

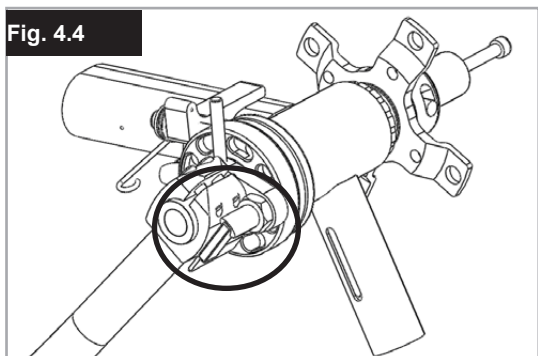



Fig. 4.5



Fig. 4.6



Fig. 4.7

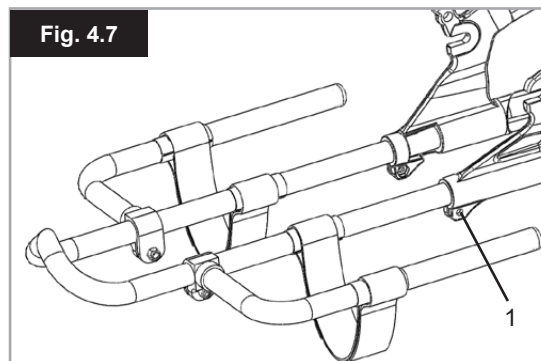

Fodstøtte

Justering af fodstøtten (Fig. 4.7 - 4.9)

Fodstøtten kan justeres for at passe til belængden. Justeringen kan foretages når skruerne (1) er blevet udløse. Når du justerer længden, skal du sørge for at benene er en anelse skråstillede, og at de berører den forreste stang. Når cyklen står stille, skal du kontrollere om den stigende knæbøjning ikke fører til kontakt med krumptappens drivenhed når du drejer i en maksimal vinkel. Der skal mindst være en afstand på 5 cm mellem hælen og underlaget. Du har brug for dette spillerum når du kører rundt om hjørner. Når du er færdig, skal du sikre dig, at alle skruerne er forsvarligt fastspændt (se siden vedr. tilspændingsmomenter).

Fodstøttens forlængerrør for længere ben leveres altid i maksimal længde. Kunden kan derefter afkorte dem til den ønskede længde.

Når røret er blevet afkortet, skal du altid sørge for at fodstøttens rør er skubbet tilstrækkeligt ind i, således at begge fastgøringsskrue berører fodstøttens rør.

VIGTIGT!

Benstøtten må aldrig bruges til at løfte håndcyklen. Inden brug skal du sørge for at begge fødder er på fodstøtterne.

Hvis dine fødder kommer ud ved et uheld mens du kører, kan dette medføre alvorlige personskader.

RT gearstang

Kædens gearskifte/navets gearskifte (Fig. 4.10 - 4.11)

Der foretages gearskifte ved hjælp af håndtagets gear skifte, som enten kan monteres på stellet, gaflen eller håndtaget.

Skiftning af de øverste kæderinge på krumtappen foretages at bruge en stang, som er monteret på krumtaphuset.

Kædens gearskifter gør dig i stand til let at blive ved at bevæge dig, uanset andre vejforhold.

En beskrivelse af gearskifteenheden er inkluderet som en del af leveringen. Hvis gearskifteren pludselig holder op med at fungere fejlfrit, bedes du kontakte din forhandler!

RS gearstang (Fig. 4.12)

Dette foretages ved at bruge udløserkontakten på højre side af håndtaget eller den dobbelte kontrolkontakt på højre side af gaflen.

Fig. 4.8



Fig. 4.9



Fig. 4.10

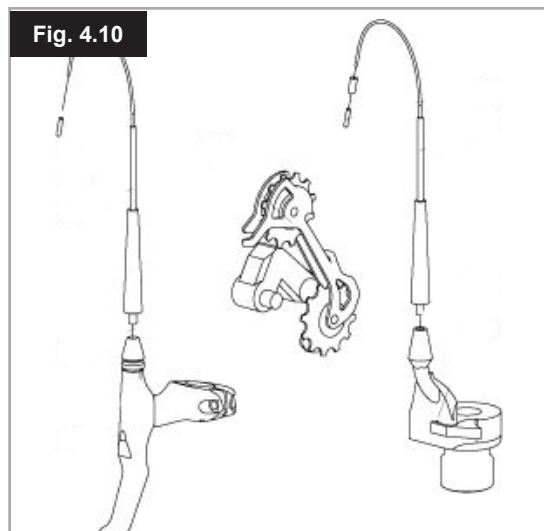


Fig. 4.11


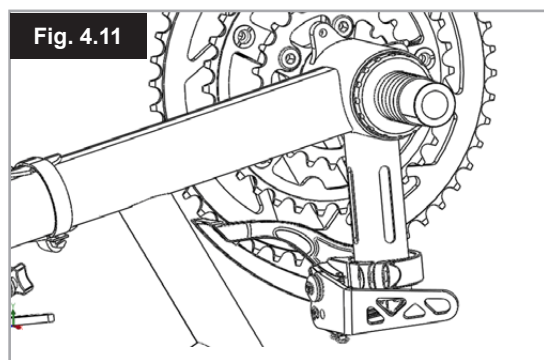


Fig. 4.12

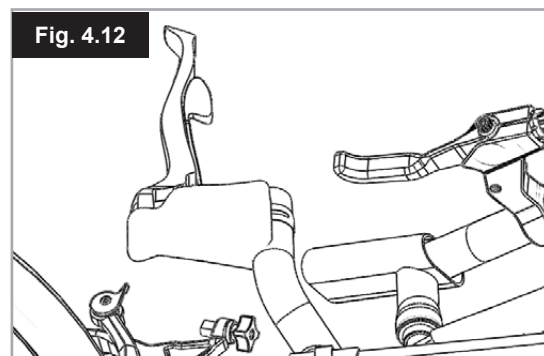

Ryglænets justering

Ryglænets justering (Fig. 4.13 - 4.14)

Under sædetesten skal du sørge for at kranken drejer frit over lårene, også når du kører rundt om et hjørne.

(Baglæns test

i frihjul, juster sædepudens tykkelse, om nødvendigt).

Indstil afstanden fra kranken således at når du drejer kranken, kan dine arme

strækkes i en behagelig afstand og de kan let bøjes. De

allerbedste køreegenskaber opnås hvis du bruger

ryglænets justeringsfunktioner

og krankens højde, for at etablere den maksimale mulighed for dig.

Justering af ryglænet foretages på langs ved at udløse og flytte fastgøringsklemmen.

Justering af ryglænets vinkel foretages ved at justere det centrale rørs højde bagved ryglænet.



VIGTIGT!

Når justeringen er foretaget, skal alle skruerne strammes igen. (se siden vedr. tilspændingsmomenter)

Fig. 4.13

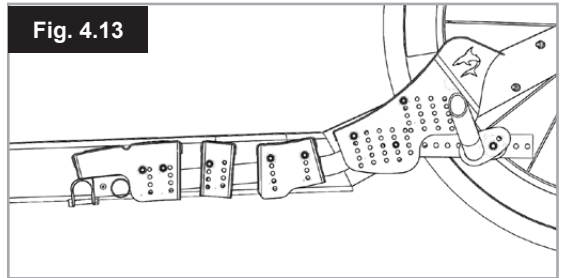


Fig. 4.14


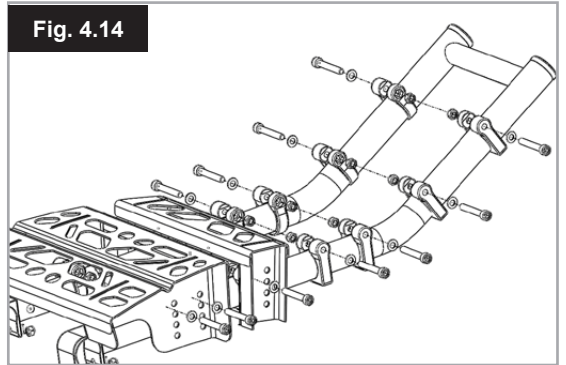


Fig. 4.15

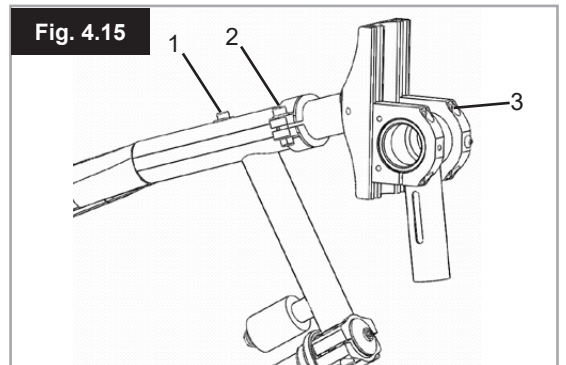

Højde- og dybdejusterbar gaffel

Diagonal justering (Fig. 4.15)

Skru stikkets hovedskruer (1) af på gafflens rør og sekskantmøtrikkerne (2) på klemmen. Skub krankens beslag frem og tilbage.

Når kranken er i den ønskede position er kædens spænding ikke korrekt; for at rette spændingen, SKAL kædens ledninger tilføjes eller fjernes. Denne procedure skal foretages af en kvalificeret tekniker.

Til sidst skal stikkets hovedskruer strammes igen, og dette fastgør krankens beslag på gafflen.

Vertikal justering

Skru stikkets hovedskruer af (3) som fastgør krankens beslag til gaffelspolen, uden at fjerne dem.

Flyt den manuelle kranken op eller ned i gafflens krave, indtil du har opnået din maksimale position.

Stram stikkets hovedskruer (3) for at fastgøre den manuelle krank i den ønskede position.

Stram kæden igen, om nødvendigt.

Bagaksel

Bagaksel (Fig. 4.16 - 4.17)

Der findes 3 forskellige aksler i udvalget, og hver enkelt kan skrues fast på stellet med akselklemmen.

Byt / udskift akslen:

Skrue de 3 fastgøringsskruer af på den venstre og højre akselklemme. Fjern akslen og udskift den. For at gennemføre funktionen, sæt den halve skal af akselklemmen over på akslen og fastgør den med de tre fastgøringsskruer.

Stram de 3 fastgøringskruer skiftevis, indtil alle 3 skruer er fastgjort til et tilspændingsmoment på 5 Nm.

BEMÆRK: Når der ændres fra aluminium til kulstofrør, skal den ekscentriske manchete også ændres.

Fig. 4.16


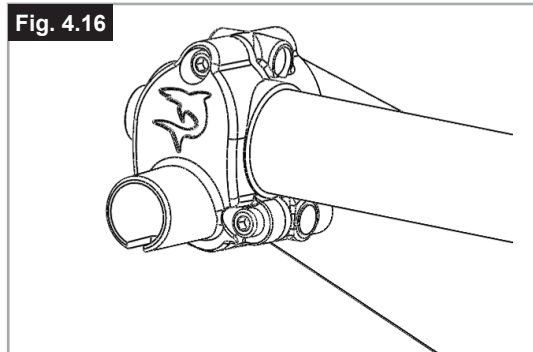


Fig. 4.17

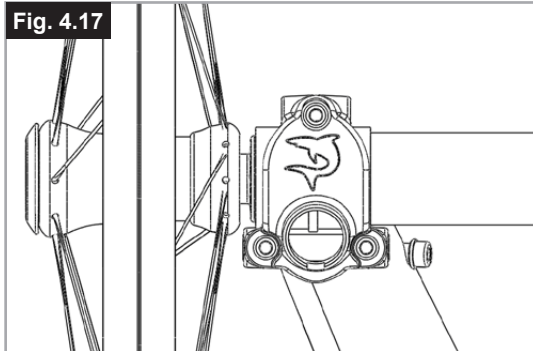

5.0 Vedligeholdelse og pleje (kontroller der skal foretages inden brug)

Hvornår

Hver 4. uge
(afhængigt af hvor ofte
håndcyklen bruges)

Hvad

Smør kablerne når de ikke er i
nærheden af kontakterne og
bremsehåndtagene.

Kontroller at alle
skrueforbindelserne er fastgjorte!
Smør kæden med olie!

Kommentar

Kør selv eller med en ledsager.

Inden du smører med olie, bedes du fjerne
alle olie rester fra komponenterne.
Sørg for at overskydende olie ikke trænger
ind i det omgivende område
og snavs (f.eks. dit tøj).

Kør selv eller med en ledsager.
Spray let med Teflon-spray

Pas på at ikke kommer på dit tøj!

Hver 2 til 3 måneder
(afhængigt af hvor ofte
håndcyklen bruges)

Kontroller:

- Renlighed
- Generel tilstand

Kør selv eller med en ledsager.

Hvis der er nogle revner eller almindelig
slitage, skal gummi udskiftes, eller du kan
besøge et autoriseret servicecenter
for en renovering.

Service:

Hvis du har nogen spørgsmål eller har brug for hjælp, bedes du kontakte din forhandler, som med glæde vil rådgive dig angående servicering og reparationer.

Afhængigt af hvor meget du har brugt din Shark RS / RT, anbefaler vi at du bringer den til din forhandler mindst hver 6. måned år, for at få din Shark RS / RT eftersat af uddannet personale.

6.0 Vedligeholdelse af dæk

Dæk

Shark RS / RT er udstyret med specielle 26" dæk på baghjulene og et 26" drivhjul. Sørg for at dækkene altid har det anbefalede tryk, da dette i væsentlig grad vil påvirke køreegenskaberne for din Shark RS / RT. Hvis dæktrykket er for lavt, er bevægelsen og manøvredegtigheden mere besværlig på grund af den stigende rullemodstand, og det kræver også at der bruges flere kræfter.

Det maksimale dæktryk er trykt på hvert dæk.

Montering og reparation af dæk

Ingen montering af et nyt indvendigt rør:

Undersøg fælgets underlag og dækkets indre vægge mod fremmedlegemer, og rengør dem, om nødvendigt. Kontroller fælgbåndets tilstand, især ventilens åbning. Kun en korrekt montering, og en stærk fælgteape giver langvarig beskyttelse mod beskadigelse af det indvendige rør via burrer og skarpe naglede hoveder.

Oppumpning:

Kontroller rundt om begge sider, for at sørge for at det indvendige rør ikke sidder fast mellem dækkets krans og fælget. Skub ventilen forsigtigt tilbage og træk den ud igen, således at det indvendige rør opnår en maksimal position rundt om ventilen.

Dæk

Som ekstraudstyr kan du få dæk med carbonfælg.

Med disse bedes du bemærke at:

dækkene skal limes til fælgen af en specialist.

Hvis du har en punktering, må du ikke fortsætte med at køre (de umiddelbare konsekvenser er en stigende risiko for ulykker, og fælgen bliver ødelagt).



VIGTIGT!

Dæktrykket skal kontrolleres efter monteringen.

Det er nødvendigt at du bevarer et konstant dæktryk og at dækkene er i en perfekt tilstand, for at sikre din personlige sikkerhed og for at sikre at din Shark RS / RT kører korrekt.

7.0 Bortskaffelse/Genbrug af materialer

BEMÆRK: Hvis håndcyklen er blevet stillet til din rådighed som en del af en velgørenhed eller en medicinsk låneordning, tilhører den muligvis ikke dig. Hvis det ikke længere er nødvendigt, skal du følge instruktionerne for at returnere den til den organisation, som stillede håndcyklen til rådighed.

I det følgende afsnit findes en beskrivelse af håndcyklens anvendte materialer i lyset af bortskaffelse eller genbrug af håndcyklen og dens emballering.

Der kan også findes specielle lokale regulativer, som gælder med hensyn til bortskaffelse eller genbrug, og disse skal tages i betragtning når du skaffer dig af med din håndcykel. (Disse kan inkludere rengøring eller dekontaminering af håndcyklen inden bortskaffelsen).

Aluminium: Svinghjuls gafler, hjul, fodstøtte,

Stål: Fastgøringsskruer,

Carbon: Bagaksel

Plastik: Håndtag, rørstoppere og dæk

Emballering: Fremstillet af blød polyethylen, pap

Betræk: Vævet polyester med PVC-beskyttelseslag og ekspanderet forbrændingsmodificeret skum.

Bortskaffelse eller genbrug skal foretages gennem en autoriseret agent eller et autoriseret bortskaffelsessted. Alternativt kan du returnere din håndcykel til din forhandler for bortskaffelse.



Hygiejneprocesser ved genanvendelse:

Hvis kørestolen skal anvendes af en ny bruger, bør den klargøres grundigt. Alle overflader, der kan komme i kontakt med brugeren, skal behandles med desinfektionsmiddel i sprayform.

Der skal til dette formål anvendes et, i dit land, anbefalet desinfektionsmiddel, som bruges til hurtig, alkoholbaseret desinfektion af medicinske hjælpemidler og medicinsk udstyr, når der kræves et hurtigtvirkende desinfektionsmiddel.

Vær opmærksom på producentens vejledning til desinfektionsmidlet under anvendelsen.

Det kan ikke garanteres, at sømme kan desinficeres fuldstændigt. For at undgå mikrobakteriel kontaminering anbefales det derfor, at sædet og rygpulstringen kasseres i henhold til lokale retningslinjer om beskyttelse mod infektion.

8.0 Navnemærkat

Navnemærkat

Navnemærkatens findes på den bageste del af steller eller på stellet under sædets overflade, såvel som på et mærkat i brugervejledningen. Navnemærkatens angiver den nøjagtige modelbetegnelse såvel som andre tekniske specifikationer. Ved bestilling af reservedele eller ved reklamation bedes du oplyse følgende:

PRØVE

	 Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch / Germany	 2021-04-21
TYPE:	THERAPY BIKE	SN 203211533174655
Shark RS/RT		
 125 kg	 400 mm	  

TYPE:	Produkt navn/SKU-nummer.
	Sædebredde.
	Maksimal belastning
	UKCA-mærkat.
	CE-mærkat.
	Se brugsanvisningen.
 XXXX-XX-XX	Produktionsdato.
	Serienummer.
	Dette symbol betyder medicinsk udstyr.
	Producentens adresse
	Importørens adresse
 	Ansvarlig person i Storbritannien
 	Adresse på repræsentant i Schweiz



ISO 7010-M002
Brugermanualen/Dette hæfte skal læses! (Blåt ikon)

Da vi er forpligtet til konstant at forbedre konstruktionen af vores håndcykler, kan produktspecifikationen variere en smule i fra de viste eksempler. Alle vægte/dimensioner og funktionsdata er omtrentlige, og oplyses udelukkende som en vejledning.



ADVARSEL!

Alle håndcykler skal anvendes ifølge producentens retningslinjer.




Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

9.0 Tilspændingsmomenter

Styrehovedes lejer:	Håndstramt
Svinghjulsgaflernes klemmer:	7 Nm
Skrueaksel på drivhjulet:	10 Nm
Fodstøttens spændskruer:	7 Nm
Krankens spændskruer:	7 Nm
Foreste ryglæns spændskruer:	7 Nm
Bageste ryglæns spændskruer:	7 Nm

BEMÆRK: Tilspændingsmomentet for M6 skruer er 7 Nm, medmindre andet angives.

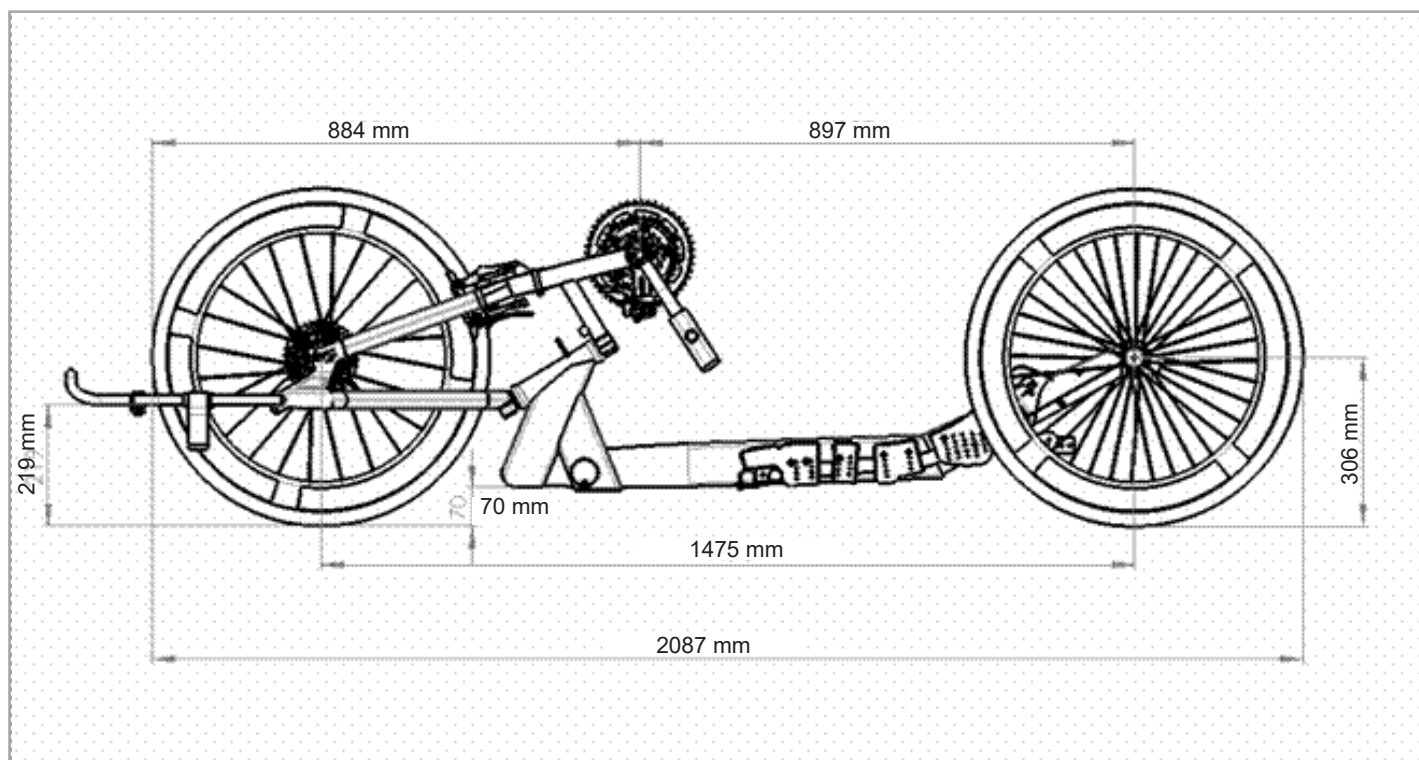

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
E: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : +33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.sunrisemedical.fr



OM_Shark RS-RT_EU_DK_
RevF_2024-08-05